

Bruksanvisning

Domino Classic Samtaleforsterker BE8017 (BE2250/2270)



2012-03-21
Dok.nr.: 0642A

Vestfold Audio AS

Innholdsfortegnelse

Viktige sikkerhetsinstruksjoner	3
Knapper og tilkoblinger	4
Mottakerenhet.....	4
Senderenhet	5
Ta apparatet i bruk (montering)	5
Lading	6
Funksjoner	6
Valg av mikrofon i Mottakerenheten	6
Valg av mikrofon i Senderenheten.....	6
Velg Ekstern signalkilde	6
Ekstern mikrofon	6
Batteristatus	7
Enkel feilsøking.....	7
Spesialfunksjoner.....	8
Midlertidig sammenkobling av "fremmede" enheter	8
Tekniske data.....	8




Viktige sikkerhetsinstruksjoner

- Les gjennom disse anvisningene nøye.
- Ikke kast disse anvisningene.
- Ta hensyn til alle advarsler.
- Følg alle anvisninger.
- Ikke benytt apparatet der det er fare for at det kan bli vått.
- Rengjør bare med en tørr eller lett fuktet klut.
- Blokker ikke ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til anvisningene.
- Installer ikke produktet nær varmekilder som ovner, peis eller andre apparater (inklusive forsterkere) som avgir varme.
- Strømledningen må ikke trækkes på eller bli klemmt. Pass spesielt godt på ved kontakter, forgreninger og der ledningen kommer ut av apparatet.
- Benytt bare tilbehør som er spesifisert av produsenten.
- Koble fra apparatet ved tordenvær eller når du ikke skal benytte det på lang tid.
- Servicearbeid skal bare utføres av kvalifisert personell. Service er bare nødvendig hvis apparater har blitt skadet, som for eksempel om ledningen eller kontakten har blitt skadet, væske har blitt sølt på apparatet eller noe har kommet inn i apparatet, om apparatet har blitt utsatt for regn eller fukt eller ikke fungerer som det skal.

Knapper og tilkoblinger


Mottakerenhet

1. Intern mikrofon på Mottaker-enheten
2. Lysdiode for intern mikrofon-innstilning
Grønn: Intern mikrofon
3. Lysdiode for Batteristatus
Grønn: På og med bra ladet batteri
Blinkende Grønn: På, men batteriet begynner å ta slutt
Blinkende Oransje: På med tomt batteri – slår seg snart av
Oransje: Lader
4. Lysdiode for lytting via Sender-enheten
Grønn: Rundt- oppfattende mikrofon
Oransje og Grønn: Linje inn (ekstern lydkilde)
5. Knapp for valg av intern mikrofon
6. Av- og på-knapp
7. Knapp for valg av lytting via Sender-enheten
8. Lys-nivåindikator for Volum og Tone
9. Knapp for å øke lydstyrke
10. Knapp for å redusere lydstyrke
11. Knapp for å redusere diskant
12. Knapp for å øke diskant
13. Tilkobling for hodetelefon / halsslynge
14. Ladekontakt
15. Belteklips

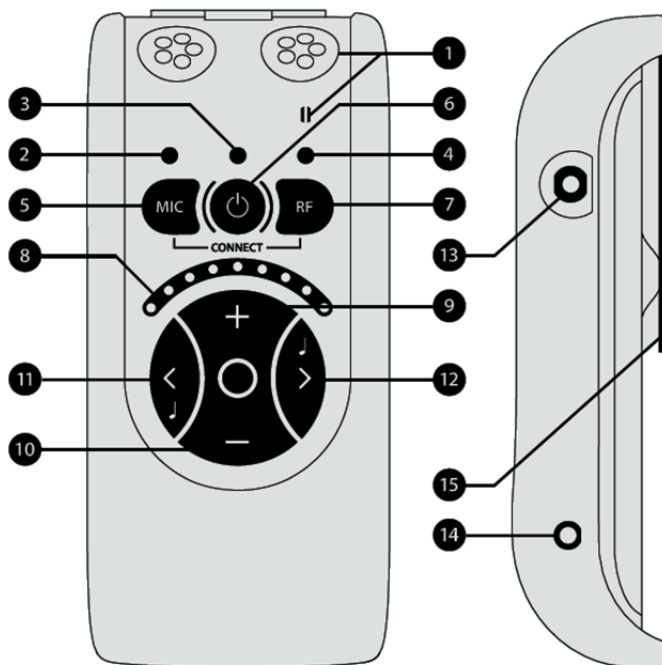

Senderenhet

16. Intern mikrofon på Sender-enheten.
17. Lysdiode for batteristatus
Grønn: På og med bra ladet batteri
Blinkende Grønn: På, men batteriet begynner å ta slutt
Blinkende Oransje: På med tomt batteri – slår seg snart av
Oransje: Lader
18. På/Av knapp
19. Knapp for å koble sender til en annen mottaker enn din egen.
20. Inngang for ekstern lydkilde, 2.5 mm jack kontakt
21. Ladekontakt
22. Belteklips

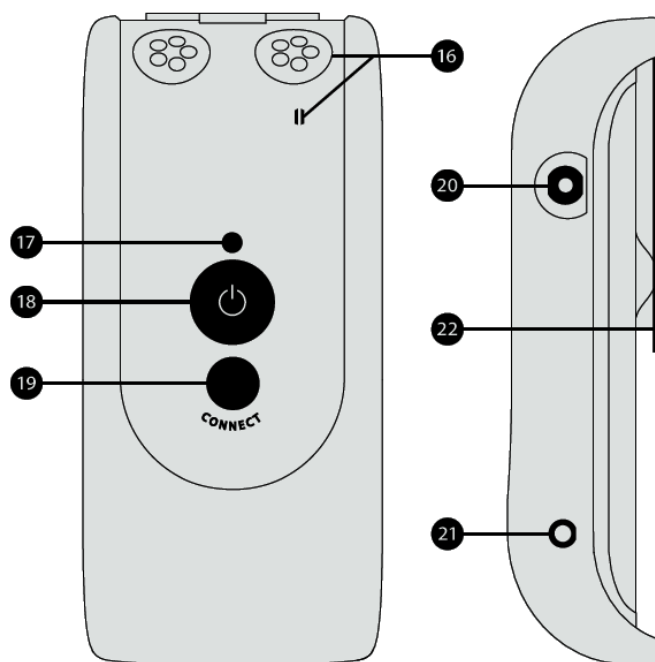

Ta apparatet i bruk (montering)

1. Både Sender- og Mottakerenheten har med innbygget laddbare batterier. Både Sender- og Mottakerenheten må lades helt opp før produktene tas i bruk første gang. Benytt bare den medfølgende laderen.
1. Koble inn halsslynge eller hodetelefon i utgangen (13).
2. Trykk kort på Av- og På-knappen (6) for å starte Mottakerenheten.
3. Lytt på den interne mikrofonen og juster volumet med Volumknappene - (9 eller 10).
4. Slå på Senderenheten ved et kort trykk på Av- og På-knappen (18).
5. Koble over til å lytte på Senderenhetens mikrofon ved å trykke på knappen for ekstern lyd (RF) (7).
6. Domino starter normalt med intern mikrofon (1) som lydkilde. Dessuten settes alltid volumkontrollen automatisk til lavt volum for å unngå ubehagelige lydnivå.
7. Volumkontroll; juster med +(9) øker og -(10) reduserer volumet samtidig som indikatoren for Volum og Tone (8) viser lydnivå. Jo fler lysdioder som er tent desto høyere volum. Indikatoren slukker 5 sekunder etter justering.
8. Tonekontrollen justerer lydklangen der >(12) øker og <(11) reduserer diskanten. Indikatoren for Volum og Tone (8) viser tone-innstillingen. Indikatoren slukker 5 sekunder etter justering.
9. Ved å koble en ekstern lydkilde til (20) kan man høre på for eksempel en MP3 spiller via Senderenheten.
10. Når du er ferdig slår du av Sender- og Mottakerenhetene ved å trykke inn knappene (6 og 18) og holde dem inne til lysdiodene for batteristatus (3 og 17) slukker.

Lading

Domino-enhetene har innebygget oppladbare batterier. Batteriene må lades før produktet tas i bruk første gang. Domino inneholder et batteri av typen Lithium-Ion og leveres med en universell lader med tilkoblingsledning for å lade begge enhetene samtidig.

NB! Bruk ikke ladere fra andre produsenter til Domino, men du kan lade enhetene ved å koble ladeledningen til en USB-port i en datamaskin!

Koble inn laderen i **(14 og 21)** som anvist på side 3.

Monter stikkontakt som passer til standarden i det landet du befinner deg. Kontroller at den klikker på plass for du kobler den inn i kontakten. Når laderen er satt inn i kontakten og tilkoblet enhetene, blinker Lysdioden for Batteristatus **(3 og 17)** mellom grønt og oransje for å vise at lading pågår. Når lading er ferdig, etter ca 2,5 timer, lyser lysdiodene grønt.

Funksjoner

Koble til hodetelefon, Halsslynge BE9159, Ørepropper BE9124 eller en annen egnet lyd giver til hodetelefonutgangen **(13)**.

Valg av mikrofon i Mottakerenheten

Man velger mikrofonen i Mottakerenheten ved å trykke på M-knappen **(5)**.

Valg av mikrofon i Senderenheten

Man velger å lytte via Senderenheten ved å trykke på RF-knappen **(7)**.

Velg Ekstern signalkilde

Om den medfølgende audiokabelen (som i ene enden har en 2,5 mm jack-plugg) kobles til inngang for ekstern lydkilde **(20)** vil den senderenhetens mikrofon kobles ut og ekstern lydkilde velges automatisk.

For å lytte til den eksterne lydkilden trykker man på RF-knappen **(7)**. Lysdioden for Senderenheten **(4)** vil lyse grønt å vise at lyden kommer fra en ekstern lydkilde.

Inngangens følsomhet justeres automatisk for å tilpasse til forskjellige lydkilder.

Med audiokabelen koblet til en TV, HiFi-anlegg, MP3-spiller eller liknende lydkilde kan man lytte på stereolyd hvis du benytter hodetelefon.

Når du drar ut kontakten går Domino automatisk tilbake til lytting med mikrofon.

Ekstern mikrofon

Man kan også tilkoble en ekstern mikrofon til inngang for ekstern lydkilde **(20)**.

Inngangens følsomhet justeres automatisk tilpasset den eksterne mikrofonen som kobles inn.

Batteristatus

Normalt lyser Lysdioden for Batteristatus **(3, 17)** grønt. Det viser at Domino er På og at batterinivået er tilfredsstillende. Ved lavt batterinivå blinker Lysdioden for Batteristatus **(3, 17)** grønt til batteriet nesten er helt tomt. Da begynner den å blinke oransje. Merk at du bør lade opp begge enhetene allerede når en begynner å blinke grønt, slik at du unngår at de slår seg av automatisk.

Enkel feilsøking

Symptom	Tiltak
Ingenting skjer når du forsøker å slå på enheten.	Koble inn laderen og kontroller at lading starter i løpet av 10 sekunder. <i>OBS! Om lading ikke starter i løpet av 10 sekunder, må du umiddelbart koble fra laderen og kontakte din Hjelpemiddelsentral!</i>
Ingen lyd høres i hodetelefon / halsslynge når enheten er på.	• Skru opp lyden med volumkontrollen + (9) • Kontroller at intern mikrofon er valgt som signalkilde og at den fungerer ved å skrapa lett på mikrofonene (1). • Kontroller at kontakten er helt trykket inn i hodetelefonutgangen. • Koble hodetelefonen/halsslyngen til en annen lydkilde (med 3,5 mm jack-kontakt) for å teste om den fungerer.
Ingen lyd høres i hodetelefon / halsslynge når enheten er på og Senderenheten er valgt.	• Kontroller at lydkilden er korrekt tilkoblet • Inngangen for ekstern lydkilde (20). • Koble lydkilden direkte til hodetelefon eller halsslynge og se om den fungerer da. • Skru eventuelt opp volumet opp den eksterne lydkilden.
Hyling i hodetelefonen.	• Senk volumet eller øk avstanden mellom mikrofonen og hodetelefonen. • Rett mikrofonen fra deg.

Spesialfunksjoner

Midlertidig sammenkobling av "fremmede" enheter

Hvis du har behov for å lytte til en "fremmed" Domino Senderenhet eller sende fra din Senderenhet til en person som også har et Domino sett, kan du enkelt koble disse sammen.

1. Slå på både Senderenhet og Mottakerenhet.
2. Trykk og hold inne Connect-knappen (**19**) på Senderenheten.
3. Trykk inn samtidig både M-knappen og RF-knappen på Mottakerenheten og hold dem inne mens du observerer:
4. Et "løpende lys" på Mottakerenhetens Nivåindikator (8) som flytter seg til midten når koblingen er etablert.
5. Slipp opp knappene på Mottakerenheten og du har kobling inntil en av enhetene slås av.

Det er mulig å koble til flere Mottakerenheter til en Senderenhet ved å gjenta prosedyren over. Hvis mange Mottakerenheter kobles til en sender, vil overføringskvaliteten kunne bli redusert.

Tekniske data

Battery power:	Innebygget lithium-ion batteri, 617 mAh, type NTA2617
Brukstid:	18 timer (for fullt oppladet batteri)
Ladetid:	2,5 timer
Mikrofon:	Innebygget kondensator-type
Linjeinngang:	0dBV maks input power
Rekkevidde:	Opp til 25m i fri sikt innendørs
Radio samband	2,4GHz, kryptert
Utgangseffekt:	100mW i 16ohm
Dynamic range:	95dB SNR (elektrisk)
Frekvensområde:	40-10000Hz (elektrisk)
Dimensjoner:	99 x 48 x 22 mm (HxBxD)
Vekt:	BE2250: 74 g, BE2270: 70 g