

UNIVERSALSENDER DENTAL
Bruksanvisning



UNIVERSALSENDER DENTAL tilkobles utstyr som skal viderevarsle signaler til Dental varslingsmottakere. Varsling blir utløst når en av inngangene aktiveres fra tilkoblet utstyr. Universalsender har funksjoner for viderevarsling av mange forskjellige hendelser. Andre varslinger er tilgjengelig på bestilling. Varslingene er fordelt i to grupper:

- Daglige signaler
- Alarmer

Daglige signaler utløser varsling med lydvolument som er innstilt i Dental mottakere. Alarmer varsler alltid med full styrke.

Tilgjengelige mottakere er stasjonær varslingsmottaker IRIS DENTAL (Varenr. 1721) og bærbar varslingsmottaker JUNIOR LOMMEVIBRATOR DENTAL (Varenr. 1722). Varslingen kan også sendes via app til Android og iPhone telefoner.

BATTERI OG LADING:

Det medfølger et høykapasitets litium-batteri (Varenr. 9100100934), som vil sikre drift av enheten i mange år.

SAMMENKOBLING:

Alle enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles ved å trykke på LIFE-knappen. LIFE-knappen finner du under lokket på fremsiden av UNIVERSALSENDER.

- 1: Trykk to ganger på LIFE-knappen på en av enhetene. Indikatorlampen blinker grønt.
- 2: Trykk én gang LIFE-knappen på den andre enheten. Indikatorlampen på begge enhetene blinker grønt i 2-3 sekunder.
- 3: Sammenkoblingen bekreftes ved at begge indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
- 4: Enhetene er klare til bruk. Trykk «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.

SAMMENKOBLING AV NY ENHET TIL EKSISTERENDE SYSTEM:

- 1: Trykk to ganger på LIFE-knappen på enhet fra eksisterende system.
- 2: Trykk én gang på LIFE-knappen på den nye enheten.
- 3: Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
- 4: Enhetene er klare til bruk. Trykk tilkallingsknappen for å kontrollere sammenkoblingen.

NULLSTILLE SAMMENKOBLINGEN:

Trykk fem ganger på LIFE-knappen på enheten hvor sammenkoblingen skal slettes. Dette bekreftes med røde og grønne blink.

DAGLIG BRUK:

UNIVERSALSENDER benyttes i hovedsak for å viderevarsle alarmsignaler fra unit.

Når enheten er i drift vises status i lysindikatoren på framsiden:

- Slukket: Stand-by
- Grønt: Varsel sendes
- Blinkende rødt/grønt: Bytt batteri

TILKOBLING AV SENSOR:

Bruk den medfølgende ledningen. Rød leder går til tuppen på jack-pluggen.



- 1: Signalingang 1 for spenningskilde. 3-24 VAC/VDC + på tuppen.
- 2: Signalingang 2 for spenningskilde. 3-24 VAC/VDC - på tuppen.
- 3: Signalingang 3 for potensialfri kontakt. Sammenkobling av lederne gir signal.

AC/DC-KILDER:

Signalkilder med spenningsignal kobles til inngang 1 eller 2. Inngang 1 er polaritetsavhengig for DC-spenning og krever + på rød leder for å varsle. (Dette er nyttig for tilkobling til alarmsystem som benytter polaritetsvending ved alarm).

KONTAKT-KILDER:

Trykk-knapper og relé-signaler kobles til inngang 3.

VELG FUNKSJON (ID-velger):

UNIVERSALSENDER har innebygget flere ferdigprogrammerte varslinger. Velg varslings-ID ved å vri på funksjonsvelgeren, som du finner under lokket på framsiden. Varslingene kan

ytterligere spesialtilpasses i varslingsmottakeren IRIS DENTAL eller via vår Skytjeneste.

ID	Varsel	ID	Varsel
0	Tilkalling rom 1	8	Tilkalling rom 8
1	Tilkalling rom 1	9	Tilkalling rom 9
2	Tilkalling rom 2	A	Tilkalling rom 10
3	Tilkalling rom 3	B	Tilkalling rom 11
4	Tilkalling rom 4	C	Tilkalling rom 12
5	Tilkalling rom 5	D	Tilkalling rom 13
6	Tilkalling rom 6	E	Tilkalling rom 14
7	Tilkalling rom 7	F	Tilkalling rom 15

VIKTIG INFORMASJON:

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut. Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteribytte. Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

RESIRKULERING:

Produktet og batteriet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

SIKKERHET:

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder. Produktet må ikke skrues fra hverandre. Brukerinnstillingene finnes ved å åpne lokket. Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes, brennes eller lades opp.

TEKNISKE DATA:

Dim. (bxhxd): 69x133x27mm
 Vekt m/batteri: 140 g
 Batteri: Litium 3V
 Sendereffekt: 10 mW e.r.p.
 Temperatur: -10 °C - +40 °C
 Radiofrekvens: 868.1 - 869.85 MHz

SAMSVARERKLÆRING:

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

FEILSØKING:

Problem: Det varsles ikke i mottakere.

- 1: Universalsender lyser ikke grønt.
Trykk på testknappen og sjekk om varselet kommer fram.
- 2: Enhetene er ikke sammenkoblet.
Utfør sammenkobling.
- 3: Signalet er ikke godt.
Sjekk tilkoblet signal.
- 4: Avstanden mellom Universalsender og motter er for stor.
Flytt enhetene nærmere hverandre, eller sett inn en Repeater Care.

5: Batteriet i senderen er tomt / det blinker rødt.

Bytt batteri.

6: Universalsenderen mangler batteri.

Sett inn batteri.

7: Kontakten er ikke korrekt tilkoblet.

Kontroller at sensoren er tilkoblet riktig inngang.

Problem: Det varsles med feil signal i mottakere.

1: Funksjonsvelger (ID) står i feil posisjon.

Skru funksjonsvelgeren til riktig posisjon.

Problem: Det blinker rødt/grønt på Universalsender.

1: Batteriet er snart tomt.

Bytt batteri.

Problem: Etter Test-trykk lyser knappen rødt.

1: Enheten er ikke sammenkoblet.

Koble enheten til en mottaker.

Problem: Etter Test-trykk lyser Universalsender lenge grønt, deretter oransje.

1: Ingen mottaker er sammenkoblet med enheten.

Sjekk at det er en mottaker i systemet. Nullstill enheten. Koble til på nytt. Prøv igjen.

Problem: Sammenkobling fungerer ikke.

1: Begge enhetene har vært sammenkoblet tidligere. Det blinker rødt.

Trykk 5 ganger på LIFE-knappen på den enheten som skal legges til for å nullstille den.

