

Bruksanvisning

AUDIOLINK RADIO (MOTTAKERMODUL) FM-M11

AudioLink Radio opererer i 823-832 MHz båndet.

Båndet har 37 kanaler fordelt på 3 banker. FM-M11 dekker Bank 11 som har 16 kanaler.

Mottakeren fungerer etter diversitetsprinsippet.

Daglig bruk

AudioLink Radio er en sentral bestanddel i alle AudioLink produkter med trådløst mottak av mikrofon-signaler og andre lyd-signaler.

AL Radio og korresponderende mikrofoner og sendere i AudioLink systemet må være innstilt på samme kanal. Se avsnittet *Kanalvalg* nedenfor.

Montering

AudioLink Radio benyttes normalt til å utvide antall mottakerkanaler i ALBASE4 og ALBASE, men de forefinnes i alle AudioLink enheter med trådløse mottakere. For montering av AL Radio i disse produktene henvises til bruksanvisning for de produktene.

Kanalvalg


AudioLink Radio kan ta imot på én valgt kanal.

Kanalvelger er plassert i front av enheten.



1. Valg av kanal

Med en liten flat skrutrekker dreier du kanalvelgeren til ønsket kanal. Den gule indikatorlampen på mottakeren lyser når sender og mottaker korresponderer.

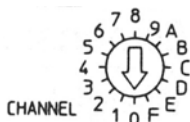

Kanaloversikt.

Bank 11

Kanal	Frekvens	Kanal	Frekvens
0	823,000	8	830,750
1	829,750	9	823,500
2	825,000	A	825,750
3	826,750	B	831,250
4	829,000	C	824,000
5	832,000	D	828,250
6	827,750	E	826,250
7	824,500	F	830,250

Enkel feilsøking

Det er ingen egen feilsøkingsprosedyre for enheten, med det vises til bruksanvisningen for det AudioLink produktet AL Radio er montert i.

Dersom du trenger hjelp til feilretting

I fall du ikke klarer å rette feilen selv, bør du kontakte det sted hjelpemiddelsentralen eventuelt har gitt deg opplysninger om, eller til:

Fylles ut av hjelpemiddelsentralen

Leverandør

Vestfold Audio AS
3234 Sandefjord

Tekniske spesifikasjoner

Frekvensområde: 100 – 12000 Hz
Radio båndbredde: 823 – 831 MHz
Bruksområde: som for vertsproduktet.
Rekkevidde: Opptil 120 meter

**Utfyllende informasjon om hvordan
hjelpemiddelet skal brukes**

Se bruksanvisningen.

Rengjøring utført av bruker

Hjelpemiddelet krever ikke spesielt renhold,
da det er innbygget i andre AudioLink
produkter.

Vedlikehold utført av bruker

Hjelpemiddelet er vedlikeholdsfritt.

Lagring når ikke i bruk

Oppbevares på et tørt og helst støvfritt sted.

Utfyllende om feilindikasjoner

Informasjon om feilmeldinger finner du i
bruksanvisningen.

Dok.nr.: 0655B
Dato: 2017-10-04



Vestfold Audio AS
Sandefjord

