

# Bruksanvisning

## AUDIOLINK RADIO (MOTTAKERMODUL) FM-M14

**AudioLink Radio opererer i frekvensområdet under 790MHz.  
FM-M14 har 16 kanaler som kan benyttes i geografiske områder  
der disse frekvensene er ledige (white spots).  
Mottakeren fungerer etter diversitetsprinsippet.**

### Daglig bruk

AudioLink Radio er en sentral bestanddel i alle AudioLink produkter med trådløst mottak av mikrofon-signaler og andre lyd-signaler.

AL Radio og korresponderende mikrofoner og sendere i AudioLink systemet må være innstilt på samme kanal. Se avsnittet *Kanalvalg* nedenfor.

### Montering

AudioLink Radio benyttes normalt til å utvide antall mottakerkanaler i ALBASE4 og ALBASE, men de forefinnes i alle AudioLink enheter med trådløse mottakere. For montering av AL Radio i disse produktene henvises til bruksanvisning for de produktene.

### Kanalvalg

AudioLink Radio kan ta imot på én valgt kanal.

Kanalvelger er plassert i front av enheten.



#### 1. Valg av kanal

Med en liten flat skrutrekker dreier du kanalvelgeren til ønsket kanal. Den gule indikatorlampen på mottakeren lyser når sender og mottaker korresponderer.



### Kanaloversikt.

Disse kanalene kan bare brukes i geografiske områder der kanalene er erklært ledige av Post- og Teletilsynet.

Kanal	Frekvens	Kanal	Frekvens
0	788,500	8	786,500
1	785,500	9	784,500
2	788,000	A	783,000
3	785,250	B	784,000
4	787,500	C	783,250
5	785,000	D	783,750
6	787,000	E	784,250
7	784,750	F	783,500

### Enkel feilsøking

Det er ingen egen feilsøkingprosedyre for enheten, med det vises til bruksanvisningen for det AudioLink produktet AL Radio er montert i.

### Dersom du trenger hjelp til feilretting

I fall du ikke klarer å rette feilen selv, bør du kontakte det sted hjelpemiddelsentralen eventuelt har gitt deg opplysninger om, eller til:

*Fylles ut av hjelpemiddelsentralen*

**Leverandør**

Vestfold Audio AS  
3234 Sandefjord

**Tekniske spesifikasjoner**

Frekvensområde: 100 – 12000 Hz  
Radio båndbredde: 783 – 790 MHz  
Bruksområde: som for vertsproduktet.  
Rekkevidde: Opptil 120 meter

**Utfyllende informasjon om hvordan  
hjelpemiddelet skal brukes**

Se bruksanvisningen.

**Rengjøring utført av bruker**

Hjelpemiddelet krever ikke spesielt renhold,  
da det er innbygget i andre AudioLink  
produkter.

**Vedlikehold utført av bruker**

Hjelpemiddelet er vedlikeholdsfritt.

**Lagring når ikke i bruk**

Oppbevares på et tørt og helst støvfritt sted.

**Utfyllende om feilindikasjoner**

Informasjon om feilmeldinger finner du i  
bruksanvisningen.

Dok.nr.: 1124A  
Dato: 2012-10-08

