

Bruksanvisning

Hodebøylemikrofon Type 2, m/ mini XLR HODEB2

Dette er en enkel mikrofon som passer til personer som ikke har spesielt svak eller dårlig stemme.



Dok. nr.: 2486A
Dato: 2016-12-21

Vestfold Audio AS
Sandefjord

Ta på deg mikrofonen**Ta på deg mikrofonen**

Mikrofonen bæres med krokene hengende over ørene bakfra.

1. Bøy bommen slik at mikrofonen kommer nærme og peker mot munnen din uten å komme i direkte kontakt med huden.
2. Sett kontakten i stemmeforsterkeren / mikrofonsenderen.



NB!! Feil tilpasning av mikrofonen medfører ofte "feedback" og kraftig hyling i høyttalerne.

Enkel feilretting

Hvis lyden er dårlig eller det hylar i høyttaleren:

1. Tilpass mikrofonen til brukeren – bøy til nær munnviken!
2. Skru ned volumet på forsterkeren.
3. Unngå å stå rett foran en høyttaler / stemmeforsterker.

Rengjøring utført av bruker

Mikrofon kan rengjøres med myk klut oppvridd i lunKent, mildt såpevann. Hjelpemiddelet må ikke utsettes for væskesøl eller sprut med vann.

Vedlikehold utført av bruker

Hjelpemiddelet er vedlikeholdsritt.

Lagring når ikke i bruk

Oppbevares på et tørt og støvfritt sted.

Dersom du trenger hjelp til feilretting

I fall du ikke klarer å rette feilen selv, bør du kontakte det sted hjelpemiddelsentralen eventuelt har gitt deg opplysninger om, eller til:

Fylles ut av hjelpemiddelsentralen

Leverandør

Vestfold Audio AS
3241 Sandefjord