

Varslingsmottaker IRIS-Touch m/ display, lys, lyd og tale. IRIS



Brukerhåndbok

Innholdsfortegnelse

1. Innledning	3
2. Oversikt	4
I pakken	4
Utvendig	4
Baksiden	4
3. Komme i gang	5
Plassering	5
Stille inn huskode	5
Tilkobling	5
4. Daglig bruk	5
Varsling	5
Avbryte varsel	5
Justere volum	6
Klokke	6
Vekkerklokke	6
Nedtellingsur (Timer)	6
5. Meny	6
Vekkerklokke	7
Timer/Nedtelling	7
Klokkeinnstillinger	7
Justere klokke	7
Funksjonsbryter	7
Informasjon	7
6. Grunninnstillinger	8
7. Avanserte innstillinger	9
Åpne avansert kontrollpanel	9
Innstillinger	9
Tilpasse	9
Nabovarsel	9
Varslinger	10
Funksjonsbryter	10
Informasjon	10
Vedlikehold	10
8. Viktig informasjon	10
Resirkulering	10
9. Tekniske data	11
10. Feilsøking	11

1. Innledning

IRIS-Touch er en mottaker/varsler som tar imot trådløse signaler fra FlexiBlink detektorer/sendere montert i boligen din.

FlexiBlink benyttes for å varsle om alvorlige hendelser som brannalarm og komfyrvakt så vel som daglige hendelser som dørklokke, telefon og andre relevante hendelser.

Varsling blir utløst når f.eks. en FlexiBlink Røykvarsler detekterer røyk eller en Telefonsender oppfatter at det ringer. Senderne varsler da trådløst til alle varslingsmottakere i boligen. Du kan ha så mange varslingsmottakere og sender som du trenger for sikkerhet og dagligliv.

IRIS-Touch kan også melde fra hvor brannalarmen er utløst. Det er viktig hvis du har flere røykvarslere i huset. Den gir også beskjed om hvilken røykvarsler som trenger batteribytte.

IRIS-Touch har også en avansert nabovarslings-funksjon, som muliggjør brannsikkerhet mellom boenheter.

I tillegg til å fungere som en varslingsmottaker kan IRIS-Touch benyttes som talende klokke, vekkerklokke og nedtellingsur/timer.


IRIS-Touch er monteringsfri – batterieliminatoren settes i kontakten på veggen. Det er alt.

2. Oversikt

I pakken



IRIS-Touch
Med avtakbar fot og
festebrakett for vegg

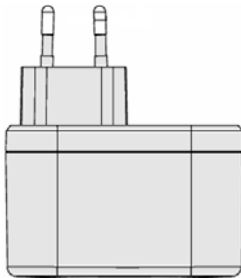

Strømforsyning


Utvendig



Figur 1 Framsiden

- ① Lys (Høyre og venstre side)
- ② Skjerm med touch
- ③ HJEM knapp
- ④ Mikrofon for taleinnspilling
- ⑤ Høyttaler
- ⑥ Volum opp/ned
- ⑦ Avtakbar fot

Baksiden

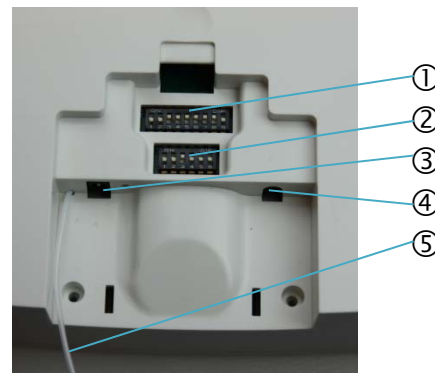

Figur 2 Baksiden

- ① Huskodebryter
- ② Funksjonsbryter
- ③ Tilkobling strømforsyning
- ④ Lydutgang for teleslynge/streamer
- ⑤ Antenne

3. Komme i gang

Plassering


IRIS-Touch kan stå på et bord i den medfølgende sokkelen, eller skrues opp på vegg med den medfølgende braketten.



Tips

Ikke monter braketten før du har kontrollert at strømledningen er lang nok

Stille inn huskode

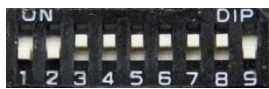

Huskodebryter
(fabrikkinnstilling)

Du finner
Huskode-
bryteren bak på
IRIS-Touch.

I FlexiBlink sørger huskoden for å varsle **kun** hos deg – og ikke hos dine naboer som også har FlexiBlink.



Viktig

Bruk aldri fabrikkinnstillingen

Velg en *tilfeldig* huskode. Dette gjøres ved å velge en kombinasjon av bryterne 1 – 9. Pass på at alt FlexiBlink utstyr i boligen har eksakt samme kode. Forsikre deg om at du leser tallrekken på huskodebryteren riktig vei på alle produktene.

Tilkobling

Sett strømforsyningen i kontakten på veggen og plugg ledningen inn i IRIS-Touch. Du vil nå se at skjermen starter – og melder med tale at den er «Klar til bruk» når den har startet opp.

IRIS-Touch er nå klar til bruk. Dersom du ønsker å gjøre endringer på oppsett, stille klokke og lignende – se kapittel 7.

4. Daglig bruk

Varsling

IRIS-Touch fungerer som varslingsmottaker uten noen som helst aktiv bruk. Hendelser som oppstår i boligens FlexiBlink-anlegg varsles automatisk med lyd, lys og bilde – samt tale dersom dette er aktivert.

IRIS-Touch husker siste varsel en tid. Ved å ta på skjermen innen to minutter etter at varslingen er ferdig vil du se hvilket varsel som ble vist. Ønsker du å se på klokken i denne perioden – trykk på HJEM knappen.

Avbryte varsel

Dersom man ønsker å stoppe et pågående varsel kan man berøre skjermen eller trykke på HJEM-knappen. Varselet vil nå stoppe umiddelbart. Dersom en brannalarm stoppes på denne måten vil kommende, nye, alarmer innen ett minutt varsles med kun symbol og lys.

Justere volum

Benytt volumbryter (pluss/minus) på høyre fremside av IRIS-Touch for å justere lydstyrke på daglige varslinger. Alarmer varsles alltid med full styrke.

Klokke

Dersom klokken er stilt og aktivert (se kapittel 5), vises klokke og dato når skjermen berøres eller HJEM-knappen trykkes.

Ved aktivert talende klokke, vil også tidspunkt og dag leses opp automatisk.

Vekkerklokke



IRIS-Touch har en innebygget vekkerklokke. Trykk på klokkesymbolet nede i høyre hjørne for å slå av/på alarmen, samt velge tidspunkt. Det kan også velges om man ønsker slumre-funksjon og om man ønsker alarm på faste dager. Trykk på tilbake på skjerm eller HJEM-knapp når innstillingen er ferdig.

Alarmtidspunktet vil nå vises ved siden av klokkesymbolet nederst til høyre på skjermen.

Vekkerklokken varsler med lyd og lys på skjermen. Den er også forberedt til å varsle trådløst til sengevibrator.

Nedtellingsur (Timer)



IRIS-Touch har et praktisk nedtellingsur.

Dette vises med gjenstående tid på skjermen når timeren er startet.

5. Meny

IRIS-Touch har en brukermeny for å stille vekkerklokke, justere dato/tid, starte nedtelling/timer samt se informasjon om produktet og hvilke funksjoner som er valgt.

Trykk og hold HJEM-knappen inne i 2 sekunder. En meny vil nå vises. Menyen kan ha flere sider. Du kan bla mellom sidene ved å trykke på pilene nederst på skjermen.

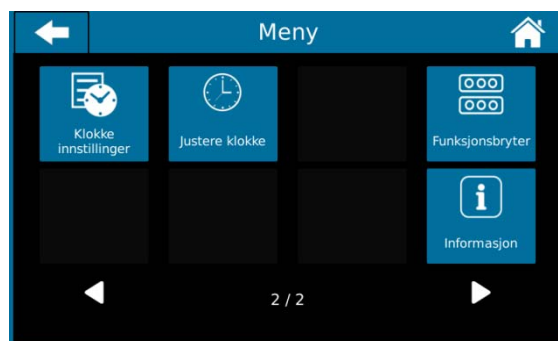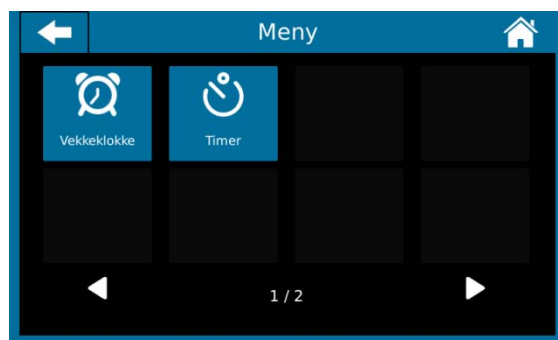



Viktig

Når meny og innstillinger vises på skjerm mottas ikke varslinger. Dette inkluderer innstillinger for vekkerklokke og timer/nedtelling

Vekkerklokke

Her velges alarmtidspunkt samt om alarmen skal være aktiv eller ei. Det kan også velges om man ønsker slumre-funksjon og om man ønsker alarm på faste dager. Dette er samme side som åpnes om man trykker på vekkerklokkesymbolet nederst til høyre på skjermen. Ved aktivering av vekkerklokke aktiveres også klokkevisning automatisk.

Timer/Nedtelling

Velg Timer i menyen, sett nedtellingstid og trykk START.

For å avbryte en pågående nedtelling, trykk på visningen av nedtellingsuret og deretter «STOPP».

Klokkeinnstillinger

Her kan man velge om klokke skal være aktivert, og hva slags type klokke som skal vises (digital/analog). Man kan også slå talende klokke av/på samt velge om den skal fortelle hvilken ukedag det er. Det kan også aktiveres mulighet for visning av tid på døgnet (morgen/kveld/natt o.l.)

Justere klokke

Her stilles klokke og dato. Velg korrekt dato og tidspunkt – trykk deretter «Endre» for å stille til valgt tid.

Funksjonsbryter

Her vises valgt huskode samt funksjonsbryterens innstillinger. Det er ikke mulig å endre innstillinger her. Bryterne betjenes bak på IRIS-Touch.

Informasjon

Her vises programvareversjon. Benyttes ved henvendelser til Vestfold Audio AS.

6. Grunninnstillinger

IRIS-Touch er utstyrt med en funksjonsbryter på baksiden.



Daglige signaler/Kun alarmer – bryter 1

Dersom du ønsker at IRIS-Touch ikke skal varsle deg om daglige hendelser som for eksempel dørklokke og telefon, kan du skyve *bryter 1* opp.

IRIS-Touch vil nå kun varsle *alarmer* – som for eksempel komfyrvakt, røykvarsler o.l.



Nabovarsling – bryter 2

Dersom du ønsker å bli varslet ved brann eller innbrudd hos naboer med FlexiBlink varslingssystem, kan du skyve *bryter 2* opp. IRIS-Touch vil varsle disse alarmene fra alle naboer innen rekkevidde. IRIS-Touch kan også settes til kun å varsle fra valgte naboer – se kapittel 7. I disse tilfellene skal nabovarsling sette i stilling ned. NB! *Nabovarsling går kun på alarmsignaler, og ikke for eksempel telefon og dørklokke.*



Tale – bryter 3

Bryter 3 er for å slå tale på/av. Tale er som standard deaktivert. Ved å skyve *bryter 3* ned, aktiveres talefunksjonen. Da får man varsling med både varslingslyd og beskrivende tale. *Brannvarsel spilles alltid av med tale.*



Sengevibrator – bryter 4

Bryter 4 er for å velge kanal A/B ved varsling fra Iris Touch til sengevibrator. Kanal A er standard kanal. Hvis man har flere sengevibratorer, kan man her velge mellom to forskjellige kanaler for separat varsling til sengevibrator. Les brukerhåndbok til sengevibrator for innstillinger på sengevibrator.



Skjermlås – bryter 5


Bryter 5 er for låsing av volum og menyer. Ved å skyve *bryter 5* opp, låses volum til gjeldende nivå. Denne innstillingen holdes selv etter strømbrudd, og ved forsøk på volumjustering vil det komme beskjed på skjermen at skjermen er låst. I denne innstillingen spiller ikke IRIS-Touch av «Klar til bruk» ved oppstart. Det vil ikke være mulig å gjøre endringer på oppsettet i skjermen når låsen er på.

Kombinasjoner av funksjonene kan kombineres fritt etter behov med bryter 1 til 3 og 5. Bryter 4 og 6 er reservert for fremtidige behov.

7. Avanserte innstillinger

IRIS-Touch har en rekke muligheter for tilpasning, som ikke er nødvendige å benytte til daglig.

Avansert kontrollpanel er kun for teknisk personell og benyttes typisk ved installasjon eller endring etter behov

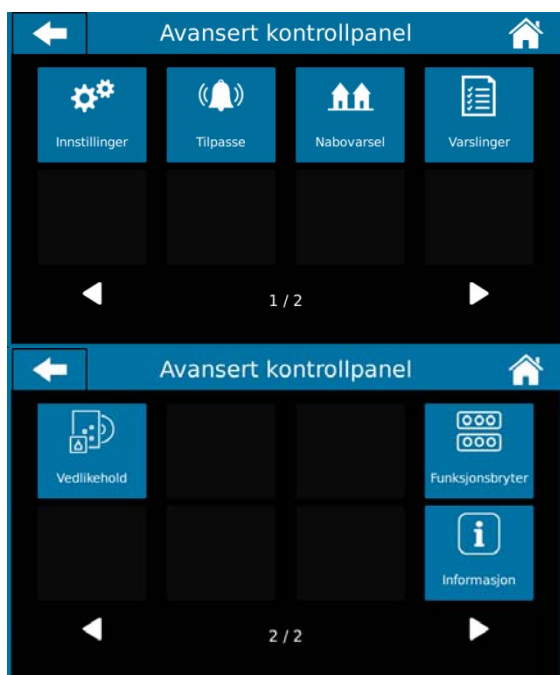

Åpne avansert kontrollpanel

For å åpne kontrollpanelet, trykk og hold HJEM-knapp inne. Straks etter at HJEM-knapp er trykket, trykk én gang på VOLUM NED og én gang på VOLUM OPP. Fortsett å holde HJEM-knapp inne i ca. 2 sekunder inntil kontrollpanelet vises.

Kontrollpanelet består av to sider, og man kan enkelt hoppe mellom disse ved å trykke på pilene i bunnen.



Viktig

Når kontrollpanel og innstillinger vises på skjerm mottas ikke varslinger

Innstillinger

Her kan man slå av/på følgende:

- Lysvarsel
Blinkende lys i front
- Synsforsterket modus
Økt tydelighet på symboler

I dette valget kan også styrken på skjermens baklys og styrken på blinkende lys i front justeres. Dette kan være nyttig for eksempel ved bruk på soverom.

Tilpasse

Her kan man endre tekst som vises ved de forskjellige varslingsene. IRIS-Touch tillater også innspilling av nye talebeskjeder. Vær oppmerksom på at kun varslinger som har blitt mottatt av IRIS-Touch kan tilpasses. (Sender må aktiveres minst én gang dersom man ønsker å tilpasse varselet.)

Nabovarsel

Dersom det ikke er ønskelig med nabovarsel fra alle naboer, kan opp til åtte huskoder fra naboer legges inn her. For hver nabo kan man legge inn et navn, samt velge hva slags type varsel man ønsker å motta (brann, tyveri, epilepsi og assistanse).

Varslinger

Her vises en liste over mottatte varslinger den siste tiden. Dette kan være praktisk ved installasjon og feilsøking.

Funksjonsbryter

Her vises valgt huskode samt grunninnstillinger fra funksjonsbryteren. Det er ikke mulig å endre innstillinger her, kun vise hvilke valg som er gjort på bryterne bak.

Informasjon

Her vises programvareversjon og lignende.

Vedlikehold

Her kan oppsett fra gjeldende skjerm lagres til minnepenn. Dette kan være nyttig om man ønsker å kopiere en tilpasset skjerm med egne tekster og lyder til flere andre skjermer.

Programvare kan også oppdateres her. Enten via internett eller via USB. Kontakt Vestfold Audio AS ved behov for hjelp.

IRIS-Touch kan også settes tilbake til fabrikkinnstilling her. Da blir alle lyder og tilpasninger slik den leveres originalt.

8. Viktig informasjon

- Produktet kan rengjøres med en myk lett fuktet klut
- Produktet er for innendørs bruk
- Temperatur: 10 °C – 40 °C
- Nødstrømbatteri m/ kontinuerlig ladefunksjon finnes som tilbehør

Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall.



Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

9. Tekniske data

Dim. (bxhxd): 218x165x40mm
(uten veggfeste og fot)
Radiofrekvens: 142.475MHz
Sendereffekt: 10 mW e.r.p.

10. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Varsling mottas ikke	Feil huskode	Kontroller at huskode er lik på sender og IRIS-Touch
	Manglende dekning	Forsøk å flytte enhetene nærmere hverandre
	Manglende dekning	Sett opp repeater
	Tomt batteri i sender	Bytt batteri i sender
	Sender virker ikke	Les bruksanvisning til sender
Varsling mottas, men ingen lyd	Volum justert ned	Forsøk å justere opp volum
	Lyd avslått	Kontroller at lyd ikke er avslått i avansert kontrollpanel. Se kapittel 7
Varsling mottas med lyd, men ingen tale	Tale avslått	Kontroller at tale ikke er avslått (funksjonsbryter 3)
Varsling mottas, men ingen lysblink	Lys avslått	Kontroller at lys ikke er avslått eller justert for lavt i avansert kontrollpanel. Se kapittel 7
Klokken viser feil tidspunkt eller dato		Still klokken. Se kapittel 5
Klokken viser feil tidspunkt etter strømbrudd	Klokkebatteriet er tomt for strøm	Klokkebatteriet lades opp over lang tid. Batteriet bør lade i minst 4 dager før man tar ut strømmen
Hvordan slette innspillinger og tilbakestille innstillinger?		Se kapittel 7

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddelsentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.



Vestfold Audio AS

www.vestfoldaudio.no

Tlf.: +47 33 47 33 47

