

Bruksanvisning

MINO Samtaleforsterker, BE2030



2013-01-02
Dok.nr.: 0638A

Vestfold Audio AS

Innholdsfortegnelse

Viktige sikkerhetsinstruksjoner	3
Knapper og tilkoblinger	3
Ta apparatet i bruk (montering)	4
Lading	4
Funksjoner	4
Valg av mikrofon	4
Telespole / T-stilling.....	5
Velg Ekstern signalkilde	5
Ekstern mikrofon	5
Kombinerte signalkilder	5
Batteristatus	6
Enkel feilsøking.....	6
Tekniske data.....	7




Viktige sikkerhetsinstruksjoner

- Les gjennom disse anvisningene nøye.
- Ikke kast disse anvisningene.
- Ta hensyn til alle advarsler.
- Følg alle anvisninger.
- Ikke benytt apparatet der det er fare for at det kan bli vått.
- Rengjør bare med en tørr eller lett fuktet klut.
- Blokker ikke ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til anvisningene.
- Installer ikke produktet nær varmekilder som ovner, peis eller andre apparater (inklusive forsterkere) som avgir varme.
- Strømledningen må ikke trækkes på eller bli klemt. Pass spesielt godt på ved kontakter, forgreninger og der ledningen kommer ut av apparatet.
- Benytt bare tilbehør som er spesifisert av produsenten.
- Koble fra apparatet ved tordenvær eller når du ikke skal benytte det på lang tid.
- Servicearbeid skal bare utføres av kvalifisert personell. Service er bare nødvendig hvis apparater har blitt skadet, som for eksempel om ledningen eller kontakten har blitt skadet, væske har blitt sølt på apparatet eller noe har kommet inn i apparatet, om apparatet har blitt utsatt for regn eller fukt eller ikke fungerer som det skal.

Knapper og tilkoblinger

1. Intern mikrofon
2. Lysdiode for intern mikrofoninnstilling
Grønt: Rundtoppfattende mikrofon
Orange: Rettet mikrofon
3. Lysdiode for Batteristatus
Grønt: På med bra ladet batteri
Blinkende Grønt: På, men batteriet er snart tomt
Blinkende Orange: På med tomt batteri – apparatet slår seg snart av
Orange: Lader
4. Lysdiode for ekstern lydkilde
Grønt: T(eleslynge)-posisjon
Orange: Ekstern mikrofon
Orange og Grønt: Line in (stereo)
5. Knapp for val av intern mikrofon
6. På og Av-knapp
7. Knapp for valg av T(eleslynge) - posisjon
8. Lysdiode for Volum og Tone
9. Knapp for å øke lydstyrke
10. Knapp for å redusere lydstyrke
11. Knapp for å redusere diskant
12. Knapp for å øke diskant
13. Hodetelefontilkobling 3,5 mm jack
14. Tilkobling lader
15. Klemme / Klips
16. Inngang for ekstern lydkilde, 2,5 mm jack

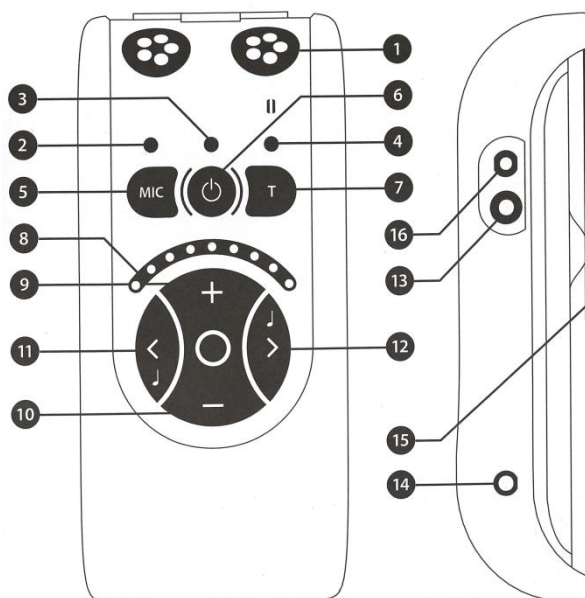

Ta apparatet i bruk (montering)

1. Koble inn halsslynge eller hodetelefon i utgangen (13).
2. Trykk kort på Av- og På-knappen i (6) for å starte Mino.
3. Lytt på den interne mikrofonen og juster volumet med Volumknappene.
4. Mino starter normalt med intern mikrofon (1) som lydkilde. Dessuten settes alltid volumkontrollen automatisk til lavt volum for å unngå ubehagelige lydnivå.
5. Volumkontroll; juster med +(9) øker og -(10) reduserer volumet samtidig som indikatoren for Volum og Tone (8) viser lydnivå. Jo fler lysdioder som er tent desto høyere volum. Indikatoren slukker 5 sekunder etter justering.
6. Tonekontrollen justerer lydlyden der > (12) øker og < (11) reduserer diskanten. Indikatoren for Volum og Tone (8) viser tone-innstillingen. Indikatoren slukker 5 sekunder etter justering.
7. Når du er ferdig kan du slå av Mino ved å trykke på Av- og På-knappen i (6) og holde den inntrykket til Lysdioden for Batteristatus (3) slukker.

Lading

Mino leveres med et innebygget ladbart batteri. Batteriet må lades før produktet tas i bruk første gang. Mino inneholder et batteri av typen Lithium-Ion og leveres med en universell lader.

NB! Bruk ikke ladere fra andre produsenter til Mino!

Koble inn laderen i (14) som anvist på side 3.

Monter stikkontakt som passer til standarden i det landet du befinner deg. Kontroller at den klikker på plass for du kobler den inn i kontakten. Når laderen er satt inn i kontakten og tilkoblet Mino, blinker Lysdioden for Batteristatus (3) mellom grønt og orange for å vise at lading pågår. Når lading er ferdig, etter ca 2,5 timer, lyser lysdioden grønt.

Funksjoner

Koble til Bellman hodetelefon BE9122, Bellman Halsslynge BE9128, Bellman Stetoclips BE9125, Bellman Ørepropper BE9124 eller en annen egnet lyd giver til hodetelefonutgangen (13).

Valg av mikrofon

Mino har to mikrofonalternativer. En for rundtopptagende (omni) og en for rettet mikrofon. Man kan veksle mellom rundtopptagende og rettet mikrofon ved å trykke på M-knappen (5). Rundtopptagende mikrofon vises ved at Lysdioden for Mikrofon (2) lyser grønt og rettet mikrofon ved at den lyser orange.

Med rettet mikrofonen kan man "peke" mot den lydkilden som du vil lytte til samtidig som lyden fra andre hold dempes. Dette kan være nyttig i vanskelige ved vanskelige lytteforhold, som for eksempel i forsamlinger og steder der det er mye støy.

Telespole / T-stilling

Du kan manuelt velge mellom intern mikrofon (MIC-stilling) eller innebygget telespole (T-stilling) ved å trykke på knappene **M (5)** og **T (7)**. Ved veksling mellom signalkilder vil volumkontrollen automatisk stilles til et lavt nivå for å unngå ubehagelige lydnivåer.

Den innebygde telespolen er vinklet 45 grader for å kunne fange opp induktive signaler fra en teleslynge både når Mino er i horisontal (i handen eller på et bord) og i vertikal stilling (i klips eller halssnor).

T-stilling kan anvendes i lokaler der teleslynge (eller horeslynge) er installert. Se etter symbolet for teleslynge eller spor personalet om teleslynge finnes hvis du er usikker. T-stilling vises ved at lysdioden for ekstern lydkilde lyser grønt.

Velg Ekstern signalkilde

Om den medfølgende audiokabelen (som i ene enden har en 2,5 mm jack-plugg) kobles til Inngang for ekstern lydkilde (**16**) vil den interne mikrofonen kobles ut og ekstern lydkilde velges automatisk. Lysdioden for Ekstern lyd (**4**) vil lyse grønt og orange samtidig for å vise at lyden kommer fra en ekstern lydkilde.

Inngangens følsomhet justeres automatisk for å tilpasse til forskjellige lydkilder. Med audiokabelen koblet til en TV, HiFi-anlegg, MP3-spiller eller liknende lydkilde kan man lytte på stereolyd hvis du benytter hodetelefon.

Når du drar ut kontakten går Mino automatisk tilbake til intern mikrofon (M-stilling).

Ekstern mikrofon

Man kan også tilkoble en ekstern mikrofon til Inngang for ekstern lydkilde (**16**). Lysdioden for Ekstern lyd (**4**) vil lyse orange for å vise at lyden kommer fra en ekstern mikrofon. Inngangens følsomhet justeres automatisk tilpasset den eksterne mikrofonen som kobles inn.

Kombinerte signalkilder

Hvis du lytter til en Ekstern lydkilde går det an å kombinere den med lyd som den interne mikrofonen tar opp.

Velg først å lytte på Ekstern lydkilde eller velg telespole ved å trykke på **T**-knappen (**7**). Hold så **M**-knappen (**5**) inntrykket til både MIC- lysdioden (**2**) og T-lysdioden (**4**) lyser.

Lyden fra den eksterne lydkilden blandes nå med lyden fra den interne mikrofonen.

Man kan justere balansen mellom den eksterne lyden og den interne mikrofonen ved å holde **M**-knappen (**5**) inntrykket samtidig som man stiller inn balansen med knappene **< (11)** eller **> (12)**.

Om man vil gå tilbake til å bare lytte til ekstern lydkilde trykker man på **T**-knappen (**7**) og om man vil tilbake til bare å lytte på den interne mikrofonen trykker man på **M**-knappen (**5**).

Batteristatus

Normalt lyser Lysdioden for Batteristatus (3) grønt. Det viser at Mino er På og at batterinivået er tilfredsstillende. Ved lavt batterinivå blinker Lysdioden for Batteristatus (3) grønt til batteriet nesten er helt tomt. Da begynner den å blinke orange. Merk at du bør lade opp Mino allerede når den begynner å blinke grønt, slik at du unngår at den slår seg av automatisk.

Enkel feilsøking

Symptom	Tiltak
Ingenting skjer når du forsøker å slå på enheten.	Koble inn laderen og kontroller at lading starter i løpet av 10 sekunder. <i>OBS! Om lading ikke starter i løpet av 10 sekunder, må du umiddelbart koble fra laderen og kontakte din Hjelpemiddelsentral!</i>
Ingen lyd høres i hodetelefon / halsslynge når enheten er på.	<ul style="list-style-type: none"> • Skru opp lyden med volumkontrollen + (9) • Kontroller at intern mikrofon er valgt som signalkilde og at den fungerer ved å skrapa lett på mikrofonene (1). • Kontroller at kontakten er helt trykket inn i hodetelefonutgangen. • Koble hodetelefonen/halsslyngen til en annen lydkilde (med 3,5 mm jack-kontakt) for å teste om den fungerer.
Ingen lyd høres i hodetelefon / halsslynge når enheten er på og Ekstern lydkilde er valgt.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at lydilden er korrekt tilkoblet • Inngangen for ekstern lydkilde (16). • Koble lydilden direkte til hodetelefon eller halsslynge og se om den fungerer da. • Skru eventuelt opp volumet opp den eksterne lydilden.
Hyling i hodetelefonen.	<ul style="list-style-type: none"> • Senk volumet eller øk avstanden mellom mikrofonen og hodetelefonen. • Rett mikrofonen fra deg.

Tekniske data

Battery power:	Innebygget lithium-ion batteri , 3,7V 618 mAh, type McNair MCP413048
Brukstid:	18 timer (far fullt oppladet batteri)
Ladetid:	2,5 timer
Mikrofon:	Innebygget kondensator-type
Linjeinngang:	0dBV maks input power
Telespole:	Vinklet 45 grader
Utgangseffekt:	100mW i 16ohm
Dynamic range:	90dB SNR (elektrisk)
Frekvensområde:	40-10000Hz (elektrisk)
Dimensjoner:	99 x 48 x 22 mm (HxBxD)
Vekt:	75g

