

FlexiBlink

Varenr. 1515
HMS-nr.: 232764

Tidsstyrt Aktivitetsvarsler TIDS-UNI



Brukerhåndbok

Dok. nr.: 2376 B
Dato: 2017.06.23



Innholdsfortegnelse

<u>1. Innledning</u>	<u>3</u>
<u>2. Oversikt</u>	<u>4</u>
I pakken	4
Utvendig	4
Baksiden	4
Under lokket	4
<u>3. Komme i gang</u>	<u>5</u>
Sett inn batteriene	5
Montere Tidsstyrt	
Aktivitetsvarsler	5
Stille inn huskode	5
Funksjonstest	5
<u>4. Oppsett</u>	<u>6</u>
<u>5. Avansert</u>	<u>7</u>
Systeminnstillinger	7
<u>6. Viktig informasjon</u>	<u>7</u>
Resirkulering	7
<u>7. Tekniske data</u>	<u>7</u>
<u>8. Feilsøking</u>	<u>8</u>

1. Innledning

TIDSSTYRT

AKTIVITETSVARSLER varsler hendelser i valgte tidsrom og med en gitt varighet. Dette kan være nyttig for egenmestring der man for eksempel kan få en påminnelse om at kjøleskapet har stått oppe lenge. Den kan også være til hjelp for pårørende for å varsle at en person har vært ute av senga en viss periode. I tillegg kan den også benyttes for å varsle foreldre om at barnet har gått ut av rommet sitt om natta.

TIDSSTYRT

AKTIVITETSVARSLER kan benyttes sammen med alle sensorer fra Vestfold Audio. Dette kan for eksempel være PIR Gardinsensor, PIR Mini, Magnetkontakt eller Sengesensor.

Ved aktivitet sendes meldinger trådløst til FlexiBlink mottakere. På denne måten kan talebeskjeder/påminnelser aktiveres i boligen eller varsling kan gå til pårørende.



Lukk fryseren.
Lukk kjøleskapet.
Lukk døra.
Lukk vinduet.



Det er natt - gå til sengs.



Barnet har stått opp.



Passasjealarm.



Vandring ute.



Vandring inne.

2. Oversikt

I pakken



Tidsstyrt
Aktivitetsvarsler



2 stk. Litium AA
batterier



Låsebrakett for
vegg



Festebrakett for vegg

Utvendig



Figur 1 Framsiden

① Åpning
av lokket for
innstillinger

Baksiden



Figur 2 Baksiden

- ① Festehull til braketten
- ② Tilkobling strømforsyning
(Opsjon. Kjøpes separat.)
- ③ Tilkoblingspunkt for sensor
(PIR-Gardin / Dørkontakt)
- ④ Åpning av batterilokket
- ⑤ Antenne

Under lokket



Figur 3 Under lokket på forsiden

- ① Touch-skjerm
- ② Funksjonsvelger
- ③ Huskodevelger

3. Komme i gang

Sett inn batteriene

Sett inn begge de medfølgende batteriene i batterilommen på baksiden. Den flate siden av batteriene (minus) skal vende oppover.

Begge batteriene skal monteres samme vei.



Figur 4
Batterirommet

Montere Tidsstyrt Aktivitetsvarsler

Benytt enten de medfølgende borrelåsene eller skruer til å montere produktet på vegg ved hjelp av veggbraketten.

Hvis du skal bruke borrelåsen, må flatene rengjøres med den medfølgende spritservietten. La flaten tørke i minst ett minutt før montering.

Koble til ønsket sensor i tilkoblingspunktet på baksiden. Se egen bruksanvisning på valgt sensor for mer informasjon om montering av denne

Produktet kan også låses fast med låsebraketten. Denne skrues fast i vegg etter at produktet er hengt opp på braketten.



Figur 9 Låse
med braketten

Stille inn huskode

I FlexiBlink sørger huskoden for å varsle **kun** hos deg – og ikke hos dine naboer som også har FlexiBlink.



Huskodebryter
(fabrikkinnstilling)



Viktig

Bruk aldri fabrikkinnstillingen

Velg en *tilfeldig* huskode. Dette gjøres ved å velge en kombinasjon av bryterne 1 – 9. Pass på at alt FlexiBlink utstyr i boligen har eksakt samme kode. Forsikre deg om at du leser tallrekken på huskodebryteren riktig vei på alle produktene.

Funksjonstest

Etter tilkobling av sensor er Tidsstyrt Aktivitetsvarsler klar til bruk. For å teste om produktet reagerer på sensoren, gjør slik:

- Ta av frontlokket
- Det vises et rødt symbol (§) oppe i venstre hjørne på skjermen når sensoren reagerer.


(Dør åpen / bevegelse sett av PIR eller lignende)

4. Oppsett

Åpne lokket på fremsiden. Nå vises gjeldende tidspunkt og dato.



Trykk «Innstillinger» for å endre oppsett.

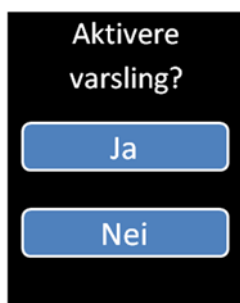

Ved å trykke «Nei» settes produktet inaktivt og vil ikke kunne bli aktivert av sensor. Trykk «Ja» for å aktivere varslings samt for å endre/se oppsett.



Her velges type funksjon. Klikk «Neste» for å velge annen funksjon eller «Bekreft» for å velge gjeldende.

Alle funksjoner varsler med lyd, lys, symbol, tekst og tale i

FlexiBlink varslingsmottakere. Varslinger kan også mottas på mobiltelefon med FlexiApp.

Følgende funksjoner finnes:

Ved varighet	Straks
Seng	Barn stått opp
Kjøleskap	Passasjealarm
Fryser	Vandring Inne
Dør	Vandring ute
Vindu	Klokke




Etter valgt type funksjon velges tidsrom funksjonen skal være aktiv. Velg samme tidspunkt i til/fra for varslings hele døgnet.



Enkelte funksjoner kan man sette at hendelsen skal vare en viss tid før varslings sendes. Her kan tiden stilles inn. Dette fungerer kun dersom det benyttes en sensor som er aktiv mens hendelsen pågår, som for eksempel magnetbryter for dør eller sengesensor. Dersom varslings skal iverksettes straks

hendelsen oppdages (dør åpnes o.l.), settes tiden til 0 minutter.

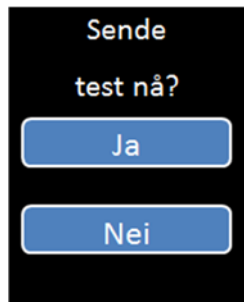

Avslutningsvis får man anledning til å sende en test-melding.

Produktet aktiveres først når lokket settes på igjen.



Viktig

Pass på at skjermen slokker når frontlokket settes på, for å unngå at batteriet brukes opp!

5. Avansert

Varsling av fravær



Ved bruk som sengevakt vil TIDS-UNI først aktiveres etter at brukeren har lagt seg i senga i aktiveringstidsrommet. Dersom det er ønskelig å varsle dersom bruker *ikke* har lagt seg, kan bryter 1 vippes opp.

Antall repetisjoner



TIDS-UNI sender normalt alarm opp til 5 ganger etter hverandre dersom alarmsituasjonen er opprettholdt (dør åpen for eksempel). Ved å vippe bryter 2 opp vil den kun sende én gang selv om alarmen er opprettholdt.

Systeminnstillinger



Ved å vippe bryter 4 opp og deretter trykke «Innstilling», vil en meny med avanserte valg komme frem:

- Still klokke
- Stille dato

Tilbakestill fabrikkinnstilling

Viktig informasjon

- Produktet kan rengjøres med en myk lett fuktet klut.
- Produktet er for innendørs bruk.
- Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.
- Temperatur: +10°C-+40°C

Resirkulering

Produktet og batterier skal ikke kastes sammen med restavfall.



Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

6. Tekniske data

Dim. (bxhxd):	95x150x40mm
Batteri:	2xAA Litium
Radiofrekvens:	142MHz
Sendereffekt:	10 mW e.r.p.

7. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Tidsstyrt Aktivitetsvarsler aktiveres, men ingen respons i mottaker.	Feil huskode	Still sender og mottaker til samme huskode.
	Klokken er utenfor varslingsperioden(e).	Kontroller at klokken går riktig og at riktige varslingsstidspunkt er satt opp.
	Varslingen er slått AV.	Gå inn i innstillinger og aktiver varslingen.
	Det er for lang avstand mellom sender og mottaker.	Flytt enhetene nærmere eller benytt en FlexiBlink repeater/videresender.
Produktet viser ikke bilde når frontklokken tas av.	Batteriene er tomme for strøm eller mangler.	Bytt batterier. Bruk 2 stk. AA Litium.
Klokken viser feil tidspunkt		Still klokken. Se kapittel SYSTEMINNSTILLINGER.
	Klokkebatteriet er tomt for strøm.	Kontakt leverandøren.
Klokken viser feil dato		Still dato. Se kapittel SYSTEMINNSTILLINGER.
	Klokkebatteriet er tomt for strøm.	Kontakt leverandøren.
Hvordan slette innspillinger og tilbakestille innstillinger?		Se kapittel SYSTEMINNSTILLINGER.
Produktet varsler lavt batteri selv med helt nye batterier.	Forsinkelse i batterimåling.	Ta av frontdeksel. Sjekk at det ikke står «Bytt batteri» på skjermen. Sett deretter dekselet på igjen.
Berøring på skjerm registreres ikke	Touch må kalibreres	Ta av deksel. Vipp alle brytere opp. Sett på deksel og ta det av igjen. Trykk på kryssene for å kalibrere.

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 3347 3347.



Vestfold Audio AS

www.vestfoldaudio.no

tel. +47 3347 3347

