

AudioLink 

Varenr. 1561
Artikkelnr. UNO-863
HMS-nr.: 233385

Høytaler for TV-lytting

Med forsterker og trådløs overføring fra TV



Brukerhåndbok

Dok. nr.: 2438A1
Dato: 2017.04.21

 Vestfold Audio

Innholdsfortegnelse

| | |
|------------------------------|----------|
| 1. Innledning | 3 |
| 2. Oversikt | 3 |
| UNO-863 | 3 |
| 3. Komme i gang | 4 |
| Koble til strømforsyningen | 4 |
| Stille inn kanal | 4 |
| Koble til senderen | 4 |
| 4. Daglig bruk | 4 |
| Ta UNO-863 i Bruk | 4 |
| 5. Avansert bruk | 4 |
| Lydingang | 4 |
| Lydutgang | 4 |
| Innstille kanal | 4 |
| 6. Viktig informasjon | 5 |
| 7. Resirkulering | 5 |
| 8. Tekniske data | 5 |
| 9. Tilbehør | 6 |
| 10. Feilsøking | 7 |

1. Innledning

Denne aktive høyttaleren UNO-863 er spesielt utviklet for å gi best mulig gjengivelse av lyden fra TV.

Med UNO-863 får du TV-lyden brakt fram til godstolen. Da slipper du høyt volum samtidig som du kan følge med på hva andre personer i rommet sier.


UNO-863 benyttes sammen med "Sender for TV-Lytting" (varenr. 1562).

2. Oversikt


UNO-863



Figur 1 Kontroller

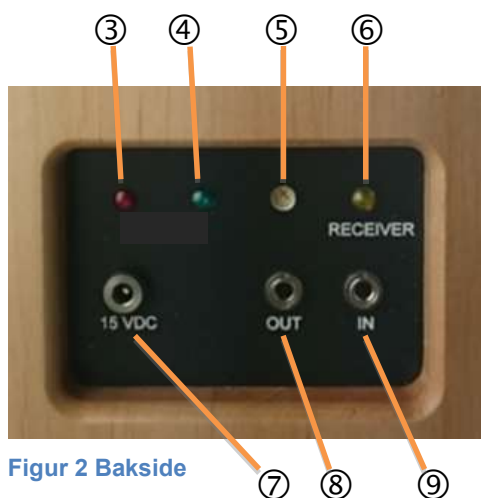

Figur 2 Bakside

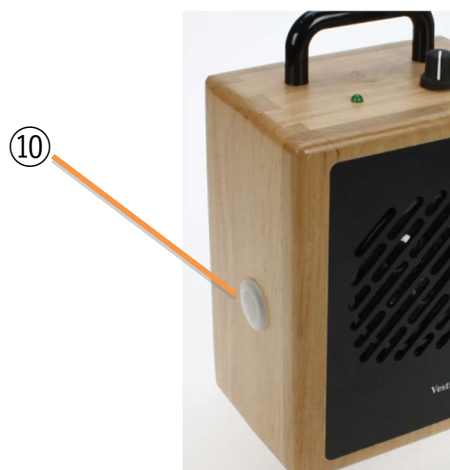

Figur 3 kanalvelger

1. På/Av og volumkontroll
2. Grønt lys = PÅ
3. Ikke i bruk
4. Ikke i bruk
5. Justering av signalnivå OUT (hvis du benytter streamer)
6. Mikrofon på / signal mottatt på riktig kanal
7. Ladekontakt 15VDC (+ på senter)
8. Linje ut (stereo jack)
9. Linje inn (stereo jack)
10. Åpning til kanalvelger

3. Komme i gang

Koble til strømforsyningen

Benytt den medfølgende strømforsyningen og koble den til i kontakten (7).

Stille inn kanal

UNO-863 må stilles inn til samme kanal som på senderen som er tilkoblet TV-apparatet.

Du kan enten stille inn kanal på UNO-863 eller stille inn kanal på "Sender for TV-lytting".

Se avsnitt 5. under

Koble til senderen

Se bruksanvisning for "Sender for TV-lytting".

4. Daglig bruk

Ta UNO-863 i Bruk

1. Slå på "Sender for TV-lytting".
2. Slå på TV / dekode / lydanlegg.
3. Slå på UNO-863 (1). Lampen (2) lyser grønt.
4. Juster lydvolument til et behagelig nivå.
5. Lampen (6) lyser når UNO-863 mottar signaler fra senderen.

5. Avansert bruk

På baksiden og undersiden av UNO-863 er det indikatorer, kontakter og justeringsmuligheter.

Til daglig er det bare tilkobling til ladekontakten (7) som man trenger å kjenne til,

Lydinngang

UNO-863 har en kontakt (9) for tilkobling av eksterne lyd kilder, som f.eks. en MP3-spiller. Du kan benytte 3-polet minijack-plugg.


Lydutgang

Lydutgangen (8) er justert til standard linjenivå fra fabrikken. Hvis linjenivået er for kraftig for den enheten du kobler til, kan nivået justeres ved å vri på kontrollen (5). Bruk en liten skrutrekker.

Innstille kanal

a) På siden av UNO-863 Vipp opp proppen som sitter over kanalvelgeren.

Bruk en liten flat skrutrekker og skru til riktig kanal: 0 – F

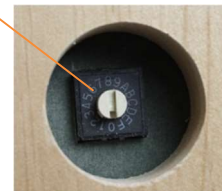

b) På "Sender for TV-lytting". Se bruksanvisningen for apparatet.

6. Viktig informasjon

- UNO-863 kan rengjøres med en myk lett fuktet klut.
- UNO-863 skal ikke utsettes for regn / vannsøl.
- Temperatur: -10°C-+40°C
- UNO-863 skal ikke benyttes eller lagres der det er kondenserende luft.

7. Resirkulering

UNO-863 skal ikke kastes sammen med restavfall.

Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Riktig håndtert vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

8. Tekniske data

| | |
|-----------------------|----------------|
| Frekvensområde: | 100 – 12000 Hz |
| Radio båndbredde: | 863-865 MHz |
| Bruksområde: | Innendørs |
| Strømforsyning/Lader: | 15V DC / 1,6A |
| Vekt: | 1050g |
| Dim (HxBxD): | 200x130x90 mm |

9. Tilbehør

For overføring av lyden fra TV-apparatet



Sender for TV-lytting

Art.nr. 863-SENDER

Varenr. 1562

10. Feilsøking

| Problem | Mulig årsak | Løsninger |
|---|---|---------------------------------------|
| Ingen lyd og ikke grønt lys i (2). | Ingen strøm. | Koble til strømforsyningen. |
| Ingen lyd i høyttaleren, men grønt lys i (2). | Lydnivået står for lavt | Skru opp lyden (1). |
| Ikke gult lys i (6) | Senderen er ikke påslått. | Skru på senderen |
| Ikke gult lys i (6) | Senderen er på feil kanal. | Still inn riktig kanal. Se kap. 5. |
| Dårlig/ingen lyd i lydutstyr tilkoblet OUT (8). | Utgangsnivået er stilt for lavt eller høyt. | Juster nivået med potentiometer (5). |

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.



Vestfold Audio AS

www.vestfoldaudio.no

tel. 33 47 33 47

