

# FLEXIBLINK

---

## Bruksanvisning

### JELLYBEAN BRYTER

Art. nr. JELLY-R

**JellyBean er en lettbetjent bryter for enkelte FlexiBlink sendere. Når man trykker på bryteren, gir den startsignal til f.eks. FlexiBlink Universalsender UN1e. Universalsenderen aktiverer straks FlexiBlink mottakere i varslingsystemet.**

#### Anvendelsesområder

JellyBean bryter blir brukt når det er behov for manuell varsling.

#### Virkemåte

JellyBean bryteren er lett å aktivisere. Den har en stor berøringsflate, med et aktiviseringstrykk på kun 70 gram.

JellyBean bryteren bør fortrinnsvis brukes sammen med disse FlexiBlink sendere, som alle har inngang for sluttekontakt:

- Universalsender UN1e
- Barnevakt BVe
- Sykesignal SKSe

Når JellyBean bryteren blir aktivisert, vil brukeren bli varslet gjennom FlexiBlink mottakere i boligen/på arbeidsplassen.

#### Montering

1. Sett opp valgt FlexiBlink sender. Plugg i ledningen fra JellyBean bryteren.
2. Nå er systemet klar til bruk.

#### Enkel feilretting

Kontroller at ledningen fra JellyBean bryteren er plagget i FlexiBlink senderen. Kontroller også at batteriet i senderen er i orden.

#### Dersom du trenger hjelp til feilretting

I fall du ikke klarer å rette feilen selv, bør du kontakte det sted hjelpemiddelsentralen eventuelt har gitt deg opplysninger om, eller til:

*Fylles ut av hjelpemiddelsentralen*

# FLEXIBLINK

---

## Brukerveiledning

### JELLYBEAN BRYTER

Art. nr. JELLY-R

**Produsent**

Vestfold Audio AS  
3241 Sandefjord

**Tekniske spesifikasjoner**

Bruksområde: Innendørs.

**Nødvendige advarsler i forbindelse med bruk**

Skal kun brukes med FlexiBlink sendere.  
Skal ikke brukes til andre formål.

**Utfyllende informasjon om hvordan hjelpemiddelet skal brukes**

Se bruksanvisningen.

**Rengjøring utført av bruker**

JellyBean bryteren kan rengjøres med myk klut oppvridd i mildt, lunkent såpevann. Hjelpemiddelet må ikke utsettes for søl eller sprut med vann.

**Vedlikehold utført av bruker**

Hjelpemiddelet er vedlikeholdsfritt.

**Lagring når ikke i bruk**

Oppbevares på et tørt og helst støvfritt sted.

**Utfyllende om feilindikasjoner**

Informasjon om feilindikasjoner finner du i bruksanvisningen.

2010-10-27  
Dok.nr.: 0286A