

# FlexiApp-Sender

## Varsling på smarttelefon

### AppSender



## Brukerhåndbok

---

## Innholdsfortegnelse

<b><u>1. Innledning</u></b>	<b>3</b>
<b><u>2. Oversikt</u></b>	<b>4</b>
AppSenderen	4
<b><u>3. Komme i gang</u></b>	<b>5</b>
Still inn Huskoden	5
Montering av AppSenderen	5
AppSender tilkoblinger	5
AppSender i drift	5
Installere FlexiApp	6
FlexiApp Menylinjen	6
<b><u>4. Koble til FlexiApp</u></b>	<b>6</b>
Med WiFi	6
Legg til manuelt	7
Navngi AppSenderen	7
<b><u>5. Daglig bruk</u></b>	<b>7</b>
HJEM	7
SENDERE/ENHETER	7
SØK	8
<b><u>6. Avansert bruk</u></b>	<b>8</b>
Varslinger	8
Enheter	8
Tilpasse	9
Test	9
<b><u>7. Viktig informasjon</u></b>	<b>10</b>
Resirkulering	10
<b><u>8. Sikkerhet</u></b>	<b>10</b>
<b><u>9. Tekniske data</u></b>	<b>10</b>
<b><u>10. Samsvarserklæring</u></b>	<b>10</b>
<b><u>11. Feilsøking</u></b>	<b>11</b>

## 1. Innledning

Med en **AppSender** installert i boligen får du FlexiBlink-varsling rett til **FlexiApp** på smarttelefonen din.

Denne løsningen er praktisk for personer "i farta" som har behov for varsling på steder der det ikke er FlexiBlink varslingsmottakere.



**AppSenderen** mottar FlexiBlink varslingssignaler og sender dem videre via Internett til telefoner med **FlexiApp**. Mobiltelefonen må ha mobildata påslått eller være tilkoblet Internett via WiFi.

Opp til 10 smarttelefoner kan være registrert samtidig til **AppSenderen**.

Du kan registrere din **FlexiApp** til flere **AppSendere**, som for eksempel hjemme og på arbeidsplass.

**FlexiApp** finnes for både iPhone og Android-telefoner.


**FlexiApp**  
Android og iOS

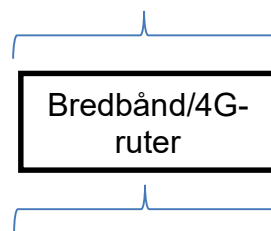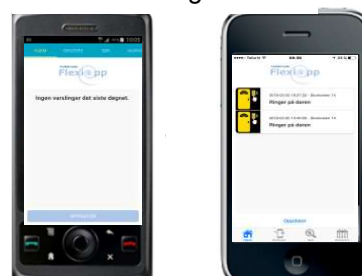

## 2. Oversikt


---

### AppSenderen

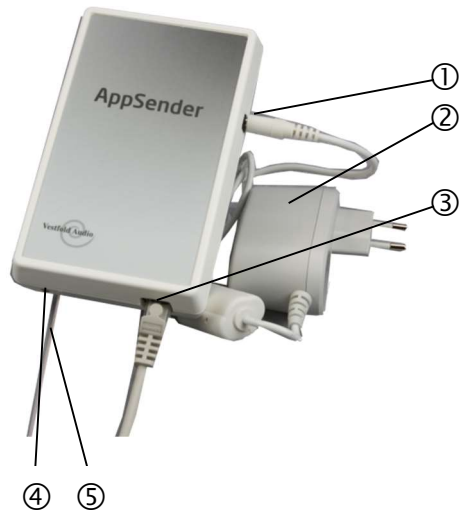

Figur 1 Forside

- ① Tilkobling strømforsyning
- ② Strømforsyning
- ③ Tilkobling bredbåndsruter
- ④ Lysdiode/statusindikator
- ⑤ Antenne
- ⑥ Huskodevelger (under proppen)

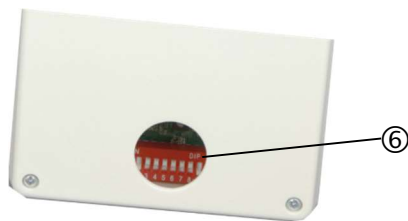

Figur 2 Bakside

### 3. Komme i gang

#### Still inn Huskoden

Alle FlexiBlink varslingsprodukter som installeres i boligen må stilles inn med lik Huskode.

Skyv knappene i Huskodevelgeren på **AppSenderen** til det valgte mønsteret.



Huskodebryter  
(fabrikkinnstilling)

#### Montering av AppSenderen

**AppSenderen** må installeres på et sted der den er innen rekkevidde fra de FlexiBlink varslingsenderne den skal videresende fra.

Samtidig skal det være en plassering som tillater kablet tilkobling til bredbånds-ruter.

**AppSenderen** skal monteres på vegg med antennen hengende rett ned. Benytt de medfølgende borrelåsene.

Rengjøre flatene med spritservietten og vent 1 minutt. Trykk limflatene hardt på plass i minst 10 sekunder.



#### Tips

Vi anbefaler at du tar av lappen med PIN-kodene og klistrer den på baksiden av denne håndboken. Oppbevar PIN-kodene på et trygt sted.

#### AppSender tilkoblinger

- 1 Strøm  
Koble strømforsyningen til **AppSenderens** strømkontakt, og sett strømforsyningen i kontakten på veggen.
- 2 Internett  
Sett den ene enden av nettverkskabelen i **AppSenderen** og den andre enden i en ledig port i bredbånds-ruter.

#### AppSender i drift

Når enheten er i drift vises status i lysindikatoren:

<i>Slukket</i>	IKKE KLAR
<i>Blinkende grønt</i>	Klar
<i>Grønt</i>	Varsel sendes
<i>Gul</i>	Mottar signal fra FlexiBlinksender
<i>Blinkende grønt/rødt</i>	Ikke kontakt med server



#### Tips

Når AppSenderen er på og er klar til bruk, vil den grønne lysdioden blinke.

## Installere FlexiApp

**FlexiApp** finnes for både iOS (iPhone) og Android smarttelefoner, og den kan lastes ned fra AppStore og PlayButikk. Gjør slik:

- 1 Søk opp "**FlexiApp**".
- 2 Installer og åpne **FlexiApp**.
- 3 Tillat mottak av varslinger
- 4 Startsidene gir deg nyttig informasjon:



- 5 Fortsett i kapittel 4 *Koble til FlexiApp*.

## FlexiApp Menylinjen

FlexiApp fungerer likt på iPhone og Android-telefoner, men utseendet er litt forskjellig. Android har menylinjen i toppen, mens iPhone har den nederst.

HJEM	Viser varslinger
SENDERE	Slå på/av varslinger
SØK	Søke etter AppSender
AVANSERT	Avanserte funksjoner

## 4. Koble til FlexiApp

Du kan koble deg til **AppSenderen** enten ved å søke den opp på WiFi eller du kan legge til manuelt.

### Med WiFi

- 1 Sjekk at WiFi er slått på og at du er tilkoblet det trådløse nettverket til bredbåndsruteren hvor **AppSenderen** er tilkoblet. Til dette kreves det normalt et WiFi-passord.

### Viktig

Systemet forutsetter at det er et trådløst nettverk (WiFi) i forbindelse med bredbåndsruteren for første gangs tilkobling til smarttelefonen.

- 2 Start **FlexiApp** og gå til «Søk»-siden for å søke opp **AppSenderen**.
- 3 Du får nå opp en liste der **AppSenderen** vises med det navnet den er gitt på klistrelappen. Trykk på  for å koble smarttelefonen til **AppSenderen**.



## Legg til manuelt

- 1 Trykk på valget "legg til appsender manuelt".
- 2 Skriv inn Bruker PIN-kode.

## Navngi AppSenderen

- 1 Dersom du vil endre navnet på **AppSenderen**, kan du gjøre det nå. Dette navnet vises som en del av meldingen når du får en varsling.

Navn

Når du legger til en AppSender, vil du motta varsler på din telefon ved hendelser i ditt FlexiBlink system.

Varslingene vil bli sendt som Push-meldinger. Dette krever at telefonen er tilkoplest internett enten via WiFi eller mobildata

- 2 Trykk "LEGG TIL" for å koble til **AppSenderen**.
- 3 Dersom du ikke får opp noen AppSendere, eller du ikke er på samme WiFi-nettverk som AppSenderen, kan du legge den inn manuelt. Trykk «Legg til AppSender manuelt», og skriv inn Bruker PIN og ditt ønskede navn på AppSenderen.

## 5. Daglig bruk


Straks du har utført siste instruksjon i foregående avsnitt, kan du motta varslinger på smarttelefonen.



Smarttelefonen må ha tilgang til Internett over mobilt nettverk eller WiFi.

## HJEM


Når du trykker på FlexiApp-ikonet, og når du trykker på et mottatt varsel, kommer du til HJEM-siden. Her vises de varslene du har mottatt på telefonen de siste 24 timene.

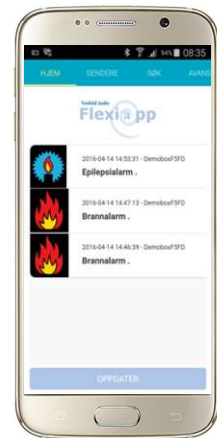

## SENDERE/ENHETER

På denne meny-siden kan du velge hvilke varsler du vil motta. Ved å velge Mottak "av", får du ingen varsler. Ved å velge "Motta kun alarmer", varsles du bare av alarmer.

"Avslutt" bryter tilkoblingen til denne AppSenderen og du må eventuelt gjenta kapittel 4 for å koble til igjen.

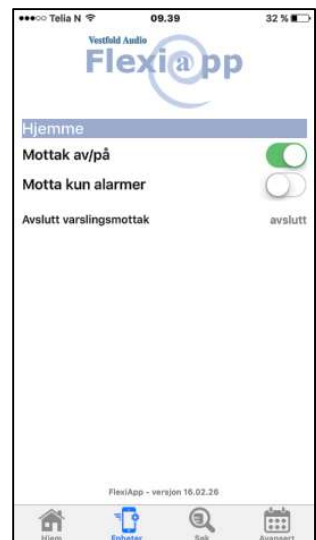

### Tips

Hvis du har slått "Mottak" av, vil ingen varsler mottas eller vises på HJEM-siden.

## Viktig

Varslingene i **FlexiApp** er underlagt telefonens basis varslingsinnstillinger for lyd, vibrasjon og visning. Se telefonens bruksanvisning.


## SØK

Velg denne siden hvis du vil koble deg til en ny **AppSender**. Se kapittel 4 over.

## 6. Avansert bruk

Funksjonene på denne siden krever pålogging med PIN-kode. PIN-kodene finner du på lappen på **AppSenderen**. Disse funksjonene er for den avanserte brukeren.

Det finnes to nivåer for pålogging:

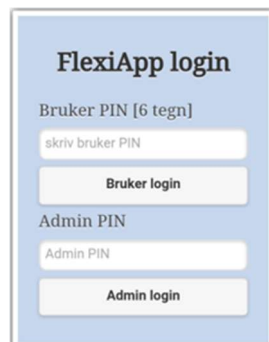

The screenshot shows the 'FlexiApp login' screen. It has two sections: 'Bruker PIN [6 tegn]' with a text input field containing 'skriv bruker PIN' and a 'Bruker login' button; and 'Admin PIN' with a text input field containing 'Admin PIN' and an 'Admin login' button.

**Bruker login** Tilgang bare til varslingshistorikk

**Admin login** Varslingshistorikk og administrator-funksjoner

Når du logger inn, kommer du først til denne siden med informasjon om versjon o.l.

Nederst finnes tilgang til avanserte funksjoner.

## Varslinger




På denne siden vil du varslingshistorikk for en begrenset tidsperiode.

## Enheter

For å få tilgang til denne fanen må du logge på som "Admin". Her kan du administrere telefonene som er koblet til AppSenderen.

Klikk på den telefonen du ønsker å gjøre noe med. Du kommer da til denne siden:

Her kan du endre telefonens navn og visningsnavnet til AppSenderen.

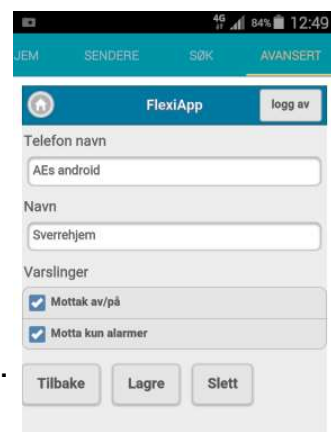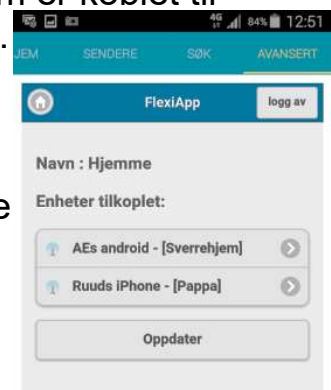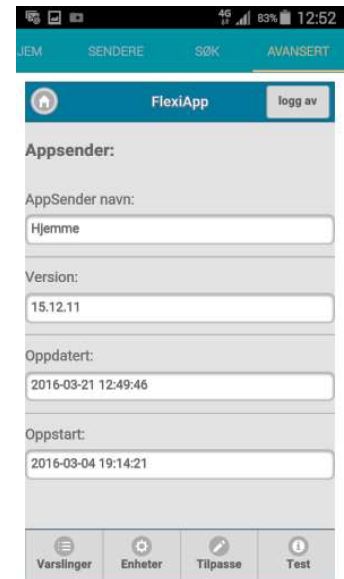





Trykk "Lagre" for å lagre endringene.  
Trykk "Slett" for permanent å stoppe varsling til denne telefonen.

## Tilpasse

På denne siden kan du endre varslingstekst og varslingslyder fra det som er standard.

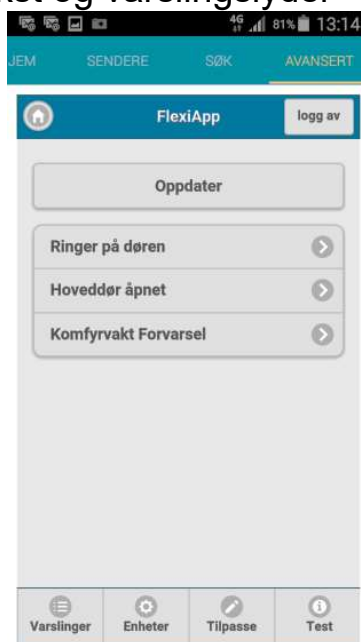

Alle typer varslinger som AppSenderen har mottatt fra varslingssendere er listet opp. Hvis du ønsker å endre på en varsling, trykker du på pilen til høyre.

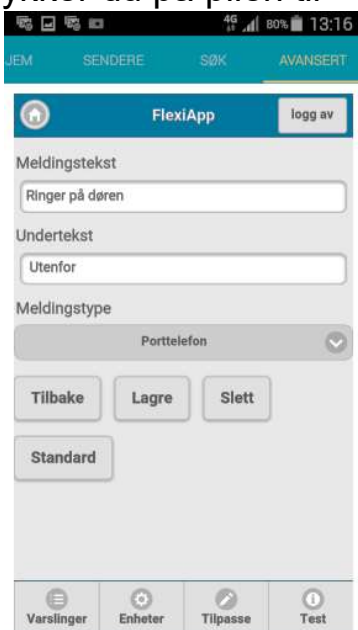


F.eks. kan du spesifisere hvilken dør det ringer på.  
Velg hvordan varslet skal lyde fra menyen "Meldingstype".  
Trykk "Lagre" for å lagre endringene.

Trykk "Slett" for fjerne varslings-  
typen fra listen.

Trykk "Standard" for å  
tilbakestille til fabrikkinnstilling.

## Test

Under denne fanen kan du få  
systemet til å sende deg en test-  
alarm.

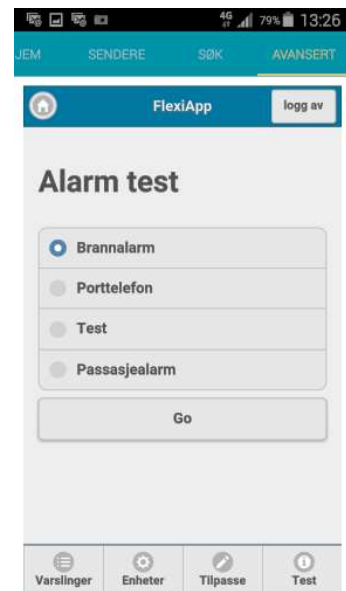

Du kan velge mellom 4 standard-  
varslinger.  
Velg en og trykk på "Go".

## 7. Viktig informasjon

---

- **AppSender** kan rengjøres med en myk lett fuktet klut.
- **AppSender** er for innendørs bruk.
- Ikke kondenserende luft.



### Tips

Husk å starte **FlexiApp** etter omstart av mobilen for å motta varsler.



### Viktig

Tidsforsinkelser på varslinger kan oppleves og avhenge av Internett-forbindelse og mobilnettet.

## Resirkulering

**AppSender** skal ikke kastes sammen med restavfall.

Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Riktig håndtert vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.



## 8. Sikkerhet

---

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder.

Produktet må ikke kortsluttes eller skruses fra hverandre.

Brukerinnstillingene finnes ved å åpne lokket.

Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes, brennes eller lades opp.

## 9. Tekniske data

---

Dim. (bxhxd): 90x145x34mm

Strømforsyning: 15VDC

LAN: 10/100Mbps

Vekt u/strømtilførsel: 190 g

Batteri: Litium 3 V

Sendereffekt: 10 mW e.r.p.

Temperatur: -10 °C - +40 °C

Radiofrekvens: 142,475 MHz

Bruksbegrensninger:



Kun tillatt benyttet i Norge

## 10. Samsvarserklæring

---

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:

[www.vestfoldaudio.no/samsvar](http://www.vestfoldaudio.no/samsvar)

## 11. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
AppSenderen blinker ikke grønt.	Strømforsyningen er ikke tilkoblet.	Kontroller tilkoblingen.
	Det er ikke kontakt med bredbåndsruteren	Kontroller tilkoblingen til ruteren og at ruteren er på.
	Bredbåndsruteren har ikke kontakt med Internett.	Sjekk linjer.
FlexiApp finner ikke AppSenderen	WiFi er ikke tilgjengelig	Skru på WiFi til det samme nettet der AppSender er tilkoblet.
	Smarttelefonen er ikke tilkoblet WiFi-nettet.	Logg på WiFi.
FlexiApp mottar ikke varslinger	Varsling er avslått i FlexiApp.	Slå på varsling i FlexiApp, fane "Sendere".
	"Bare alarmer" er valgt.	Slå av "Bare alarmer" i FlexiApp.
	Mottak av varslinger er blokkert	Gå til Innstillinger: Tillat mottak av varslinger
	AppSenderen fungerer ikke.	Kontroller AppSender og tilkoblinger.
	Får ikke gult blinkende lys.	Sjekk rekkevidde mellom sendere og AppSender.
	Smarttelefonen er ikke tilkoblet AppSenderen.	Koble til FlexiApp, fane "Søk".
	AppSenderen har feil Huskode.	Still inn Huskodevelger likt senderne i boligen.
	Mobildata/WiFi/Internett er ikke tilgjengelig.	Slå på mobildata og/eller logg på et WiFi-nett.
	Telefonen er satt i "flymodus".	Slå av "flymodus".
	Varslinger mottas, men ingen lyd eller vibrasjon.	Smarttelefonen er satt til "lydløs"-modus.
FlexiApp varsler for sent	Smarttelefonens strømsparing er aktivert.	Slå av strømsparingsfunksjonen.
	Smarttelefonen har vært utenfor dekningsområde.	Om mulig: Oppsøk områder med god dekning.
	Smarttelefonen er opptatt med å bytte mellom mobildata og WiFi.	Om mulig: Velg enten mobildata eller WiFi.
	Internett-linjen i boligen er ustabil.	Sjekk linje og tilgang.
	Smarttelefonen har andre "app'er" som stjeler prioritet.	Forsøk å slå av andre "app'er".

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
Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til [post@vestfoldaudio.no](mailto:post@vestfoldaudio.no) eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.

**AppSenders** Bruker PIN: \_\_\_\_\_

**AppSenders** Admin PIN: \_\_\_\_\_

Plass til **AppSenders** klistrelapp:



**Vestfold Audio AS**  
Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord



[www.vestfoldaudio.no](http://www.vestfoldaudio.no)

tel. 33 47 33 47