

FlexiBlink

Varenr. 1519
HMS-nr.: 233409

Barnevakt

BARN10



Brukerhåndbok

Dok. nr.: 2304A2
Dato: 2018.10.25

Innholdsfortegnelse

<u>1. Innledning</u>	<u>3</u>
<u>2. Oversikt</u>	<u>4</u>
Utvendig	4
Batteriet	4
Under lokket	4
<u>3. Komme i gang</u>	<u>4</u>
Still inn Huskoden	4
Velg funksjon (ID-velger)	5
Inngang	5
På/Av-bryter	5
Følsomhet	5
Montering	5
Sette inn batteriet	6
<u>4. I bruk</u>	<u>6</u>
<u>5. Viktig informasjon</u>	<u>6</u>
Resirkulering	6
<u>6. Sikkerhet</u>	<u>7</u>
<u>7. Tekniske data</u>	<u>7</u>
<u>8. Samsvarserklæring</u>	<u>7</u>
<u>9. Feilsøking</u>	<u>8</u>

1. Innledning

Barnevakt BARN10 er en praktisk batteridrevet sensor som oppfatter når et barn gråter og viderevarsler til FlexiBlink mottakere i hjemmet.

Det er innstillinger for lydnivå og tidsforsinkelser, så man kan tilpasse den til barnet sitt.

BARN10 skiller ikke mellom barnegråt og andre høye lyder.

BARN10 har inngang for brytere for tilkobling av trykknapp, mattebryter eller bevegelsessensor. (Dette er tilbehør og må bestilles separat.) Trykknapp benyttes for at eldre barn selv skal kunne tilkalle foreldre (uten å gråte), og mattebryter eller bevegelsessensor benyttes for å detektere at barnet har stått opp.

Senderen viderevarsler signaler til FlexiBlink mottakere.

BARN10 benytter et spesialbatteri med svært lang levetid.

Viktig

BARN10 inneholder små deler som kan skade barn hvis de får leke med produktet. Sørg ALLTID for at BARN10 holdes utenfor rekkevidde for barnet. Tape eventuelt fast lokket slik at batteriet ikke kan lekes med.



Viktig

Dersom man får svelget et Litium-batteri, eller deler av det, må man oppsøke lege umiddelbart.

2. Oversikt

Utvendig



Figur 1 Forside

Figur 2 Bakside



Figur 3 Bunn med inngang


- ① Innebygd mikrofon
- ② Lysindikator
- ③ Løkk
- ④ Borrelås-tape
- ⑤ Hull for skruefeste
- ⑥ På/Av-bryter
- ⑦ Signalinngang for tilkobling av trykknapp, mattebryter eller FlexiBlink sensor

Batteriet

Det medfølger et høykapasitets litium-batteri (Varenr. 9100100934), som vil sikre drift av enheten i mange år. Batteriet må ikke lades opp.



Under lokket

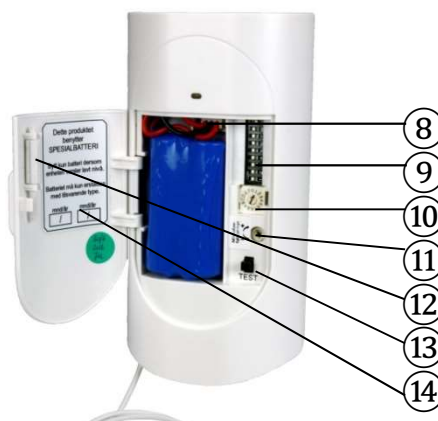

Figur 4 Under lokket

- ⑧ Batterikontakt
- ⑨ Huskodevelger (kanal)
- ⑩ Funksjonsvelger (ID-velger)
- ⑪ Følsomhetsjustering
- ⑫ Verktøy for innstillinger
- ⑬ Testknapp
- ⑭ Batteriinformasjon

3. Komme i gang

Still inn Huskoden

Alle FlexiBlink varslingsprodukter som du har i boligen må stilles inn med lik Huskode. Skyv knappene i Huskodevelgeren til et tilfeldig valgt mønster. Benytt gjerne det medfølgende verktøyet som sitter i lokket.



Huskodevelger
(fabrikkinnstilling)

Velg funksjon (ID-velger)

BARN10 kan skille mellom flere barn. Vri på Funksjonsvelgeren til den posisjonen som passer til det som skal varsles i varslingsmottakerne. Dette gjelder både mikrofonen og signalinngangen. Benytt gjerne den korte enden på det medfølgende verktøyet som sitter i lokket.



Funksjonsvelger
(fabrikkinnstilling)

ID	Varsler om	Tidsforsinkelse
0	Barnet gråter	0,5 s
1	Barn 1 gråter	0,5 s
2	Barn 2 gråter	0,5 s
3	Barn 3 gråter	0,5 s
4	Barnet gråter	1 s
5	Barn 1 gråter	1 s
6	Barn 2 gråter	1 s
7	Barn 3 gråter	1 s
8	Barnet gråter	2 s
9	Barn 1 gråter	2 s
A	Barn 2 gråter	2 s
B	Barn 3 gråter	2 s
C	Barnet gråter	3 s
D	Barn 1 gråter	3 s
E	Barn 2 gråter	3 s
F	Barn 3 gråter	3 s

Inngang

Signalinngangen kan f.eks. kobles til en trykknapp. Med denne kan eldre barn selv tilkalle foreldre (uten å gråte). Alternativt kan det kobles til en bevegelsessensor eller en tråkkematte til signalinngangen. Da kan foreldrene bli varslet når barnet forlater senga eller rommet sitt. Ved bruk av inngangen varsler FlexiBlink «Barnet har stått opp».

På/Av-bryter

På bunnplaten er det en bryter. Med denne kan barnevakten etter ønske slås av og på.

Følsomhet

Bruk eventuelt det medfølgende verktøyet for å justere følsomheten ⑫ til mikrofonen. Følsomheten økes ved å vri hjulet med klokka, og senkes ved å vri hjulet motsatt vei.



Viktig

BARN10 skiller ikke mellom barnegråt og andre høye lyder

Montering

Barnevakten plasseres så nært barnet som praktisk mulig, helst med mikrofonen rettet mot barnet. Mikrofonen er innebygd og ligger like over lysindikatoren på boksen. Sørg for at barnet ikke får lekt med BARN10. Senderen kan monteres på vegg med den medfølgende borrelåstapen. Benytt den medfølgende spritservietten for å rengjøre veggen. Trykk limflatene hardt på plass i minst 10 sekunder.

Alternativt kan enheten festes med skrue til veggen gjennom festehullet under batteriet.




Forsiktig

Vær forsiktig når du skrur inn skruen slik at den omkringliggende hvite platen ikke skades.

Sette inn batteriet

Sett inn batteriets kontakt som vist i figuren til høyre. Ved tilkobling av batteri kan BARN10 blinke grønt i opptil et par minutter mens batteriet klargjøres for lang tids bruk.

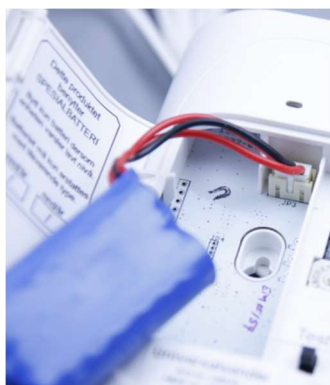

Før ledningen i en bue inn i åpningen og legg inn batteriet.



Tips

Skriv inn dato på batteri-lappen i lokket når batteriet ble koblet til.



Tips

Trykk på test-knappen for å verifisere at enheten fungerer og at det varsler i mottakerne som tilsiktet.



Forsiktig

Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes eller brennes.

4. I bruk

Når enheten er i drift, vises status i lysindikatoren på framsiden:

<i>Slukket</i>	Stand-by
<i>Grønt</i>	Varsel sendes
<i>Blinkende</i>	
<i>rødt/grønt</i>	Bytt batteri



Viktig

Når systemet er koblet opp, må man ALLTID teste at barnevakten varsler som tiltenkt når barnet gråter.

5. Viktig informasjon

- Produktet kan rengjøres med en myk lett fuktet klut.
- Produktet er for innendørs bruk.
- Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteribytte hvis du har mottakere som viser dette.

Resirkulering

Produktet og batteriet skal ikke kastes sammen med restavfall.



Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

6. Sikkerhet

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder. Produktet må ikke kortsluttes eller skrues fra hverandre. Brukerinnstillingene finnes ved å åpne lokket. Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes, brennes eller lades opp.

7. Tekniske data

Dim. (bxhxd): 69x133x27mm
Vekt m/ batteri: 140 g
Batteri: Litium 3 V
Sendereffekt: 10 mW e.r.p.
Temperatur: -10 °C - +40 °C

Radiofrekvens: 142,475 MHz

Bruksbegrensninger:



Kun tillatt benyttet i Norge

8. Samsvarserklæring

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:
www.vestfoldaudio.no/samsvar

9. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Det varsler ikke i mottakere	Bryteren er i Av-stilling	Sett bryteren i bunnlokket i På-stilling
	BARN10 får ikke signal fra kilden / det lyser ikke grønt.	Trykk på Testknappen og sjekk om varselet kommer fram.
	Feil huskode	Sjekk at barnevakten er satt opp med samme huskode som mottaker
	Lyden er ikke høy nok	Juster opp følsomheten
	Lyden er ikke lang nok	Juster lyttetiden v.h.a. Funksjonsvelgeren
	Avstanden mellom BARN10 og mottaker er for stor.	Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn en repeater.
	Batteriet i BARN10 er tomt / det blinker rødt.	Bytt batteri.
	BARN10 mangler batteri	Sett inn batteri.
	Kontakten er ikke korrekt tilkoblet	Kontrollert tilkobling og at kilden gir potensialfri utgang.
Oransje, korte blink i senderen	Volumet er for lavt	Juster opp følsomheten
Det varsler med feil signal i mottakere.	Funksjonsvelger (ID) står i feil posisjon.	Skru funksjonsvelger til riktig posisjon.
Det blinker rødt/grønt i BARN10	Batteriet i BARN10 er snart tomt.	Bytt batteri
Det lyser ikke grønt når barnet gråter.	BARN10 oppfatter ikke signalet.	Juster følsomheten og eventuelt tidsforsinkelsen
Det varsler selv om ikke barnet gråter	BARN10 oppfatter andre lyder enn barnegråt	Fjern andre lydkilder ved BARN10

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.



Vestfold Audio AS
Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord
www.vestfoldaudio.no
tel. +47 33 47 33 47

