

FlexiBlink

Varenr. 1528
HMS-nr.: 233422

Brannsender audio

BRANN9



Brukerhåndbok

Dok. nr.: 2413A2
Dato: 2018.10.29



Innholdsfortegnelse

<u>1. Innledning</u>	<u>3</u>
<u>2. Oversikt</u>	<u>3</u>
Utvendig	3
Under lokket	4
Batteriet	4
<u>3. Komme i gang</u>	<u>5</u>
Still inn Huskoden	5
Velg funksjon (ID-velger)	5
Mikrofon på ledning	5
Justering av følsomhet	5
Montering	6
Sette inn batteriet	6
<u>4. I bruk</u>	<u>6</u>
<u>5. Viktig informasjon</u>	<u>6</u>
<u>6. Resirkulering</u>	<u>7</u>
<u>7. Sikkerhet</u>	<u>7</u>
<u>8. Tekniske data</u>	<u>7</u>
<u>9. Samsvarserklæring</u>	<u>7</u>
<u>10. Feilsøking</u>	<u>8</u>

1. Innledning

Brannsenderen BRANN9 er en akustisk varsler med spesiell funksjonalitet for å varsle brannalarm fra sentrale brannalarmanlegg, sirener og fra seriekoblede røykvarslere.

Senderen detekterer varslingslyd ved hjelp av en mikrofon på ledning. Mikrofonen monteres så nær lyd-kilden som mulig.

Senderen viderevarsler signaler til FlexiBlink mottakere.

BRANN9 benytter et spesialbatteri med svært lang levetid.

2. Oversikt

Utvendig



Figur 1 Forside




Figur 2 Bakside



Figur 3 Bunn med mikrofon på ledning

Under lokket

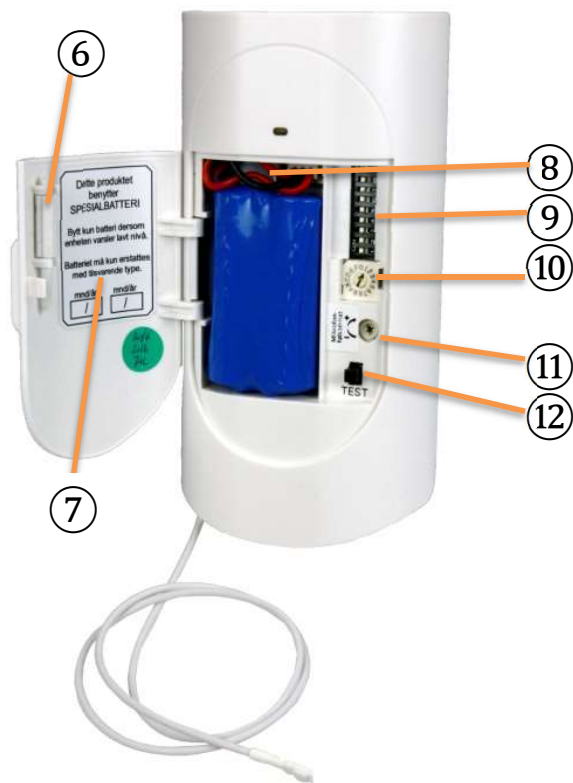

Figur 4 Under lokket

Betydning:

- ① Lysindikator
- ② Lokk
- ③ Mikrofon på ledning
- ④ Borrelås-tape
- ⑤ Hull for skruefeste
- ⑥ Verktøy for innstillinger
- ⑦ Batteriinformasjon
- ⑧ Batterikontakt
- ⑨ Huskodevelger (kanal)
- ⑩ Funksjonsvelger (ID-velger)
- ⑪ Følsomhetsjustering
- ⑫ Testknapp

Batteriet

Det medfølger et høykapasitets litium-batteri (Varenr. 9100100934), som vil sikre drift av enheten i mange år. Batteriet må ikke lades opp.



3. Komme i gang

Still inn Huskoden


Alle FlexiBlink varslingsprodukter som du har i boligen, må stilles inn med lik huskode. Skyv knappene i huskodevelgeren til et tilfeldig valgt mønster. Benytt gjerne det medfølgende verktøyet som sitter i lokket.



Huskodevelger
(fabrikkinnstilling)

Velg funksjon (ID-velger)

BRANN9 har innebygget to varslinger. Vri på Funksjonsvelgeren til den posisjonen som passer til det som skal varsles i mottakerne. Benytt gjerne den korte enden på det medfølgende verktøyet som sitter i lokket.

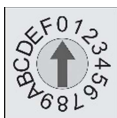

Funksjonsvelger
(fabrikkinnstilling)

Mikrofon på ledning

Brannsenderen reagerer på lyd av en viss styrke (regulerbar følsomhet). Rød ring ytterst på ledning, markerer mikrofonen. Det er meget viktig at den lille mikrofonen settes fast *teppet mulig inntil lydkilden med den røde ringen inn*. Mikrofonen festes med medfølgende tape.

Justering av følsomhet

Følsomheten ⑪ til mikrofonen innstilles, om nødvendig, til minste nivå for sikker deteksjon. For økt følsomhet, vri hjulet med klokka. For lavere følsomhet, vri hjulet mot klokka.



OBS!

Kjør **ALLTID** en branntest etter at brannsenderen er montert for å verifisere at enheten fungerer og at den klarer å fange opp lyden. Sjekk også at det varsler i mottakerne som tilsiktet.

ID	Mikrofon ③
0	Brannalarm (Brannklokke/sirene)
1	Brannalarm (Røykvarsler)

Montering

BRANN9 monteres normalt på vegg med den medfølgende borrelås-tapen. Benytt den medfølgende spritservietten for å rengjøre vegg. Trykk limflatene hardt på plass i minst 10 sekunder.

Alternativt kan enheten festes med skruer til vegg gjennom festehullet under batteriet.



Forsiktig

Vær forsiktig når du skrur inn skruen slik at den omkringliggende hvite platen ikke skades.

Sette inn batteriet

Sett inn batteriets kontakt som vist i figuren til høyre. Ved tilkobling av batteri kan BRANN9 blinke grønt i opptil et par minutter mens batteriet klargjøres for langtids bruk.



Før ledningen i en bue inn i åpningen og legg inn batteriet.



Tips

Skriv inn dato på batteri-lappen i lokket når batteriet ble koblet til.



Tips

Trykk på test-knappen for å verifisere at enheten fungerer og at det varsler i mottakerne som tilsiktet.



Forsiktig

Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes eller brennes.

4. I bruk

Når enheten er i drift, vises status i lysindikatoren på framsiden:

<i>Slukket</i>	Stand-by
<i>Grønt</i>	Varsel sendes
<i>Blinkende</i>	
<i>rødt/grønt</i>	Bytt batteri

5. Viktig informasjon

- Produktet kan rengjøres med en myk lett fuktet klut.
- Produktet er for innendørs bruk i ikke-kondenserende miljø.
- Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteribytte hvis du har mottakere som viser dette.

6. Resirkulering

Produktet og batteriet skal ikke kastes sammen med restavfall.



Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

7. Sikkerhet

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder. Produktet må ikke kortsluttes eller skrues fra hverandre.

Brukerinnstillingene finnes ved å åpne lokket.

Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes, brennes eller lades opp.

8. Tekniske data

Dim. (bxhxd): 69x133x27mm
Vekt m/ batteri: 140 g
Batteri: Litium 3 V
Sendereffekt: 10 mW e.r.p.
Temperatur: -10 °C - +40 °C

Radiofrekvens: 142,475 MHz



Bruksbegrensninger:

Kun tillatt benyttet i Norge

9. Samsvarserklæring

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettsadresse:

www.vestfoldaudio.no/samsvar

10. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Det varsles ikke i mottakere	BRANN9 fanger ikke opp lyden fra kilden / lyser ikke grønt	Trykk på Test-knappen og sjekk om varselet kommer fram.
	BRANN9 fanger ikke opp lyden fra kilden	Sett mikrofonen tett opp til lydkilden. Eventuelt juster følsomheten opp, se kap. 3.
	Batteriet i BRANN9 er tomt / det blinker rødt.	Bytt batteri.
	BRANN9 mangler batteri	Sett inn batteri.
	Avstanden mellom BRANN9 og mottaker er for stor.	Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn en repeater.
Det lyser/blinker oransje lys	Mikrofonen hører lyd, men ikke godt nok til å varsle	Plasser mikrofonen nærmere lydkilden. Eventuelt øk følsomheten. Se kap. 3.
Falsk varsling	Følsomheten er for høy	Reduser følsomheten – Se kap. 3. Husk å teste brannvarsling etter justering.
Det varsles med feil signal i mottakere.	Funksjonsvelger (ID) står i feil posisjon.	Skru funksjonsvelgeren til riktig posisjon.
Det blinker rødt/grønt i BRANN9	Batteriet i BRANN9 er snart tomt.	Bytt batteri

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.



Vestfold Audio AS
Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord
www.vestfoldaudio.no
tel. 33 47 33 47

