

FlexiBlink

Varenr. 1529
HMS-nr.: 233424

Dørklokkesender audio

DØR9



Brukerhåndbok

Dok. nr.: 2415A2
Dato: 2018.10.29



Innholdsfortegnelse

<u>1. Innledning</u>	<u>3</u>
<u>2. Oversikt</u>	<u>3</u>
Utvendig	3
Under lokket	4
Batteriet	4
<u>3. Komme i gang</u>	<u>5</u>
Still inn Huskoden	5
Velg funksjon (ID-velger)	5
Mikrofon på ledning	5
Justering av følsomhet	5
Montering	5
Sette inn batteriet	6
<u>4. I bruk</u>	<u>6</u>
<u>5. Viktig informasjon</u>	<u>6</u>
<u>6. Resirkulering</u>	<u>7</u>
<u>7. Sikkerhet</u>	<u>7</u>
<u>8. Tekniske data</u>	<u>7</u>
<u>9. Samsvarserklæring</u>	<u>7</u>
<u>10. Feilsøking</u>	<u>8</u>

1. Innledning

Dørklokkesender DØR9 er et produkt i FlexiBlink-serien.

FlexiBlink er et trådløst varslingsystem med sendere og mottakere. Systemet kan brukes til de fleste varslingsoppgaver innen en bolig eller på en arbeidsplass, og systemet er enkelt å sette opp.


Dørklokkesender DØR9 er en audiodetektor spesiallaget for å varsle at det ringer på døren. Den vil detektere både gammeldagse ringeklokker og moderne elektroniske ringeapparater. Senderen detekterer ringelyd ved hjelp av en mikrofon på ledning. Mikrofonen monteres så nær lyd-kilden som mulig.

Senderen viderevarsler signaler til FlexiBlink mottakere.


DØR9 benytter et spesialbatteri med svært lang levetid.

2. Oversikt

Utvendig

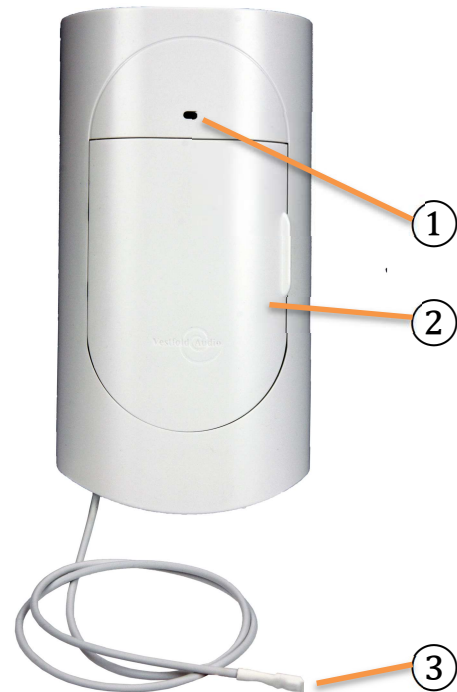

Figur 1 Forside

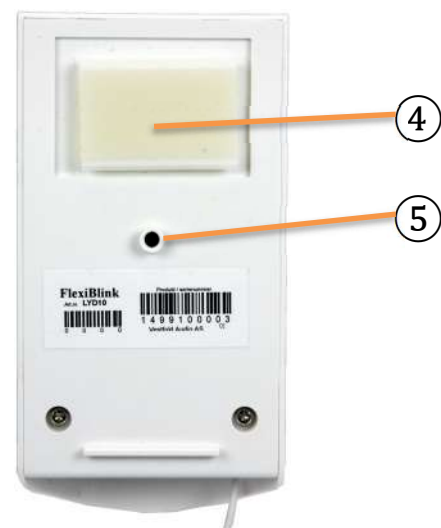


Figur 2 Bakside



Figur 3 Bunn med mikrofon på ledning

Under lokket

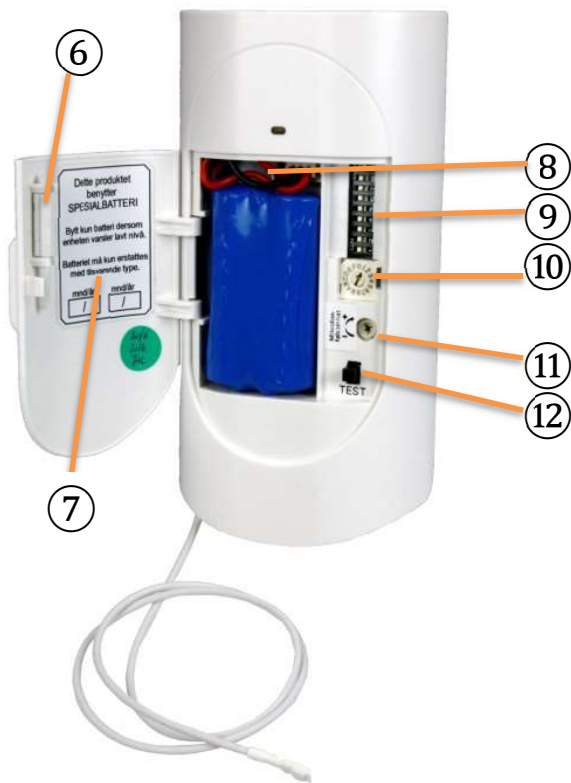

Figur 4 Under lokket

Betydning:

- ① Lysindikator
- ② Lokk
- ③ Mikrofon på ledning
- ④ Borrelås-tape
- ⑤ Hull for skruefeste
- ⑥ Verktøy for innstillinger
- ⑦ Batteriinformasjon
- ⑧ Batterikontakt
- ⑨ Huskodevelger (kanal)
- ⑩ Funksjonsvelger (ID-velger)
- ⑪ Følsomhetsjustering
- ⑫ Testknapp

Batteriet

Det medfølger et høykapasitets litium-batteri (Varenr. 9100100934), som vil sikre drift av enheten i mange år. Batteriet må ikke lades opp.



3. Komme i gang

Still inn Huskoden

Alle FlexiBlink varslingsprodukter du har i boligen, må stilles inn med lik huskode. Skyv knappene i huskodevelgeren til et tilfeldig valgt mønster. Benytt gjerne det medfølgende verktøyet som sitter i lokket.



Huskodevelger
(fabrikkinstilling)

Velg funksjon (ID-velger)

DØR9 har innebygget tre varslinger. Vri på Funksjonsvelgeren til den posisjonen som passer til det som skal varsles i mottakerne. Benytt gjerne den korte enden på det medfølgende verktøyet som sitter i lokket.



Funksjonsvelger
(fabrikkinstilling)

ID	Mikrofon ③
0	Det ringer på døren
1	Det ringer på hoveddøren
2	Det ringer på dør 2

Mikrofon på ledning

Dørklokkesenderen reagerer på lyd av en viss styrke (regulerbar følsomhet). Rød ring ytterst på ledning, markerer mikrofonen. Det er meget viktig at den lille mikrofonen settes fast *tettest mulig inntil lydkilden med den røde ringen inn*. Mikrofonen festes med medfølgende tape.

Justering av følsomhet

Følsomheten ⑪ til mikrofonen innstilles, om nødvendig, til minste nivå for sikker deteksjon.

For økt følsomhet, vri hjulet med klokka. For lavere følsomhet, vri hjulet mot klokka.

Montering

DØR9 monteres normalt på vegg med den medfølgende borrelås-tapen. Benytt den medfølgende spritservietten for å rengjøre vegg. Trykk limflatene hardt på plass i minst 10 sekunder. Alternativt kan enheten festes med skrue til vegg gjennom festehullet under batteriet.



Forsiktig

Vær forsiktig når du skrur inn skruen slik at den omkringliggende hvite platen ikke skades.

Sette inn batteriet

Sett inn batteriets kontakt som vist i figuren til høyre. Ved tilkobling av batteri kan DØR9 blinke grønt i opptil et par minutter mens batteriet klargjøres for langtids bruk.



Før ledningen i en bue inn i åpningen og legg inn batteriet.



Tips

Skriv inn dato på batteri-lappen i lokket når batteriet ble koblet til.



Tips

Trykk på test-knappen for å verifisere at enheten fungerer og at det varsler i mottakerne som tilsiktet.



Forsiktig

Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes eller brennes.

4. I bruk

Når enheten er i drift, vises status i lysindikatoren på framsiden:

<i>Slukket</i>	Stand-by
<i>Grønt</i>	Varsel sendes
<i>Blinkende</i>	
<i>rødt/grønt</i>	Bytt batteri
<i>Blinkende</i>	
<i>Oransje</i>	Mikrofonen hører lyd, men litt for lav til å sendes



Viktig

Når systemet er koblet opp, må man ALLTID teste at dørklokkesenderen varsler som tiltenkt ved å aktivere lyd-kilden den er tilkoblet.

5. Viktig informasjon

- Produktet kan rengjøres med en myk lett fuktet klut.
- Produktet er for innendørs bruk i ikke-kondenserende miljø.
- Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteribytte hvis du har mottakere som viser dette.

6. Resirkulering

Produktet og batteriet skal ikke kastes sammen med restavfall.

Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.



7. Sikkerhet

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder. Produktet må ikke kortsluttes eller skrus fra hverandre.

Brukerinnstillingene finnes ved å åpne lokket.

Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes, brennes eller lades opp.

8. Tekniske data

Dim. (bxhxd): 69x133x27mm

Vekt m/ batteri: 140 g

Batteri: Litium 3 V

Sendereffekt: 10 mW e.r.p.

Temperatur: -10 °C - +40 °C

Radiofrekvens: 142,475 MHz

Bruksbegrensninger:



Kun tillatt benyttet i Norge

9. Samsvarserklæring

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende

internettadresse:

www.vestfoldaudio.no/samsvar

10. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Det varsles ikke i mottakere	DØR9 fanger ikke opp lyden fra kilden / det lyser ikke grønt	Trykk på Test-knappen og sjekk om varselet kommer fram.
	DØR9 fanger ikke opp lyden fra kilden	Sett mikrofonen tett opp til lyd-kilden, eventuelt skru opp følsomheten. Se kap. 3.
	Batteriet i DØR9 er tomt / det blinker rødt.	Bytt batteri.
	DØR9 mangler batteri	Sett inn batteri.
	Avstanden mellom DØR9 og mottaker er for stor.	Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn en repeater.
Det lyser/blinker oransje lys	Mikrofonen hører lyd, men ikke godt nok til å varsle	Plasser mikrofonen nærmere lyd-kilden. Eventuelt øk følsomheten. Se kap. 3.
Falsk varsling	Følsomheten er for høy	Reduser følsomheten – Se kap. 3.
Det varsles med feil signal i mottakere.	Funksjonsvelger (ID) står i feil posisjon.	Skru funksjonsvelgeren til riktig posisjon.
Det blinker rødt/grønt i DØR9	Batteriet i DØR9 er snart tomt.	Bytt batteri

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.



Vestfold Audio AS
Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord

www.vestfoldaudio.no

tel. 33 47 33 47

