

# **Bruksanvisning**

## **ELLA Smykkesender**

### **HSS1e**

Varenr.: 1393



2018-10-29  
Dok.nr.: 1809B3

---

Vestfold Audio  
Sandefjord

## Innholdsfortegnelse

Innledning.....	3
Hva du som bruker bør lese i denne bruksanvisningen.....	3
Varslingsmåter.....	3
Batteri.....	3
Rekkevidde.....	3
Betjeningspanelet.....	4
Trykknapp.....	4
Grønn indikatorlampe.....	4
Rød indikatorlampe.....	4
Daglig bruk av Smykkesenderen ELLA.....	4
Assistansealarm.....	4
Halsenor.....	4
Rengjøring.....	5
Klargjøring før bruk.....	5
Sette inn batteriet.....	5
Huskode (kanal).....	5
Spesielle innstillinger.....	7
Stille inn både huskode og ID.....	7
Tilbakeføre til fabrikkinnstilling.....	7
Enkel feilretting.....	8
Teknisk informasjon.....	8

## Innledning

Smykkesenderen ELLA er designet for å bæres rundt halsen. Den har derfor halssnor med sikkerhetsmekanisme. Smykkesenderen kan brukes med varslingsystemet FlexiBlink og trygghetssystemet FlexiLife.

Produktet er sprutsikkert, og det kan derfor bæres mens man dusjer. Det kan derimot **ikke** senkes ned under vann som f.eks. i et badekar.

### Hva du som bruker bør lese i denne bruksanvisningen

Første del av denne bruksanvisningen omfatter en veiledning i daglig bruk av Smykkesenderen. Vi anbefaler at du setter deg inn i disse kapitlene:

- Oversikt over betjeningspanelet (side 4)
- Daglig bruk av smykkesenderen (side 5).
- Avsnittet Klargjøring før bruk, sette inn batteriet (side 5).

### Varslingsmåter

Smykkesenderen aktiveres/sender varsling ved å trykke på rød trykknapp. Fra fabrikk er den satt opp til å sende et sykesignal.

### Batteri

Smykkesenderen ELLA har utbyttbart batteri.


Fra fabrikk blir den levert med et litium ENERGIZER CR2032 kvalitetsbatteri. Batteriet har en spenning på 3V og en kapasitet på 240mAh.

Smykkesenderen kan bruke CR2032 batterier fra alle andre fabrikanter, men vær oppmerksom på av batterilevetiden da kan bli kortere.

### Rekkevidde

Smykkesenderen ELLA dekker en vanlig enebolig eller leilighet. Dersom man har behov for varsling over lengre avstander, kan man bruke FlexiBlink Repeater.

## Betjeningspanelet

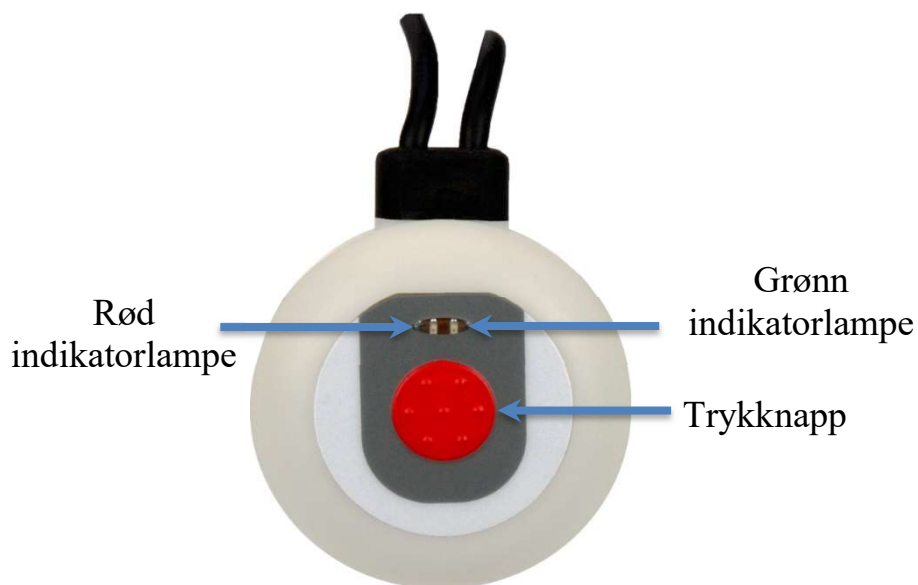

### Trykknapp

Et lett trykk på knappen og ELLA sender et sykesignal.

### Grønn indikatorlampe

Fast grønt lys indikerer at ELLA sender varslingsmeldingen.

Blinkende grønt lys indikerer at ELLA gjør seg klar til å kunne sende på nytt.

### Rød indikatorlampe

Vekslede rødt og grønt lys viser at batteriet må byttes.

## Daglig bruk av Smykkesenderen ELLA

### Assistansealarm

Trykk på den røde knappen når du trenger hjelp. Jevnt lys i den grønne indikatorlampen viser at signalet blir sendt. Deretter vil lampen blinke en stund. Når den har sluknet er Smykkesenderen klar sending av nytt signal.

### Halssnor

Smykkesenderens halssnor har en sikkerhetslås som vil løse ut hvis halssnoren henger seg opp i noe.

Sikkerhetslåsen skal IKKE benyttes for å ta av og på Smykkesenderen rundt halsen. Det vil medføre at sikkerhetslåsen kan bli "slakk" og løser ut utilsiktet.

## Rengjøring

Smykkesenderen er sprutsikker men skal IKKE nedsenkes i vann!

Smykkesenderen og halssnoren bør rengjøres jevnlig og ved behov med en fuktig klut og et mildt vaskemiddel.

## Klargjøring før bruk

### Sette inn batteriet

Smykkesenderen har batterilokk på baksiden. Symboler viser om batterilokket er låst eller ulåst.



Batterilokket åpnes eller lukkes ved å sette en passende mynt i sporet og vri. Batteriet har to store flater. På den ene siden er det tekst. Legg batteriet i batterilommen slik at teksten vender opp.



Åpne: Vri mot venstre.



Lokket er nå ulåst og kan vippes ut.



Batterilommen



Batteriet legges i batterilommen

Sett batterilokket på plass. Med mynten trykker du lokket litt ned og vrir det mot høyre (med klokka) til pilen peker direkte på symbolet for låst batterilokk.

**NB!** Etter batteriskifte vil Smykkesenderen bruke ca. 3 minutter på oppstart før den er klar til bruk.

## Huskode (kanal)

I FlexiBlink og FlexiLife systemene sørger *huskoden* for at anlegget varsler kun i din bolig. FlexiBlink sendere er normalt utstyrt med en huskodebryter med 9 knaster som kan skyves opp og ned. **Smykkesenderen har derimot ikke en fysisk huskodebryter. Den vil nemlig hente huskoden trådløst fra FlexiBlink sendere.**

Alle sendere og mottakere i boligen må stilles inn på samme huskode for å fungere sammen. Smykkesenderen leveres med vår fabrikksette huskode.


### Innstilling av huskode

For å sette riktig huskode i Smykkesenderen benyttes en FlexiBlink/FlexiLife sender som er innstilt på ønsket huskode. Dette kan f.eks. være en ringeknappsender i boligen.

Før du starter med punkt 1 nedenfor, skal indikatorlampene ha vært slukket i 3 minutter eller mer.

Frengangsmåten er slik:

1. Trykk og *hold inne* den røde knappen på Smykkesenderen.  
Grønn indikatorlampe vil lyse jevnt i 3 sekunder. Deretter vil lampen begynne å blinke.
2. Slipp den røde knappen idet blinkende grønt lys erstattes med fast rødt lys. Trykk straks 3 ganger på den røde knappen.
3. Både rød og grønn indikatorlampe vil nå lyse jevnt. Smykkesenderen venter på en varslingsmelding som den kan kopiere huskoden fra. Meldingen må mottas innen 20 sekunder.
4. Send en varslingsmelding. Du kan f.eks. ringe på døren eller trykke på testknappen på en FlexiBlink røykvarsler.
5. Når Smykkesenderen har hentet huskoden, vil den grønne indikatorlampen blinke i 5 sekunder eller mer. Når indikatorlampen har sluknet, er Smykkesenderen klar til bruk med varslingsanlegget i boligen.
6. Dersom Smykkesenderen *ikke* har hentet huskoden, vil den røde indikatorlampen blinke i 5 sekunder eller mer. Når indikatorlampen har sluknet, går Smykkesenderen automatisk tilbake til normal driftsmodus *uten* å endre gjeldende huskode.

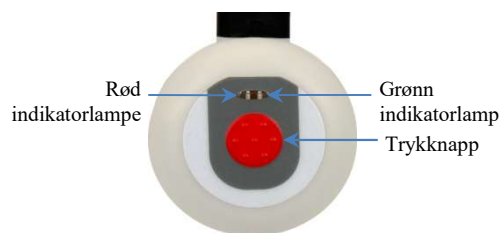

### Innstilling av huskode med FlexiBlink Testsender.

Dersom boligen ikke har et eksisterende FlexiBlink eller FlexiLife system, kan Smykkesenderen hente huskoden fra en FlexiBlink Tester.

Før du starter med punkt 1 nedenfor, skal indikatorlampene ha vært slukket i 3 minutter eller mer.

Framgangsmåten er slik:

1. Legg inn ønsket kode på huskodebryteren i FlexiBlink Tester.
2. Trykk og *hold inne* den røde knappen på Smykkesenderen.  
Grønn indikatorlampe vil lyse jevnt i 3 sekunder. Deretter vil lampen begynne å blinke.
3. Slipp den røde knappen idet blinkende grønt lys erstattes med fast rødt lys. Trykk straks 3 ganger på den røde knappen.
4. Både rød og grønn indikatorlampe vil nå lyse jevnt. Smykkesenderen venter på en varslingsmelding som den kan kopiere huskoden fra. Meldingen må mottas innen 20 sekunder.
5. Trykk på en av knappene på FlexiBlink Tester.
6. Når Smykkesenderen har hentet huskoden, vil den grønne indikatorlampen blinke i 5 sekunder eller mer. Når indikatorlampen har sluknet, er Smykkesenderen klar til bruk med varslingsanlegget i boligen.
7. Dersom Smykkesenderen *ikke* har hentet huskoden, vil den røde indikatorlampen blinke i 5 sekunder eller mer. Når indikatorlampen har sluknet, går Smykkesenderen automatisk tilbake til normal driftsmodus *uten* å endre gjeldende huskode.

## Spesielle innstillinger

### Stille inn både huskode og ID

Fra fabrikk er Smykkesenderen satt opp til å sende et sykesignal.

Smykkesenderen kan imidlertid trådløst programmeres til sende et hvilket som helst signal til mottakere i FlexiBlink og FlexiLife systemene. Et varslingssignal i denne sammenheng er kjent som **ID** (for *identitet*).

I framgangsmåten nedenfor er utgangspunktet at brukeren ikke har FlexiBlink eller FlexiLife system i boligen. Smykkesenderen kan da hente huskoden fra en FlexiBlink Tester.

Før du starter med punkt 1 nedenfor, skal indikatorlampene ha vært slukket i 3 minutter eller mer.

Fremgangsmåten er slik:

1. Legg inn ønsket kode på huskodebryteren i FlexiBlink Tester.
2. Trykk og *hold inne* den røde knappen på Smykkesenderen.
3. Grønn indikatorlampe vil lyse jevnt i 3 sekunder. Deretter vil lampen begynne å blinke.
4. Slipp den røde knappen idet blinkende grønt lys erstattes med fast rødt lys. Trykk straks 3 ganger på den røde knappen. Både rød og grønn indikatorlampe vil nå lyse jevnt.
5. Trykk straks og *hold inne* den røde knappen igjen. Smykkesenderen forventer både huskode og ID fra FlexiBlink Tester innen 20 sekunder.
6. Trykk den knappen på FlexiBlink Tester som har det symbolet som best passer til varslingsformålet.
7. Når Smykkesenderen har hentet huskoden og ID, vil den grønne indikatorlampen blinke. Du kan da slippe den røde knappen. Indikatorlampen vil blinke i 5 sekunder eller mer. Når den har sluknet, er Smykkesenderen klar til bruk med varslingsanlegget i boligen.
8. Dersom Smykkesenderen *ikke* har hentet huskoden og ID, vil den røde indikatorlampen blinke. Du kan da slippe den røde knappen. Indikatorlampen vil blinke i 5 sekunder eller mer. Når indikatorlampen har sluknet, går Smykkesenderen automatisk tilbake til normal driftsmodus *uten* å endre gjeldende huskode og ID. Prøv på nytt.

### Tilbakeføre til fabrikkinnstilling

Med et enkelt grep kan du tilbakeføre (resette) Smykkesenderen til fabrikkinnstilling.

Før du starter med punkt 1 nedenfor, skal indikatorlampene ha vært slukket i 3 minutter eller mer.

Framgangsmåten er slik:

1. Trykk og *hold inne* alarmknappen.  
Underveis vil du legge merke til at Smykkesenderen sender en melding samtidig som den grønne indikatorlampen lyser fast grønt. Deretter vil den grønne indikatorlampen blinke i 5 sekunder. Så går lyset over i **rødt**. *Forsett å holde inne alarmknappen.*
2. Etter ca. 20 sekunder med rødt lys vil grønn indikatorlampe lyse sammen med den røde indikatorlampen. Gjør nå følgende:

- a. Slipp alarmknappen.
- b. Trykk **3** ganger på alarmknappen. Nå slukker rød og grønn indikatorlampe.

Smykkesenderen er nå tilbakeført til fabrikkinnstilling.

## Enkel feilretting

Feilsymptom	Mulig årsak til feil
Ingen varsling.	Har Smykkesenderen samme huskode som andre sendere i boligen?
Ingen varsling.	Du er for langt unna mottakeren.
Ingen lysindikasjon når du trykker på knappen.	Batteriet er utbrukt. Bytt batteriet.
Vekslede rødt og grønt lys når du trykker på knappen.	Batterinivået er lavt. Bytt batteriet.
Rødt lys blinker i 5 sekunder etter at du trykket på knappen.	Du har nettopp satt inn et nytt batteri. Vent 3 minutter og trykk på nytt.

## Teknisk informasjon

### Info

Bruksområde: Innendørs  
 Batteri: 3V litium knappecelle CR2032  
 Sendereffekt: 10mW e.r.p.  
 Radiofrekvens: 142,475 MHz

Bruksbegrensninger:



Kun tillatt benyttet i Norge

### Nødvendige advarsler i forbindelse med bruk

Smykkesenderen ELLA er designet og produsert i henhold til IEC 60529 IP54. Den tåler derfor vannsprut og er støvtett.

*Ved batteribytte må batterilokket skrus skikkelig på plass.* Da vil den fortsatt tåle vannsprut og støv.

### Vedlikehold utført av bruker

Daglig rengjøring og batteribytte. Ut over dette er Smykkesenderen vedlikeholdsfri.

### Lagring når ikke i bruk

Oppbevares på et tørt sted.

### Sikkerhet

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder.

Produktet må ikke kortsluttes eller skrus fra hverandre

Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes, brennes eller lades opp.

### Samsvarserklæring

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettsadresse:

[www.vestfoldaudio.no/samsvar](http://www.vestfoldaudio.no/samsvar)

### Produsent

Vestfold Audio AS  
 Nordre Fokserød 12  
 3241 Sandefjord



**Vestfold Audio AS**

Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord

[www.vestfoldaudio.no](http://www.vestfoldaudio.no)

tel. 33 47 33 47

