

# Bruksanvisning

## JUNIOR lommevibrator, Universell

JUNIOR



2018-10-29

Dok.nr.: 2428A3

---

Vestfold Audio  
Sandefjord

## Innholdsfortegnelse

Innledning .....	3
Overblikk over betjeningspanelet.....	4
Nødvendige innstillinger før bruk .....	6
Om Huskodebryteren og Funksjonsbryteren.....	6
Ta av og sette på bakdekselet .....	6
Stille inn Huskoden .....	6
Stille inn Funksjonsbryteren .....	7
Daglig bruk av lommevibratoren .....	8
Slå lommevibratoren på og av .....	8
Stanse en varsling.....	8
Stenge og åpne for varsling med lyd.....	9
Melding om svakt batteri .....	9
Lading .....	9
Spesielle innstillinger .....	10
Innledning .....	10
Stenge og åpne for varsling med STERKT LYS.....	10
Stenge og åpne for varsling med LYD .....	10
Stenge og åpne for varsling med VIBRASJON.....	11
Tilbakeføre til fabrikkinnstillingene .....	11
Enkel feilretting .....	12
Teknisk informasjon.....	12

## Innledning

JUNIOR lommevibrator, Universell hører til i FlexiBlink familien. Denne versjonen av JUNIOR er tiltenkt hørselshemmede for bruk i hjem, på arbeid, i skole og på fritiden. Den indikerer 12 spesifikke varslingsårsaker, slik at den bør dekke behovet for både barn, yrkesaktive og eldre.

Du kan ha JUNIOR i lommen, i den medfølgende bæreveksen eller i halssnoren.

### Hva du som bruker bør lese i denne bruksanvisningen

Første del av denne bruksanvisningen omfatter en veiledning i daglig bruk av JUNIOR. Vi anbefaler at du setter deg inn i disse kapitlene:

- Oversikt over betjeningspanelet (side 5)
- Nødvendige innstillinger før bruk (side 6)
- Daglig bruk av lommevibratoren (side 8).

Andre halvdel av bruksanvisningen er skrevet for et noe mer teknisk orientert personell.

### Varslingsmåter

JUNIOR varsler med kraftig vibrasjon, sterkt lysblink, lyd og symboler.

Daglige hendelser varsles på en rolig måte, med moderat vibratorintensitet. Alarmer har en tiltakende, hissig form for varsling hvor vibrasjonen er spesielt kraftig.

Kombinasjon lys/vibrasjon benyttes for å skille mellom varslingsårsaker.

Du kan, om ønskelig, på en enkel måte stenge for varsling med lyd.

### Batteri

JUNIOR har innebygd oppladbart batteri og automatisk ladesystem. Som en regel bør du lade daglig, selv om JUNIOR har kapasitet til flere dagers bruk mellom hver lading.

### Rekkevidde

Når den ligger i lommen, kan JUNIOR brukes i vanlig enebolig/leilighet og i hagen utenfor.

Dersom man har behov for varsling over større avstander, kan man enten bruke medfølgende halssnor, FlexiBlink Repeater eller i kombinasjon med andre av våre produkter. Ta kontakt med Vestfold Audio for nærmere opplysninger.

### Tilpassing ved spesielle varslingsbehov

JUNIOR bærer i seg mye av konseptet til varslingsmottakeren IRIS. Derfor er den meget godt egnet når man har spesielle varslingsbehov i hjem og på arbeidsplass. Kombinert med våre sendere, utgjør lommevibratoren JUNIOR og IRIS en solid varslingspakke som er tilpasset brukernes behov.

## Overblikk over betjeningspanelet

Framsiden av JUNIOR består av et betjeningspanel. Der finner du to betjeningsknapper og åtte små indikatorer (lys).

Med Strømknappen  slår du JUNIOR av og på.

Når JUNIOR er påslått, vil lyset i denne knappen blinke grønt.

Stoppknappen  avbryter varslingen.

Batterisymbolet  blinker rødt når du må lade JUNIOR.

Ved varsling vil lyset ved ett av symbolene blinke samtidig som vibrasjon starter. Dersom to varslinger kommer tett på hverandre, vil eldste melding vises med fast lys.

Lys i symbolene sammen med vibrasjon benyttes for å angi varslingsårsaken. Hvis varsling med vibrasjon slås av, vil lysene angi hovedårsaken.

Disse varslingsårsakene meldes slik på denne versjonen:

Varslingsårsak	Lys i symbol	Vibrasjonsmønster
Dørklokke	1	Korte pulser
Porttelefon	1	Lange pulser
Brann - Røykvarsler	2	Korte pulser
Brann – Sentral anlegg	2	Lange pulser
Fasttelefon	3	Korte pulser
Mobiltelefon	3	Lange pulser
Barnet har stått opp	4	Korte pulser
Barn gråter	4	Lange pulser
Påkalling – daglig	5	Korte pulser
Påkalling - alarm	5	Lange pulser
Vandring inne / andre daglig	6	Korte pulser
Vandring ute / andre alarm	6	Lange pulser



Illustrasjonen nedenfor viser utvendige funksjoner på JUNIOR.

**NB!** Symbolene på bildene videre i dette dokumentet er generelle for illustrasjon. Det er ikke slik denne versjonen av JUNIOR blir levert. Se foregående side for korrekt symboloversikt.

**Bæresnor/utvendig antenne**

Bæresnor rundt halsen.  
Øker rekkevidden.  
Trekk ut gummiproppen og skru antennen i hullet.

**Strømknapp**

Slår lommevibratoren av/på. Tidsforsinket reaksjon (på samme måte som i mobiltelefoner.

**«På»-indikator**

Korte blink hvert 4. sekund når lommevibratoren er påslått.

**Symboler og lys**

Blinkende lys ved bildet som symboliserer varslingen.

**Kraftig vibrator**

**Stoppknapp**

Stanser varsling.

**Lysvarsling**

Område med blinkende sterkt varsellys.

**Ladekontakt**

Tilkoblingspunkt for batterieliminatør.

**Batteri-/ladetilstand**

Vanligvis slukket. Blinker når batteriet må lades. Lyser konstant mens lading pågår. Slukker når lading er fullført.

**Lydvarsling**

Lydåpning.




## Nødvendige innstillinger før bruk


### Om Huskodebryteren og Funksjonsbryteren

I FlexiBlink sørger *Huskoden* for å varsle kun hos deg – og ikke hos dine naboer. Med *Funksjonsbryteren* kan imidlertid et naboskap gå sammen om å varsle hverandre ved brann og innbrudd. Dette kan du lese mer på neste side under *Stille inn Funksjonsbryter – Nabovarsling*.

Du finner *Huskodebryteren* og *Funksjonsbryteren* under det gjennomsliktige dekselet på baksiden av JUNIOR.

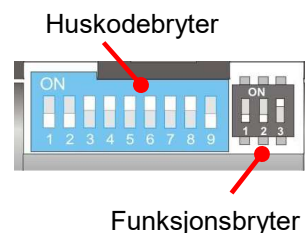

### Ta av og sette på bakdekselet

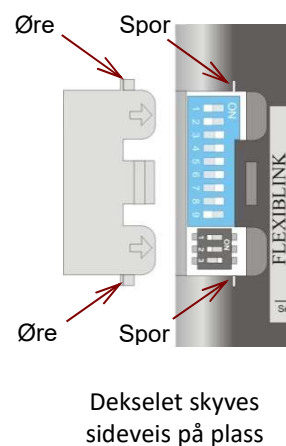

### 2. Sette dekselet tilbake på plass

Pass på at de to ørene entrer sporene i JUNIOR.  
Skyv så dekselet sideveis til det sitter på plass.


### Stille inn Huskoden

Pass på at alle FlexiBlink sendere og mottakere bruker koden du valgte, inklusiv JUNIOR. Velg en *tilfeldig* huskode, eller eventuelt kopier huskoden fra et annet FlexiBlink produkt i boligen din. Forsikre deg om at du leser tallrekken på huskodebryteren riktig vei.

Dette gjelder både JUNIOR og det produktet du eventuelt kopierer huskoden fra.



Bruk en liten, butt gjenstand (f.eks. en kulepenn eller liten skrutrekker) når du nå skal skyve de små bryterne i posisjon.

Etter at du har stilt inn huskoden, bør du vurdere om innstilling av *Funksjonsbryteren* er nødvendig.

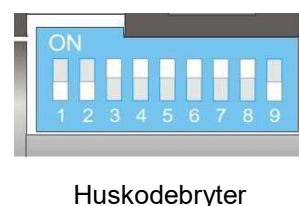


## Stille inn Funksjonsbryteren

Junior utstyrt med en Funksjonsbryter. Levert fra fabrikk er bryter 1 og 2 av og bryter 3 på. Du trenger ikke endre på fabrikkinnstillingen med mindre du har behov for funksjonene forklart nedenfor.

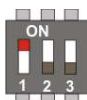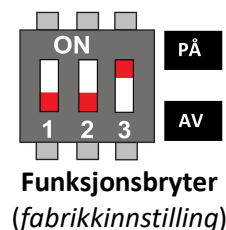

### Alltid sterk vibrasjon – bryter 1


I enkelte situasjoner har man bruk for ekstra kraftig vibrasjon i JUNIOR, uansett hvilke hendelser den varsler om. Skyv da *bryter 1* i stilling **ON** (på).

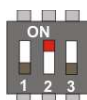

### Nabovarsling – bryter 2

Dersom du ønsker å bli varslet ved brann eller innbrudd i hos naboer som har FlexiBlink varslingssystem, kan du skyve *bryter 2* i stilling **ON** (på).

NB! Du vil ikke bli varslet når naboer tester røykvarslerne sine.

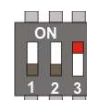

### Bryter 3

JUNIOR kan benyttes som en liten putevibrator for vekking på tid, når den benyttes sammen med varslingsmottakeren IRIS Touch. Når vekkerklokken starter i IRIS Touch, vil den sende trådløst signal som kan få JUNIOR til å vibrere.

Sett Bryter 3 til stilling **ON** (på) for å slå på vekkefunksjonen i JUNIOR.

## Daglig bruk av lommevibratoren

På de følgende to sider vil vi vise deg hvordan JUNIOR enkelt kan brukes i det daglige.


### Slå lommevibratoren på og av

#### Slå på

Trykk på Strømknappen  og hold den inne i ca. 2 sekunder, til JUNIOR kjører en rask selvtest (bl.a. lys og vibrasjon).

Deretter viser grønne blink at lommevibratoren er påslått.

#### Slå av


Trykk på Strømknappen  og hold den inne i ca. 2 sekunder, til JUNIOR kvitterer med to korte vibrasjoner. Da er den avslått.



### Stanse en varsling



#### Stans varsling

Trykk én gang på Stoppknappen  .  
Vibrasjon, sterkt lysblink og lyd stanses.

Et nytt trykk på Stoppknappen vil slukke lyset ved det/de aktuelle symbolet/symbolene.

#### Symboler og lys

Lyset ved det aktuelle symbolet vil fortsette å blinke i 45 sekunder etter at Stoppknappen ble trykket på én gang.

Dersom det skulle komme en annen varsling innen 45 sekunder er gått, vil lyset ved dette symbolet blinke, mens lyset ved det første vil være fast.



## Stenge og åpne for varsling med lyd

Dersom du ønsker en stille form for varsling, kan du på en enkel måte stenge for varsling med lyd. Junior skal være påslått når du stenger/åpner for lydvarsling.



### Stenge for lydvarsling


Trykk på Stoppknappen  og hold den inne i ca. 2 sekunder, til JUNIOR kvitterer med to korte lyder. Heretter vil den ikke varsle med lyd.

### Åpne for lydvarsling

Trykk på Stoppknappen  og hold den inne i ca. 2 sekunder, til JUNIOR kvitterer med en lang lyd. Heretter vil den varsle med lyd.

## Melding om svakt batteri



Når lyset i batterisymbolet  blinker, er det ca. 6 timer driftstid igjen på batteriet.

Én gang i timen vil JUNIOR minne deg om at det er behov for lading; et kort støt i vibratoren og en kort lyd (dersom du har valgt varsling med lyd).

## Lading

JUNIOR har oppladbart batteri og innebygd automatisk lader.


Det kan gå flere dager mellom hver gang du må lade. Mange foretrekker å lade hver natt – omtrent som en mobiltelefon. Ladetiden er om lag seks timer dersom batteriet er helt tomt for strøm.



### Sette til opplading

Sett batterieliminatoren i kontakten på veggen. Trykk ladepluggen på plass i ladekontakten på siden av JUNIOR.

### Batterisymbolet ved opplading

Det røde lyset i batterisymbolet  tennes og lyser nå kontinuerlig inntil opplading er fullført. Da slukker lyset.

## Spesielle innstillinger

### Innledning


Du trenger *ikke* å sette deg inn i dette avsnittet for å bruke JUNIOR i det daglige.

Dersom du i din situasjon likevel trenger å stenge for varsling med det sterke lyset, eller ikke vil ha vibratorvarsling, kan du følge veiledningen nedenfor.





Vi gjør oppmerksom på at selv om du uforvarende skulle stenge for alle tre varslingsformer (sterkt lys, lyd og vibrasjon), vil JUNIOR likevel varsle deg med vibrasjon og markere hendelsen med et symbol.

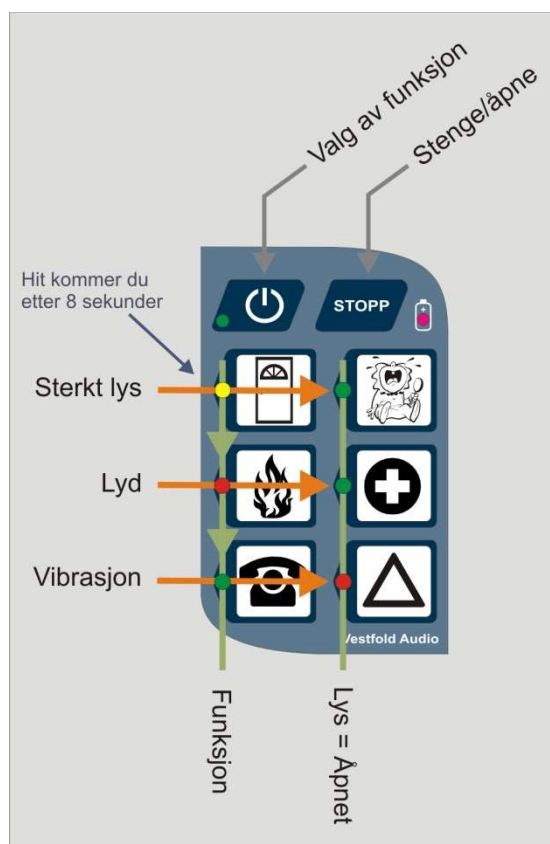Illustrasjonen til høyre bør sees i sammenheng med veiledningen til de tre stengnings- og åpningsmulighetene.



Utgangspunktet for «Spesielle innstillinger» er at JUNIOR skal være **avslått**.






### Stenge og åpne for varsling med STERKT LYS






1. Utgangspunkt: JUNIOR skal være avslått.
2. Trykk og hold inne Strømknappen  inntil lyset ved dørsymbolet tennes. Samtidig ser du ett blink i det sterke lyset. Slipp så straks Strømknappen  . Du har nå kommet til Lysvarsling. Dette tar omlag 8 sekunder fra JUNIOR har kjørt selvtesten.
3. Med Stoppknappen  kan du nå stenge eller åpne for Lysvarsling. Tent lys ved barnesymbolet viser at du har åpnet for Lysvarsling.
4. Dersom dette var alt du ville endre, trykker du **tre** ganger på Strømknappen  . Nå er JUNIOR i vanlig drift igjen, og med den innstilling for varsling med sterkt lys som du nettopp valgte.

### Stenge og åpne for varsling med LYD

1. Utgangspunkt: JUNIOR skal være avslått.
2. Trykk og hold inne Strømknappen  inntil lyset ved dørsymbolet tennes. Samtidig ser du ett blink i det sterke lyset. Slipp så straks Strømknappen  . Dette tar omlag 8 sekunder fra JUNIOR har kjørt selvtesten. Nå må du gå videre til Lydvarsling, slik punkt 3 nedenfor forklarer.



3. Trykk **én** gang på Strømknappen  . Nå tennes lyset ved *flammesymbolet*, samtidig som du hører en kort varslingslyd.  
Du har nå kommet til *Lydvarsling*.
4. Med Stoppknappen  kan du nå stenge eller åpne for Lydvarsling. Tent lys ved *assistansesymbolet* viser at du har åpnet for Lydvarsling.
5. Dersom dette var alt du ville endre, trykker du **to** ganger på Strømknappen  .  
Nå er JUNIOR i vanlig drift igjen, og med den innstilling for varsling med *lyd* som du nettopp valgte.

### Stenge og åpne for varsling med VIBRASJON

1. Utgangspunkt: JUNIOR skal være avslått.
2. Trykk og *hold inne* Strømknappen  inntil lyset ved *dørsymbolet* tennes. Samtidig ser du ett blink i det sterke lyset. Slipp så *straks* Strømknappen  .  
Dette tar omlag 8 sekunder fra JUNIOR har kjørt selvtesten.  
Nå må du gå videre til Vibratorvarsling, slik punkt 3 nedenfor forklarer.
3. Trykk **to** ganger på Strømknappen  . Nå tennes lyset ved *telefonsymbolet*, samtidig som du kjenner en kort vibrasjon.  
Du har nå kommet til *Vibatorvarsling*.
4. Med Stoppknappen  kan du nå stenge eller åpne for Vibratorvarsling. Tent lys ved *faresymbolet* viser at du har åpnet for Vibratorvarsling.
5. Dersom dette var alt du ville endre, trykker du **én** gang på Strømknappen  . Nå er JUNIOR i vanlig drift igjen, og med den innstilling for varsling med *vibrasjon* som du nettopp valgte.

### Tilbakeføre til fabrikkinnstillingene

JUNIOR blir levert med en innebygd kopi av fabrikkinnstillingene. Med et enkelt grep kan du tilbakeføre (*reset*) JUNIOR til de opprinnelige innstillingene:

1. Utgangspunkt: JUNIOR skal være påslått.
2. Trykk *samtidig* på Strømknappen  og Stoppknappen  og hold dem *begge* inne i ca. 10 sekunder, til JUNIOR kvitterer med:
  - Et blink med alle lys i membranpanelet
  - Et blink med det sterke lyset
  - Lydsignal
  - Vibrasjon

Dette skjer samtidig, og varer i ca. 1 sekund.  
Deretter slår JUNIOR seg automatisk av.

## Enkel feilretting

Feilsymptom	Mulig årsak til feil
Ingen varsling	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riktig huskode? (Sjekk huskode med senderne i boligen.)</li> <li>Lad opp batteriet: Koble til laderen og plugg den i kontakten</li> </ul>
Ingen varsling	Du er for langt unna senderen.
Manglende varsling	Tilbakefør til fabrikkinnstilling – se avsnittet over.

## Teknisk informasjon

### Info

Bruksområde: Innendørs  
 Batteri: 7,4V litium Polymer  
 Lader: 230VAC/15VDC  
 Det er normalt at både Junior og batteri-eliminatorene blir svakt varme under opplading.

Sendereffekt: 10mW e.r.p.  
 Radiofrekvens: 142,475 MHz

Bruksbegrensninger:



Kun tillatt benyttet i Norge

### Produsent

Vestfold Audio AS  
 3241 Sandefjord

### Samsvarserklæring

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettsadresse:  
[www.vestfoldaudio.no/samsvar](http://www.vestfoldaudio.no/samsvar)

### Nødvendige advarsler i forbindelse med bruk

JUNIOR er designet for innendørs bruk. Dersom du skal bruke den ute, må du beskytte den mot fuktighet/ regn. Av sikkerhetsmessige årsaker må du *under ingen omstendighet* lade JUNIOR utendørs eller i våtrom.

### Sikkerhet

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder.  
 Produktet må ikke kortsluttes eller skrues fra hverandre. Brukerinnstillingene finnes ved å åpne lokket.  
 Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes, brennes eller lades opp.

### Utfyllende informasjon om hvordan hjelpemiddelet skal brukes

Se øvrig del av bruksanvisningen.

### Rengjøring utført av bruker

Du kan tørke av JUNIOR med en fuktig klut med mildt såpevann. Batterieliminatoren og ledning skal du ikke rengjøre.

### Vedlikehold utført av bruker

JUNIOR er vedlikeholdsfri.

### Lagring når ikke i bruk

Oppbevares på et tørt og helst støvfritt sted.

### Utfyllende om feilindikasjoner

Se avsnittet om *Melding om svakt batteri*.



**Vestfold Audio AS**  
 Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord

[www.vestfoldaudio.no](http://www.vestfoldaudio.no)

tel. 33 47 33 47

