

FlexiBlink

Varenr. 1512
HMS-nr.: 233427

Mobiltelefonsender

MOBIL10



Brukerhåndbok

Dok. nr.: 2299A4
Dato: 2018.10.29



Innholdsfortegnelse

1. Innledning	3
2. Oversikt	4
Utvendig	4
Batteriet	4
Under lokket	4
3. Komme i gang	4
Still inn Huskoden	4
Velg funksjon (ID-velger)	5
Tilkobling	5
Montering	5
Bruk av repeater	5
EKOM	5
Sette inn batteriet	6
4. I bruk	6
5. Viktig informasjon	6
Resirkulering	6
6. Sikkerhet	7
7. Tekniske data	7
8. Samsvarserklæring	7
9. Feilsøking	8

1. Innledning

Mobiltelefonsender MOBIL10 er et produkt i FlexiBlink-serien. Den benyttes for å varsle til FlexiBlink mottakere at mobiltelefonen ringer.

FlexiBlink er et trådløst varslingsystem med sendere og mottakere. Systemet kan brukes til de fleste varslingsoppgaver innen en bolig eller på en arbeidsplass, og systemet er enkelt å sette opp.

Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer telefonen på seg. Når mobilen ringer eller varsler med lyd, vil mobiltelefonsenderen varsle til FlexiBlink mottakere.


MOBIL10 har innebygget funksjoner for viderevarsling av flere telefonvarslinger. Brukeren kan også velge mellom tre følsomhetsnivåer på mobiltelefonsenderen.

MOBIL10 benytter et spesialbatteri med svært lang levetid.



2. Oversikt

Utvendig

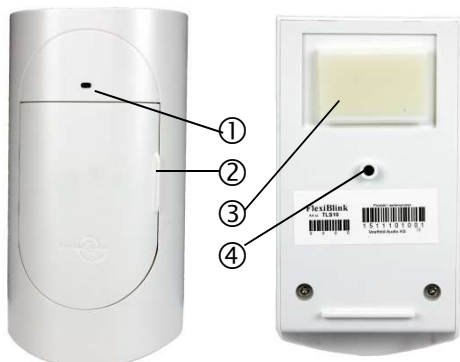

Figur 1 Forside

Figur 2 Bakside



Figur 3 Bunn med jack på ledning


- ① Lysindikator
- ② Lokk
- ③ Borrelås-tape
- ④ Hull for skruefeste
- ⑤ Kabel med jack-inngang

Batteriet

Det medfølger et høykapasitets litium-batteri (Varenr. 9100100934), som vil sikre drift av enheten i mange år. Batteriet må ikke lades opp.



Under lokket

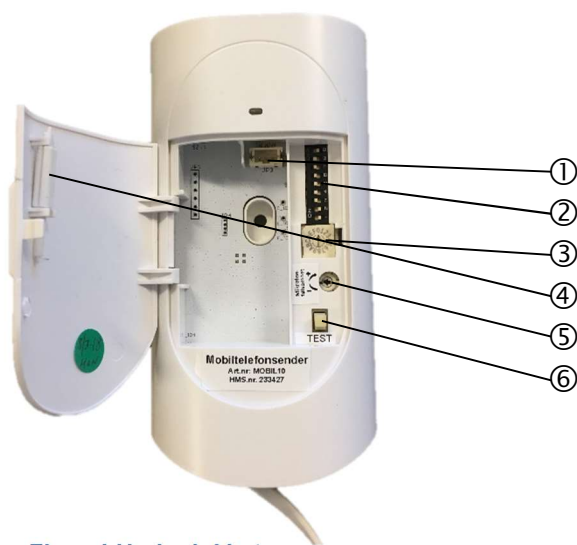

Figur 4 Under lokket

- ① Batterikontakt
- ② Huskodevelger (kanal)
- ③ Funksjonsvelger (ID-velger)
- ④ Verktøy for innstillinger
- ⑤ Mikrofonfølsomhetshjul
- ⑥ Testknapp

3. Komme i gang

Still inn Huskoden

Alle FlexiBlink varslingsprodukter som du har i boligen må stilles inn med lik Huskode. Skyv knappene i Huskodevelgeren til et tilfeldig valgt mønster. Benytt gjerne det medfølgende verktøyet som sitter i lokket.



Huskodevelger
(fabrikkinnstilling)

Velg funksjon (ID-velger)

MOBIL10 kan differensiere forskjellige mobiltelefoner. Vri på Funksjonsvelgeren til den posisjonen som passer til det som skal varsles i varslingsmottakerne. Benytt gjerne den korte enden på det medfølgende verktøyet som sitter i lokket.



Funksjonsvelger
(fabrikkinstilling)

ID	Varsler om	Følsomhet
0	Mobiltelefon	Normal
1	Mobiltelefon Nr. 1	Normal
2	Mobiltelefon Nr. 2	Normal
3	Mobiltelefon Nr. 3	Normal
4	Mobiltelefon Nr. 4	Normal
5	Mobiltelefon Nr. 5	Normal
6	Mobiltelefon	Lav
7	Mobiltelefon Nr. 1	Lav
8	Mobiltelefon Nr. 2	Lav
9	Mobiltelefon	Høy
A	Mobiltelefon Nr. 1	Høy
B	Mobiltelefon Nr. 2	Høy
C	Mobiltelefon +EKOM	Normal
D	Mobilt. Nr. 1 +EKOM	Normal
E	Mobilt. Nr. 2 +EKOM	Normal
F	EKOM	Normal

Tilkobling

Bruk den monterte ledningen på mobiltelefonsenderen. Sett pluggen i hodetelefonutgangen på mobilen. Bruk medfølgende overgang dersom brukerens mobiltelefon har 2.5 mm utgang.

Mobilens ringetonevolum settes til minimum halv styrke. Prøv ut hvilke ringetoner MOBIL10 oppfatter og juster volumet til MOBIL10 varsler. Benytt ID-

venderen til å sette rett følsomhetsnivå. Følsomhetshjulet på MOBIL10 kan også justeres opp eller ned for å finjustere varslingsnivået for MOBIL10.

Montering

MOBIL10 monteres normalt på vegg med den medfølgende borrelås-tapen. Benytt den medfølgende spritservietten for å rengjøre veggen. Trykk limflatene hardt på plass i minst 10 sekunder.

Alternativt kan enheten festes med skrue til veggen gjennom festehullet under batteriet.

Bruk av repeater

Dersom det er behov for å benytte en repeater i systemet, må repeateren settes opp til å videresende telefonsignaler.



Forsiktig

Vær forsiktig når du skrur inn skruen slik at den omkringliggende hvite platen ikke skades.

EKOM

EKOM er et sett spesielle lyder som mobiltelefonsenderen kjenner igjen og vil varsle spesifikk hendelse. Ved å benytte disse spesielle lydene på mobiltelefonen eller pc kan man skille på varslinger som SKYPE, EPOST, SMS, VIP Samtale. Lydene kan man laste ned fra m.flexilife.no, eller ta kontakt med Vestfold Audio.

Sette inn batteriet

Sett inn batteriets kontakt som vist i figuren til høyre. Trykk gjerne en gang på testknappen slik at initiering og kontroll av batteriet utføres.



Før ledningen i en bue inn i åpningen og legg inn batteriet.



Tips

Trykk på test-knappen for å verifisere at enheten fungerer og at det varsler i mottakerne som tilsiktet. Første gangen etter batterimontering, kan det være nødvendig å trykke på nytt etter en liten pause.



Forsiktig

Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes eller brennes.

4. I bruk

Når enheten er i drift, vises status i lysindikatoren på framsiden:

<i>Slukket</i>	Stand-by
<i>Grønt</i>	Varsel sendes
<i>Blinkende</i>	
<i>rødt/grønt</i>	Bytt batteri

5. Viktig informasjon

- Produktet kan rengjøres med en myk lett fuktet klut.
- Produktet er for innendørs bruk.
- Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteribytte hvis du har mottakere som viser dette.

Resirkulering

Produktet og batteriet skal ikke kastes sammen med restavfall.



Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

6. Sikkerhet

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder.

Produktet må ikke kortsluttes eller skruses fra hverandre.

Brukerinnstillingene finnes ved å åpne lokket.

Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes, brennes eller lades opp.

7. Tekniske data

Dim. (bxhxd): 69x133x27mm
Vekt m/ batteri: 140 g
Batteri: Litium 3 V
Sendereffekt: 10 mW e.r.p.
Temperatur: -10 °C - +40 °C

Radiofrekvens: 142,475 MHz

Bruksbegrensninger:



Kun tillatt benyttet i Norge

8. Samsvarserklæring

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:

www.vestfoldaudio.no/samsvar

9. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Det varsler ikke i mottakere	MOBIL10 får ikke signal fra kilden / det lyser ikke grønt.	Trykk på Testknappen og sjekk om varselet kommer fram.
	Pluggen er ikke koblet skikkelig til	Sjekk at pluggen er festet ordentlig
	Lyden er ikke høy nok	Skrue opp volumet på ringelyden, velg eventuelt en annen ringelyd
	Avstanden mellom MOBIL10 og mottaker er for stor.	Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn en repeater.
	Batteriet i MOBIL10 er tomt / det blinker rødt.	Bytt batteri.
	MOBIL10 mangler batteri	Sett inn batteri.
Oransje, korte blink i senderen	Volumet er for lavt	Skrue opp volumet eller bytt til annen ringelyd. Endre eventuelt følsomheten vha. ID-velgeren.
Oransje blink	Telefonen ringer	Senderen blinker oransje når telefonen ringer. Lyser grønt når den sender.
Får ikke koblet til mobilen	Annen lydutgang på mobilen	Senderen støtter 3.5 og 2.5 mm Jack-plugg. Sjekk eventuelt med leverandør om det finnes en overgang til 3.5 mm Jack.
Det varsler med feil signal i mottakere.	Funksjonsvelger (ID) står i feil posisjon.	Skrue funksjonsvelger til riktig posisjon.
Det varsler i senderen uten at mobilen ringer	Kan ha mottatt andre varsler med lyd på mobilen, f.eks. SMS, varsler, lite strøm.	Sjekk innstillingene på mobilen slik at disse ikke gir lyd.
Det blinker rødt/grønt i MOBIL10	Batteriet i MOBIL10 er snart tomt.	Bytt batteri
Det lyser ikke grønt når signalet aktiveres.	MOBIL10 oppfatter ikke signalet.	Kontroller at kilden gir riktig signal til valgt inngang.

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse. For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.



Vestfold Audio AS
Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord
www.vestfoldaudio.no
tel. +47 33 47 33 47

