

FlexiBlink

Varenr. 1498
HMS-nr.: 217589

Universalsender

UNI10



Brukerhåndbok

Dok. nr.: 2259A2
Dato: 2018.10.29

Innholdsfortegnelse

1. Innledning	3
2. Oversikt	4
Utvendig	4
Under lokket	4
Batteriet	4
Medfølgende kabel	4
3. Komme i gang	5
Still inn Huskoden	5
Velg funksjon (ID-velger)	5
Tilkobling	5
Montering	5
Sette inn batteriet	6
4. I bruk	6
5. Viktig informasjon	6
Resirkulering	6
6. Sikkerhet	7
7. Tekniske data	7
8. Samsvarserklæring	7
9. Feilsøking	8

1. Innledning

Universalsender UNI10 er et produkt i FlexiBlink-serien. Den tilkobles utstyr som skal viderevarsle signaler til FlexiBlink mottakere.

Varsling blir utløst når en av inngangene aktiveres fra tilkoblet utstyr. Du kan ha så mange varslingsmottakere og sendere som du trenger for sikkerhet og dagligliv.

UNI10 har innebygget funksjoner for viderevarsling av mange forskjellige hendelser. Andre varslinger er tilgjengelig på bestilling. Varslingene er fordelt i to grupper:

- 1 *Daglige signaler*
- 2 *Alarmer*


Daglige signaler utløser varsling med lydvolument som er innstilt i FlexiBlink varslingsmottakere, mens *Alarmer* alltid varsler med full lydstyrke.

UNI10 benytter et spesialbatteri med svært lang levetid.




2. Oversikt

Utvendig

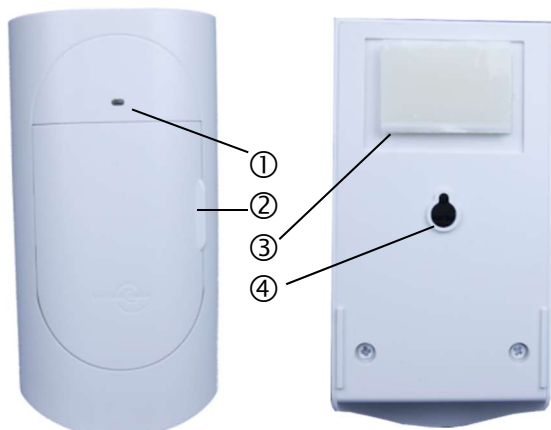

Figur 1 Forside


Figur 2 Bakside

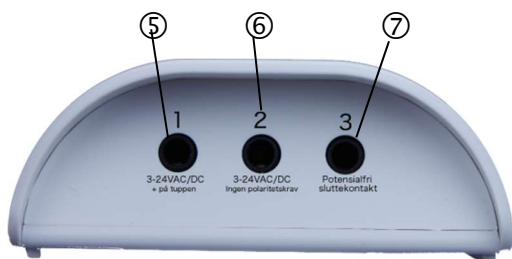

Figur 3 Bunn med 3,5mm jack-tilkoblinger

- ① Lysindikator
- ② Løkk
- ③ Borrelås-tape
- ④ Hull for skruefeste
- ⑤ Signalinngang for spenningskilde. 3-24VAC/VDC + på tuppen
- ⑥ Signalinngang for spenningskilde. 3-24VAC/VDC
- ⑦ Signalinngang for potensialfri kontakt. (Sammenkobling av lederne gir signal.)

Under lokket

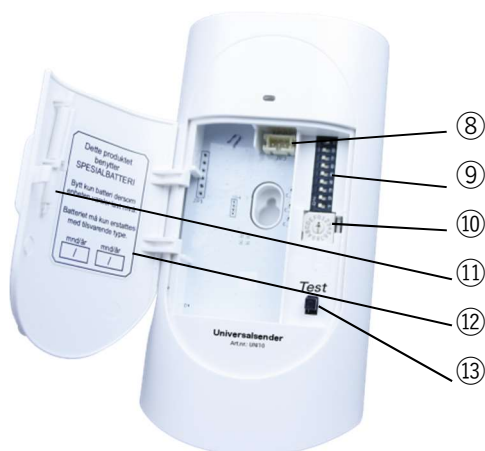

Figur 4 Under lokket

- ⑧ Batterikontakt
- ⑨ Huskodevelger (kanal)
- ⑩ Funksjonsvelger (ID-velger)
- ⑪ Verktøy for innstillinger
- ⑫ Batteriinformasjon
- ⑬ Testknapp

Batteriet

Det medfølger et høykapasitets litium-batteri (Varenr. 9100100934), som vil sikre drift av enheten i mange år. Batteriet må ikke lades opp.



Medfølgende kabel

Det følger med en tilkoblingskabel med 3,5mm jack-plugg, som passer i alle 3 signalinnganger.



3. Komme i gang

Still inn Huskoden

Alle FlexiBlink varslingsprodukter som du har i boligen må stilles inn med lik Huskode. Skyv knappene i Huskodevelgeren til et tilfeldig valgt mønster. Benytt gjerne det medfølgende verktøyet som sitter i lokket.



Huskodevelger
(fabrikkinstilling)

Velg funksjon (ID-velger)

UNI10 kan varsle mange forskjellige typer hendelser. Vri på Funksjonsvelgeren til den posisjonen som passer til det som skal varsles i mottakerne. Benytt gjerne den korte enden på det medfølgende verktøyet som sitter i lokket.



Funksjonsvelger
(fabrikkinstilling)

ID	Varsler om	Signal-type
0	Brannklokke/-sentral	Alarm
1	Komfyrvakt	Alarm
2	Timer / varselur	Alarm
3	Gass-alarm	Alarm
4	Innbruddsalarm	Alarm
5	Vannlekkasje	Alarm
6	Sykesignal 1	Daglig
7	Sykesignal 2	Alarm
8	Dørklokke OG Porttelefon (Benytt inngang 1 og 3)	Daglig
9	Dørklokke 2	Daglig
A	Porttelefon	Daglig
B	Passasje 1 (voksen)	Daglig
C	Passasje 2 (voksen)	Daglig
D	Passasje 1 (barn)	Daglig
E	Passasje 2 (barn)	Daglig
F	Epilepsialarm	Alarm

Tilkobling

Bruk den medfølgende ledningen. Rød leder går til tuppen på jack-pluggen.

AC/DC-kilder

Signalkilder med spenningssignal kobles til inngang nr. 1 eller 2. Inngang nr. 1 er polaritetsavhengig for DC-spenning og krever + på rød leder for å varsle. (Dette er nyttig for tilkobling til brannalarmsystem som benytter polaritetsvending ved alarm.)

Kontakt-kilder

Trykk-knapper og relé-signaler kobles til inngang nr. 3.

Montering

UNI10 monteres normalt på vegg med den medfølgende borrelåstapen. Benytt den medfølgende spritservietten for å rengjøre veggen. Trykk limflatene hardt på plass i minst 10 sekunder.

Alternativt kan enheten festes med skruer til veggen gjennom festehullet under batteriet.



Forsiktig

Vær forsiktig når du skrur inn skruen slik at den omkringliggende hvite platen ikke skades.

Sette inn batteriet

Sett inn batteriets kontakt som vist i figuren til høyre.

Ved tilkobling av batteri kan UNI10 blinke grønt i

opptil et par minutter mens batteriet klargjøres for lang tids bruk.



Før ledningen i en bue inn i åpningen og legg inn batteriet.



Tips

Skriv inn dato på batteri-lappen i lokket når batteriet ble koblet til.



Tips

Trykk på test-knappen for å verifisere at enheten fungerer og at det varsler i mottakerne som tilsiktet.



Forsiktig

Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes eller brennes.

4. I bruk

Når enheten er i drift, vises status i lysindikatoren på framsiden:

<i>Slukket</i>	Stand-by
<i>Grønt</i>	Varsel sendes
<i>Blinkende</i>	
<i>rødt/grønt</i>	Bytt batteri

5. Viktig informasjon

- Produktet kan rengjøres med en myk lett fuktet klut.
- Produktet er for innendørs bruk.
- Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteribytte hvis du har mottakere som viser dette.

Resirkulering

Produktet og batteriet skal ikke kastes sammen med restavfall.



Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

6. Sikkerhet

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder.

Produktet må ikke kortsluttes eller skruses fra hverandre.

Brukerinnstillingene finnes ved å åpne lokket.

Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes, brennes eller lades opp.

7. Tekniske data

Dim. (bxhxd):	69x133x27mm
Vekt m/ batteri:	140 g
Batteri:	Litium 3 V
Sendereffekt:	10 mW e.r.p.
Temperatur:	-10 °C - +40 °C

Radiofrekvens: 142,475 MHz

Bruksbegrensninger:



Kun tillatt benyttet i Norge

8. Samsvarserklæring

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:

www.vestfoldaudio.no/samsvar

9. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Det varsler ikke i mottakere	UNI10 får ikke signal fra kilden / det lyser ikke grønt.	Trykk på Testknappen og sjekk om varselet kommer fram.
	Tilkoblingen til signalkilden feiler	Kontroller tilkobling til signalkilden
	Feil inngang er benyttet	Kontroller at kilden gir riktig signal til valgt inngang.
	Batteriet i UNI10 er tomt / det blinker rødt.	Bytt batteri.
	UNI10 mangler batteri	Sett inn batteri.
	Avstanden mellom UNI10 og mottaker er for stor.	Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn en repeater.
Det lyser ikke grønt når signalet aktiveres.	UNI10 oppfatter ikke signalet.	Kontroller at kilden gir riktig signal til valgt inngang.
Det varsler med feil signal i mottakere.	Funksjonsvelger (ID) står i feil posisjon.	Skru funksjonsvelger til riktig posisjon.
Det blinker rødt/grønt i UNI10	Batteriet i UNI10 er snart tomt.	Bytt batteri

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.



Vestfold Audio AS
Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord
www.vestfoldaudio.no
tel. +47 33 47 33 47

