

# Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale.

## AURORA-L



# Brukerhåndbok

---

# Innholdsfortegnelse

---

<b>1. Innledning</b>	<b>3</b>
<b>2. Oversikt</b>	<b>3</b>
I pakken	3
Utvendig	4
Under frontlokk	4
Baksiden	4
<b>3. Komme i gang</b>	<b>4</b>
Plassering	4
Tilkobling	4
Sammenkoble enheter	5
Sammenkoble første gang	5
Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system	5
Sammenkobling mislykkes	5
Avbryte sammenkobling	5
Nullstille sammenkoblingen	6
<b>4. Daglig bruk</b>	<b>6</b>
Varsling	6
Justere volum	6
Meldinger om batteribytte	6
<b>5. Utvidede funksjoner</b>	<b>6</b>
Velge funksjoner	6
Velge modus	7
<b>6. Viktig informasjon</b>	<b>8</b>
Bruksbegrensninger	8
Resirkulering	8
<b>7. Sikkerhet</b>	<b>8</b>
<b>8. Tekniske data</b>	<b>8</b>
<b>9. Samsvarserklæring</b>	<b>8</b>
<b>10. Feilsøking</b>	<b>9</b>

## 1. Innledning

---

AURORA er en mottaker/varsler som tar imot trådløse signaler fra FlexiBlink LIFE

detektorer/sendere montert i boligen din.

FlexiBlink LIFE benyttes for å varsle om alvorlige hendelser som brannalarm og komfyrvakt så vel som daglige hendelser som dørklokke, telefon og andre relevante hendelser.

Varsling blir utløst når f.eks. en FlexiBlink LIFE Røykvarsler detekterer røyk eller en Telefonsender oppfatter at det ringer.

Du kan ha så mange varslingsmottakere og sendere som du trenger for sikkerhet og varsling.

AURORA kan også melde fra med talemelding hvor brannalarmen er utløst. Det er viktig hvis du har flere røykvarslere i huset. Den gir også beskjed når sendere trenger batteribytte.

AURORA har innebygget nabovarslingsfunksjon, som muliggjør brannsikkerhet mellom boenheter. Dette kan settes opp ved hjelp av en IRIS LIFE.

AURORA er monteringsfri – batterieliminatoren settes i kontakten på veggen.


## 2. Oversikt

---

### I pakken



AURORA med krybbe og festebrakett for vegg

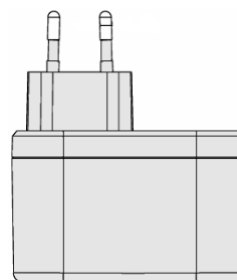

Strømforsyning


## Utvendig



Figur 1 Framsiden

- ① Lys (topp og bunn)
- ② Skjerm
- ③ Volumkontroll
- ④ Spor for åpning av frontlokk
- ⑤ Krybbe


## Under frontlokk

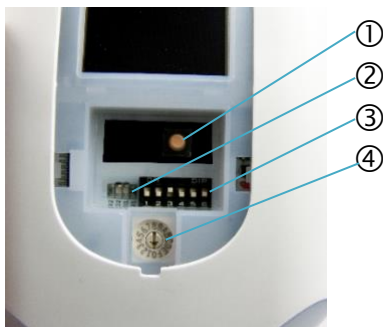

Figur 2 Under frontlokk

- ① LIFE-knapp
- ② Lysindikator
- ③ Funksjonsbrytere
- ④ Modusbryter

## Baksiden

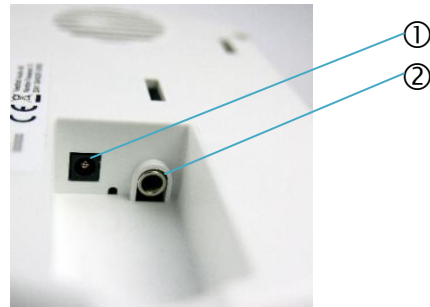

Figur 3 Baksiden

- ① Strømtilkobling
- ② Linjeutgang for lyd

## 3. Komme i gang

### Plassering

AURORA kan stå på et bord i den medfølgende sokkelen, eller festes på vegg med den medfølgende braketten.



### Tips

Ikke monter braketten før du har kontrollert at strømledningen er lang nok.

### Tilkobling


Sett strømforsyningen i kontakten på vegg og plugg ledningen inn i AURORA

## Sammenkoble enheter


LIFE-knappen finnes under frontlokket på AURORA. Se figur 2 på forrige side.

### Sammenkoble første gang


1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på en av enhetene.

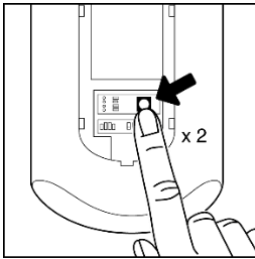

2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den andre enheten.

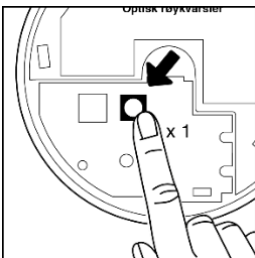

3. Indikatorlampene på begge enhetene blinker grønt.

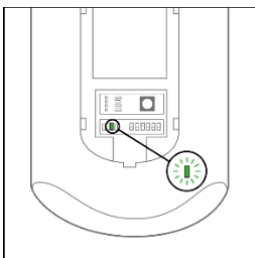

4. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.

5. Enhetene er klare til bruk. Trykk på «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.

### Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system

1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på enhet fra eksisterende system.
2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den nye enheten.
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
4. Enhetene er klare til bruk.

Trykk på «Test»-knappen for å kontrollere sammenkoblingen.


### Sammenkobling mislykkes

Dersom du får rødt lys i den nye enheten ved sammenkobling, mislykkes den.

Vennligst nullstill enheten for å sammenkoble på nytt. Se under.

### Avbryte sammenkobling

For å avbryte sammenkoblingen, trykk **én** gang på LIFE-knappen.

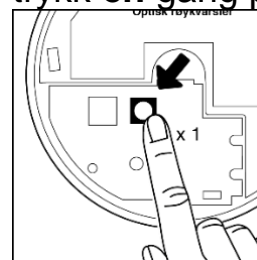

## Nullstille sammenkoblingen

Trykk **fem** ganger på LIFE-knappen på enheten hvor sammenkoblingen skal slettes. Dette bekreftes med røde og grønne blink.

Dersom du ønsker å endre funksjoner i produktet, se kapittel 5.

## 4. Daglig bruk

### Varsling

Hendelser som oppstår i boligens FlexiBlink LIFE-anlegg varsles automatisk med lyd, blinkende lys og bilde – samt tale dersom dette er aktivert.

### Justere volum

Benytt volumkontroll på høyre side. Juster opp for høyere og ned for lavere lyd. Lydnivået indikeres samtidig på skjermen.



#### **Viktig**

Alarmer varsles alltid med full lydstyrke

### Meldinger om batteribytte

Dersom en FlexiBlink LIFE-sender får lavt batteri, varsles dette i AURORA i god tid før batteriet er helt tomt. AURORA viser symbolet for varsling etterfulgt av et bilde av et batteri. Dette veksler frem og tilbake helt til batteriet er byttet på senderen, og senderen er aktivert eller testet.

## 5. Utvidede funksjoner

AURORA er utstyrt med en funksjonsbryter og en modusbryter bak frontlokket. Du trenger ikke endre på fabrikkinnstillingen med mindre du har behov for de funksjonene som blir forklart i dette kapitlet.



**Funksjonsbryter**  
(fabrikkinnstilling)



**Modusbryter**  
(fabrikkinnstilling)

### Velge funksjoner



#### **Daglige signaler/Kun alarmer – bryter 1**

Dersom du ønsker at AURORA ikke skal varsle deg om daglige hendelser som for eksempel dørklokke og telefon, kan du skyve *bryter 1* opp.

AURORA vil nå kun varsle *alarmer* – forhold av sikkerhetsmessig karakter (komfyrvakt, røykvarsler o.l.).



#### **Nabovarsling – bryter 2**

For å få nabovarsling i FlexiBlink LIFE-systemet, må det benyttes en IRIS LIFE for oppsett. Da settes varslingsmottakerne opp til å varsle ved brann eller innbrudd hos aktuelle naboer.

Dersom du ikke ønsker at AURORA skal varsle fra naboer, kan du skyve *bryter 2* opp. AURORA blir da koblet fra nabovarsling.

NB! *Nabovarsling går kun på alarmsignaler, og ikke for daglige signaler som for eksempel telefon og dørklokke.*



### Tale – bryter 3

*Bryter 3 er for å slå tale på/av. Tale er som standard deaktivert. Ved å skyve bryter 3 ned, aktiveres talefunksjonen. Da får man varsling med både varslingslyd og beskrivende tale. Brannvarsel spilles alltid av med tale.*



### Skjermlås – bryter 5

*Bryter 5 er for låsing av volum. Ved å skyve bryter 5 opp, låses volum til gjeldende nivå. Denne innstillingen holdes selv etter strømbrudd, og ved forsøk på volumjustering vil det komme beskjed på skjermen at volumet er låst.*

Kombinasjoner av funksjonene kan gjøres fritt etter behov med bryter 1 til 3 og 5. Bryter 4 og 6 er reservert for fremtidige behov.

## Velge modus



### (F) Installasjons- modus

Ved å sette venderen i posisjon F (vist på figur) settes AURORA i installasjonsmodus. Dette medfører at siste mottatte varsel vises i displayet helt til en eventuell ny varsling inntreffer.

Dette er spesielt nyttig ved installasjon av dørklokke/porttelefonsender. Husk å sette bryter tilbake til 0 når installasjonen er utført.



### (1) Lyslappett med display

Ved å sette venderen i posisjon 1 (vist på figur), settes AURORA opp som lyslappett. Dette medfører at AURORA viser varslingsymbol i display og blinker i lampene, men lyden er avslått. Lyd er fortsatt tilgjengelig via linjeutgang.



### (2) Akustisk varsler med display

Ved å sette venderen i posisjon 2 (vist på figur), settes AURORA opp som akustisk varsler med display. Dette medfører at AURORA viser varslingsymbol i display og spiller av varslingslyd og eventuell tale, men det vekslende lyset i lampene er avslått

## 6. Viktig informasjon

---

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut.

Produktet er for innendørs bruk i ikke-kondenserende miljø.

Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteribytte hvis du har mottakere som viser dette.

### Bruksbegrensninger:

Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

### Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.



## 7. Sikkerhet

---

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder.

Produktet må ikke skrus fra hverandre.

## 8. Tekniske data

---

Dim. (bxhxd): 92x150x37mm  
(uten veggfeste og fot)

Vekt: 200 gram  
(uten veggfeste, fot og strømforsyning)

Radiofrekvens: 868.1 – 869.85 MHz

Sendereffekt: 10 mW e.r.p.

Driftsspenning: 15 VDC

Temperatur: -10 °C - +40 °C

## 9. Samsvarserklæring

---

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:

[www.vestfoldaudio.no/samsvar](http://www.vestfoldaudio.no/samsvar)



## 10. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
<b>Får ikke sammenkoblet – indikatorlampe lyser rødt</b>	Sammenkobling mislykkes pga. for lang avstand	Flytt enhetene nærmere hverandre og prøv igjen
	Enheteren er allerede sammenkoblet med andre enheter.	Nullstill sammenkobling. Vennligst prøv igjen.
	Feil rekkefølge på sammenkoblingen	Trykk <b>to</b> ganger på LIFE-knappen på en enhet i det eksisterende system, og kun <b>én</b> gang på den nye enheten
<b>Indikatorlampen fortsetter å blinke grønt etter sammenkobling</b>	Er det trykket to ganger på den ene enhetens LIFE-knapp?	Trykk en gang til på LIFE-knappene for å avbryte. Prøv igjen.
	Leter fortsatt etter nye enheter.	Trykk en gang til på LIFE-knappen for å avbryte. Prøv igjen.
<b>Etter TEST-trykk, lyser senderen rødt</b>	Enheteren er ikke sammenkoblet	Koble enheten til en mottaker
<b>Etter TEST-trykk, lyser senderen lenge grønt, deretter lenge oransje</b>	Ingen mottaker er sammenkoblet med senderen	Sjekk at det er en mottaker i systemet. Nullstill enheten. Koble til på nytt. Prøv igjen
<b>Varsling mottas ikke</b>	Ikke sammenkoblet	Koble ut siste enhet og koble sammen igjen
	Manglende dekning	Forsøk å flytte enhetene nærmere hverandre eller sett opp repeater
	Tomt batteri i sender	Bytt batteri i sender
	Sender virker ikke	Les bruksanvisning til sender
	Volum justert ned	Forsøk å justere opp volum
<b>Varsling mottas, men ingen lyd</b>	Lyd avslått	Kontroller at modusbryter ikke står i posisjon 1
	Tale avslått	Kontroller at tale er slått på (funksjonsbryter 3)
<b>Varsling mottas med lyd, men ingen tale</b>	Lys avslått	Kontroller at modusbryter ikke står i posisjon 2.
<b>Varsling mottas, men ingen lysblink</b>	Enheteren er sammenkoblet feil.	Nullstill sammenkoblingen på enheten og legg til igjen.
<b>AURORA varsler hendelser, men ingen sendere er aktivert i boligen.</b>	Nabovarsel	Kontroller at funksjonsbryteren for nabovarsel står korrekt.

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddelsentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til [post@vestfoldaudio.no](mailto:post@vestfoldaudio.no) eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.

Blank side

Notater:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



Vestfold Audio AS



Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord

[www.vestfoldaudio.no](http://www.vestfoldaudio.no)

Tlf.: +47 33 47 33 47