

Mobiltelefonsender

MOBIL10-L



Brukerhåndbok

Innholdsfortegnelse

<u>1. Innledning</u>	3
<u>2. Oversikt</u>	3
Utvendig	3
Batteriet	3
Under lokket	3
<u>3. Komme i gang</u>	4
Sammenkoble enheter	4
Sammenkoble første gang	4
Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system	4
Sammenkobling mislykkes	4
Avbryte sammenkobling	5
Nullstille sammenkoblingen	5
Tilkobling	5
Velg funksjon (ID-velger)	5
Montering	5
EKOM	6
Sette inn batteriet	6
<u>4. I bruk</u>	7
<u>5. Viktig informasjon</u>	7
Bruksbegrensninger:	7
Resirkulering	7
<u>6. Sikkerhet</u>	7
<u>7. Tekniske data</u>	7
<u>8. Samsvarserklæring</u>	7
<u>9. Feilsøking</u>	8

1. Innledning

Mobiltelefonsender MOBIL10-L er et produkt i FlexiBlink LIFE-serien. Den benyttes for å varsle til FlexiBlink LIFE mottakere at mobiltelefonen ringer.


FlexiBlink LIFE er et trådløst varslingssystem med sendere og mottakere. Systemet kan brukes til de fleste varslingsoppgaver innen en bolig eller på en arbeidsplass, og systemet er enkelt å sette opp. Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer telefonen på seg.

MOBIL10-L har innebygget funksjoner for viderevarsling av flere telefonvarslinger. Brukeren kan også justere følsomhetsnivåer for å tilpasse ringevolumet.

MOBIL10-L benytter et spesialbatteri med svært lang levetid.

2. Oversikt

Utvendig

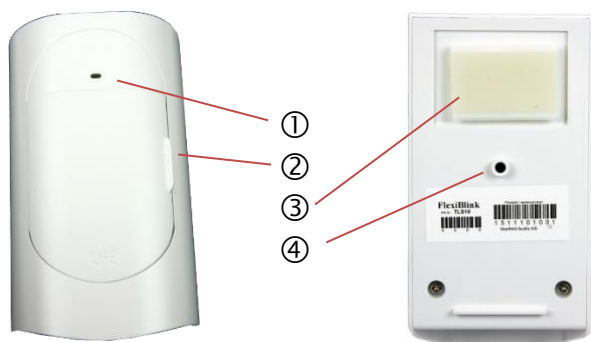

Figur 1 Framside

Figur 2 Bakside



Figur 3 Bunn med jack på ledning


- ① Lysindikator
- ② Lokk
- ③ Borrelås-tape
- ④ Hull for skruefeste
- ⑤ Kabel med jack-inngang

Batteriet

Det medfølger et høykapasitets litium-batteri (Varenr. 9100100934), som vil sikre drift av enheten i mange år. Batteriet må ikke lades opp.



Under lokket

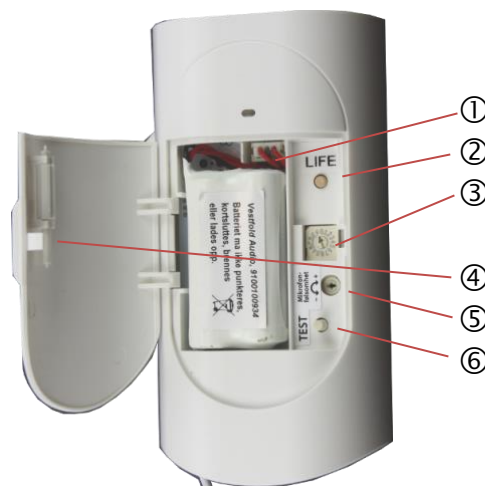

Figur 4 Under lokket

- ① Batterikontakt
- ② LIFE-knapp (sammenkobling)
- ③ Funksjonsvelger (ID-velger)
- ④ Verktøy for innstillinger
- ⑤ Mikrofonfølsomhetshjul
- ⑥ Testknapp

3. Komme i gang


Sammenkoble enheter

Alle FlexiBlink LIFE enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles ved å trykke på LIFE-knappen.


Den finnes under lokket foran på MOBIL10-L. Se figur 4 på forrige side.

Sammenkoble første gang


1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på en av enhetene.

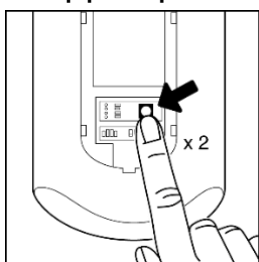

2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den andre enheten.

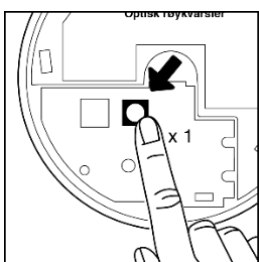

3. Indikatorlampene på begge enhetene blinker grønt.

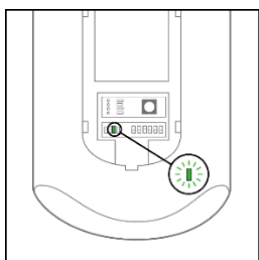

4. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
5. Enhetene er klare til bruk. Trykk på «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.

Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system

1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på enhet i eksisterende system.
2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den *nye* enheten.
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
4. Enhetene er klare til bruk.

Trykk på «Test»-knappen for å kontrollere sammenkoblingen.


Sammenkobling mislykkes

Dersom du får rødt lys i den nye enheten ved sammenkobling, mislykkes den.

Da må du nullstille enheten for å sammenkoble på nytt.

Avbryte sammenkobling

For å avbryte sammenkoblingen, trykk **én** gang på LIFE-knappen.

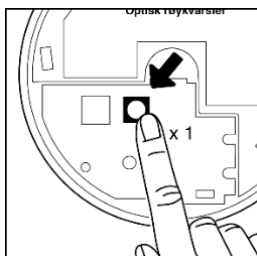

Nullstille sammenkoblingen

Trykk **fem** ganger på LIFE-knappen på enheten hvor sammenkoblingen skal slettes. Dette bekreftes med røde og grønne blink.

Tilkobling

Bruk den monterte ledningen på mobiltelefonsenderen. Sett pluggen i hodetelefonutgangen på mobilen

Mobilens ringetonevolum settes til minimum halv styrke. Prøv ut hvilke ringetoner MOBIL10-L oppfatter og juster volumet til MOBIL10-L varsler. Benytt ID-venderen til å sette rett følsomhetsnivå. Følsomhetshjulet Fig. 4 ⑤ kan også justeres opp eller ned for å finjustere varslingsnivået for MOBIL10-L.



Forsiktig

Vær forsiktig når du skrur inn skruen slik at den omkringliggende hvite platen ikke skades.

Velg funksjon (ID-velger)

MOBIL10-L har innebygget flere varslinger.

Vri på Funksjonsvelgeren til den posisjonen som passer til det som skal varsles i mottakerne. Benytt gjerne den korte enden på det medfølgende verktøyet som sitter i lokket.



Funksjonsvelger
(fabrikkinnstilling)

ID	Varsler om	Følsomhet
0	Mobiltelefon	Normal
1	Mobiltelefon Nr. 1	Normal
2	Mobiltelefon Nr. 2	Normal
3	Mobiltelefon Nr. 3	Normal
4	Mobiltelefon Nr. 4	Normal
5	Mobiltelefon Nr. 5	Normal
6	Mobiltelefon	Lav
7	Mobiltelefon Nr. 1	Lav
8	Mobiltelefon Nr. 2	Lav
9	Mobiltelefon	Høy
A	Mobiltelefon Nr. 1	Høy
B	Mobiltelefon Nr. 2	Høy
C	Mobiltelefon +EKOM	Normal
D	Mobilt. Nr. 1 +EKOM	Normal
E	Mobilt. Nr. 2 +EKOM	Normal
F	EKOM	Normal

Montering

MOBIL10-L monteres normalt på vegg med den medfølgende borrelås-tapen. Benytt den medfølgende spritservietten for å rengjøre vegg. Trykk limflatene hardt på plass i minst 10 sekunder.

Alternativt kan enheten festes med skruer til vegg gjennom festehullet under batteriet.

EKOM

EKOM er et sett spesielle lyder som mobiltelefonsenderen kjenner igjen og vil varsle spesifikk hendelse. Ved å benytte disse spesielle lydene på mobiltelefonen eller pc, kan man skille på varslinger som SKYPE, EPOST, SMS, VIP Samtale. Lydene kan man laste ned fra m.flexiLIFE.no, eller ta kontakt med Vestfold Audio.

Sette inn batteriet

Sett inn batteriets kontakt som vist i figuren til høyre. Trykk gjerne en gang på testknappen slik at initiering og kontroll av batteriet utføres.



Før ledningen i en bue inn i åpningen og legg inn batteriet.



Tips

Trykk på testknappen for å verifisere at enheten fungerer og at det varsler i mottakerne som tilsiktet. Første gangen etter batterimontering, kan det være nødvendig å trykke på nytt etter en liten pause.



Forsiktig

Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes eller brennes.

4. I bruk

Når enheten er i drift, vises status i lysindikatoren på framsiden:

<i>Slukket</i>	Stand-by
<i>Grønt</i>	Varsel sendes
<i>Blinkende rødt/grønt</i>	Bytt batteri

5. Viktig informasjon

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut.

Produktet er for innendørs bruk i ikke-kondenserende miljø.

Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteribytte hvis du har mottakere som viser dette.

Bruksbegrensninger:

Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

Resirkulering

Produktet og batteriet skal ikke kastes sammen med restavfall.

Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.



6. Sikkerhet

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder.

Produktet må ikke skrues fra hverandre. Brukerinnstillingene finnes ved å åpne lokket.

Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes, brennes eller lades opp.

7. Tekniske data

Dim. (bxhxd):	69x133x27mm
Vekt m/ batteri:	140 g
Batteri:	Litium 3 V
Sendereffekt:	10 mW e.r.p.
Temperatur:	-10 °C - +40 °C
Radiofrekvens:	868.1–869.85 MHz

8. Samsvarserklæring

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:

www.vestfoldaudio.no/samsvar

9. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Det varsler ikke i mottakere	MOBIL10-L får ikke signal fra kilden / det lyser ikke grønt.	Trykk på Testknappen og sjekk om varselet kommer fram.
	Pluggen er ikke koblet skikkelig til	Sjekk at pluggen er festet ordentlig
	Lyden er ikke høy nok	Skru opp volumet på ringelyden, velg eventuelt en annen ringelyd
	Avstanden mellom MOBIL10-L og mottaker er for stor.	Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn en repeater.
	Batteriet i MOBIL10-L er tomt / det blinker rødt.	Bytt batteri.
Sammenkobling fungerer ikke	MOBIL10-L mangler batteri	Sett inn batteri.
	Begge enhetene har vært sammenkoblet tidligere. Det blinker rødt.	Trykk 5 ganger på LIFE-knappen på den enheten som skal legges til.
Etter TEST-trykk, lyser senderen rødt	Enheten er ikke sammenkoblet med noen	Koble enheten til en mottaker
Etter TEST-trykk, lyser senderen lenge grønt, deretter lenge oransje	Ingen mottaker er sammenkoblet senderen	Sjekk at det er en mottaker i systemet. Nullstill enheten. Koble til på nytt. Prøv igjen
Oransje, korte blink i senderen	Volumet er for lavt	Skru opp volumet eller bytt til annen ringelyd. Endre eventuelt følsomheten vha. ID-velgeren.
Oransje blink	Telefonen ringer	Senderen blinker oransje når telefonen ringer. Lyser grønt når den sender.
Får ikke koblet til mobilen	Annen lydutgang på mobilen	Senderen støtter 3.5 mm Jack-plugg. Sjekk eventuelt med leverandør om det finnes en overgang til 3.5 mm Jack.
Det varsler med feil signal i mottakere.	Funksjonsvelger (ID) står i feil posisjon.	Skru funksjonsvelger til riktig posisjon.
Det varsler i senderen uten at mobilen ringer	Kan ha mottatt andre varsler med lyd på mobilen, f.eks. SMS, varsler, lite strøm.	Sjekk innstillingene på mobilen slik at disse ikke gir lyd.

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse. For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.



Vestfold Audio AS
Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord

www.vestfoldaudio.no

tel. +47 33 47 33 47

