

FlexiBlink
Life

Varenr. 1666

SKS-L

Sykesignalsender



Brukerhåndbok

Dok. nr.: 5989 A
Dato: 2019.03.21

Innholdsfortegnelse

<u>1. Innledning</u>	3
<u>2. Oversikt</u>	3
Utvendig	3
Batteriet	4
<u>3. Komme i gang</u>	4
Sammenkoble enheter	4
Sammenkoble første gang	4
Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system	4
Sammenkobling mislykkes	5
Avbryte sammenkobling	5
Montering	5
Tilkobling til ekstern knapp	5
<u>4. I bruk</u>	5
Funksjonskontroll	5
<u>5. Viktig informasjon</u>	6
Bruksbegrensninger	6
<u>6. Resirkulering</u>	6
<u>7. Tekniske data</u>	6
<u>8. Sikkerhet</u>	6
<u>9. Samsvarserklæring</u>	6
<u>10. Feilsøking</u>	7

1. Innledning


Sykesignalsender SKS-L er et produkt i FlexiBlink LIFE -serien. SKS-L varsler til FlexiBlink LIFE mottakere.

SKS-L har tre knapper som sender forskjellige signaler/ meldinger til FlexiBlink LIFE mottakerne.

Mottakeren IRIS LIFE med display viser symboler knyttet til den enkelte meldingen, samtidig som den varsler med lys og lyd. Andre FlexiBlink LIFE mottakere varsler med lys, lyd og vibrasjon, avhengig av produktfunksjoner


2. Oversikt

Utvendig

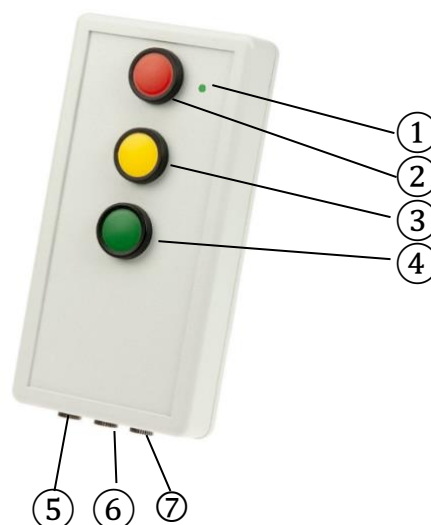

Figur 1 Framside

- ① Lysdiode
- ② Knapp – Hjelp meg nå!
- ③ Knapp – Hjelp meg snart!
- ④ Knapp – Assistanse ønskes
- ⑤ Signalinngang – Hjelp meg nå!
- ⑥ Signalinngang – Hjelp meg snart!
- ⑦ Signalinngang – Assistanse ønskes

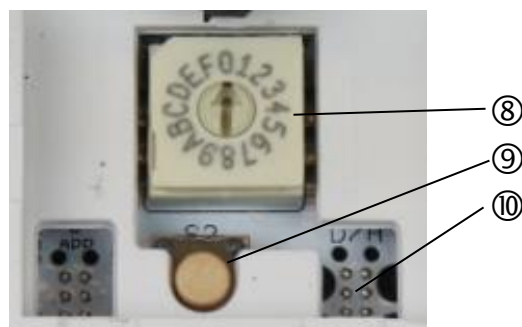

Figur 2 Bakside

- ⑧ Funksjonsvelger (ID-velger)
- ⑨ LIFE-knapp
- ⑩ Lysindikator

Batteriet

Det er montert et høykapasitets litium-batteri (Varenr. 9100100934) i enheten. Batteriet må ikke lades opp.




3. Komme i gang

Sammenkoble enheter


Alle FlexiBlink LIFE enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles ved å trykke på LIFE-knappen. Den finnes under lokket på baksiden av SKS-L.

Sammenkoble første gang


1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på en av enhetene.

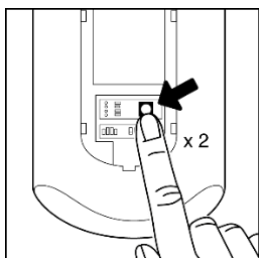

2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den andre enheten.

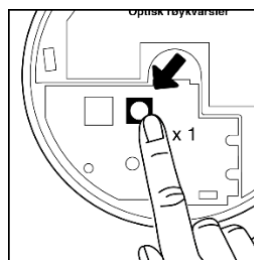

3. Indikatorlampene på begge enhetene blinker grønt.

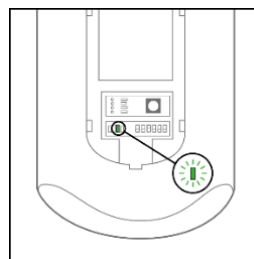

4. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
5. Enhetene er klare til bruk. Trykk på «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.

Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system

1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på enhet i eksisterende system.
2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den *nye* enheten.
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
4. Enhetene er klare til bruk.

Trykk på «Test»-knappen for å kontrollere sammenkoblingen.


Sammenkobling mislykkes

Dersom du får rødt lys i den nye enheten ved sammenkobling, mislykkes den.

Da må du nullstille enheten for å sammenkoble på nytt.

Avbryte sammenkobling

For å avbryte sammenkoblingen, trykk **én** gang på LIFE-knappen.

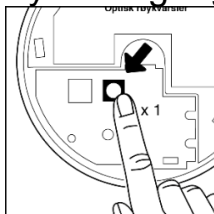

Montering

SKS-L kan monteres på vegg eller bord med den medfølgende borrelås-tapen. Benytt den medfølgende spritservietten for å rengjøre veggen. Trykk limflatene hardt på plass i minst 10 sekunder.

Tilkobling til ekstern knapp

Tilkoblingskontaktene i bunnen på SKS-L er for tilkobling til eksterne trykknapper.



Tips

Trykk på en av knappene for å verifisere at enheten fungerer og at det varsler i mottakerne som tilsiktet.

4. I bruk

SKS-L gir individuelle varsler avhengig av hvilken knapp eller inngang som benyttes. Se tabell under for hvilke varslinger som sendes.

Inngang nr.	Knapp Farge	Varsel
1	Rød	Hjelp meg nå
2	Gul	Hjelp meg snart
3	Grønn	Assistanse ønskes

Funksjonskontroll

På SKS-L finner du en indikatorlampe. Den er vanligvis slukket.

Når Sykesignalsenderen sender meldinger, blinker lampen grønt. Ved feil vil indikatorlampen blinke rødt.

5. Viktig informasjon

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut.
Produktet er for innendørs bruk i ikke-kondenserende miljø.
Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteribytte hvis du har mottakere som viser dette.

Bruksbegrensninger

Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

6. Resirkulering

Produktet og batteriet skal ikke kastes sammen med restavfall.



Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.



Forsiktig

Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes eller brennes.

7. Tekniske data

Dim. (bxhxd): 65x130x30mm
Vekt m/ batteri: 140 g
Batteri: Litium 3 V
Sendereffekt: 10 mW e.r.p.
Temperatur: -10 °C - +40 °C
Radiofrekvens: 868.1–869.85 MHz

8. Sikkerhet

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder.

Produktet må ikke kortsluttes eller skrues fra hverandre.

Brukerinnstillingene finnes ved å åpne lokket.

Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes, brennes eller lades opp.

9. Samsvarserklæring

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:

www.vestfoldaudio.no/samsvar

10. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Det varsler ikke i mottakere	SKS-L får ikke signal fra kilden / det lyser ikke grønt.	Trykk på en av knappene og sjekk om varselet kommer fram.
	Tilkoblingen til signalkilden feiler	Kontroller tilkobling til signalkilden
	Batteriet i SKS-L er tomt / det blinker rødt.	Bytt batteri.
	Avstanden mellom SKS-L og mottaker er for stor.	Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn en repeater.
	Enhetene er ikke sammenkoblet.	Utfør sammenkobling.
Sammenkobling fungerer ikke	Begge enhetene har vært sammenkoblet tidligere. Det blinker rødt.	Trykk 5 ganger på LIFE-knappen på den enheten som skal legges til.
Det varsler med feil signal i mottakere.	Tilkoblet sensor er i feil konnektor	Flytt sensoren til rett konnektor
Etter TEST-trykk, lyser senderen lenge rødt	Enheten er ikke sammenkoblet med noen	Koble enheten til en mottaker
Etter TEST-trykk, lyser senderen lenge grønt, deretter lenge oransje	Ingen mottaker er sammenkoblet senderen	Sjekk at det er en mottaker i systemet. Nullstill enheten. Koble til på nytt. Prøv igjen
Det lyser ikke grønt når signalet aktiveres.	SKS-L oppfatter ikke signalet.	Kontroller at kilden gir riktig signal til inngangen.
Det blinker rødt/grønt i SKS-L	Batteriet i SKS-L er snart tomt.	Bytt batteri

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.



Vestfold Audio AS
Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord
www.vestfoldaudio.no
tel. +47 33 47 33 47

