

FlexiBlink

Varenr. 1640

Telefonsender

TLS10-L



Brukerhåndbok

Dok. nr.: 5961 A
Dato: 2019-03-20

Innholdsfortegnelse

<u>1. Innledning</u>	3
<u>2. Oversikt</u>	3
Utvendig	3
Batteriet	4
<u>3. Komme i gang</u>	4
Sammenkoble enheter	4
Sammenkoble første gang	4
Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system	5
Sammenkobling mislykkes	5
Avbryte sammenkobling	5
Velg funksjon (ID-velger)	5
Tilkobling	5
Montering	6
Bruk av repeater	6
Sette inn batteriet	6
<u>4. I bruk</u>	6
<u>5. Viktig informasjon</u>	7
Resirkulering	7
<u>6. Sikkerhet</u>	7
<u>7. Tekniske data</u>	7
<u>8. Samsvarserklæring</u>	7
<u>9. Feilsøking</u>	8

1. Innledning

Telefonsender TLS10-L er et produkt i FlexiBlink LIFE-serien. Den benyttes for å varsle til FlexiBlink LIFE mottakere at telefonen ringer.


FlexiBlink LIFE er et trådløst varslingssystem med sendere og mottakere. Systemet kan brukes til de fleste varslingsoppgaver innen en bolig eller på en arbeidsplass, og systemet er enkelt å sette opp.

Telefonsenderen aktiveres av ringesignal på analog telefonlinje eller på *analog utgang* på bredbåndsmodemet.

TLS10-L benytter et spesialbatteri med svært lang levetid.


2. Oversikt

Utvendig

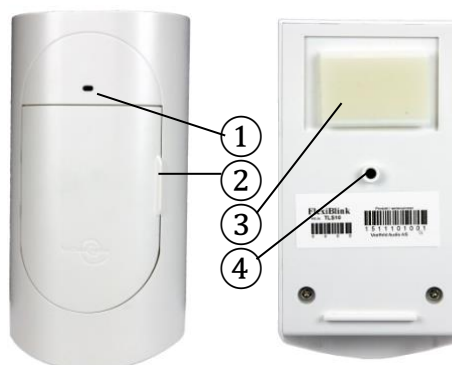

Figur 1 Forside


Figur 2 Bakside

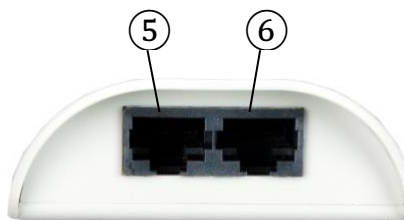

Figur 3 Bunn med telefontilkoblinger

- ① Lysindikator
- ② Lokk
- ③ Borrelås-tape
- ④ Hull for skruefeste
- ⑤ Telefonkontakt
- ⑥ Telefonkontakt

Under lokket

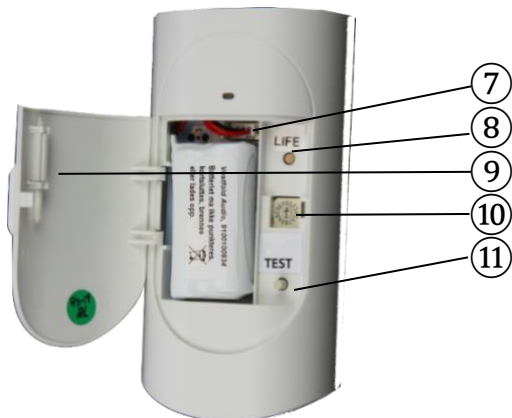

Figur 4 Under lokket

- ⑦ Batterikontakt
- ⑧ LIFE-knapp (sammenkobling)
- ⑨ Verktøy for innstillinger
- ⑩ Funksjonsvelger (ID-velger)
- ⑪ Testknapp

Batteriet

Det medfølger et høykapasitets litium-batteri (Varenr. 9100100934), som vil sikre drift av enheten i mange år. Batteriet må ikke lades opp.



3. Komme i gang


Sammenkoble enheter

Alle FlexiBlink LIFE enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles ved å trykke på LIFE-knappen.


Den finnes under lokket foran på TLS10-L. Se figur 4.

Sammenkoble første gang


1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på en av enhetene.

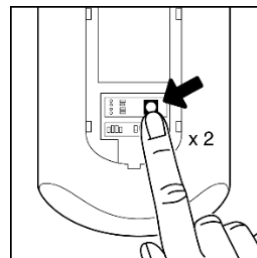


2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den andre enheten.

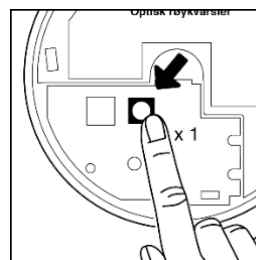

3. Indikatorlampene på begge enhetene blinker grønt.

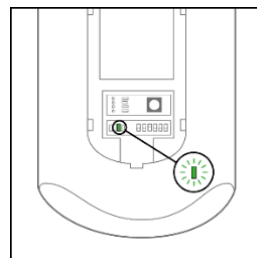

4. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
5. Enhetene er klare til bruk.

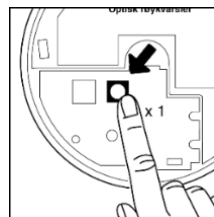

Trykk på «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.

Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system

1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på enhet i eksisterende system.
2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den *nye* enheten.
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
4. Enhetene er klare til bruk.

Trykk på «Test»-knappen for å kontrollere sammenkoblingen.

Sammenkobling mislykkes

Dersom du får rødt lys i den nye enheten ved sammenkobling, mislykkes den.

Da må du nullstille enheten for å sammenkoble på nytt.

Avbryte sammenkobling

For å avbryte sammenkoblingen, trykk **én** gang på LIFE-knappen.

Velg funksjon (ID-velger)

TLS10-L kan varsle flere telefoner. Vri Funksjonsvelgeren til den posisjonen som passer til det som skal varsles i varslingsmottakerne.

Benytt gjerne den korte enden på det medfølgende verktøyet som sitter i lokket.



Funksjonsvelger (fabrikkinstilling)

ID	Varsler om
0	Telefon
1	Telefon Nr. 1
2	Telefon Nr. 2
3	Telefon Nr. 3
4	Telefon
5	Telefon Nr. 1
6	Telefon Nr. 2
7	Telefon Nr. 3

Tilkobling

Den medfølgende ledningen kobles mellom telefonuttaket i veggen og den ene telefonkontakten i telefonsenderen. Ledningen fra telefonen settes inn i den andre telefonkontakten i senderen. ID-valg 0-3, registrerer når telefonen blir besvart. Denne funksjonen er avhengig av at spenningsnivået på telefonlinja er innenfor gitte grenser. Dersom en opplever ustabilitet med varslingen med ID-velgeren i disse posisjoner, bør ID-valg 4-7 benyttes.

Montering

TLS10-L monteres normalt på vegg med den medfølgende borrelås-tapen. Benytt den medfølgende spritservietten for å rengjøre vegg. Trykk limflatene hardt på plass i minst 10 sekunder.

Alternativt kan enheten festes med skrue til veggen gjennom festehullet under batteriet.



Forsiktig

Vær forsiktig når du skrur inn skruen slik at den omkringliggende hvite platen ikke skades.

Sette inn batteriet

Sett inn batteriets kontakt som vist i figuren til høyre.

Før ledningen i en bue inn i åpningen og legg inn batteriet.



Forsiktig

Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes eller brennes.



Tips

Trykk på test-knappen for å verifisere at enheten fungerer og at det varsler i mottakerne som tilsiktet.

4. I bruk

Når enheten er i drift, vises status i lysindikatoren på framsiden:

<i>Slukket</i>	Stand-by
<i>Grønt</i>	Varsel sendes
<i>Blinkende rødt/grønt</i>	Bytt batteri

Ringsignalet på analoge telefonlinjer varsler med 1 sekunds ringing, etterfulgt av 4 sekunder stillhet. Dersom det benyttes ID 4-7, kan det som følge av dette ta opp til 6 sekunder fra du tar telefonen, til varslingsmottakeren slutter å varsle.

5. Viktig informasjon

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut. Produktet er for innendørs bruk. Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteribytte hvis du har mottakere som viser dette.

Resirkulering

Produktet og batteriet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne



resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

6. Sikkerhet

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder. Produktet må ikke kortsluttes eller skrues fra hverandre. Brukerinnstillingene finnes ved å åpne lokket. Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes, brennes eller lades opp.

7. Tekniske data

Dim. (bxhxd): 69x133x27mm
Vekt m/ batteri: 140 g
Batteri: Litium 3 V
Sendereffekt: 10 mW e.r.p.
Temperatur: -10 °C - +40 °C
Radiofrekvens: 868.1–869.85 MHz

Bruksbegrensninger:



Kun tillatt benyttet i EU/EØS

8. Samsvarserklæring

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse: www.vestfoldaudio.no/samsvar

9. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Det varsler ikke i mottakere		Trykk på Testknappen og sjekk om varselet kommer fram.
	Ikke koblet til mellom vegg eller telefon	Sjekk at alle tilkoblingene er festet ordentlig
	Avstanden mellom TLS10-L og mottaker er for stor.	Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn en repeater (må ev
	Batteriet i TLS10-L er tomt / det blinker rødt/grønt.	Bytt batteri.
	TLS10-L mangler batteri	Sett inn batteri.
Sammenkobling fungerer ikke	Begge enhetene har vært sammenkoblet tidligere. Det blinker rødt.	Trykk 5 ganger på LIFE-knappen på den enheten som skal legges til.
Etter TEST-trykk, lyser senderen lenge rødt	Enheten er ikke sammenkoblet med noen	Koble enheten til en mottaker
Etter TEST-trykk, lyser senderen lenge grønt, deretter lenge oransje	Ingen mottaker er sammenkoblet senderen	Sjekk at det er en mottaker i systemet. Nullstill enheten. Koble til på nytt. Prøv igjen
Det varsler for kort tid	ID-velgeren står i pos. 0-3	Sett ID-velgeren i pos. 4-7
Det varsler med feil signal i mottakere.	Funksjonsvelger (ID) står i feil posisjon.	Skru funksjonsvelger til riktig posisjon.
Det blinker rødt/grønt i TLS10-L	Batteriet i TLS10-L er snart tomt.	Bytt batteri
Det varsler med feil signal i mottakere.	Funksjonsvelger (ID) står i feil posisjon.	Skru funksjonsvelger til riktig posisjon.

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.



Vestfold Audio AS
Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord

www.vestfoldaudio.no

tel. +47 33 47 33 47

