

Armbåndssender og -mottaker ARM-L



Brukerhåndbok

Innholdsfortegnelse

1. Innledning	3	4. Daglig bruk	7
2. Oversikt	3	Sende et varsel	7
3. Komme i gang	4	Motta et varsel	7
Lading	4	5. Viktig informasjon	7
Lysdiodene og knapp	4	6. Resirkulering	7
Lysdiodene og vibrasjoner	4	7. Tekniske data	7
Sammenkoble enheter	5	8. Feilsøking	8
Koble sammen en ARM i et FlexiBlink LIFE-system	5		
Benytte ARM for å sammenkoble en ny enhet til systemet	6		
Sammenkobling mislykkes	6		
Avbryte sammenkobling	6		
Nullstille sammenkoblingen	6		
Fabrikkinnstilling	6		
Dvalemodus	6		
Velg funksjon (ID-velger)	7		
Forlenge rekkevidden	7		

1. Innledning

ARM-L (ARM) er en assistansealarm for personer som har behov for å kunne tilkalle assistanse eller sende varslinger til andre. Den bæres diskret på håndleddet.

ARM er en kombinert sender med trykk-knapp og mottaker. Den sender varsling til andre ARM og FlexiBlink LIFE mottakere, og den varsler (med lys og vibrasjon) ved mottak av varsler fra andre ARM og FlexiBlink LIFE sendere. Det vibrerer med varierende vibrasjonsmønster når varsel mottas.

ARM kan også tilpasses for å starte fjernstyrt oppløsning av klokke på produktene IRIS LIFE, MÅNE LIFE og SOL LIFE, og for en rekke andre varslinger.


ARM vil vibrere når den mottar varslinger fra FlexiBlink LIFE sendere.

Nøkkeldata

- Enkel installasjon og bruk.
- Sprutsikker (dusj - ikke bad)
- Signalrekkevidde innen normal husstand
- Enkelt å tilpasse lengde på armbåndet
- God batterilevetid
- Oppladbar

2. Oversikt

I pakken

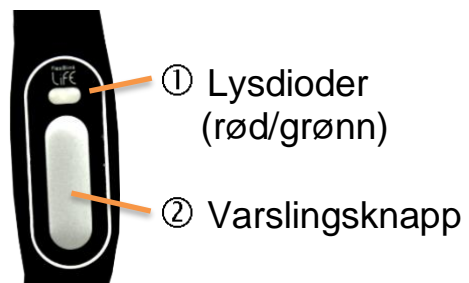

3. Komme i gang

Lading

Før du begynner å bruke ARM, bør den lades helt opp.

En fullt oppladet enhet har batterilevetid på 2-3 døgn avhengig av bruken.

Press ARM ut av armbåndet og sett den inn i ladekontakten, som igjen settes inn i den medfølgende laderen.



Lysdioden blinker rødt så lenge ladingen pågår.

Sette inn ARM

ARM settes inn i armbåndet "ovenfra" - altså trekkes ned med bunnen først. Begynn med den enden som har lysdiodene.




Ta ut ARM

ARM tas ut ved å presse den ned gjennom armbåndet som vist på figuren.



Lysdiodene og knapp

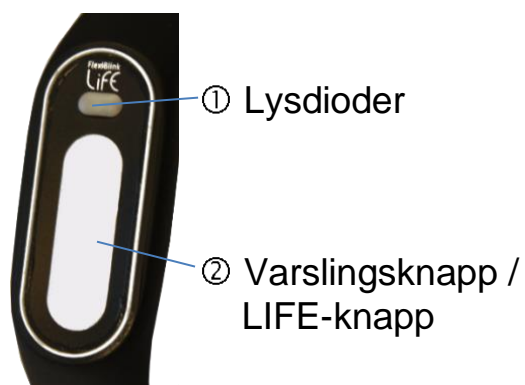

NB! Du kan ikke sende eller motta varslinger når enheten lades.

Lysdiodene og vibrasjoner

ARM har to lysdioder, en grønn og en rød, og en vibrator som sammen gir informasjon. Alle ARM kan benyttes som både sender og mottaker.

Varslingsmønster ved sending:

Grønn blink + vibrasjon	Sender varsel
Grønt lys etter sending	Sendt varsel er mottatt
Grønn blink + vibrasjon	Varsel er bekreftet, «Hjelp kommer», av annen enhet
Rød blink+ 10 x vibrasjon	Varslingen kom ikke fram.



Sammenkoble enheter

Alle FlexiBlink LIFE enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles med noen enkle knappetrykk.

Koble sammen en ARM i et FlexiBlink LIFE-system

Et system kan bestå av en eller flere sendere og mottakere som er sammenkoblet.

1. Hold varslingsknappen på den ene ARM inne i ca. 10 sekunder. Den kvitterer med 3 korte vibrasjoner.
2. Trykk **to** ganger på varslingsknappen på ARM. Indikatorlampen blinker grønt.
3. Hold varslingsknappen på den andre ARM inne i ca. 10 sekunder. ARM kvitterer med 3 korte vibrasjoner.
4. Trykk **én** gang på varslingsknappen på ARM nr. to. Indikatorlampen blinker grønt.
5. Sammenkoblingen bekreftes ved at begge indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.

Varslingsmønster ved mottak:

Grønn blink + vibrasjon	Varsel er mottatt fra annen enhet
Ved trykking mens varsel mottas	«Hjelp kommer» svares varslingssender
Grønt lys etter sending	Sendt varsel er mottatt
Rød blink+ 10 x vibrasjon	Svaret kom ikke fram.

Varslingsmønster generelt:

Rød og grønn blink	Lavt batteri.
Rød blink	Enheden lades

Benytte ARM for å sammenkoble en ny enhet til systemet

Når ARM er med i et system, kan den benyttes til å koble sammen flere sendere eller mottakere.

1. Hold varslingsknappen på ARM inne i ca. 10 sekunder. ARM kvitterer med 3 korte vibrasjoner.
2. Trykk **to** ganger på varslingsknappen på ARM. Indikatorlampen på ARM blinker da grønt.
3. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på enheten som skal kobles til ARM. Indikatorlampen på denne enheten blinker grønt.
4. Sammenkoblingen bekreftes ved at begge indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.

Sammenkobling mislykkes

Hvis enheten lyser rødt under sammenkoblingen, er koblingen mislykket.

Sammenkoblingen må nullstilles for å sammenkoble på nytt.

Avbryte sammenkobling

For å avbryte sammenkoblingen, trykk **én** gang på LIFE-knappen / varslingsknappen på ARM.

Nullstille sammenkoblingen

1. Trykk og hold varslingsknappen inne i 10 sekunder, inntil du kjenner 3 vibrasjoner.
2. Trykk **fem** ganger på varslingsknappen på ARM.
3. Nullstilling bekreftes med røde og grønne blink.

Fabrikkinnstilling

For å slette spesialtilpasning av ARM, må først sammenkoblingen nullstilles. Deretter kan den fabrikkinnstilles.

1. Trykk og hold varslingsknappen inne i 10 sekunder, inntil du kjenner 3 vibrasjoner.
2. Trykk **ti** ganger på varslingsknappen på ARM.
3. Nullstilling bekreftes med røde og grønne blink.

Dvalemodus

Når ARM kommer til deg, kan den være satt i dvalemodus.

For å oppheve dvalemodus, trykk på varslingsknappen eller sett ARM i laderen.

Velg funksjon (ID-velger)

ARM kan settes opp til å sende andre varslinger enn "Assistanse ønskes".

Dette må gjøres ved hjelp av en IRIS LIFE varslingsmottaker. Vennligst se brukerhåndboken til IRIS LIFE. Dette kan også bestilles ferdig satt opp fra Vestfold Audio AS.

Forlenge rekkevidden

I større bygg eller institusjoner hvor man har behov for å forlenge rekkevidden mellom en ARM og andre FlexiBlink LIFE produkter, må det benyttes en eller flere videresendere av typen REPEATER-L.

4. Daglig bruk

Sende et varsel

Når du trykker på varslingsknappen, sendes varsel til alle mottakere som er sammenkoblet din ARM.

Det lyser grønt og gis en vibrasjon på at varslingen er sendt.

Standard varslingsmelding er: "Assistanse ønskes!"

NB! Hvis det blinker rødt og vibreres 10 ganger tett, betyr det at ingen mottakere har oppfattet varslingen. Flytt deg nærmere mottaker og prøv på nytt!

Motta et varsel

Når ARM mottar et varsel fra andre sendere, varsler den med grønt blink og vibrasjon. Se kap. 3.

5. Viktig informasjon

- Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut.
- Armbåndsmottakeren er for innendørs bruk i ikke-kondenserende miljø.
- Armbåndsmottakeren vil varsle til FlexiBlink LIFE mottakere om behov for batteribytte hvis du har mottakere som viser dette.

6. Resirkulering

Produktet og batteriet skal ikke kastes sammen med restavfall.



Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

7. Tekniske data

Dim. (lxb):	235x10mm
Håndleddets omkrets:	10,5-21 cm
Vekt m/ batteri:	40 g
Radiofrekvens:	868.1–869.85 MHz
Sendereffekt:	10 mW e.r.p.
Temperatur:	-10 °C - +40 °C
Ladespenning:	5VDC (USB)

8. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Det varsles ikke i mottakere	Avstanden mellom ARM og mottaker er for stor.	Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn en repeater.
	ARM er tom for strøm.	Lad opp ARM.
	ARM og mottakere er ikke sammenkoblet.	Utfør sammenkobling. Se kap. 3
	Feil på mottaker	Se bruksanvisning for mottakeren.
Sammenkobling fungerer ikke	Begge enhetene har vært sammenkoblet tidligere. Det blinker rødt.	Nullstill sammenkobling. Se kap. 3
Det lyser ikke grønt når varslingsknappen trykkes.	ARM er tom for strøm.	Lad opp ARM.
Det blinker rødt/grønt	ARM er nesten tom for strøm.	Lad opp ARM.
Det varsles med feil signal i mottakere.	ARM er satt til å sende et "feil" varsel.	Bruk en IRIS LIFE for å sette riktig varsling i ARM. Se brukerhåndbok for IRIS.
Det blinker rødt og vibrerer etter at knappen er trykket og etter at grønt lys for sending har slukket.	Varslingen ble ikke mottatt av noen mottakere.	Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn en repeater
		Utfør sammenkobling med mottakere.
Sletting av sammenkoling fjerner spesialtilpasning	ARM er av tidligere versjon.	Spesialtilpass på nytt

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.



Vestfold Audio AS

www.vestfoldaudio.no

tel. 33 47 33 47

