

Flexiknapp sender

FLEXI-L



Brukerhåndbok

Innholdsfortegnelse

1. Innledning	3
2. Oversikt	3
Utvendig	3
Batteriet	3
3. Komme i gang	4
Sammenkoble enheter	4
Sammenkoble første gang	4
Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system	4
Sammenkobling mislykkes	5
Avbryte sammenkobling	5
Nullstille sammenkoblingen	5
Velg funksjon (ID-velger)	5
Bytte/sette inn batteri	6
Montering	6
4. I bruk	7
5. Viktig informasjon	7
Bruksbegrensninger:	7
6. Resirkulering	7
7. Sikkerhet	7
8. Tekniske data	7
9. Samsvarserklæring	7
10. Feilsøking	8

1. Innledning

FLEXIKNAPP sender (FLEXI-L), er et produkt i FlexiBlink LIFE-serien. Den benyttes for å varsle til FlexiBlink LIFE mottakere. Den kan benyttes både innen- og utendørs.


FlexiBlink LIFE er et trådløst varslingsystem med sendere og mottakere. Systemet kan brukes til de fleste varslingsoppgaver innen en bolig eller på en arbeidsplass, og systemet er enkelt å sette opp.

Flexiknapp kan f. eks. varsle dørklokke, sykesignal eller assistanse ønskes. I tillegg har Flexiknapp mulighet for å sende generell alarm og varslinger som kan tilpasses i IRIS LIFE og AppSender LIFE.


Flexiknapp benytter et spesialbatteri med svært lang levetid.

2. Oversikt


Utvendig

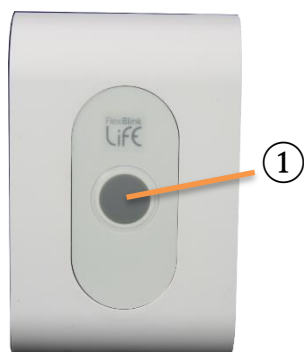

Figur 1 Framside

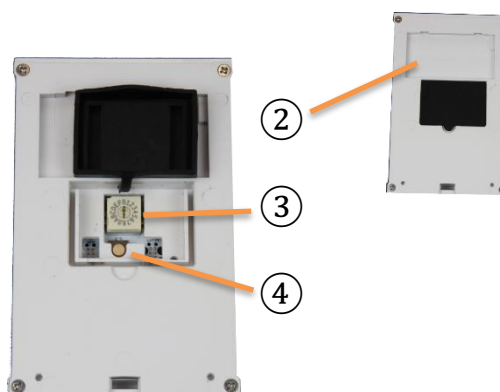

Figur 2 Bakside /m åpent lokk

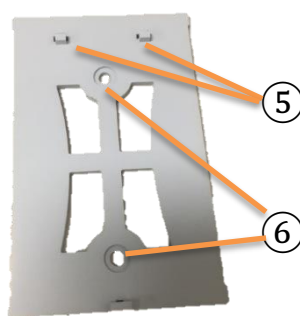

Figur 3 Festebrakett

Betydning:

- ① Trykknapp med lysindikator
- ② Plass til borrelås-tape
- ③ Funksjonsvelger (ID-velger)
- ④ LIFE-knapp (sammenkobling)
- ⑤ Feste for Flexiknapp
- ⑥ Skruehull for festebrakett

Batteriet

Det medfølger et høykapasitets litium-batteri (Varenr. 9100100934), som vil sikre drift av enheten i mange år. Batteriet må ikke lades opp.



3. Komme i gang


Sammenkoble enheter

Alle FlexiBlink LIFE enheter som skal å fungere sammen, må sammenkobles ved å trykke på LIFE-knappen.


Den finnes under det sorte lokket bak på Flexiknapp. Se figur 2 på forrige side.

Sammenkoble første gang


1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på en av enhetene.

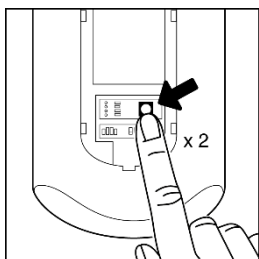

2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den andre enheten.

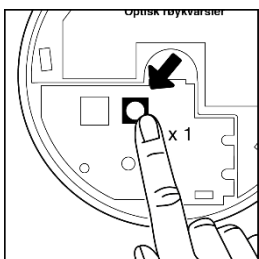

3. Indikatorlampene på begge enhetene blinker grønt.

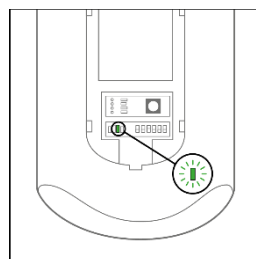

4. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
5. Enhetene er klare til bruk. Trykk på «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.

Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system

1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på enhet i eksisterende system.
2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den *nye* enheten.
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
4. Enhetene er klare til bruk.

Trykk på «Test»-knappen for å kontrollere sammenkoblingen.


Sammenkobling mislykkes

Dersom du får rødt lys i den nye enheten ved sammenkobling, mislykkes den.

Da må du nullstille enheten for å sammenkoble på nytt.

Avbryte sammenkobling

For å avbryte sammenkoblingen, trykk **én** gang på LIFE-knappen.

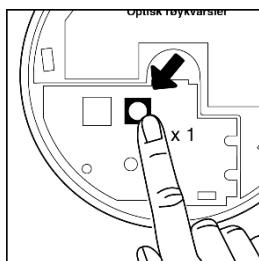


Nullstille sammenkoblingen

Trykk **fem** ganger på LIFE-knappen på enheten hvor sammenkoblingen skal slettes. Dette bekreftes med røde og grønne blink.

Velg funksjon (ID-velger)

Flexiknapp har innebygget flere varslinger. Vri på Funksjonsvelgeren til den posisjonen som passer til det som skal varsles i mottakerne.

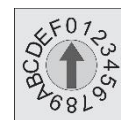

Funksjonsvelger
(fabrikkinnstilling)

ID	Varsler om	Signal-type
0	Det ringer på døren	Daglig
1	Det ringer på hoveddøren	Daglig
2	Det ringer på dør 2	Daglig
3	Sykesignal	Daglig
4	Sykesignal 2	Daglig
5	Assistanse ønskes	Daglig
6	Hjelp meg nå!	Alarm
7	Kom snart	Daglig
8	Generell	Daglig
9	Generell	Alarm
A	Barnet har stått opp	Daglig
B	Opplest klokke (Fra IRIS) (*1)	Daglig
C		
D		
E		
F		

*1 - Når denne benyttes, forteller IRIS hva klokka er.

Bytte/sette inn batteri

Åpne boksen ved å skru ut de fire skruene på baklokket.

Batteriet kobles inn i kontakten her.

Legg inn batteriet.

Ved tilkobling av batteri kan Flexiknapp blinke grønt i opptil et par minutter mens batteriet klargjøres for langtids bruk.



Figur 4 Batterikonnetektor

Lukk boksen og skru inn de fire skruene før montering av Flexiknapp.



Forsiktig

Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes eller brennes.

Montering

Utendørs

Benytt den vedlagte veggbraketten og skru denne fast på veggen. Flexiknapp kneppes deretter på plass i braketten.



Viktig

Plassen for borrelås skal alltid være oppover når produktet monteres.

Innendørs

Flexiknapp monteres normalt på vegg med den medfølgende borrelås-tapen. Benytt den medfølgende spritservietten for å rengjøre veggen. Trykk limflatene hardt på plass i minst 10 sekunder.

Alternativt kan enheten festes med veggbraketten som for utendørs montasje.

4. I bruk

Når enheten er i drift, vises status i lysindikatoren på framsiden:

<i>Slukket</i>	Stand-by
<i>Grønt</i>	Varsel sendes
<i>Blinkende rødt/grønt</i>	Bytt batteri

5. Viktig informasjon

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut.

Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteribytte hvis du har mottakere som viser dette.

Bruksbegrensninger:

Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

6. Resirkulering

Produktet og batteriet skal ikke kastes sammen med restavfall.



Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

7. Sikkerhet

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder.

Produktet må ikke skrues fra hverandre. Brukerinnstillingene finnes ved å åpne lokket.

Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes, brennes eller lades opp.

8. Tekniske data

Dim. (bxhxd):	64x100x20mm
Vekt m/ batteri:	140 g
Batteri:	Litium 3V
Sendereffekt:	10 mW e.r.p.
Temperatur:	-10 °C - +40 °C
Radiofrekv.:	868.1–869.85 MHz

9. Samsvarserklæring

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:

www.vestfoldaudio.no/samsvar

10. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Det varsles ikke i mottakere	Flexiknapp lyser ikke grønt.	Bytt batteri.
	Flexiknapp mangler batteri	Sett inn batteri.
	Avstanden mellom Flexiknapp og mottaker er for stor.	Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn en repeater.
	Batteriet i Flexiknapp er tomt / det blinker rødt.	Bytt batteri.
Det varsles med feil signal i mottakere.	Funksjonsvelger (ID) står i feil posisjon.	Skru funksjonsvelgeren til riktig posisjon.
Det blinker rødt/grønt i Flexiknapp	Batteriet i Flexiknapp er snart tomt.	Bytt batteri
Etter TEST-trykk, lyser senderen rødt	Enheten er ikke sammenkoblet	Koble enheten til en mottaker
Etter TEST-trykk, lyser senderen lenge grønt, deretter lenge oransje	Ingen mottaker er sammenkoblet med senderen	Sjekk at det er en mottaker i systemet. Nullstill enheten. Koble til på nytt. Prøv igjen
Sammenkobling fungerer ikke	Begge enhetene har vært sammenkoblet tidligere- Det blinker rødt.	Trykk 5 ganger på LIFE-knappen på den enheten som skal legges til.

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.

VESTFOLD AUDIO



Vestfold Audio AS
Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord
www.vestfoldaudio.no
tel. 33 47 33 47

