

## ARMBÅNDSENDER OG -MOTTAKER DENTAL Bruksanvisning



**ARM DENTAL** bæres rundt håndleddet. Den benyttes til å sende og motta alarmer. Alarmene sendes trådløst, uten tidsforsinkelse. Trykk på knappen for å sende alarm til tilknyttede varslingsmottaker(e). Mottakerne kan vise med unik ID hvilken enhet varslingen er sendt fra. ARM DENTAL varsler mottak av alarm med vibrasjon. Den skiller mellom generelle varslinger og akutte alarmer med ulikt vibrasjonsmønster.

Tilgjengelige mottakere er IRIS DENTAL og JUNIOR LOMMEVIBRATOR TILKALLING. Varslingen kan også sendes via app til Android og iPhone telefoner.

### BATTERI OG LADING:

ARM DENTAL har innebygget oppladbart batteri. Enheten bør lades en gang i døgnet. Batterilader følger i pakken til produktet. ARM DENTAL bør lades helt opp før du tar den i bruk første gang.

### SAMMENKOBLING:

Alle enheter må sammenkobles for å fungere i ett system. NB! Kontroller om enheten allerede er sammenkoblet før du utfører denne prosedyren.

- 1: Trykk og hold varslingsknappen i 10 sekunder, til du kjenner 3 vibrasjoner.
- 2: Trykk én gang på varslingknappen på ARM DENTAL. Indikatorlampen blinker grønt.
- 3: Trykk 2 ganger på LIFE-knappen på enhet som ARM DENTAL skal sammenkobles med. Indikatorlampen blinker grønt på enhet.
- 4: Sammenkoblingen bekreftes ved at begge indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
- 5: Enhetene er klare til bruk. Trykk «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.

### SAMMENKOBLING AV NY ENHET (ARM DENTAL) TIL EKSISTERENDE SYSTEM:

- 1: Trykk og hold varslingsknappen på ARM DENTAL inne i 10 sekunder, til du kjenner 3 vibrasjoner.

- 2: Trykk to ganger på LIFE-knappen på enhet fra eksisterende system.
- 3: Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
- 4: Enhetene er klare til bruk. Trykk tilkallingsknappen for å kontrollere sammenkoblingen.

### NULLSTILLE SAMMENKOBLINGEN:

- 1: Trykk og hold varslingsknappen inne i 10 sekunder, til du kjenner 3 vibrasjoner.
- 2: Trykk 5 ganger på LIFE-knappen.
- 3: Nullstillingen bekreftes med røde og grønne blink.

### TILBAKEFØRE TIL FABRIKKINNSTILLINGENE:

Før ARM DENTAL setts til fabrikkinnstilling må først sammenkoblingen nullstilles.

- 1: Trykk og hold varslingsknappen inne i ca 10 sekunder, til du kjenner 3 vibrasjoner.
- 2: Trykk 10 ganger på varslingsknappen på ARM DENTAL.
- 3: Fabrikkinnstillingen bekreftes med røde og grønne blink.

### VIKTIG INFORMASJON:

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut. Produktet er for innendørs bruk. Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

### RESIRKULERING:

Produktet og batteriet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

### SIKKERHET:

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder. Produktet må ikke skrus fra hverandre.

### FORLENGE REKKEVIDDEN:

I større bygg eller institusjoner der man har behov for å utvide rekkevidden mellom en DENTAL CARE og andre CARE-produkter, må det benyttes en eller flere videresender av typen REPEATER CARE.

### TEKNISKE DATA:

Dim. (bxhxd):	235x10 mm
Vekt:	40 g
Radiofrekvens:	868.1 – 869.85 MHz
Sendereffekt:	10 mW e.r.p.
Temperatur:	-10°C +40°C
Ladespenning:	5VDC (USB)

**SAMSVARERKLÆRING:**

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU

**FEILSØKING:****Problem: Det varsles ikke i mottakere.**

1: Avstanden mellom ARM DENTAL og mottaker er for stor.

Flytt enhetene nærmere hverandre, eller sett inn en Repeater DENTAL.

2: ARM DENTAL er tom for strøm.

Lad opp ARM DENTAL.

3: ARM DENTAL og mottakere er ikke sammenkoblet.

Utfør sammenkobling.

4: Feil på mottaker.

Se bruksanvisning for mottakeren.

**Problem: Sammenkobling fungerer ikke.**

1: Enhetene har vært sammenkoblet tidligere. Det blinker rødt.

Trykk 5 ganger på LIFE-knappen på enheten som skal kobles til for å nullstille enheten. Utfør sammenkobling på nytt.

**Problem: Det lyser ikke grønt når knappen trykkes.**

1: ARM DENTAL er tom for strøm.

Lad opp ARM DENTAL.

**Problem: Det blinker rødt/grønt.**

1: ARM DENTAL er nesten tom for strøm.

Lad opp ARM DENTAL.

Problem: Det varsles med feil signal i mottakere.

1: ARM DENTAL er satt til å sende «feil» varsel.

Bruk en IRIS CARE for å sette riktig varsling i ARM DENTAL, eller ta kontakt med Vestfold Audio for support.

**Problem: Det blinker rødt og vibrerer etter at knappen er trykket og grønt lys for sending har slukket.**

1: Varslingen ble ikke mottatt av noen mottakere.

Flytt enhetene nærmere hverandre, eller sett inn en Repeater DENTAL.

2: Utfør sammenkobling med mottakere.

**Problem: Sletting av sammenkobling fjerner spesialtilpasning.**

1: ARM DENTAL er av tidligere versjon.

Spesialtilpass på nytt.

