

Bruksanvisning

Hodebøylemikrofon Type 10, m/ mini jack HODEB10-2

Varenr. 1810

HODEB10 er en solid mikrofon av meget høy kvalitet som framhever konsonantene i talen og dermed taleforståelsen. Diskret utforming, god passform og gode justeringsmuligheter. Kulekarakteristikk. Utskiftbar kabel. Beige.




Dok. nr.: 7031A
Dato: 2020-10-08

Vestfold Audio AS
Sandefjord

Ta på deg mikrofonen

Mikrofonen bæres med krokene hengende over ørene bakfra.

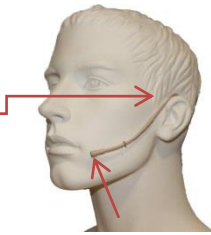

1. Bøy bommen slik at mikrofonen kommer nærme og peker mot munnen din uten å komme i direkte kontakt med huden.
2. Tilpass ved å skyve på bøylene i bakkant.



3. Sett kontakten i stemmeforsterkeren / mikrofonsenderen.

NB!! Feil tilpasning av mikrofonen medfører ofte “feedback” og kraftig hyling i høyttalerne.

Enkel feilretting

Hvis lyden er dårlig eller det hylrer i høyttaleren:

1. Tilpass mikrofonen til brukeren – bøy til nær munnviken!
2. Skru ned volumet på forsterkeren.
3. Unngå å stå rett foran en høyttaler / stemmeforsterker.

Rengjøring utført av bruker

Mikrofon kan rengjøres med myk klut oppvridd i lun kent, mildt såpevann. Hjelpemiddelet må ikke utsettes for væskesøl eller sprut med vann.

Vedlikehold utført av bruker

Hjelpemiddelet er vedlikeholdsritt.

Lagring når ikke i bruk

Oppbevares på et tørt og støvfritt sted.

Dersom du trenger hjelp til feilretting

I fall du ikke klarer å rette feilen selv, bør du kontakte det sted hjelpemiddelsentralen eventuelt har gitt deg opplysninger om, eller til:

Fylles ut av hjelpemiddelsentralen

Leverandør

Vestfold Audio AS
3241 Sandefjord

