

VELFERDSENDER CARE Bruksanvisning



VELFERDSENDER CARE (VEL10 CARE) tilkobles utstyr som skal viderevarsle signaler til CARE-mottakere. Varsling blir utløst når en av de to inngangene aktiveres fra tilkoblet utstyr.

VEL10 har funksjoner for varsling av standard hendelser. Andre varslinger er tilgjengelig på bestilling.

Varslingene er fordelt i to grupper:

- 1: Daglige signaler
- 2: Alarmer

Daglige signaler utløser varsling med lydvolument som er innstilt i CARE varslingsmottakere. Alarmer varsler alltid med full styrke.


BATTERI OG LADING:

Det medfølger et høykapasitets litium-batteri (Varenr. 9100100934), som vil sikre drift av enheten i mange år.

MEDFØLGENDE KABEL:

Det følger med en tilkoblingskabel med 3,5 mm jack-plugg, som passer i de 2 signalinngangene.

OVERSIKT:

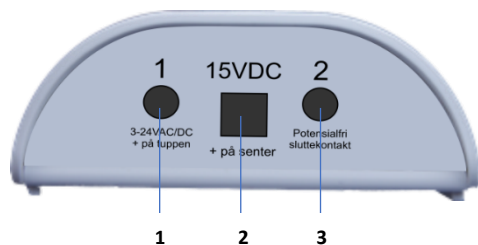

- 1: Signalinngang nr.1 for spenningskilde. 3-24VACVDC, + på tuppen.
- 2: Tilkobling for batterieliminatort 15VDC
- 3: Signalinngang nr.2 for Vestfold Audio sensorer og potensialfri kontakt. (Sammenkobling av lederne gir signal).



- 4: Batterikontakt
- 5: LIFE-knapp
- 6: Funksjonvelger (ID-velger)
- 7: Testknapp

BATTERIELIMINATOR:

Dersom det skal benyttes timer, brytere for å slå på/av senderen o.l., må en benytte batterieliminatort. Denne kan kjøpes som tilbehør (varenr. 9100100451). Da må ikke batteriet settes inn, batteriet fungerer da som et backupbatteri.

SAMMENKOBLING:

Alle enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles ved å trykke på LIFE-knappen. LIFE-knappen finner du under lokket på VEL10 CARE.

- 1: Trykk to ganger på LIFE-knappen på en av enhetene. Indikatorlampen blinker grønt.
- 2: Trykk én gang LIFE-knappen på den andre enheten. Indikatorlampen på begge enhetene blinker grønt i 2-3 sekunder.
- 3: Sammenkoblingen bekreftes ved at begge indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
- 4: Enhetene er klare til bruk. Trykk «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.

SAMMENKOBLING AV NY ENHET TIL EKSISTERENDE SYSTEM:

- 1: Trykk to ganger på LIFE-knappen på enhet fra eksisterende system.
- 2: Trykk én gang på LIFE-knappen på den nye enheten.
- 3: Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
- 4: Enhetene er klare til bruk. Trykk tilkallingsknappen for å kontrollere sammenkoblingen.

NULLSTILLE SAMMENKOBLINGEN:

Trykk fem ganger på LIFE-knappen på enheten hvor sammenkoblingen skal slettes. Dette bekreftes med røde og grønne blink.

DAGLIG BRUK:

VEL10 CARE benyttes i hovedsak for å tilkalle assistanse. Det kan kobles til en trykkbryter for å tilkalle hjelp. Den kan også kobles til en magnetbryter for å kunne varsle når en dør eller vindu åpnes. Dersom det ønskes varsling når en

person går inn i et område, kan det benyttes en bevegelsessensor som PIR-GARDIN eller PIR-MINI.

VELG FUNKSJON (ID-velger):

VEL10 CARE har innebygget flere ferdigprogrammerte varslinger. Velg varslings-ID ved å vri på funksjonsvelgeren, som du finner under lokket på framsiden. Varslingene kan ytterligere spesialtilpasses i varslingsmottakeren IRIS CARE eller via vår Skytjeneste.

ID	Varsel	ID	Varsel
0	Varsling 1	8	Alarm 8
1	Varsling 1	9	Alarm 9
2	Varsling 2	A	Alarm 10
3	Varsling 3	B	Alarm 11
4	Varsling 4	C	Alarm 12
5	Varsling 5	D	Alarm 13
6	Varsling 6	E	Alarm 14
7	Varsling 7	F	Alarm 15

I BRUK:

Når enheten er i drift, vises status i lysindikatoren på fremsiden.

Slukket:	Stand-by
Grønt:	Varsel sendes
Blinkende rødt/grønt:	Bytt batteri

VIKTIG INFORMASJON:

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut. Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteribytte. Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

RESIRKULERING:

Produktet og batteriet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

SIKKERHET:

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder. Produktet må ikke skrus fra hverandre. Brukerinnstillingene finnes ved å åpne lokket. Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes, brennes eller lades opp.

TEKNISKE DATA:

Dim. (bxhxd): 69x133x27mm
 Vekt m/batteri: 140 g
 Batteri: Litium 3V
 Sendereffekt: 10 mW e.r.p.
 Temperatur: -10 °C - +40 °C
 Radiofrekvens: 868.1 - 869.85 MHz

SAMSVARERKLÆRING:

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

FEILSØKING:

Problem: Det varsles ikke i mottakere.

- 1: Lysindikator lyser ikke grønt.
Bytt batteri.
- 2: VEL10 mangler batteri.
Sett inn batteri.
- 3: Avstanden mellom VEL10 og mottaker er for stor.
Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn en Repeater CARE.

- 4: Batteriet i VEL10 er tomt / det blinker rødt
Bytt batteri.

Problem: Det varsles med feil signal i mottakere.

- 1: Funksjonsvelger (ID) står i feil posisjon.
Skru funksjonsvelgeren til riktig posisjon.

Problem: Det blinker rødt/grønt i VEL10.

- 1: Batteriet er snart tomt.
Bytt batteri.

Problem: Etter Test-trykk lyser knappen rødt.

- 1: Enheten er ikke sammenkoblet.
Koble enheten til en mottaker.

Problem: Etter Test-trykk lyser VEL10 lenge grønt, deretter oransje.

- 1: Ingen mottaker er sammenkoblet med enheten.
Sjekk at det er en mottaker i systemet. Nullstill enheten. Koble til på nytt. Prøv igjen.

Problem: Sammenkobling fungerer ikke.

- 1: Begge enhetene har vært sammenkoblet tidligere. Det blinker rødt.
Trykk 5 ganger på LIFE-knappen på den enheten som skal legges til for å nullstille den.

