

# Bruksanvisning

## Sender og bærbar mottaker med halsslynge

### DIRLYD1

VARENØ.: 1844



Sender og bærbar mottaker med halsslynge, for direktelyd fra Vestfold Audio forsterkere, som VOX UNO, VOX DUO og VOX BASE. Kan også brukes til TV lytting. Senderen tilkobles forsterker, TV o.l. med den medfølgende mini-jack kabelen, og sender lyden direkte til mottakeren. Overføringssystemet er av "studiokvalitet" og benytter EU-godkjente radiofrekvenser.

# Innholdsfortegnelse

1	I pakken .....	3
2	Koble til .....	3
2.1	Senderen .....	3
2.2	Mottakeren .....	3
3	Mottakerens display .....	4
4	Kanalvalg .....	4
5	Spesielle funksjoner .....	5
5.1	Valg for at enheten skal slå seg av automatisk .....	5
5.2	Varsel for lavt batteri .....	6
6	Låse menyen .....	6
7	Sendereffekt.....	7
8	Vedlikehold .....	7
9	Resirkulering .....	7
10	Tekniske spesifikasjoner .....	7
11	Samsvarserklæring .....	7
12	Leverandør.....	7
13	Feilsøking.....	8


## 1 I pakken

- Sender type VAS
- Strømadapter med USB kabel
- Mini-jack /4p mini XLR kabel
- Mottaker type FM-MVA
- Hals Slynge type

## 2 Koble til

### 2.1 Senderen

Senderen benytter en batterieliminatør, som plugges inn i USB-C kontakten i bunnen av senderen.

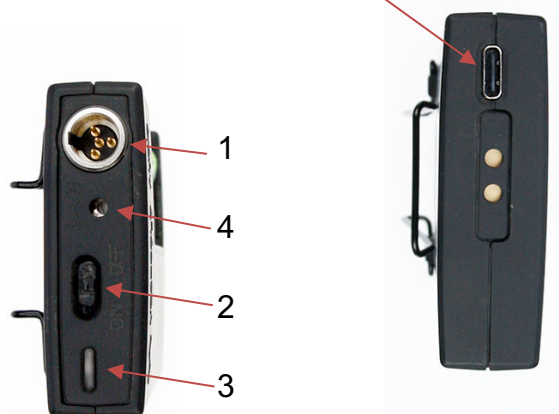


1. Sett tilkoblingskabelen inn i senderens mini-XLR kontakt på toppen og koble jack-pluggen til lydkilden.
2. Senderen slås på/av med-bryteren (2) på toppen.
3. Når den er i bruk lyser en grønn indikatorlampe (3) på toppen av senderen.
4. For å kompensere for høyt/lavt signalnivå i lydkilden, kan følsomheten justeres med en liten skrutrekker.

Senderen bør være avslått når den ikke er i bruk.


### 2.2 Mottakeren

Mottakeren er batteridrevet med 2 AA batterier, som er plassert under det avtagbare dekselet på baksiden av mottakeren.

Koble halsslyngen inn i mottakerens lydutgang, og slå på mottakeren.

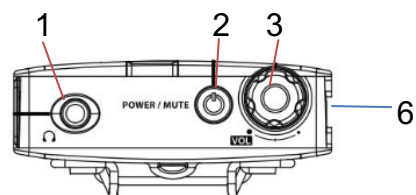

Mottakeren sett ovenfra

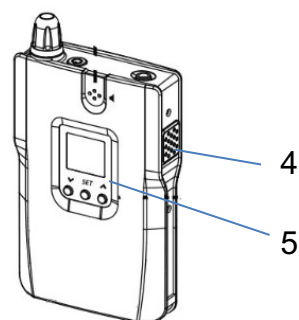


Mottakerens front

1. Tilkobling halsslynge
2. På/Av-knapp og status LED  
-Fast grønt lys = på  
-Av = mottaker avslått
3. Volumkontroll
4. Innebygd høyttaler
5. Display og funksjonsvelgere
6. Linjeutgang. For eventuell tilkobling av lyd ut til forsterker.  
NB! Mono-jack.

Som standard leveres mottakeren med to alkaline AA-batterier.


NB! Senderen og mottakeren må være innstilt på samme kanal. Se avsnittet *Kanalvalg* nedenfor.

Mottakeren kan henges rund halsen i den medfølgende snoren, puttes i lommen eller festes i beltet. Det finnes også tilbehør som veske til å ha rundt livet og en lomme til å ha rundt overarmen.

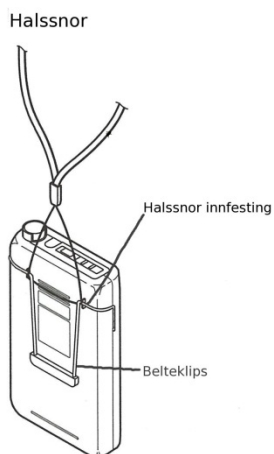

Ta på halsslyngen og juster lydstyrken til behagelig lydnivå oppnås.

### 3 Mottakerens display

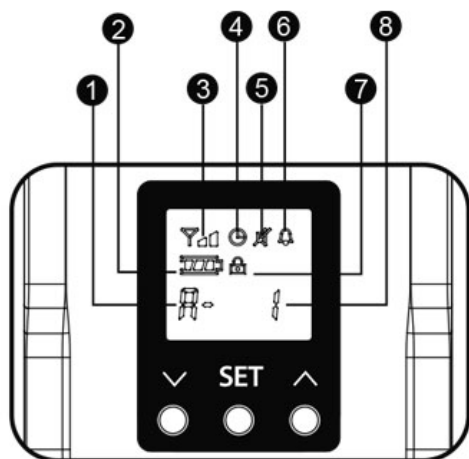

1. Kanalbank
2. Batterinivå
3. RF signalnivå
4. Auto power av
5. Mute
6. Varsel for lavt batteri
7. Låsesymbol
8. Kanal

### 4 Kanalvalg


Kanalen man skal benytte må være forskjellig fra kanaler benyttet av trådløse mikrofoner i systemet/nærliggende system.



Du kan benytte mottakeren for å lytte etter ledig kanal.

#### Sender:

Skyv av lokket over batteriet, og still inn valgt kanal og kanalbank på senderen.

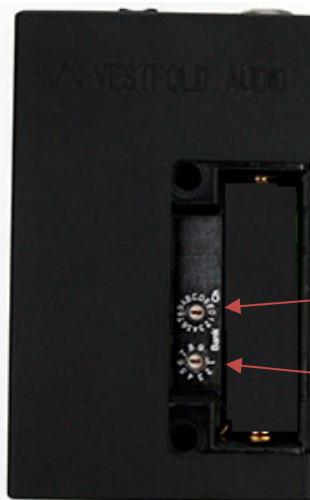


Bruk en liten flat skrutrekker. Gyldige kanalvalg:

- Kanalbank 1  
Kanal 0-F
- Kanalbank 2  
Kanal 0-F
- Kanalbank 3  
Kanal 0-4

Bank 4-9 er ikke i bruk.

Dersom bankvelger stilles til 4-9, eller kanalvelger stilles til en kanal høyere enn 4 i bank 3, vil indikatorlampen gi en feilvarsling.

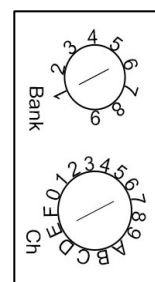

Still inn samme kanal og kanalbank på mottakeren slik:





1. Slå på mottakeren (2)
2. Trykk og hold «SET» for å låse opp enheten for programmering.
3. Benytt piltastene «opp» og «ned» for å velge KANALBANK. Trykk «SET» når riktig BANK er valgt.
4. Benytt piltastene «opp» og «ned» for å velge KANAL.
5. Trykk «SET».  
Enheden lagrer innstillingene og går automatisk ut av menyen. Enheden er klar til bruk.

NB! Hvis du ikke endrer kanalbank eller kanal, fortsetter innstillingene til "spesielle funksjoner".

## 5 Spesielle funksjoner

### 5.1 Valg for at enheten skal slå seg av automatisk

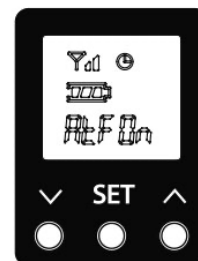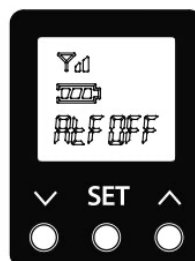


Med denne funksjonen aktivert vil enheten slå seg av automatisk 30 minutter etter at senderen er slått av.

Funksjonen er som standard satt til «off».

1. Slå på mottakeren (2).
2. Trykk og hold «SET» for å låse opp enheten for programmering.
3. Trykk «SET» 2 ganger til «AtF» vises.
4. Benytt piltastene for å slå funksjonen på.  
Det vises et klokkesymbol når funksjonen er på.
5. Trykk «SET».  
Enheden lagrer innstillingene og går automatisk ut av menyen. Enheden er klar til bruk.

NB! Hvis du ikke endrer AtF fortsetter innstillingene til neste "spesielle funksjon".


## 5.2 Varsel for lavt batteri

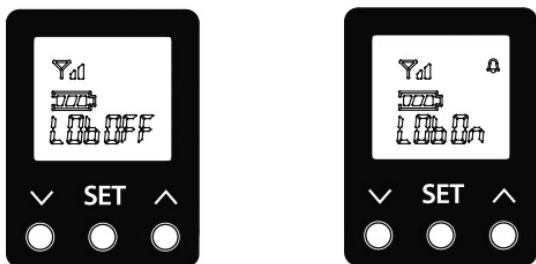

Funksjonen er som standard satt til «off».

1. Slå på mottakeren (2).
2. Trykk og hold «SET» for å låse opp enheten for programmering.
3. Trykk «SET» 3 ganger til «Lob» vises.
4. Benytt piltastene for å slå funksjonen på.  
Det vises et bjelle-symbol når funksjonen er på.
5. Trykk «SET».  
Enheden lagrer innstillingene og går automatisk ut av menyen. Enheden er klar til bruk.

## 6 Låse menyen

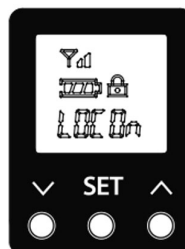

Menyen kan låses for å unngå utilsiktet endringer.

1. Slå på mottakeren (2).
2. Hold begge piltastene inne samtidig til displayet viser «LOCK ON»

Utfør samme prosedyre for å låse enheten opp igjen.

## 7 Sendereffekt



**Bryter for å endre sendereffekten.**  
(under kanalvelger)  
N = Normal  
L = Redusert effekt

Sendereffekten skal normalt ikke endres, da den normale effekten generelt gir riktig rekkevidde.

## 8 Vedlikehold

Mottakeren og hodetelefonen kan rengjøres med myk klut oppvridd i lunkent, mildt såpevann. Hjelpemiddelet må ikke utsettes for væskesøl eller sprut med vann.

Lagring når ikke i bruk  
Oppbevares på et tørt og støvfritt sted.

## 9 Resirkulering

Produkter og batterier skal ikke kastes sammen med restavfall.  
Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

## 10 Tekniske spesifikasjoner

### Generelt

Frekvensområde: 100 – 11000 Hz  
Sendereffekt: 5 – 20 mW  
Radio båndbredde: 823 – 832 MHz  
Rekkevidde: Opp til 120 meter, fri sikt

### Sender

Dynamikk, sender: >95dB  
Strømfors. Sender: 5VDC / USB-C

### Mottaker

Batteri: 2xAA, Alkaline  
Batteritid: 10t  
Mål (BxHxD): 62 x 20 x 98 mm

## 11 Samsvarserklæring

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:

[www.vestfoldaudio.no/samsvar](http://www.vestfoldaudio.no/samsvar)

## 12 Leverandør

Vestfold Audio AS  
Nordre Fokserød 12  
3241 Sandefjord  
Tel. 3347 3347  
Epost: [post@vestfoldaudio.no](mailto:post@vestfoldaudio.no)

## 13 Feilsøking

Problem	Feilretting
<b>Ikke lys i av/på knapp på mottakeren</b>	Bytt batterier
<b>Ikke lys i lampen på senderen.</b>	Er senderen slått på? Kontroller at strømmen er riktig tilkoblet.
<b>Sender blinker rødt</b>	Feil kanal/kanalbank-innstilling.
<b>Ingen lyd fra halsslyngen</b>	Trekk ut halsslyngen fra mottakeren og hør om det er lyd fra mottakerens innebygde høyttaler. Hvis det er lyd der: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skru opp volumet for sterkere signal i slyngen.</li> <li>• Kontroller høreapparatets innstilling (T-stilling)</li> </ul>
	Er sender og mottaker innstilt på samme kanal?
	Er senderen riktig tilkoblet lydkilden og er det signal på lydutgangen?
<b>Brumming/støy</b>	Tilkoblingskabelen til senderen er ikke koblet skikkelig inn i lydkildens utgang.



Vestfold Audio AS

Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord

[www.vestfoldaudio.no](http://www.vestfoldaudio.no)

tel. 33 47 33 47

