


# Armbåndssender og -mottaker (ARM Care)

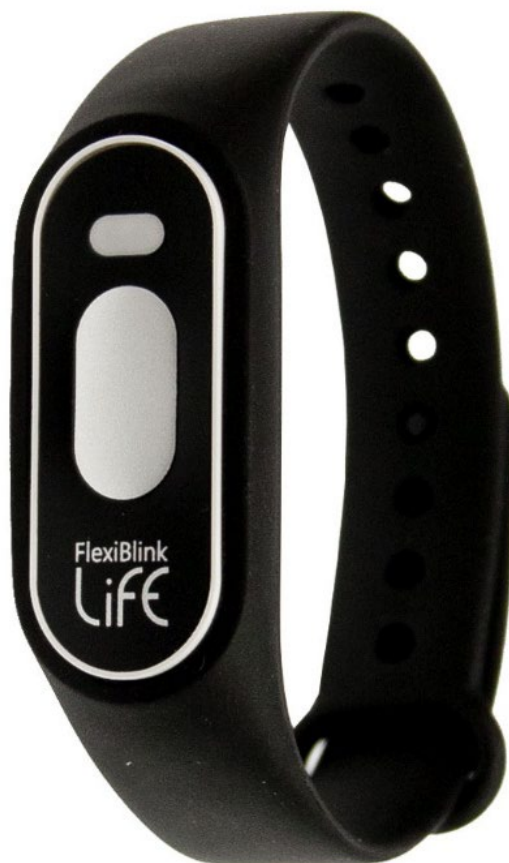

## Bruksanvisning



1748


ARM CARE bæres rundt håndleddet. Den benyttes til å sende og motta alarmer. Alarmene sendes trådløst, uten tidsforsinkelse. Trykk på knappen for å sende alarm til tilknyttede varslingsmottaker(e). Mottakerne kan vise med unik ID hvilken enhet varslingen er sendt fra. ARM CARE varsler mottak av alarm med vibrasjon. Den skiller mellom generelle varslinger og akutte alarmer med ulikt vibrasjonsmønster. ARM sender som standard alarm for tilkalling, men kan konfigureres til å sende generelle/daglige varslinger ved behov.


Tilgjengelige mottakere er IRIS CARE (art.: 1716) og JUNIOR LOMMEVIBRATOR TILKALLING CARE (art.: 1744). Varslingen kan også sendes via app til IOS- og Android telefoner.

	<p><u>I pakken:</u></p> <p>ARM Armbånd Lader og ladekabel</p>
	<p>1. Lysdioder (rød/grønn)</p> <p>2. Varslingsknapp</p>

**KOMME I GANG:**

Før du begynner å bruke ARM, bør den lades helt opp. En fullt oppladet enhet har batterilevetid på 2-3 døgn avhengig av bruken.

	<p>Press ARM ut av armbåndet og sett den inn i ladekontakten, som igjen settes inn i den medfølgende laderen.</p> <p>Lysdioden blinker rødt så lenge ladingen pågår.</p> <p>NB! Du kan ikke sende varslinger når enheten lades.</p>
---	---

	<p>Sette inn ARM:</p> <p>ARM plasseres enkelt i kjede eller armbånd, ved å trykke den ned i holderen.</p>
---	---

**Lysdioder og vibrasjon:**

ARM har to lysdioder (1.), en grønn og en rød, og en vibrator som sammen gir informasjon. Alle ARM kan benyttes som både sender og mottaker.

Varslingsmønster ved sending:

Grønn blink + vibrasjon	Sender varsel
Grønt lys etter sending	Sendt varsel er mottatt
Rød blink+ 10 x vibrasjon	Varslingen kom ikke fram.

Varslingsmønster ved mottak:

Grønn blink + vibrasjon	Varsel er mottatt fra annen enhet.
Ved trykking mens varsel mottas	«Hjelp kommer» svares varslingssender.
Grønt lys etter sending	Sendt varsel er mottatt
Rød blink+ 10 x vibrasjon	Svaret kom ikke fram.

Varslingsmønster generelt:

Rød og grønn blink	Lavt batteri
Rød blink	Enheten lades

**SAMMENKOBLING**

Alle Vea Care enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles før bruk. Et system kan bestå av en eller flere sendere og mottakere som er sammenkoblet.

Alle enhetene har en LIFE-knapp som benyttes under sammenkobling. LIFE-knappen finner du som regel på baksiden, eller under lokket på produktet. Detaljert informasjon finner du i brukermanualen til det produktet du skal benytte.

**NB! Dersom du skal koble en ny enhet til et eksisterende system, skal du ALLTID trykke to ganger på LIFE-knappen på enheten i det eksisterende systemet. Dersom alle enhetene er nye, kan du selv velge hvilken enhet du benytter for å trykke to ganger på LIFE-knappen.**

ARM følger en litt annen prosedyre enn andre Vea Care produkter. Den har ingen egen LIFE-knapp, men benytter alarmknappen for sammenkobling.

**Koble (ny) ARM til annen (ny) ARM:**

1. Trykk og hold varslingsknappen på ARM 1 i ca. 10 sekunder til den kvitterer med 3 korte vibrasjoner.
2. Trykk 1 gang på alarmknappen på ARM 1. Indikatorlampen blinker grønt.
3. Trykk og hold varslingsknappen på den ARM 2 i ca. 10 sekunder til den kvitterer med 3 korte vibrasjoner.
4. Trykk 2 ganger på alarmknappen på ARM 2. Indikatorlampen blinker grønt.
5. Sammenkoblingen bekreftes ved at begge indikatorlampene lyser fast i grønt i 2-3 sekunder.

**Koble (ny) arm til eksisterende system:**

1. Finn LIFE-knappen på enheten du skal sammenkoble ARM til, som f.eks. en Junior Lommevibrator, Optisk Røykvarsler eller lignende.
2. Trykk og hold varslingsknappen på ARM i ca. 10 sekunder til den kvitterer med 3 korte vibrasjoner.
3. Trykk 1 gang på alarmknappen på ARM. Indikatorlampen blinker grønt.
4. Trykk 2 ganger på LIFE-knappen på enheten du skal sammenkoble med. Indikatorlampen blinker grønt.
5. Sammenkoblingen bekreftes ved at begge indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.

**Benytte ARM for å sammenkoble ny enhet til systemet:**

Når ARM er med i et system, kan den benyttes til å koble sammen flere sendere eller mottakere.

1. Hold varslingsknappen på ARM inne i ca. 10 sekunder til den kvitterer med 3 korte vibrasjoner.
2. Trykk 2 ganger på varslingsknappen på ARM. Indikatorlampen på ARM blinker grønt.
3. Trykk 1 gang på LIFE-knappen på enheten som skal kobles til ARM. Indikatorlampen på denne enheten blinker grønt.
4. Sammenkoblingen bekreftes ved at begge indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.

**Sammenkobling mislyktes:**

Hvis enheten lyser rødt under sammenkoblingen, er koblingen mislykket.

Sammenkoblingen må nullstilles for å sammenkoble på nytt.

**Avbryte Sammenkobling:**

For å avbryte sammenkoblingen, trykk én gang på LIFE-knappen / varslingsknappen på ARM.

**Nullstille sammenkoblingen:**

1. Trykk og hold varslingsknappen inne i ca. 10 sekunder, inntil du kjenner 3 vibrasjoner.
2. Trykk fem ganger på varslingsknappen på ARM.
3. Nullstilling bekreftes med røde og grønne blink.

**Fabrikkinnstilling:**

For å slette spesialtilpasning av ARM, må først sammenkoblingen nullstilles. Deretter kan den fabrikkinnstilles.

1. Trykk og hold varslingsknappen inne i ca. 10 sekunder, inntil du kjenner 3 vibrasjoner.
2. Trykk ti ganger på varslingsknappen på ARM.
3. Nullstilling bekreftes med røde og grønne blink.

**Dvalemodus:**

Når ARM kommer til deg, kan den være satt i dvalemodus. Trykk på varslingsknappen eller sett ARM i laderen.

**VELG FUNKSJON (ID-Velger)**

ARM kan settes opp til å sende andre varslinger enn "Assistanse ønskes". Dette må gjøres ved hjelp av en IRIS varslingsmottaker. Vennligst se brukerhåndboken til IRIS. Dette kan også bestilles ferdig satt opp fra Vestfold Audio AS.

**FORLENGE REKKEVIDDEN**

I større bygg eller institusjoner hvor man har behov å forlenge rekkevidden mellom en ARM og andre FlexiBlink LIFE produkter, må det benyttes en eller flere videresendere av typen REPEATER.

**DAGLIG BRUK****Sende et varsel:**

Når du trykker på varslingsknappen, sendes varsel til alle mottakere som er sammenkoblet din ARM. Det lyser grønt og gir en vibrasjon på at varslingen er sendt. Standard varslingsmelding er: "Assistanse ønskes!"

**NB!** Hvis det blinker rødt og vibreres 10 ganger tett, betyr det at ingen mottakere har oppfattet varslingen. Om mulig, flytt deg og prøv på nytt!

**Motta et varsel:**

Når ARM mottar et varsel fra andre sendere, varsler den med grønt blink og vibrasjon.

**VIKTIG INFORMASJON:**

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut. Produktet er for innendørs bruk i ikke-kondenserende miljø.

Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteribytte hvis du har mottakere som viser dette.

Produktet bør ikke stå i direkte sollys.

**BRUKSBEGRENSNINGER**

Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

**RESIRKULERING**

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

**SIKKERHET**

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder. Produktet må ikke skrus fra hverandre.

**TEKNISKE DATA**

Dim. (bxhxd):	235x10 mm	Sendereffekt:	10 mW e.r.p.
Vekt:	40 g	Ladespenning	5VDC (USB)
Radiofrekvens:	868.1 – 869.85 MHz	Temperatur:	-10 °C - +40 °C

**SAMSVARSERKLÆRING**

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:

[www.vestfoldaudio.no/samsvar](http://www.vestfoldaudio.no/samsvar)

**FEILSØKING**

<b>Problem</b>	<b>Mulig årsak</b>	<b>Løsninger</b>
Det varsles ikke i mottakere	Avstanden mellom ARM og mottaker er for stor.	Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn en repeater.
	ARM er tom for strøm.	Lad opp ARM.
	ARM og mottakere er ikke sammenkoblet.	Utfør sammenkobling.
	Feil på mottaker	Se avsnitt «Sammenkobling»
Sammenkobling fungerer ikke	Begge enhetene har vært sammenkoblet tidligere. Det blinker rødt.	Se bruksanvisning for mottakeren.
Det lyser ikke grønt når knappen trykkes.	ARM er tom for strøm.	Nullstill sammenkobling.
Det blinker rødt/grønt	ARM er nesten tom for strøm.	Lad opp ARM
Det varsles med feil signal i mottakere.	ARM er satt til å sende et "feil" varsel.	Benytt IRIS for å sette opp ARM på nytt. Eller kontakt leverandøren.
Det blinker rødt og vibrerer etter at knappen er trykket og etter at grønt lys for sending har slukket.	Varslingen ble ikke mottatt av noen mottakere.	Sjekk at det er en operativ varslingsmottaker i systemet.
		Dårlig rekkevidde. Sett inn Repeater.

