

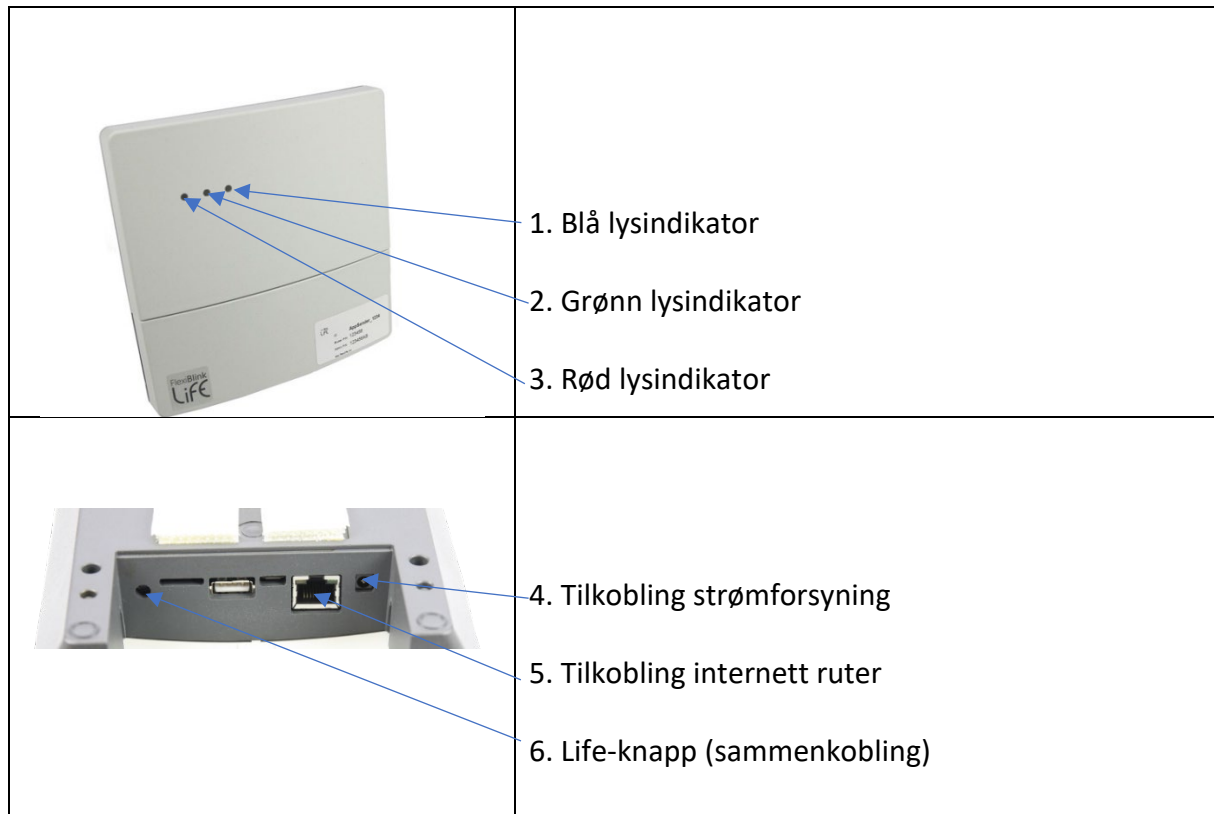
Appsender (Appsender-Care)

Bruksanvisning



Art.: 1751

APPSENDER CARE videresender alarmsignaler i et CARE-varslingsystem til «FlexiApp» på IOS og Android telefoner.



1. MONTERING

Appsenderen må installeres på et sted der den er innen rekkevidde til CARE-systemets alarmsignaler. Den kobles til internett med kabel (5).

Appsenderen skal monteres på vegg. Benytt de medfølgende skruene.

2. APPSENDER TILKOBLING

AppSender trenger kun en kablet internettforbindelse for å fungere. All annen kommunikasjon internt for VEA Care alarmsystem skjer på egen radio på lukket radiofrekvens.

Behov:

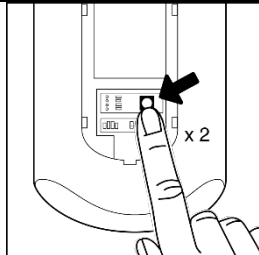
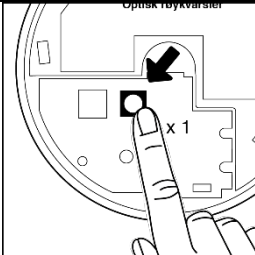
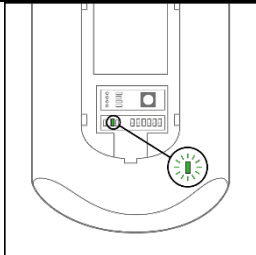
- Kablet nettverksforbindelse til internett
- Helst plassert sentralt i bygg, lite synlig
- Trenger ingen kontakt med lokalt LAN

Utgående dataporter:

- 80 http
- 443 https
- 8883 TCP/MQTT

3. SAMMENKOBLING

Alle FlexiBlink LIFE enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles ved å trykke på LIFE-knappen. Den finnes under lokket på baksiden av Sykesignalsender.

		
<p>1. Trykk 2 ganger på LIFE-knappen på den ene av enhetene.</p>	<p>2. Trykk 1 gang på LIFE-knappen på den andre enheten. Indikatorlampene på begge enhetene blinker grønt.</p>	<p>3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast i 2-3 sekunder. Enhetene er klare til bruk. Trykk «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.</p>

SAMMENKOBLING AV NY ENHET TIL EKSISTERENDE SYSTEM

1. Trykk 2 ganger på LIFE-knappen på enhet fra eksisterende system.
2. Trykk 1 gang på LIFE-knappen på den nye enheten.
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
4. Enhetene er klare til bruk. Trykk «Test»-knappen for å kontrollere sammenkoblingen.

SAMMENKOBLING MISLYKTES

Dersom du får rødt lys i den nye enheten ved sammenkobling, mislyktes den.

Nullstill enheten for å sammenkoble på nytt.

AVBRYTE SAMMENKOBLING

For å avbryte en aktiv sammenkobling, trykk 1 gang på LIFE-knappen.

NULLSTILLE SAMMENKOBLINGEN

Trykk 5 ganger på LIFE-knappen på enheten hvor sammenkoblingen skal slettes. Dette bekreftes med røde og grønne blink. Dersom du ønsker å endre funksjoner i produktet, se avsnitt «Utvidede funksjoner».

4. DRIFT

Når enheten er i drift vises status i lysindikatoren:

Slukket:	Ikke klar
Blinkende grønt:	I oppstart eller sammenkobling
Blått lys:	Klar
Blinkende rødt lys:	Ikke kontakt med skyserver

5. INSTALLERE FLEXIAPP

1. Gå til AppStore (IOS) eller Google Play (Android) på den/de telefonen(e) som skal motta varsling, og søk etter «Flexiapp».
2. Installer og åpne FlexiApp
3. Tillat mottak av varslinger

6. FLEXIAPP START

Menylinjen: FlexiApp fungerer likt på IOS og Android-telefoner, men utseendet er litt forskjellig. Android har menylinjen i toppen, mens iPhone har den nederst.

HJEM: Viser varslinger.

SENDERE: Slå på/av varslinger.

SØK: Søk etter AppSender

AVANSERT: Avanserte funksjoner.

Koble til Appsender:

1. Trykk på «Søk» og velg «Legg til Appsender manuelt».
2. Skriv inn bruker PIN-kode. Koden finner du på klistrelappen på fremsiden av appsenderen.
3. Velg et navn for Appsenderen.
4. Telefonen kan nå motta alarmer fra Appsenderen tilkoblet CARE-systemet.

7. FLEXIAPP OG DAGLIG BRUK

HJEM: Her vises alle alarmer de siste 24 timene.

SENDERE: Ved å velge Mottak «av» får du ingen varsler. Ved å velge «Motta kun alarmer» varsles bare alarmer. Dersom Appsenderen er frakoblet serveren, får du også beskjed om dette. «Avslutt» bryter tilkoblingen til Appsenderen.

SØK: Velg denne siden hvis du vil koble deg til en ny Appsender.

AVANSERT: Funksjoner for endringer og tilpasninger av alarmer. Benytt PIN-koden som du finner på klistrelappen på Appsenderen for å logge inn.

To nivåer for pålogging:

BRUKER LOGIN: Tilgang bare til varslingshistorikk.

ADMIN LOGIN: Varslingshistorikk og administrator-funksjoner.

VARSLINGER: Varslingshistorikk for en begrenset tidsperiode.

ENHETER: For å få tilgang til denne fanen må du logge på som «Admin». Her kan du administrere telefonene som er koblet til Appsenderen. Klikk på den telefonen du ønsker å gjøre noe med. Nå kan du endre telefonens navn og visningsnavnet til Appsenderen.

Trykk «lagre» for å lagre endringene.

Trykk «slett» for permanent å stoppe varsling til denne telefonen.

TILPASSE: Endre varslingstekst og varslingslyder fra det som er standard. Alle typer varslinger som Appsenderen har mottatt fra varslingssendere og som er mottatt av FlexiApp er listet opp. Hvis du ønsker å endre på en varsling, trykker du på pilen til høyre. F.eks. kan du velge hvilken dør det ringer på.

Velg hvordan varselet skal lyde fra menyen «Meldingstype». Trykk «Lagre» for å lagre endringene.

Trykk «Slett» for å fjerne varslingsstypen fra listen.

Trykk «Standard» for å tilbakestille til fabrikkinnstilling.

TEST: Under denne fanen kan du få systemet til å sende deg en test-alarm.

8. BRUKSBEGRENSNINGER

Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

9. RESIRKULERING

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

10. SIKKERHET

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder. Produktet må ikke skrues fra hverandre.

11. TEKNISKE DATA

Dim. (bxhxd):	140x140x40mm	Sendereffekt:	10 mW e.r.p.
LAN:	10/100Mbps	Driftsspenning:	15VDC
Radiofrekvens:	868.1 – 869.85 MHz	Temperatur:	-10 °C - +40 °C

12. SAMSVARERKLÆRING

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:

www.vestfoldaudio.no/samsvar

13. FEILSØKING

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Appsenderen lyser ikke blått	Strømforsyningen er ikke tilkoblet.	Kontroller tilkoblingen.
	Det er ikke kontakt med bredbåndsruteren	Kontroller tilkoblingen til ruteren og at ruteren er på.
	Bredbåndsruteren har ikke kontakt med Internett.	Sjekk linjer.
FlexiApp finner ikke Appsenderen	WiFi er ikke tilgjengelig	Skru på WiFi til det samme nettet der FlexiApp-sender er tilkoblet.
	Smarttelefonen er ikke tilkoblet WiFi-nettet.	Logg på WiFi.
Får ikke sammenkoblet	Sammenkobling mislykkes pga. for lang avstand	Flytt enhetene nærmere hverandre og prøv igjen

	Enheten er allerede sammenkoblet med andre enheter.	Nullstill sammenkobling. Vennligst prøv igjen.
	Feil rekkefølge på sammenkoblingen	Trykk to ganger på LIFE-knappen på en enhet i det eksisterende system, og kun én gang på den nye enheten
Indikatorlampen fortsetter å blinke grønt etter sammenkobling	Er det trykket to ganger på den ene enhetens LIFE-knapp?	Trykk en gang til på LIFE-knappene for å avbryte. Prøv igjen.
	Leter fortsatt etter nye enheter.	Trykk en gang til på LIFE-knappen for å avbryte. Prøv igjen.
FlexiApp mottar ikke varslinger	Varsling er avslått i FlexiApp.	Slå på varsling i FlexiApp, fane "Sendere".
	"Kun alarmer" er valgt.	Slå av "Kun alarmer" i FlexiApp.
	Mottak av varslinger er blokkert	Gå til Innstillinger: Tillat mottak av varslinger
	FlexiApp-senderen fungerer ikke.	Kontroller FlexiApp-senderens tilkoblinger.
	Får ikke grønt blinkende lys.	Sjekk rekkevidde mellom sendere og FlexiApp-senderen
	Smarttelefonen er ikke tilkoblet FlexiApp-senderen	Koble til FlexiApp, fane "Søk".
	FlexiApp-senderne er ikke sammenkoblet med senderne i huset.	Sammenkoble FlexiApp-senderen med resten av utstyret i huset
	Mobildata/WiFi/Internett er ikke tilgjengelig.	Slå på mobildata og/eller logg på et WiFi-nett.
	Telefonen er satt i "flymodus".	Slå av "flymodus".
Varslinger mottas, men ingen lyd eller vibrasjon.	Smarttelefonen er satt til "lydløs"-modus.	Slå på lyd og/eller vibrasjon.
FlexiApp varsler for sent	Smarttelefonens strømsparing er aktivert.	Slå av strømsparingsfunksjonen.
	Smarttelefonen har vært utenfor dekningsområde.	Om mulig: Oppsøk områder med god dekning.
	Smarttelefonen er opptatt med å bytte mellom mobildata og WiFi.	Om mulig: Velg enten mobildata eller WiFi.
	Internett-linjen i boligen er ustabil.	Sjekk linje og tilgang.
	Smarttelefonen har andre app-er som stjeler prioritet.	Forsøk å slå av andre "app'er".

