

# Flexiknapp Alarm (FLEXI A Care)



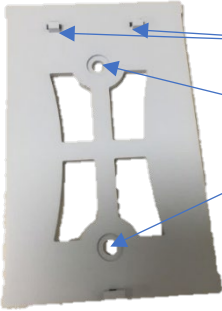
## Bruksanvisning



Art. Nr.: 1750

FLEXIKNAPP ALARM CARE (FLEXI A CARE) benyttes for å varsle assistanse til varslingsmottakere i samme system. Varslingen sendes trådløst, og kan enkelt tilpasses til å vise i mottakerne hvor varslingen er sendt fra.

FLEXI A CARE er meget godt egnet i f.eks. beboerrom, der beboeren trenger å tilkalle personalet for assistanse. Den benyttes også til varsling fra personal til personal.

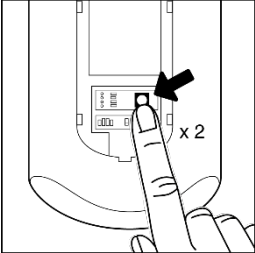
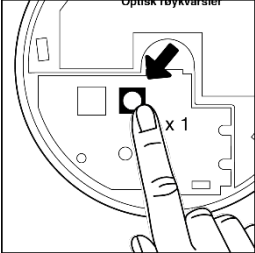
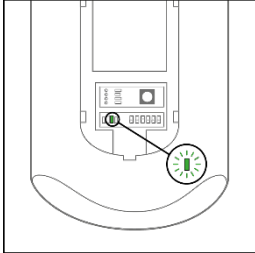
	<p><b>1. Trykknapp med lysindikator</b></p>
	<p><b>3. Funksjonsvelger (ID-velger)</b> <b>4. LIFE-knapp (sammenkobling)</b></p>
	<p><b>5. Feste for Flexiknapp</b> <b>6. Skruehull for festebrakett</b></p>

**BATTERI OG LADING:**

Det medfølger et høykapasitets litium batteri (9100100934), som vil sikre drift av enheten i mange år. Batteriet må ikke lades opp.

## SAMMENKOBLING

Alle FlexiBlink LIFE enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles ved å trykke på LIFE-knappen. Den finnes under det sorte lokket bak på Flexiknapp.

		
<p>1. Trykk 2 ganger på LIFE-knappen på den ene av enhetene.</p>	<p>2. Trykk 1 gang på LIFE-knappen på den andre enheten. Indikatorlampene på begge enhetene blinker grønt.</p>	<p>3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast i 2-3 sekunder. Enhetene er klare til bruk. Trykk «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.</p>

## SAMMENKOBLING AV NY ENHET TIL EKSISTERENDE SYSTEM

1. Trykk 2 ganger på LIFE-knappen på enhet fra eksisterende system.
2. Trykk 1 gang på LIFE-knappen på den nye enheten.
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
4. Enhetene er klare til bruk. Trykk «Test»-knappen for å kontrollere sammenkoblingen.

## SAMMENKOBLING MISLYKTES

Dersom du får rødt lys i den nye enheten ved sammenkobling, mislyktes den.

Nullstill enheten for å sammenkoble på nytt. (Se nedenfor).

## AVBRYTE SAMMENKOBLING

For å avbryte en aktiv sammenkobling, trykk 1 gang på LIFE-knappen.

## NULLSTILLE SAMMENKOBLINGEN

Trykk 5 ganger på LIFE-knappen på enheten hvor sammenkoblingen skal slettes. Dette bekreftes med røde og grønne blink. Dersom du ønsker å endre funksjoner i produktet, se avsnitt «Utvidede funksjoner».

## DAGLIG BRUK

Flexiknapp Tilkalling benyttes i hovedsak for å tilkalle assistanse. Den kan også benyttes som dørklokke, varsling fra resepsjon o.l. For alarmer av akutt art, anbefaler vi Flexiknapp Alarm (art. 1750).

### VELG FUNKSJON (ID-Velger)

FLEXI A CARE har innebygget flere ferdigprogrammerte varslinger. Velg varslings-ID ved å vri på funksjonsvelgeren, som du finner under gummilokket på baksiden. Varslingene kan ytterligere endres i varslingsmottakeren IRIS CARE eller via vår Skytjeneste.

ID	VARSLING
0	Alarm Rom 1
1	Alarm Rom 1
2	Alarm Rom 2
3	Alarm Rom 3
4	Alarm Rom 4
5	Alarm Rom 5
6	Alarm Rom 6
7	Alarm Rom 7
8	Alarm Rom 8
9	Alarm Rom 9
A	Alarm Rom 10
B	Alarm Rom 11
C	Alarm Rom 12
D	Alarm Rom 13
E	Alarm Rom 14
F	Alarm Rom 15

### BYTTE/SETTE INN BATTERI



Åpne boksen ved å skru ut de fire skruene på baklokket.

Sett inn batteriet i batterikontakten.

Ved tilkobling av batteri kan Flexiknapp blinke grønt i opptil et par minutter mens batteriet klargjøres for langtids bruk.

Lukk boksen og skru inn de fire skruene før montering av Flexiknapp.

**NB! Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes eller brennes.**

### MONTERING

Utendørs: Benytt den vedlagte veggbraketten og skru denne fast på veggen. Flexiknapp kneppes deretter på plass i braketten.

Innendørs: Flexiknapp monteres normalt på vegg med den medfølgende borrelås-tapen. Benytt den medfølgende spritservietten for å rengjøre veggen. Trykk limflatene hardt på plass i minst 10 sekunder. Alternativt kan enheten festes med veggbraketten som for utendørs montasje.

**I BRUK:**

Når enheten er i drift vises status i lysindikatoren på framsiden:

Slukket: Stand-by

Grønt: Varsel sendes

Blinkende rødt/grønt: Bytt batteri

**VIKTIG INFORMASJON:**

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut. Produktet er for innendørs bruk i ikke-kondenserende miljø.

Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteribytte hvis du har mottakere som viser dette.

Produktet bør ikke stå i direkte sollys.

**BRUKSBEGRENSNINGER**

Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

**RESIRKULERING**

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

**SIKKERHET**

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder. Produktet må ikke skrues fra hverandre.

**TEKNISKE DATA**

Dim. (bxhxd):	64x100x20mm	Sendereffekt:	10 mW e.r.p.
Vekt:	140 g	Batteri:	Litium 3V
Radiofrekvens:	868.1 – 869.85 MHz	Temperatur:	-10 °C - +40 °C

**SAMSVARERKLÆRING**

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:

[www.vestfoldaudio.no/samsvar](http://www.vestfoldaudio.no/samsvar)

**FEILSØKING**

<b>Problem</b>	<b>Mulig årsak</b>	<b>Løsninger</b>
Det varsles ikke i mottakere	Flexiknapp lyser ikke grønt.	Bytt batteri.
	Flexiknapp mangler batteri	Sett inn batteri.
	Avstanden mellom Flexiknapp og mottaker er for stor.	Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn en repeater.
	Batteriet i Flexiknapp er tomt / det blinker rødt.	Bytt batteri.
Det varsles med feil signal i mottakere.	Funksjonsvelger (ID) står i feil posisjon.	Skru funksjonsvelgeren til riktig posisjon.
Det blinker rødt/grønt i Flexiknapp	Batteriet i Flexiknapp er snart tomt.	Bytt batteri
Etter TEST-trykk, lyser senderen rødt	Enheden er ikke sammenkoblet	Koble enheten til en mottaker
Etter TEST-trykk, lyser senderen lenge grønt, deretter lenge oransje	Ingen mottaker er sammenkoblet med senderen	Sjekk at det er en mottaker i systemet. Nullstill enheten. Koble til på nytt. Prøv igjen
Sammenkobling fungerer ikke	Begge enhetene har vært sammenkoblet tidligere- Det blinker rødt.	Trykk 5 ganger på LIFE-knappen på den enheten som skal legges til.

