

# VARSLINGSMOTTAKER IRIS (IRIS CARE)

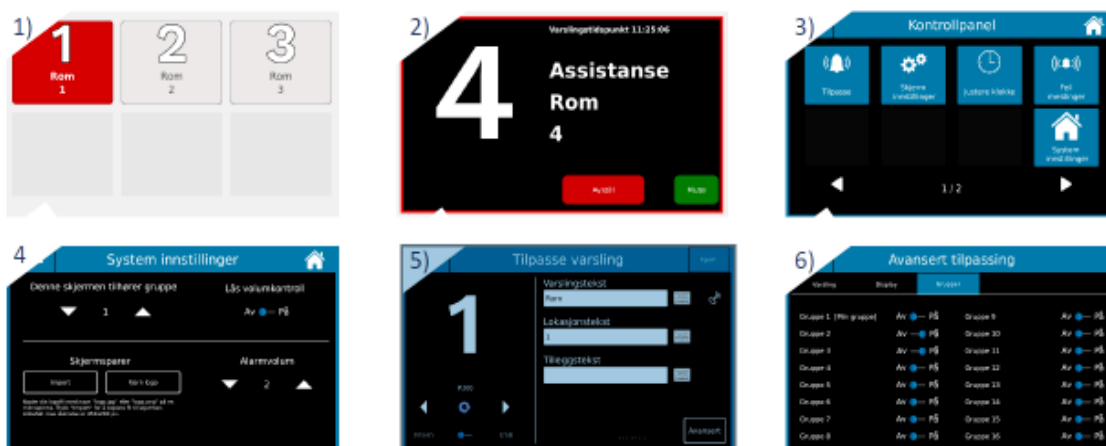
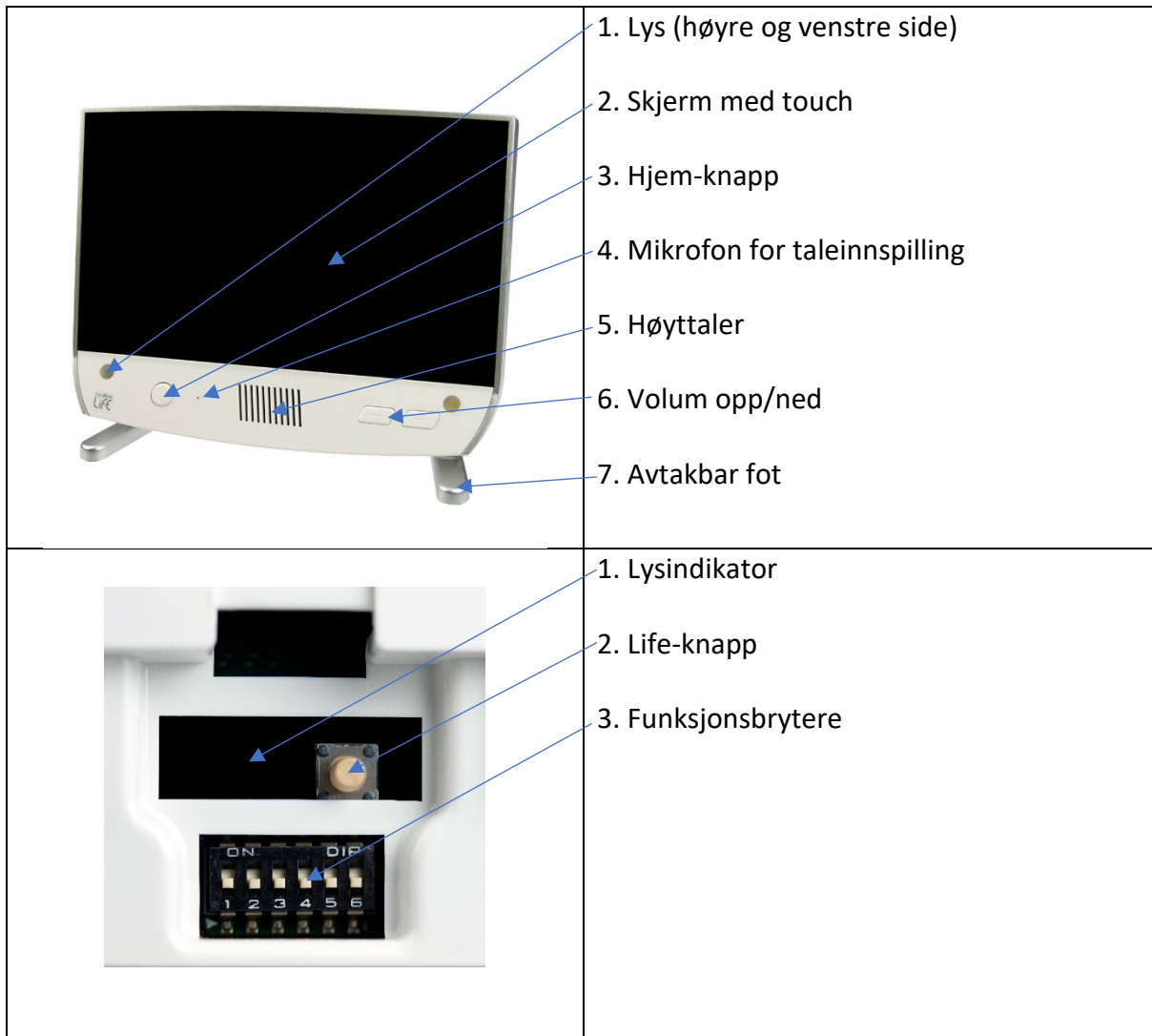
## Bruksanvisning



Art. Nr.: 1716

IRIS CARE – Varslingsmottaker med touch-dislay. Varsler tilkalling og alarmer med symboler, blinkende lys og/eller lyd.

IRIS CARE tar imot trådløse signaler fra Vestfold Audio CARE sendere installert i samme system. Den melder hvilken varsling som er utløst, og i hvilket rom den er utløst.



Varslingsystemet benyttes til å tilkalle akutt og generell assistanse, vandring, passasjealarmer, sengealarm og lignende. Daglige signaler, som f.eks. tilkalling, varsles som standard med markering på tilhørende rom-id (1), akutte alarmer varsles med full skjerm (2). Systemet kan enkelt utvides og tilpasses etter behov.

## 1. KOMME I GANG

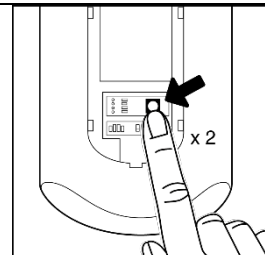
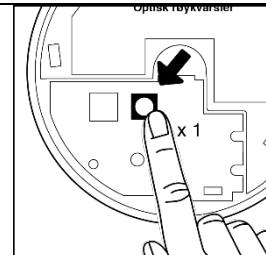
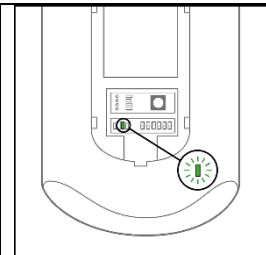
IRIS kan stå på et bord i den medfølgende sokkelen, eller skrues opp på vegg med den medfølgende braketten.

Sett strømforsyningen i kontakten på veggen og plugg ledningen inn i IRIS. Du vil nå se at skjermen starter. IRIS er klar til bruk, men først må den sammenkobles med resten av Vea Care produktene i varslingsystemet.

## 2. SAMMENKOBLING

Alle Vea Care enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles ved å trykke på LIFE-knappen. LIFE-knappen finnes under baklokket på IRIS

### Sammenkoble første gang

		
<p><b>1. Trykk 2 ganger på LIFE-knappen på den ene av enhetene.</b></p>	<p><b>2. Trykk 1 gang på LIFE-knappen på den andre enheten. Indikatorlampene på begge enhetene blinker grønt.</b></p>	<p><b>3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast i 2-3 sekunder. Enhetene er klare til bruk. Trykk «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.</b></p>

### Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system

1. Trykk 2 ganger på LIFE-knappen på enhet fra eksisterende system.
2. Trykk 1 gang på LIFE-knappen på den nye enheten.
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
4. Enhetene er klare til bruk. Trykk «Test»-knappen for å kontrollere sammenkoblingen.

### Sammenkobling mislyktes

Dersom du får rødt lys i den nye enheten ved sammenkobling, mislyktes den. Nullstill enheten for å sammenkoble på nytt. (Se nedenfor).

### Avbryte sammenkobling

For å avbryte en aktiv sammenkobling, trykk 1 gang på LIFE-knappen.

### Nullstille sammenkoblingen

Trykk 5 ganger på LIFE-knappen på enheten hvor sammenkoblingen skal slettes. Dette bekreftes med røde og grønne blink. Dersom du ønsker å endre funksjoner i produktet, se avsnitt «Utvidede funksjoner».

### 3. DAGLIG BRUK

Trykk på skjermen for å stoppe aktivt varsel på egen skjerm.

Trykk avstill-knappen for å stoppe varslingen på samtlige mottakere.

Alarmsymbolet vises på skjermen i ca 30 sekunder etter avbrutt alarm

Justere volum: Juster volumet på daglige alarmer med volumbryteren. Alarmer varsler alltid med full lydstyrke.

### 4. MENY FOR INNSTILLINGER

Trykk og hold HJEM-knappen inne i 2 sekunder. Innstillingsmenyen vil nå vises (3.). Menyene kan ha flere sider med undermenyer. Du kan bla igjennom sidene ved å trykke på pilene nederst på skjermen.

#### **Meny: Feilmeldinger:**

Her vises oversikt over alle eventuelle feil ved systemet.

#### **Meny: Varslingsaktivitet:**

Enkel oversikt over de siste varslinger. Her er det også mulig å endre på visningen av de ulike alarmene. Trykk på blyantsymbolet tilhørende den alarmen du vil endre.

#### **Meny: Tilpasse:**

Under denne menyen får man oversikt over alle mottatte varslinger. Første gang varslinger mottas, vises de med fabrikkinnstilt tekst, talemelding og symbol. Disse visningsinnstillingene kan tilpasses hver enkelt varslingslinje. Trykk på varslingslinjen som skal tilpasses for å endre den. Her kan du endre teksten som skal vises til varslingslinjen.

#### **Meny: Skjerminnstillinger:**

Her kan man endre lysstyrken på skjerm og skjermsparerer.

#### **Meny: Justere klokke:**

Benyttes for å endre tid og dato på enheten.

#### **Meny: Informasjon:**

Her vises programvareversjon og lignende. Benyttes ved henvendelser til Vestfold Audio AS.

#### **Meny: Systeminnstillinger:**

Her kan den sette opp gruppetilhørighet (se eget kapittel), låse volumkontrollen, sette alarmvolum og legge inn egen logo som skjermsparerer.

#### **Meny: LIFE Sammenkobling:**

Denne funksjonen kan benyttes i stedet for å bruke LIFE-knappen ved sammenkobling.

#### **Meny: Vedlikehold:**

Her kan oppsettet man har gjort kopieres til minnepenn. Dette er praktisk for å kopiere innstillingene man har gjort til en annen IRIS. Her er det også mulig å fabrikkinnstille varslingsmottakeren og oppgradere software.

#### **Meny: Informasjon**

Her vises programvareversjon og informasjon om sammenkobling. LIFE nettverk status: Hvit tekst = ikke sammenkoblet. Grønn tekst = sammenkoblet.

Start nettverk: Dersom man kobler til nettverkskabel, så må man enten ta ut og inn strømmen, eller man kan trykke på teksten «Start nettverk».

## GRUNNINNSTILLINGER

Med funksjonsbryterne på baksiden av IRIS kan du endre noen grunnleggende innstillinger. Funksjonene kan kombineres fritt etter behov.

### Daglige signaler/Kun alarmer – bryter 1



Med bryter 1 ON (opp) varsler IRIS kun alarmer – som for eksempel tilkalling for akutt bistand, røykvarsler/brannalarm, o.l.

### Skjermlås – bryter 5



Med bryter 5 opp (ON) låses volumknapper og menyer. Denne innstillingen holdes selv etter strømbrudd, og ved forsøk på volumjustering vil det komme beskjed på skjermen at skjermen er låst.

## GENERELT OM SENDERE

Sendere sammenkobles og stilles inn på aktuelt romnummer vha. funksjonsvelgeren.

### GENERELT OM REPEATERE:

Sammenkoble først Repeater mot ett av produktene i systemet. Ved flere Repeatere, så MÅ de sammenkobles opp mot Repeater som allerede er i systemet.

### GRUPPEINNSTILLINGER:

IRIS CARE sender som standard alle alarmer til alle enheter.

Dersom man ikke vil motta enkelte varslinger på enkelte skjermer, gjøres dette via Systeminnstillinger. Her kan man f.eks. slå av varsling for egne alarmer.

9.1. Gå til Kontrollpanel og velg Systeminnstillinger (4).

9.2. Bestem gruppenummer tilhørende skjermen. Dette bør gjøres på samtlige IRIS CARE som er i samme system. Hver skjerm kan da settes til egen gruppe, eller flere skjermer kan tilhøre samme gruppe. Dette gjør det mulig å bestemme hvilke varslinger som skal gå til de ulike skjermene. Gå tilbake til kontrollpanel når du har bestemt gruppe.

9.3. Velg «Tilpasse» fra Kontrollpanelet og velg alarmen som skal tilpasses (5). (For å få oversikt over alarmene, må disse først ha blitt aktivert). Velg deretter «Avansert».

- Varslinger sendes som standard til alle enheter når alarmene er satt til «PÅ» under standard konfigurasjon.

- Velg «Gruppe konfigurasjon» for å bestemme varslingsform på egen skjerm, og til bestemte grupper/skjermer. Slå varsling av/på med bryterne på displayet. Velg deretter «Grupper» (6) for å bestemme hvilke varslingsgrupper/skjermer som skal motta / ikke motta den valgte alarmen.

Hvis man f.eks slår alarmen av, og velger Gruppe 1 og Gruppe 2 «PÅ», så vil disse gruppene ikke motta valgte alarm.

**VIKTIG INFORMASJON:**

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut. Produktet er for innendørs bruk i ikke-kondenserende miljø.

Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteribytte hvis du har mottakere som viser dette.

Produktet bør ikke stå i direkte sollys.

**BRUKSBEGRENSNINGER**

Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

**RESIRKULERING**

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

**SIKKERHET**

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder. Produktet må ikke skrus fra hverandre.

**TEKNISKE DATA**

Dim. (bxhxd):	218x165x40 mm (uten veggfeste og fot).	Sendereffekt:	10 mW e.r.p.
Vekt uten strømforsyning:	800 g	Driftsspennning:	15 VDC
Radiofrekvens:	868.1 – 869.85 MHz	Temperatur:	-10 °C - +40 °C

**SAMSVARSERKLÆRING**

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:

[www.vestfoldaudio.no/samsvar](http://www.vestfoldaudio.no/samsvar)

**FEILSØKING**

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Får ikke sammenkoblet	Indikatorlampe lyser rødt etter sammenkoblingsforsøk	Enheten er allerede sammenkoblet med andre enheter. Nullstill sammenkobling.
	Indikatorlampe blinker rødt etter sammenkoblingsforsøk	Sammenkobling mislykkes. Vennligst prøv igjen.

	Indikatorlampen fortsetter å blinke grønt etter sammenkobling	Leter fortsatt etter nye enheter. Trykk en gang til på LIFE-knappen for å avbryte. Prøv igjen.
Etter TEST-trykk, lyser senderen rødt	Enheden er ikke sammenkoblet	Koble enheten til en mottaker
Etter TEST-trykk, lyser senderen lenge grønt, deretter lenge oransje	Ingen mottaker er sammenkoblet med senderen	Sjekk at det er en mottaker i systemet. Nullstill enheten. Koble til på nytt. Prøv igjen
Varsling mottas ikke	Ikke sammenkoblet	Koble ut siste enhet og koble sammen igjen
	Manglende dekning	Forsøk å flytte enhetene nærmere hverandre
	Manglende dekning	Sett opp en REPEATER
	Tomt batteri i sender	Bytt batteri i sender
	Sender virker ikke	Les bruksanvisning til sender
Varsling mottas, men ingen lyd	Volum justert ned	Forsøk å justere opp volum
	Lyd avslått	Kontroller at lyd ikke er avslått i avansert kontrollpanel.
Varsling mottas med lyd, men ingen tale	Tale avslått	Kontroller at tale ikke er avslått (funksjonsbryter 3)
Varsling mottas, men ingen lysblink	Lys avslått	Kontroller at lys ikke er avslått eller justert for lavt i avansert kontrollpanel. Se kapittel 7
Klokken viser feil tidspunkt eller dato		Still klokken.
Klokken viser feil tidspunkt etter strømbrudd	Klokkebatteriet er tomt for strøm	Klokkebatteriet lades opp over lang tid. Batteriet bør lade i minst 4 dager før man tar ut strømmen
IRIS varsler hendelser, men ingen sendere er aktivert.	Enheden er sammenkoblet feil.	Nullstill sammenkoblingen på enheten og legg til igjen.

