

Junior Lommevibrator (Junior Care)

Bruksanvisning



Art. Nr.: 1745

JUNIOR LOMMEVIBRATOR (JUNIOR-CARE) er en varslingsmottaker i VEA Care-serien. Den varsler tilkallinger og alarmer fra tilknyttede varslingssendere. Panelet har seks symboler med lys, som kan skille mellom varsling fra seks ulike enheter. Dersom den skal varsle fra mer enn seks enheter, er dette mulig ved å benytte enkelte av symbolene i kombinasjon.

Lommevibratoren varsler med vibrasjon, symboler, lys og/eller lyd. Den skiller mellom daglige signaler og alarmer med ulik varslingsstyrke.



BATTERI OG LADING

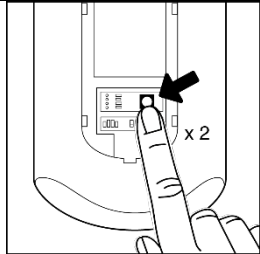
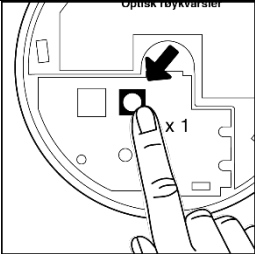
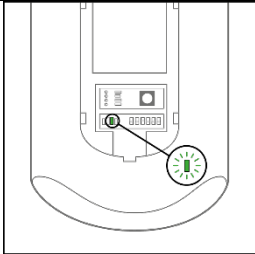
Junior Lommevibrator har innebygget oppladbart batteri. Et fulladet batteri holder normalt i over 2 døgn.

KOMME I GANG

Alle enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles ved å trykke på Life-knappen. Den finnes under lokket bak på Junior (11.). Benytt en flat skrutrekker eller lignende for å vippe av lokket.

SAMMENKOBLING

Sammenkoble første gang

		
<p>1. Trykk 2 ganger på LIFE-knappen på den ene av enhetene.</p>	<p>2. Trykk 1 gang på LIFE-knappen på den andre enheten. Indikatorlampene på begge enhetene blinker grønt.</p>	<p>3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast i 2-3 sekunder. Enhetene er klare til bruk. Trykk «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.</p>

Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system

1. Trykk 2 ganger på LIFE-knappen på enhet fra eksisterende system.
2. Trykk 1 gang på LIFE-knappen på den nye enheten.
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
4. Enhetene er klare til bruk. Trykk «Test»-knappen for å kontrollere sammenkoblingen.

Sammenkobling mislyktes

Dersom du får rødt lys i den nye enheten ved sammenkobling, mislyktes den. Nullstill enheten for å sammenkoble på nytt. (Se nedenfor).

Avbryte sammenkobling

For å avbryte en aktiv sammenkobling, trykk 1 gang på LIFE-knappen.

Nullstille sammenkoblingen

Trykk 5 ganger på LIFE-knappen på enheten hvor sammenkoblingen skal slettes. Dette bekreftes med røde og grønne blink. Dersom du ønsker å endre funksjoner i produktet, se avsnitt «Utvidede funksjoner».

DAGLIG BRUK

JUNIOR-CARE skiller mellom generelle og akutte alarmer. Alarmtypen bestemmes på senderen (se egen bruksanvisning for sender). De seks knappene på panelet brukes for å identifisere hvor varslingen sendes fra. Ved varsling vil lyset ved symbolet blinke, samtidig som vibrasjon starter.

VARSLING

- Trykk «STOPP» for å stoppe en alarm på mottakeren.
- Trykk «ON/OFF»-knappen for å kvittere en alarm. Det sendes et signal til de andre mottakerne at varslingen er kvittert, samtidig slås alarmen av på de andre mottakerne.

Indikatorlampen lyser fast i noen sekunder, for å vise hvilken alarm som er kvittert. Trykk eventuelt «STOPP» for å slå av indikatorlampen.

LYDVARSLING AV

Trykk og hold Stoppknappen inne i ca. 2 sekunder, til JUNIOR-CARE kvitterer med to korte lyder. Heretter vil den ikke varsle med lyd.

LYDVARSLING PÅ

Trykk og hold Stoppknappen inne i ca. 2 sekunder, til JUNIOR-CARE kvitterer med en lang lyd. Heretter vil den varsle med lyd.

TILBAKEFØRE TIL FABRIKKINNSTILLINGENE

1) JUNIOR-CARE skal være påslått

2) Trykk samtidig på Strømknappen og Stopp-knappen, og hold dem begge inne i ca. 10 sekunder til JUNIOR kvitterer med:

- Et blink med alle lys i membranpanelet.
- Et blink med det sterke lyset.
- Lydsignal
- Vibrasjon

Dette skjer samtidig og varer i ca. 1 sekund. Deretter slår JUNIOR-CARE seg automatisk av.

VIKTIG INFORMASJON:

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut. Produktet er for innendørs bruk i ikke-kondenserende miljø.

Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteribytte hvis du har mottakere som viser dette.

Produktet bør ikke stå i direkte sollys.

BRUKSBEGRENSNINGER

Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

RESIRKULERING

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

SIKKERHET

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder. Produktet må ikke skrues fra hverandre.

TEKNISKE DATA

Dim. (bxhxd):	69x133x27mm	Sendereffekt:	10 mW e.r.p.
Vekt:	200 g	Strømforsyning:	15VDC/230VAC
Radiofrekvens:	868.1 – 869.85 MHz	Temperatur:	-10 °C - +40 °C

SAMSVARSERKLÆRING

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:

www.vestfoldaudio.no/samsvar

FEILSØKING

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Det varsler ikke i JUNIOR	JUNIOR er ikke påslått.	Trykk på Strømknappen og se om det kommer lys i knappen.
	JUNIOR mangler strøm.	Sette enheten på lading.
	Avstanden mellom JUNIOR og senderen er for stor.	Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn en repeater.
	JUNIOR og senderen(e) er ikke sammenkoblet.	Utfør sammenkobling.
Etter TEST-trykk, lyser senderen rødt	Enheten er ikke sammenkoblet	Koble enheten til en mottaker
Etter TEST-trykk, lyser senderen lenge grønt, deretter lenge oransje	Ingen mottaker er sammenkoblet med senderen	Sjekk at det er en mottaker i systemet. Nullstill enheten. Koble til på nytt. Prøv igjen
Sammenkobling fungerer ikke	Enhetene har vært sammenkoblet tidligere. Det blinker rødt.	Trykk 5 ganger på LIFE-knappen på den enheten som skal legges til.
Falsk varsling	Følsomheten på en akustisk sensor/sender er for høy.	Reduser følsomheten.

