

# Ella Smyckessändare ELLA-L R



## Användarmanual

---

# Inehållsförteckning

---

<b><u>1. Inledning</u></b>	<b>3</b>
<b><u>2. Översikt</u></b>	<b>3</b>
I paketet	3
<b><u>3. Kom igång</u></b>	<b>4</b>
Sammankoppla enheter	5
Anslut en ELLA till ett FlexiBlink LIFE-system	5
Använd ELLA för att ansluta en ny enhet till systemet	5
Anslutningen misslyckades	5
Avbryt anslutningen	6
Återställ sammankopplingen	6
Fabrikinställning	6
Välj funktion (ID-väljare)	6
Utöka räckvidden	6
<b><u>4. Daglig användning</u></b>	<b>7</b>
Skicka en varning	7
<b><u>5. Viktig information</u></b>	<b>7</b>
Säkerhet	7
Rengöring	7
Återvinning	7
Användningsbegränsningar:	7
<b><u>6. Försäkran om överensstämmelse</u></b>	<b>7</b>
<b><u>7. Teknisk data</u></b>	<b>7</b>
<b><u>8. Felsöking</u></b>	<b>8</b>

## 1. Inledning

---

Smyckessändaren ELLA-L R (ELLA) är ett hjälpalarm för människor som behöver kunna ringa efter hjälp, eller skicka varningar till andra.

Du bär den med hjälp av ett halssnöre.

ELLA skickar varningar till ELLA och andra FlexiBlink LIFE mottagare.

ELLA kan också anpassas så att den startar fjärrstyrd uppläsning av klockan på produkter som IRIS LIFE, MÅNE LIFE och SOL LIFE, och för ett antal andra varningar.

ELLA vibrerar när den skickar varningar.

### Nyckeldata

- Enkel installation och användning.
- Stänksäker (dusch - inte badkar)
- Signalområde inom normalt hushåll
- Mycket bra batteritid
- Laddningsbar


## 2. Översikt

---

### I paketet



Figur 1  
ELLA, armband, hållare med säkerhetsnöre,  
laddare och laddkabel

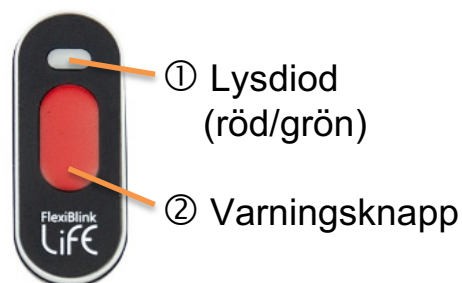

Figur 2 Knapp och ljus

### 3. Kom igång

#### Laddning

Innan du använder ELLA, bör den vara fulladdad.

En fulladdad enhet har en batteritid på veckor, beroende på användning.

Ta ut ELLA ur hållaren och sätt in den i laddningsuttaget, som igen sätts in i den medföljande laddaren.



Lysdioden blinkar rött under laddning.

**OBS!** Du kan inte skicka varningar när enheten laddas.

#### Insättning av ELLA

ELLA sätts in i hållaren "underifrån" - dvs trycks ned mot botten först..



#### Uttagning av ELLA


ELLA avlägsnas genom att trycka upp den genom hållaren, enligt bilden ovan.

#### Säkerhetssnöre



ELLAs halssnöre har ett säkerhetsfäste av små metallkulor, som passar in i hålen i hållaren. Om snöret dras ut, tryck bara tillbaka kulorna på plats.

#### Lysdioder och vibrationer

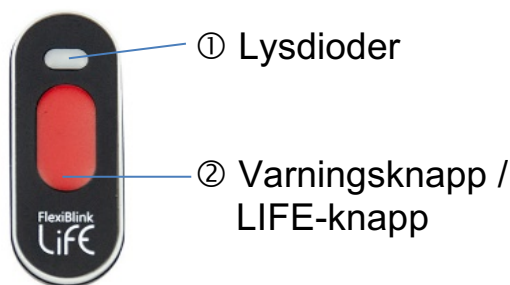

ELLA har två lysdioder, en grön och en röd, och en vibrator som tillsammans ger information:

Grönt blink + vibration	Skickar varning
Grönt blink efter sändning	Skickad varning har mottagits
Rött blink+ 10 x vibration	Varningen kom inte fram.
Röd och grön blinkning	Lite batteri.
Röd blinkning	Enheten laddas

## Sammankoppla enheter

Alla FlexiBlink LIFE som ska fungera tillsammans, måste sammankopplas. Det gör du genom att trycka på LIFE-knappen.

## Anslut en ELLA till ett FlexiBlink LIFE-system

Ett system kan bestå av en eller flera sändare och mottagare, som är sammankopplade.

1. Håll varningsknappen ned på den ena ELLA i ca 10 sekunder. Det bekräftas med 3 korta vibrationer.
2. Tryck **två** gånger på varningsknappen på ELLA. Indikationslampan blinkar grönt.
3. Håll varningsknappen ned på den andra ELLA i ca 10 sekunder. ELLA bekräftas med 3 korta vibrationer.
4. Tryck **en** gång på varningsknappen på ELLA nr. två. Indikationslampan blinkar grönt.
5. Sammankopplingen bekräftas genom att båda indikationslamporna lyser grönt i 2-3 sekunder.

## Använd ELLA för att ansluta en ny enhet till systemet

När ELLA är en del av ett system, kan den användas för att ansluta flera sändare och mottagare.

1. Håll varningsknappen på ELLA ned i ca 10 sekunder. ELLA bekräftas med 3 korta vibrationer.
2. Tryck **två** gånger på varningsknappen på ELLA. Indikationslampan på ELLA blinkar grönt.
3. Tryck **en** gång på LIFE-knappen på enheten som ska kopplas till ELLA. Indikationslampan på den enheten blinkar grönt.
4. Sammankopplingen bekräftas genom att båda indikationslamporna lyser grönt i 2-3 sekunder.

## Anslutningen misslyckades

Om enheten lyser rött vid försök av anslutningen, så misslyckades den.

Då måste du återställa enheten och prova igen.

## Avbryt anslutningen

För att avbryta anslutningen, tryck **en** gång på LIFE-knappen / varningsknappen på ELLA.

## Återställ sammankopplingen

1. Tryck ned och håll varningsknappen inne i 10 sekunder, till du känner 3 vibrationer.
2. Tryck **fem** gånger på varningsknappen på ELLA.
3. Återställningen bekräftas med röda och gröna blinkningar.

## Fabrikinställning

För att radera specialanpassningen av ELLA, måste sammankopplingen först återställas. Därefter kan den fabrikinställas.

1. Tryck och håll ned varningsknappen i 10 sekunder, till du känner 3 vibrationer.
2. Tryck **tio** gånger på varningsknappen på ELLA.
3. Återställningen bekräftas med röda och gröna blinkningar.

## Välj funktion (ID-väljare)

ELLA kan ställas in så den skickar andra varningar än "Assistans begäran".

Detta måste göras med en IRIS LIFE varningsmottagare.

Vänligen läs

användningsmanualen till IRIS LIFE. Detta kan också förhandsbeställas från Vestfold Audio AS.

## Utöka räckvidden

I större byggningar eller institutioner där det finns ett behov av att utöka räckvidden mellan en ELLA och andra FlexiBlink LIFE produkter, måste en eller flera sändare av typen REPEATER-L anslutas/användas.

## 4. Daglig användning

---

### Skicka en varning

När du trycker på varningsknappen, skickas en varning till alla mottagare som är sammankopplad med din ELLA. Den lyser grönt och ger ifrån sig en vibration att meddelandet har skickats.

Standard varningsmeddeland är:  
"Assistans begäran!"

**OBS!** Om det blinkar rött och vibrerar tio gånger tätt, betyder det att inga mottagare har uppfattat varningen. Om möjligt flyttar du dig lite och försöker igen.

## 5. Viktig information

---

### Säkerhet

Undvika att utsätta produkten för lågor och andra direkta värmekällor.  
Produkten får inte kortslutas eller skruvas loss.

### Rengöring

Produkten kan rengöras med en mjuk, lätt fuktad trasa.

### Återvinning

Produkten får inte kastas med restavfall.

Bekanta dig med lokala bestämmelser för avfallshantering av elektriska produkter. Med korrekt hantering kan stora delar av produkten återvinnas, samtidigt som miljön skyddas.



### Användningsbegränsningar:

Endast tillåtet att användas inom EU/EES.

## 6. Försäkran om överensstämmelse

---

Vestfold Audio AS förklarar att SOL överensstämmer med direktiven (MDR) 2017/745.

Den fullständiga texten på överensstämmelse finns på följande internetadress:  
[www.vestfoldaudio.no/samsvar](http://www.vestfoldaudio.no/samsvar)

## 7. Teknisk data

---

Dämpa. (lxb): 235x10mm  
Vikt m/ batteri: 40 g  
Radiofrekvens: 868.1–869.85 MHz  
Sändareffekt: 10 mW e.r.p.  
Temperatur: -10 °C - +40 °C  
Laddninsspänning: 5VDC (USB)

## 8. Felsöking

Problem	Mölig orsak	Lösningar
Det varnas inte hos mottagarna	Avståndet mellan ELLA och mottagare är för stort.	Flytta enheterna närmare varandra eller sätt in en repeater.
	ELLA har ingen ström.	Ladda ELLA.
	ELLA och mottagare är inte sammankopplad.	Utför sammankopplingen. Se kap. 3
	Fel på mottagare	Se bruksanvisning för mottagare.
Sammankopplingen fungerar inte.	Båda enheterna har varit sammankopplade tidigare. Det blinkar rött.	Återställ sammankopplingen. Se kap. 3
Det lyser inte grönt när man trycker på knappen.	ELLA har ingen ström.	Ladda ELLA.
Det blinkar rött/grönt	ELLA har nästan ingen ström	Ladda ELLA.
Det varnas med fel signaler i mottagarna.	ELLA är inställd att skicka en "fel" varning.	Använd en IRIS LIFE för att få rätt varning i ELLA. Se bruksanvisningen för IRIS.
Det blinkar rött och vibrerar efter att knappen har tryckts in och efter att grönt ljus slocknat.	Varningen mottogs inte av någon mottagare.	Flytta enheterna närmare varandra eller sätt in en repeater
		Utför sammankopplingen med mottagare
Radera sammankoppling och ta bort specialanpassningen.	ELLA är av en tidigare version.	Specialanpassa på nytt.



Vestfold Audio AS

[www.vestfoldaudio.no](http://www.vestfoldaudio.no)

tel. 33 47 33 47

