

VARSLINGSMODTAGER NORA Flexiwatch (NORA-L)

Brugsanvisning



Art. Nr.: 1860

NORA-L er et armbåndsurs som varsler FlexiBlink LIFE alarmer og daglige signaler med vibration, symboler og lyd.

Klokkevisning aktiveres med et enkelt tryk på skærmen.

Ved alarm vises et symbol og tekst på skærmen, samtidig med vibration og lydvarsel for den aktuelle alarm. Både lyd- og vibrationsvarsling benytter forskjellige varslingsmønstre til de respektive alarmer. Således kan hørehæmmede og synshæmmede enkelt skelne imellem daglige varslinger og alarmer.

NORA-L oplades med den medfølgende USB-lader. NORA er monteringsfri – batteristicket indsættes i kontakten på væggen.


Infomation:

- Enkel installation og anvendelse
- Stænktæt (bruser – ej bad)
- Signalrækkevidde indenfor normal husstand
- Enkelt at tilpasse længde på remmen
- Opladbar med god batterilevetid
- Udskiftbar rem





NB! Uret må kobles til laderen for at kunne tændes første gang.

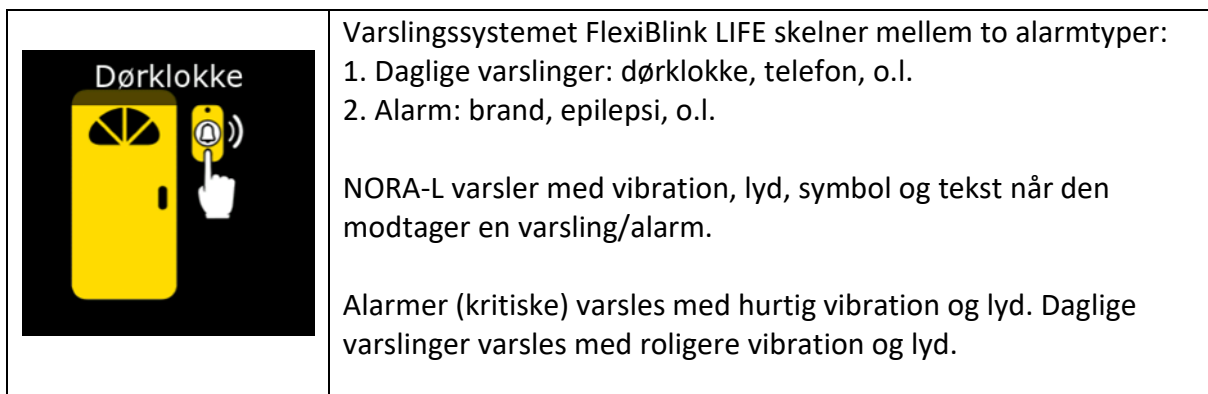VARSLING




OPLADNING

NORA bør oplades fuldt før brug. Anvend det medfølgende opladekabel.


	<p>Enheden lades ved at opladekontakten «klipses» på bagsiden af NORA-L. Kontakten fastholdes med magneter. Når disse «klipses» ind, er den korrekt placeret. Husk at sætte strømadapteren i stikkontakten.</p>
	<p>Batteriindikatoren øverst i venstre hjørne på displayet indikerer kapaciteten på batteriet. Et grønt batterisymbol vises på skærmen når batteriet er fuldt opladet. NORA-L kan modtage varslinger imens enheden oplades.</p>


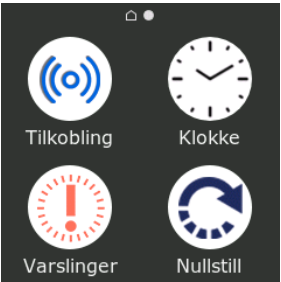
ARMBÅND

	<p>NORA-L kommer med armbåndsremmen påsat. Disse kan udskiftes ved at holde låseknappen inde og skyde remmen ud af holderen. Klips-holder er tilgængelig som tilbehør.</p>
---	---

MENY FOR INDSTILLINGER

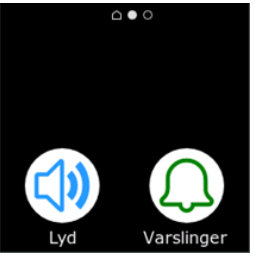

Svipe til siden på skærmen for at komme til menuen. Menuen har to sider. Svipe til højre for side 2.

	<p>Side 1: «Lyd»: Tænd/sluk for lyd «Varslinger»: Tænd/sluk for modtagelse af varslinger.</p>
---	---

	<p>Side 2:</p> <p>«Innstillinger»: Ændrer varslingsklokkens innstillinger. «Slå av»: Af stiller uret. «Info»: Viser Nora vertionsnummer.</p>
	<p>Indstillinger:</p> <p>«Tilkobling»: FlexiBlink LIFE innstillinger. «Klokke»: Indstil klokke og dato. "Varslinger": Varslingsinnstillinger. "Nullstil": Sletter alle innstillinger og setter uret i fabriksinnstilling.</p>


SAMMENKOBLING

Alle FlexiBlink LIFE enheder som skal fungere sammen må sammenkobles før bruk.

	<p>NORA-L går automatisk til menu for sammenkobling når du tilkobler USB-laderen første gang.</p> <p>De fleste FlexiBlink LIFE produkter benytter en egen LIFE-knap til sammenkoblingen. LIFE-knappen finner du som regel under låget på enheden. (Se bruksanvisning for gjeldende produkt hvis du ikke finner LIFE-knappen).</p>
	<p>Tilkoblingsstatus:</p> <p>Status for LIFE-tilkobling vises med radiosymbolet øverst til høyre på skærmen.</p> <p>Ved rød streg over radiosymbolet er uret ikke sammenkoblet med anden enhed i LIFE-systemet.</p>


SAMMENKOBLING AF NORA TIL ET EKSISTERENDE FLEXIBLINK LIFE SYSTEM

Et system kan bestå af en eller flere sendere og modtagere som er sammenkoblet.

	<ol style="list-style-type: none">1. Vælg «Indstillinger» og derefter «Tilkobling».2. Vælg «Koble til LIFE-net».3. Tryk 2 gange på LIFE-knappen på enhed i et system som NORA-L skal sammenkobles til.4. Sammenkoblingen bekræftes af klokken.5. Tryk på «Test»-knappen på en sender for at kontrollere sammenkoblingen.
---	--

DELE ELLER STARTE LIFE-NET FRA NORA-L

NORA-L kan dele netværket den er opkoblet til, og kan da benyttes til at tilkoble nye enheder til samme net.

	<ol style="list-style-type: none">1. Vælg «Indstillinger» og derefter «Tilkobling».2. Vælg «Del mit LIFE-net».3. Tryk 1 gang på LIFE-knappen på den nye enhed.4. Sammenkoblingen bekræftes af uret.5. Tryk på «Test»-knappen på en sender for at kontrollere sammenkoblingen.
--	---

AFBRYDE SAMMENKOBLING


For at afbryde sammenkoblingen, tryk én gang på LIFE-knappen på en enhed, eller tryk «Afbryd» på uret.

NULSTILLE SAMMENKOBLINGEN

1. Vælg «Indstillinger» og derefter «Tilkobling».
2. Vælg «Forlad LIFE enhed».
3. Nulstillingen bekræftes ved at teksten «Ikke tilkoblet LIFE-net» vises.

AUTOMATISK TIDSINDSTILLING

Denne funktion forudsætter at du har en AppSender i dit varslingsystem. Vælg «Indstillinger» derefter «Klokke» og skyd bryder til højre («PÅ») for at aktivere funktionen.

	<p>Uret søger efter appsender. Funktionen slår sig automatisk på. (Klokken giver besked hvis den ikke kobles til AppSenderen).</p>
---	--

FORLÆNG RÆKKEVIDDEN

Ved behov for at forlænge rækkevidden mellem NORA-L og andre FlexiBlink LIFE produkter, må der benyttes en, - eller flere, videresendere af typen REPEATER-L.

VARSLINGSINDSTILLINGER

Daglige signaler/Kun alarmer: Du kan vælge om du vil modtage alle varslinger, eller kun alarmer. Vælg «Indstillinger» og derefter «Varslinger». Når bryderen «Kun alarmer» er slået på, vil du ikke modtage varslinger for dagligdags signaler som for eksempel dørklokke.

Nabovarsling: Med denne funktion aktiveret kan du modtage alarmer hos nabo(er) som har FlexiBlink LIFE varslingssystem installeret. Funktionen forudsætter at der er opsat deling af nabovarsel mellem naboerne. (Kræver varslingsmodtageren IRIS LIFE)


Vælg «Indstillinger» og derefter «Varslinger».
Indstil bryderen «Modtag nabovarsel» PÅ.

INDSTILLINGER FOR DATO OG TID

Vælg «Indstillinger» og derefter «Klokke» for at ændre dato og tid. Uret indstilles automatisk når «Automatisk ur-indstilling» er tændt, og der er installeret en appsender (APPS-L) i boligen.

FABRIKSINDSTILLING

Fabriksindstilling sletter alle indstillinger og sammenkoblinger, og nulstiller enheden.

	<ol style="list-style-type: none">1. Vælg «Indstillinger» og derefter «Nulstil».2. Vælg «Tilbakestill» og tryk derefter «OK».3. Enheden sættes til fabriksindstilling.
---	--

VIKTIG INFORMATION

Produktet kan rengøres med en blød, letfugtet klud.

NORA-L vil varsle til FlexiBlink LIFE modtagere ved behov for batteribytte, hvis du har modtagere som viser dette.

RECIRKULERING

Produktet skal ikke bortkastes med restaffald. Gør dig bekendt med lokale bestemmelser for affaldsdeponering af elektriske produkter.

TEKNISKE DATA

Dim. (lxb):	260x43mm	Sendereffekt:	10 mW e.r.p.
Vægt:	50g	Ladespænding:	5V
Radiofrekvens:	868.1 – 869.85 MHz	Temperatur:	-10 °C - +40 °C
Omkreds:	15-23 cm		

SAMSTEMMELSESESKLÆRING

Tag kontakt med oss på post@vestfoldaudio.no ved behov for samstemmelseserklæringer.

FEJLSØGNING

Problem	Mulig årsag	Løsninger
Der varsles ikke i NORA-L.	Afstanden mellem NORA-L og sender er for stor.	Flyt enhederne nærmere hinanden, eller indsæt en repeater.
	NORA-L er tom for strøm.	Oplad NORA-L.
	NORA-L er ikke korrekt sammenkoblet.	Udfør sammenkobling. Se kap. 7.
	Fejl på sender.	Se brugsanvisning for senderen.
	Fejl med indstillinger.	Tjek at varslinger er slået på. Tjek at «kun alarmer» ikke er valgt.
	Systemfejl.	Nulstil til fabriksindstillinger. Væk uret ved at sætte det i laderen efter at skærmen er blevet sort.
Sammenkobling fungerer ikke.	Begge enheder har været sammenkoblet tidligere.	Nulstil sammenkobling. Se kap. 7.
NORA-L vibrerer af sig selv uden at der varsles.	NORA-L er næsten tom for strøm.	Oplad NORA-L.
NORA-L har kun sort skærm.	NORA-L er i transportmodus.	Koble ind oplader.
	NORA-L er helt tom for batteri.	Koble ind oplader.
	Batteriet er opbrugt.	Lad batteriet med den medfølgende oplader.
Displayet blinker når Nora lades.	Dårlig kontakt ved ladekontakt.	Kontroller tilkoblingen på laderen. Rengør ladekontakterne på uret om nødvendigt.

