

IRIS MÅNE KALENDER

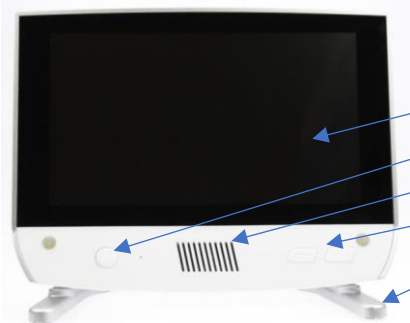


Bruksanvisning



Kalenderen IRIS MÅNE er en elektronisk talende klokke med valgbar visning av informasjon som dag, dato og døgnorientering.

IRIS MÅNE har også valgbar skjerminnstillinger med bakgrunnsbilder og fargekombinasjoner. IRIS MÅNE kommer ferdig til bruk, og man trenger kun å koble til den medfølgende strømforsyningen. Ved oppstart, hvis klokken ikke er satt, vil skjermen gå rett til siden for justering av tid og dato. Alle grunnleggende innstillinger er låst for brukeren, og man må låse opp innstillingsmenyen (bryter nr. 5 skyves ned) for å komme til menyer for innstillinger.

IRIS MÅNE har innebygget batteri som holder på innstillingene ved strømstans.


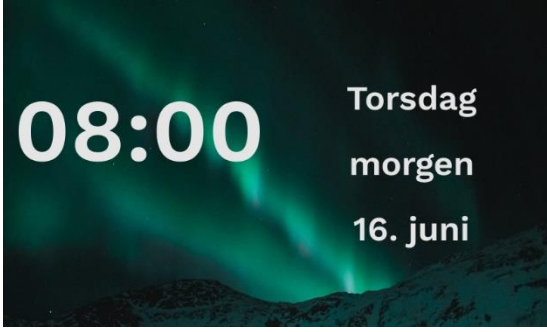
	<p>Front:</p> <ul style="list-style-type: none"> Touch-skjerm HJEM-knapp Høyttaler Volum opp/ned Avtakbar fot
	<p>Tilkoblinger bak:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tilkobling strømforsyning Funksjonsbrytere
	<p>Tilkoblinger venstre side:</p> <ul style="list-style-type: none"> USB Veggbrakett

1. KOMME I GANG

IRIS MÅNE kan stå på et bord i den medfølgende sokkelen, eller skrues opp på vegg med den medfølgende braketten.

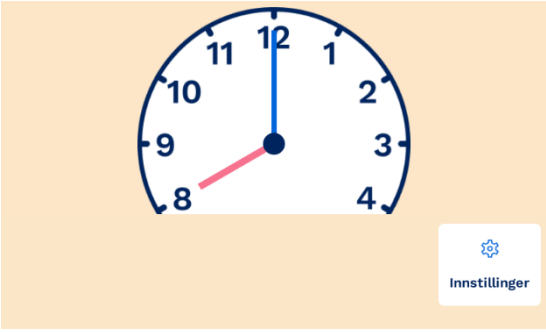
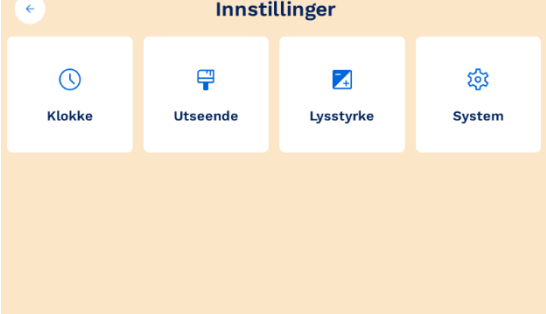

Sett strømforsyningen i stikkontakten på veggen og plugg ledningen inn i IRIS MÅNE. Du vil nå se at skjermen starter. Dato og klokke må stilles første gang du tar i bruk IRIS MÅNE. IRIS MÅNE er nå klar til bruk, men kan tilpasses brukeren. Se eksempler under.

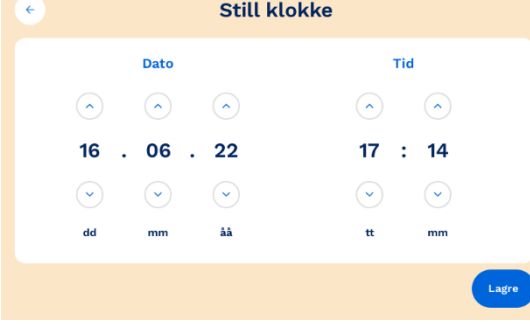
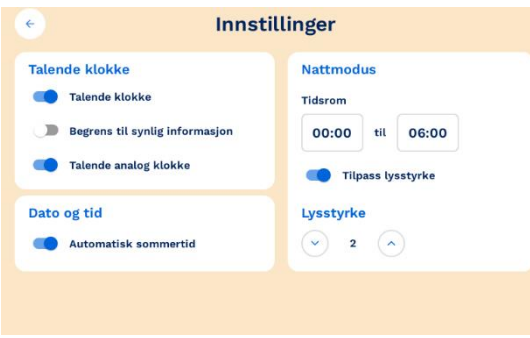


	
<p>Kun tekst: Kontrast</p>	<p>Klokke: Mørk bakgrunn – uthevet analog</p>






	
<p>Klokke med tidsperiode Stein bakgrunnsbilde – standard analog</p>	<p>Informativ: Nordlys bakgrunnsbilde - digital</p>

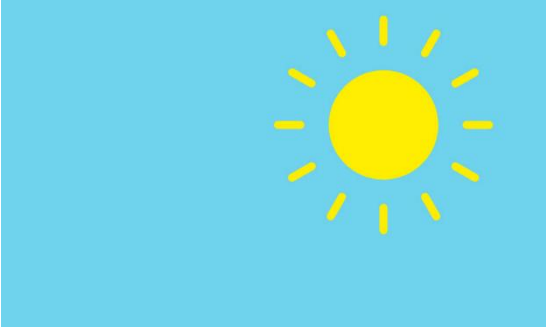

2. MENY FOR INNSTILLINGER

Under innstillingsmenyen kan man endre klokke/dato, utseende, lysstyrke, samt se systeminformasjon og hvilke funksjoner som er valgt.

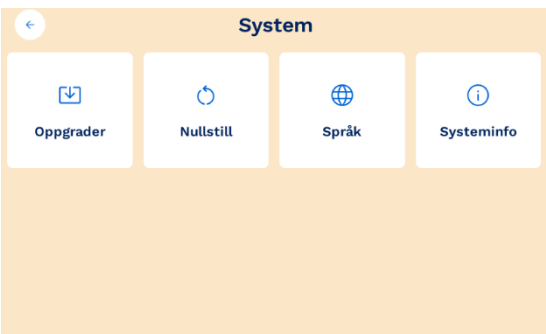


	<p>Trykk på HJEM-knappen så kommer det fram et ikon med teksten Innstillinger i nedre høyre hjørne.</p> <p>Trykk på Innstillinger-ikonet.</p> <p>Hvis du får melding Skjerm er låst må bryter 5 på baksiden av IRIS MÅNE skyves ned (fra ON til OFF).</p>
	<p>Innstillingsmenyene vil nå vises som ikoner på skjermen.</p>
	<p>Klokke</p> <p>Klokkeinnstillinger er delt i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Still klokke (og dato) -Innstillinger <p>Under innstillinger ligger talende klokke, sommertid og nattmodus.</p>

	<p>Still klokke</p> <p>Bruk Pilknappene for å endre. Trykk på Lagre for å lagre innstillingen eller Pil tilbake for å avbryte.</p>
	<p>Innstillinger</p> <p>Talende klokke</p> <ul style="list-style-type: none"> -Slå talende klokke på eller av. -Velg om informasjon i talemeldingen skal begrenses til det som vises på skjermen. -Velg om talende klokke skal ha analog eller digital opplesning. Analog klokke runder av til nærmeste 5 minutter. <p>Automatisk sommertid</p> <p>Nattmodus</p> <p>Her kan du selv definere tidsrom for natt. Standardinnstillingene er kl. 00:00 til 06:00. Gyldig valg for start av natte tid er mellom kl. 18.00 og 00:00, og start av dagtid er mellom kl. 05:00 og 10:00.</p>
	<p>Utseende</p> <p>På denne siden finner man innstillinger av utseende:</p> <ul style="list-style-type: none"> -bakgrunn -oppsett av klokke
	<p>Utseende - Bakgrunn</p> <p>Her velges utseendet til klokken. Hvert utseende består av en bakgrunn og tekst/klokke i utvalgte farger.</p> <p>Klokkeskiven har to valg, standard og uthevet. Innstillingen lagres automatisk.</p>

	<p>Utseende - Oppsett</p> <p>Man kan velge mellom 3 oppsett for hvordan klokken skal framstå:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kun tekst - her vises dag og digital klokke, periode på døgnet eller dato. • Enkel klokke - her vises en stor klokke med valgbar informasjon i underkant. • Informativ - her vises klokken med valgbar informasjon i 5 felt. <p>Alle visningene kan tilpasses.</p>
	<p>Oppsett klokke</p> <p>Nå vises forsidebildet med blå Penn-ikoner på de plasseringen som kan endres.</p> <p>Når du trykker på et Penn-ikon, vises en liste over hva som kan vises i denne posisjonen på skjermen. Valgene inntreffer umiddelbart, slik at man kan prøve seg fram til det bildet som passer brukeren best.</p>
	<p>Oppsett dag</p> <p>Alle oppsettene har visning som skiller mellom dag og natt.</p> <p>Trykk på de hvite Pilene øverst på skjermen for å bla mellom hva som skal vises på dag og natt.</p>
	<p>Oppsett natt</p> <p>Trykk på Penn-ikon for å endre visning mellom klokke og bilde.</p> <p>Hvis du velger Bilde er det en sol for dagtid og en måne og stjerner for natt. Ingen annen informasjon som f.eks. klokke vil vises.</p>
	<p>Bilde for natt (i stedet for klokke).</p> <p>Nattmodus benyttes først og fremst for de som vil ha symboler for døgnorientering i stedet for klokkevisning.</p> <p>Dette gjøres i Innstillinger, Utseende, Oppsett og Tilpass.</p>

	<p>Bilde for dag (i stedet for klokke).</p>
	<p>Lysstyrke Her velges: -skjermens lysstyrke.</p> <p>Innstillingen lagres automatisk.</p>

Innstillinger: System

	<p>IRIS MÅNE er i utgangspunktet vedlikeholdsfri, og det er ingen lisenser e.l. som må fornyes.</p>
	<p>Oppgradering Programvaren (SW) kan oppdateres via USB.</p> <p>Kontakt Vestfold Audio AS for hjelp.</p>
	<p>Nullstill IRIS MÅNE kan tilbakestilles til fabrikkstandard her.</p> <p>Alle innstillinger og tilkoblinger fjernes, og enhet kan utleveres til ny bruker.</p>

	<p>Språk Her kan du endre språk på enheten. Når du har endret språk, vil enhet starte på nytt.</p> <p>Ta kontakt med Vestfold Audio ved behov for flere språk.</p>
	<p>Systeminfo Her vises informasjon om versjon. Dette er informasjon som benyttes ved henvendelser til Vestfold Audio AS.</p>

3. SKJERMLÅS

Med funksjonsbryter 5 på baksiden av IRIS MÅNE kan du aktivere/ deaktivere skjermlås og volumjustering. Da vil brukeren ikke få tilgang til å endre innstillinger. Volum og innstillinger låses til gjeldende nivå. Låsing aktiveres ved å skyve bryter 5 til ON.



4. TILBEHØR



BACKUP

Art.nr: 1378

HMS: 195457

Nødstrømsbatteri til
IRIS MÅNE og IRIS SOL

5. VIKTIG INFORMASJON

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut. Produktet er for innendørs bruk i ikke-kondenserende miljø.

Produktet bør ikke stå i direkte sollys.

BRUKSBEGRENSNINGER

Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

RESIRKULERING

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

SIKKERHET

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder. Produktet må ikke skrues fra hverandre.

TEKNISKE DATA

BxHxD (uten veggfeste og fot):	218x165x40 mm
Vekt uten strømforsyning:	800 g
Driftsspenning:	15 VDC
Temperatur:	-10 °C - +40 °C

SAMSVARERKLÆRING

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med kravene til CE-merket.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:

www.vestfoldaudio.no/samsvar

FEILSØKING

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Klokken viser feil tidspunkt eller dato		Gå til Innstillinger: Klokke: Still klokke
Klokken viser feil tidspunkt etter strømbrudd	Klokkebatteriet er tomt for strøm	Klokkebatteriet lades opp over lang tid. Batteriet bør lade i minst 4 dager før man tar ut strømmen
Hvordan tilbake stille innstillinger?		Gå til Innstillinger: System: Nullstill
Kommer ikke inn i innstillingsmenyen.	Bryter nr. 5 på baksiden står opp (ON)	Skyv bryter 5 ned (til OFF) og prøv igjen.
Kan ikke stille lydstyrken	Bryter nr. 5 på baksiden står opp (ON)	Skyv bryter 5 ned (til OFF) og prøv igjen.
Talende klokke virker ikke	Funksjonen er slått av i innstillinger	Gå til Klokke: Innstillinger og aktiver Talende klokke.



Doc. No.: 8007-2