

Bruksanvisning

Stemmeforsterker, kroppsbåren uten mikrofon, 4P mini XLR STFORSTKB-04

Varenr. 1831



Vår erfaring er at dette produktet kan gi svært god hjelp til slagpasienter, ALS-pasienter, personer med Parkinson, svak stemme på grunn av respiratorbruk, prematurfødte og ved fonasteni (stemmetretthet). Stemmeforsterkeren har svært god lyd kvalitet og egner seg meget godt til den personlige samtalen. Den har en avansert forsterker med 3-bånds equalizer, som tillater tilpasning til brukerens stemme for optimal stemmegjengivelse. Den har oppladbart batteri som sørger for mer enn 8 timers driftstid. Valg av riktig mikrofon for brukerens stemme er viktig for best mulig gjengivelse og for å unngå feedback. Produktet er enkelt å betjene av personer med nedsatt bevegelse i fingrene.

Daglig bruk

Kombinert av/på bryter og volumkontroll (2) er plassert lett tilgjengelig på toppen av stemmeforsterkeren.

Der finnes også indikatorlampe for PÅ/Lading (1), mikrofontilkobling (4) og ladekontakt (3).

På baksiden av kabinettet, under et deksel (8), finner du nivåkontrollen for mikrofonen (5), samt justeringer for bass, mellomtone og diskant (6).

Komme i gang

NB!

Før første gangs bruk må stemmeforsterkeren settes til lading. Ladetiden er ca. 5 timer. Når rød LED slukker er enheten ferdig ladet.

1. Det medfølgende beltet tres i hempene (7) bak på stemmeforsterkeren.
2. Mikrofonen kobles til kontakt (4).
3. Slå på stemmeforsterkeren ved å vri volumkontrollen med klokken. Indikatorlampen (1) lyser grønt.
4. Med volumkontrollen justerer du stemmeforsterkningen til ønsket nivå.



Ta på deg mikrofonen

Se bruksanvisning for den mikrofonen som skal benyttes.

Det **anbefales** å benytte Vestfold Audio mikrofon type HODEB11-4 eller HODEB1-4.

NB!! Feil tilpasning av mikrofonen medfører ofte "feedback" og kraftig hyling i høytalerne.

Justeringer

Stemmeforsterkerens forsterkertrinn er fabrikkinnstilt, men i enkelte tilfeller kan det være behov for endringer:

1. Dersom du ønsker å benytte en annen mikrofon (anbefales normalt ikke) kan det være nødvendig å tilpasse stemmeforsterkerens inngangstrinn til den nye mikrofonen. Dette gjøres ved å justere nivåkontrollen (5) til maksimalt signalnivå uten forvrengning.
NB! Det er fare for feedback (hyling) ved bruk av andre mikrofoner enn HODEB11-4 og HODEB1-4!
2. Dersom du ønsker å endre lydbildet for å bedre passe til brukerens stemme, kan dette gjøres ved å justere tonekontrollene (6).
NB! Tonekontrollene er fabrikkinnstilt for optimal stemmegjengivelse, så det oppfordres til varsomhet med eventuelle endringer.

Brukstid

Etter fullført opplading har enheten minimum brukstid på 8 timer.

Feilmelding


Dersom det oppstår en feil på batteriet vil indikatorlampen blinke med rødt lys. Stemmeforsterkeren bør da straks leveres til reparasjon.

Enkel feilretting

Dersom Stemmeforsterkeren ikke virker, bør du sjekke følgende:

1. Slå senderen på. Indikatorlampen ved av/på-bryteren skal lyse grønt. Lyser den ikke, kan batteriet være utladet. Sett stemmeforsterkeren til lading. Indikatorlampen skal da lyse rødt.
2. Dersom batteriet går tomt for strøm mens stemmeforsterkeren er i bruk, kan den tilkobles laderen samtidig som den fortsatt brukes. Indikatorlampen vil da lyse oransje. Ladingen påvirkes ikke av at stemmeforsterkeren er påslått.

Tilgang til forsterkerens kontroller

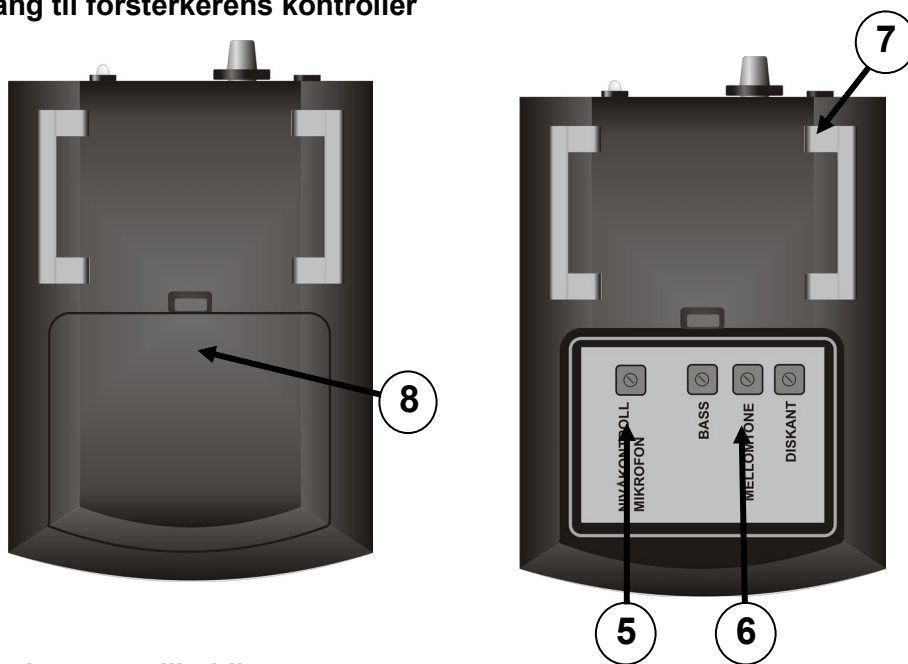

Funksjoner og tilkoblinger

1. Indikatorlampe, tofarget. Lampen har fire forskjellige indikeringer:
 - a. Grønt lys: Stemmeforsterkeren er PÅ
 - b. Rødt lys: Lader med stemmeforsterkeren AV
 - c. Oransje lys: Lader med stemmeforsterkeren PÅ
 - d. Blinkende rødt lys: Batterifeil
2. Kombinert av/på-bryter og volumkontroll.
3. Kontakt for tilkobling av medfølgende lader.
4. Kontakt for tilkobling av mikrofon.
5. Justering av signalnivå fra mikrofon.
6. Bass, mellomtone og diskantkontroller.
7. Beltehempe.
8. Deksel over kontrollpanel.
NB! Dekselet skal alltid være lukket når stemmeforsterkeren er i bruk!
Neopren-pakningen rundt kanten av kontrollpanelet må ikke fjernes.

Tekniske spesifikasjoner

Bruksområde: Innendørs/tørt.
Driftsspenning: 15VDC/230VAC
(Lader)
Ladetid fra helt utladet: ca. 5 timer
Brukstid: 8 timer
Vekt: 300 gram

Rengjøring utført av bruker

Stemmemforsterkeren kan rengjøres med myk klut oppvridd i lunkent, mildt såpevann. Hjelpemiddelet må ikke utsettes for søl eller sprut med vann.

Lagring når ikke i bruk

Oppbevares på et tørt og støvfritt sted.

Leverandør

Vestfold Audio AS
Nordre Fokserød 12
3241 Sandefjord
Tel. 3347 3347
Epost: post@vestfoldaudio.no

