

# FlexiBlink AURORA Varslingsmodtagere

## Med display, lys, lyd og/eller tale

### Brugsanvisning



AURORA er en enhed som modtager trådløse signaler fra FlexiBlink LIFE-detektorer/sendere installeret i dit hjem.


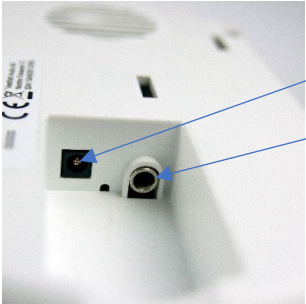
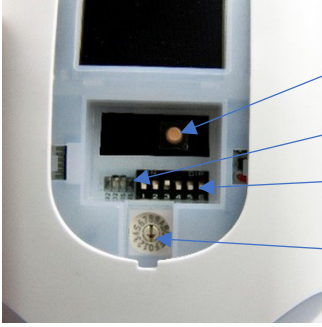
FlexiBlink LIFE anvendes til at varsle om alvorlige hændelser som brandalarm, samt daglige hændelser som dørklokke, telefon og andre relevante aktiviteter.

Varsling udløses når eksempelvis en FlexiBlink LIFE-røgalarm detekterer røg eller en telefonsender opfanger at det ringer.

Du kan have så mange varslingsmodtagere og sendere som du behøver.

Aurora meddelar også når sendere behøver nyt batteri.

AURORA er monteringsfri - AC-adapteren indsættes i stikkontakten.

	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lys (top og bund)</li><li>2. Skærm</li><li>3. Volumenkontrol</li><li>4. Slids for at åbne frontlåg</li><li>5. Fod</li></ol>
	<ol style="list-style-type: none"><li>6. Strømtilslutning</li><li>7. Linjeudgang til lyd</li></ol>
	<ol style="list-style-type: none"><li>8. LIFE-knapp</li><li>9. Lysindikator</li><li>10. Funktionsknap</li><li>11. ID kobler</li></ol>

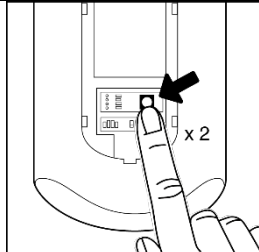
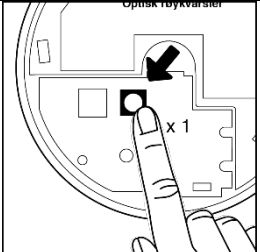
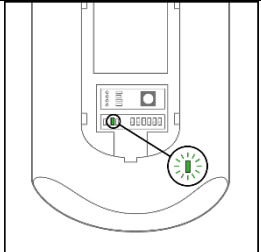
### Kom igang

AURORA kan placeres på et bord i den medfølgende fod, eller befæstes på væggen med det medfølgende fæstningssæt.

**TIPS! Monter ikke fæstningssæt før du har kontrolleret at ledningen er tilstrækkelig lang.**

Tilslut strømforsyning til stikkontakt og anslut ledning til AURORA.

**SAMMENKOBLING**

		
<p><b>1. Tryk på LIFE-knappen to gange på en af enhederne.</b></p>	<p><b>2. Tryk en gang på LIFE-knappen på den anden enhed. Indikatorlamperne på begge enheder blinker grønt.</b></p>	<p><b>3. Sammenkoblingen bekræftes af at indikatorlamperne lyser i 2-3 sekunder. Enhederne er klar til at anvendes. Tryk på "Test"-knappen på en senderne for at kontrollere sammenkoblingen.</b></p>

**TILSLUT NY ENHED TIL EKSISTERENDE SYSTEM**

1. Tryk på LIFE-knappen på enheden fra det oprindelige system to gange.
2. Tryk en gang på LIFE-knappen på den nye enhed.
3. Sammenkoblingen bekræftes ved at indikatoren lyser med fast grønt lys i 2-3 sekunder.
4. Enhederne er klar til at anvendes. Tryk på "Test"-knappen for at kontrollere sammenkoblingen.

**SAMMENKOBLINGEN MISLYKKEDES**

Hvis du får et rødt lys i den nye enhed når den blev tilkoblet mislykkedes sammenkoblingen. Nulstil enheden for at genkoble. (Se nedenfor).

**AFBRYD SAMMENKOBLING**

For at afbryde en aktiv sammenkobling, tryk 1 gang på LIFE-knappen.

**NULSTIL TILSLUTNING**

Tryk på LIFE-knappen 5 gange på enheden. Dette bekræftes med røde og grønne blink. Hvis du vil ændre funktioner i produktet, se afsnittet "yderligere funktioner".

**DAGLIG ANVENDELSE****Underretning:**

Hændelser som indtræffer i hjemmets FlexiBlink LIFE-system angives automatisk med lyd, blinkende lys och symboler.

**Justere volumen:**

Anvend volumenkontrollen på højre side.

**VIGTIGT! Alarm sendes altid med fuld volumen.**

**Meddelelse om batteriskift:**

Hvis en FlexiBlink LIFE-sender har lavt batteriniveau, meddeler AURORA i god tid inden at batteriet er helt tømt. AURORA viser varslingsymbol efterfulgt af et billede af et batteri. Dette skifter frem og tilbage indtil batteriet udbyttes og senderen aktiveres eller testes.

**YDERLIGERE FUNKTIONER:**

AURORA er udrustet med en funktionsskifter (10) og en ID vælger (11) bagved frontlågen. Du behøver ikke ændre fabriksindstillingerne hvis du ikke har behov for funktionerne som forklares i dette kapitel.

**Vælg funktioner (funktionsskifter 10):****Daglige signaler / kun alarm - switch 1**

Hvis du ønsker at AURORA ikke skal meddele dig om daglige hændelser, som eksempelvis dørklokke og telefon kan du trykke bryder 1 opad. AURORA meddeler nu kun kritiske alarmer - sikkerhedsalarmer (komfurvarsling, brandvarsling etc.)

**Nabovarsling - switch 2**

For at tage imod nabovarsling i FlexiBlink LIFE-systemet må der anvendes en IRIS LIFE i installationen. I så fald er alarmmodtagerne indstillet til at meddele brand eller indbrud hos berørte nabo. Hvis du ikke ønsker at AURORA skal varsle nabo kan du trykke bryder 2 opad. AURORA bortkobles da fra nabovarsling.

**OBS! Nabovarsling fungerer kun med kritiske alarmer, og ikke til daglige signaler som telefon og dørklokke.**

**Tal – switch 3**

Aktiver eller deaktiver tale ved hændelser. Tale er deaktiveret som standard. Brandalarm varsler altid med tale.

**Volumenknop - switch 5**

Switch 5 er til volumenlås. Ved at stille bryder 5 opad låses volumen til det aktuelle niveau. Denne indstilling fastholdes efter et strømafbryd, - og hvis du forsøger at justere volumen meddeler skærmen at volumen er låst.

Kombinationer af funktioner kan frit anvendes efter behov med bryder 1 til 3 og 5. Bryder 4 og 6 er reserverede til fremtidige behov.

**Vælg indstilling (Indstillingsbryder 11):****(F) Installationsindstilling**

Ved at indstiller bryderen til F sættes AURORA i installationsmodus. Dette indebærer at den senest modtagne alarm vises i displayet, indtil en eventuel ny alarm indtræffer.

Dette er specielt anvendeligt når du installerer en dørklokke og intercomsendere. Husk at tilbagestille bryderen til 0 når installationen er klar.

### (1) Lyslampe med display

Ved at indstille bryderen til 1 sættes AURORA til lys/lampe. Dette medfører at AURORA viser varslings symbolet i displayet og blinker i lamperne, men lyden er frakoplet. Lyd er stadigvæk tilgængelig via linjeudgang.

### (2) Akustisk alarm med display

Ved at stille bryderen til position 2 indstilles AURORA til akustisk alarm med display. Det betyder at AURORA viser varslings symbol i displayet og afspiller varslingslyd, men lyset i lamperne er slukket.

#### VIGTIG INFORMATION:

Produktet kan rengøres med en blød, letfugtet klud. Produktet er egnet til indendørs brug i et ikkekondenserende miljø.

Produktet vil meddele modtagerne ved behov for batteriskift, hvis du har modtagere som viser dette.

Produktet bør ikke udsættes for direkte sollys.

#### ANVENDELSESBEGRÆNSNINGER

Kun tilladt at anvende indenfor EU/EES.

#### GENANVENDELSE

Produktet må ikke bortkastes som restaffald. Gør dig bekendt med lokale bestemmelser for affaldssortering af elektriske produkter. Ved korrekt håndtering kan mange af de indgående dele af produktet genanvendes samtidig med at miljøet beskyttes.

#### SIKKERHED

Undgå at udsætte produktet for direkte varme. Produktet må ikke skilles ad.

#### TEKNISKE DATA

Dim. (bxhxd):	92x150x37mm (uden vægfæste og fod).	Sendeeffekt:	10 mW e.r.p.
Vægt:	200 gram (uden vægfæste og fod)	Driftsspænding:	15 VDC
Radiofrekvens:	868.1 – 869.85 MHz	Temperatur:	-10 °C - +40 °C

#### OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Producenten Vestfold Audio AS bekræfter at produktet er i henhold til direktiv 2014/53/EU.

For yderligere dokumentation om overensstemmelseserklæring, tag kontakt via e-post:

[ap.teisen@vestfoldaudio.dk](mailto:ap.teisen@vestfoldaudio.dk)

**FEJLSØGNING**

<b>Problem</b>	<b>Mulig årsag</b>	<b>Løsning</b>
Bliver ikke indkølet - indikatorlampen lyser rødt	Tilslutning mislykket p.g.a. for lang afstand	Flyt enhederne tættere sammen og forsøg igen.
	Enheden er allerede sammenkoblet med andre enheder.	Nulstil sammenkoblingen og forsøg igen.
	Fejlagtig rækkefølge i parringen.	Tryk på LIFE-knappen to gange på en enhed i det eksisterende system, - og kun en gang på den nye enhed.
Indikatorlampen fortsætter med at blinke grønt efter parring.	Er en enheds LIFE-knap trykket ind to gange?	Tryk på LIFE-knapperne igen for at afbryde. Forsøg igen.
	Ledar fortsat efter nye enheder.	Tryk på LIFE-knappen igen for at afbryde. Forsøg igen.
Efter TEST-trykning lyser senderen rødt.	Enheden er ikke parret.	Tilslut enheden til en modtager.
Efter TEST-trykning lyser senderen grønt længe, siden orange længe.	Ingen modtagere er tilsluttet senderen.	Kontroller at der findes en modtager i systemet. Nulstil enheden. Genstart, forsøg igen.
Varsling ej modtaget.	Ikke tilsluttet.	Frakobl den senest tilsluttede enhed, og tilkobl igen.
	Begrænset dækning.	Forsøg at flytte enhederne tættere på hinanden eller tilslut en repeater.
	Batteri i senderen er dødt.	Skift batteri i senderen.
	Senderen fungerer ikke.	Læs brugsanvisningen for senderen
	Volumen justeres.	Prøv at justere volumen.
Varsling modtaget, men giver ingen lyd.	Lyden er slukket.	Kontroller at funktionsbryderen ikke er sat på 1
Varsling med lyd, men ej tale.	Lys af.	Kontroller at funktionskobleren ikke står på 2.
Varsling modtaget, men intet blinkende lys	Enheden er fejlagtigt tilsluttet.	Genetabler parring.
AURORA meddeler hændelser, men ingen sendere er aktiveret i hjemmet.	Nabovarsling.	Kontroller at funktionsbryderen til nabovarsling er korrekt sat.

