

# FlexiApp-sender – varsling på mobiltelefon

## Bruksanvisning



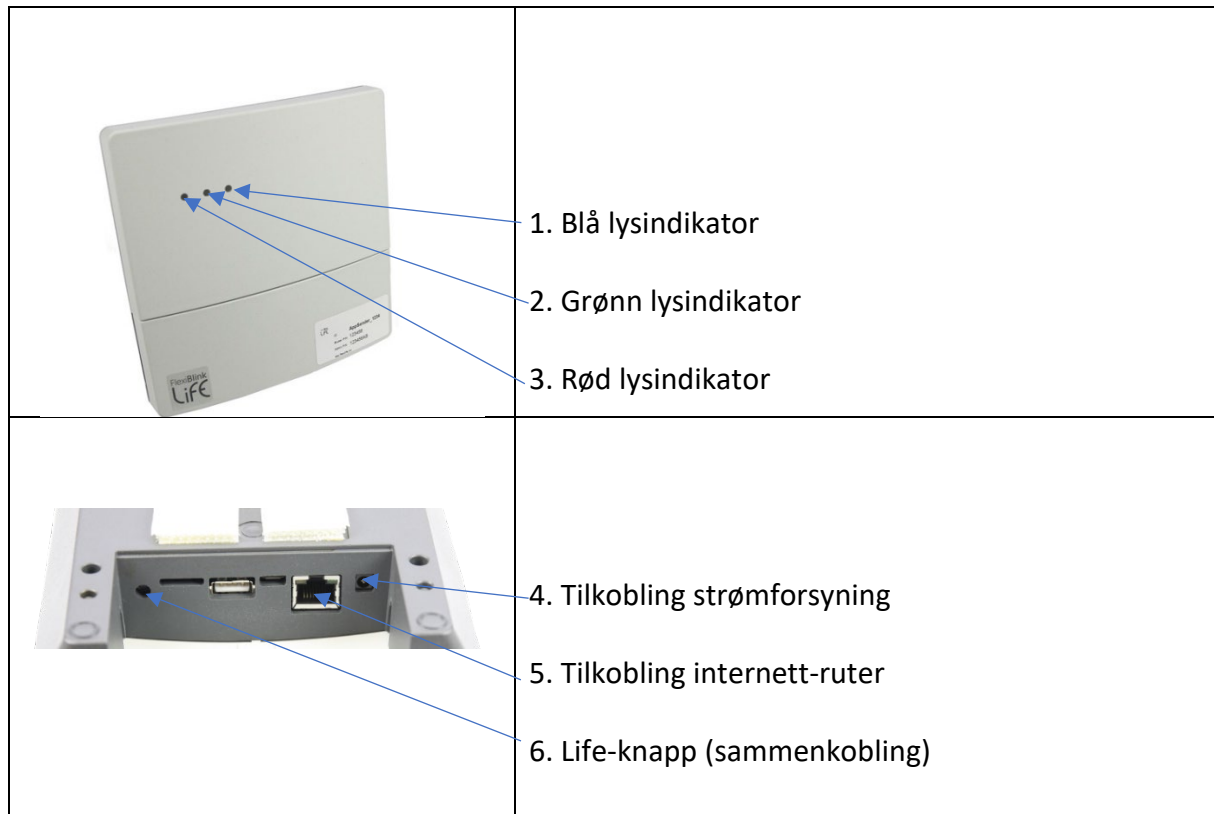
Med en FlexiApp-sender installert i boligen, får du FlexiBlink LIFE-varsling rett til FlexiApp på mobilen.

FlexiApp-sender mottar FlexiBlink LIFE varslinger og alarmer, og sender dem videre via Internett til telefoner med FlexiApp.

Opp til 10 smarttelefoner kan være registrert samtidig til FlexiApp-sender.

Du kan registrere din FlexiApp til flere FlexiApp-sendere, som for eksempel hjemme og på arbeidsplass.

FlexiApp finnes for både iPhone og Android-telefoner.



## 1. MONTERING

Appsenderen må installeres på et sted der den er innen rekkevidde til FlexiBlink systemets alarmsignaler. Den kobles til internett med kabel (5).

Appsenderen skal monteres på vegg. Benytt de medfølgende skruene eller borrelås.

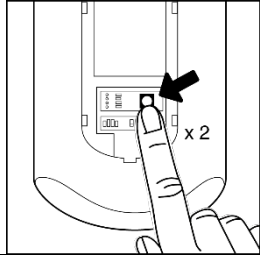
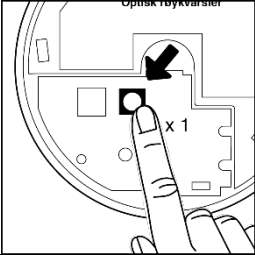
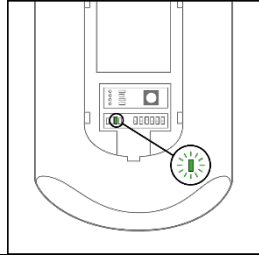
## 2. APPSENDER TILKOBLING

**Strøm:** Koble strømforsyningen til Appsenderens strømkontakt, og sett strømforsyningen i kontakten på vegg.

**Internett:** Sett den ene enden av nettverkskabelen i Appsenderen og den andre enden i en ledig port i internett-ruteren.

### 3. SAMMENKOBLING

Alle FlexiBlink LIFE enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles ved å trykke på LIFE-knappen (se figur forrige side (6)).

|   |  |   |
|---|--|---|
|  |                                   |    |
| <p>1. Trykk 2 ganger på LIFE-knappen på den ene av enhetene.</p>                  | <p>2. Trykk 1 gang på LIFE-knappen på den andre enheten.<br/>Indikatorlampene på begge enhetene blinker grønt.</p> | <p>3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast i 2-3 sekunder.<br/>Enhetene er klare til bruk.<br/>Trykk «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.</p> |

#### SAMMENKOBLING AV NY ENHET TIL EKSISTERENDE SYSTEM

1. Trykk 2 ganger på LIFE-knappen på enhet fra eksisterende system.
2. Trykk 1 gang på LIFE-knappen på den nye enheten.
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
4. Enhetene er klare til bruk. Trykk «Test»-knappen for å kontrollere sammenkoblingen.

#### SAMMENKOBLING MISLYKTES

Dersom du får rødt lys i den nye enheten ved sammenkobling, mislyktes den.

Nullstill enheten for å sammenkoble på nytt.

#### AVBRYTE SAMMENKOBLING

For å avbryte en aktiv sammenkobling, trykk 1 gang på LIFE-knappen.

#### NULLSTILLE SAMMENKOBLINGEN

Trykk 5 ganger på LIFE-knappen på enheten hvor sammenkoblingen skal slettes. Dette bekreftes med røde og grønne blink. Dersom du ønsker å endre funksjoner i produktet, se avsnitt «Utvidede funksjoner».

### 4. DRIFT

Når enheten er i drift vises status i lysindikatoren:

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Slukket:            | Ikke klar                      |
| Blinkende grønt:    | I oppstart eller sammenkobling |
| Blått lys:          | Klar                           |
| Blinkende rødt lys: | Ikke kontakt med skyserver     |

## 5. INSTALLERE FLEXIAPP

1. Gå til AppStore (IOS) eller Google Play (Android), og søk etter «Flexiapp».
2. Installer og åpne FlexiApp
3. Tillat mottak av varslinger

## 6. FLEXIAPP START

1. Trykk på rullegardin-menyen, og velg «Legg til Appsender».
2. Skriv inn Appsenderens bruker PIN. Bruker PIN finner du på etiketten på Appsender-enheten.
3. Skriv inn valgfri tekst på «Appsender navn».
4. Velg «Legg til».
5. FlexiApp er nå klar til å motta varslinger fra Appsenderen.

### Andre menyvalg:

«Mine AppSendere» viser oversikt over Appsendere tilknyttet Flexiapp på telefonen. Ved å velge Mottak «av» får du ingen varsler. Ved å velge «Motta kun alarmer» varsles bare alarmer. Dersom Appsenderen er frakoblet serveren, får du også beskjed om dette.

«Avslutt» bryter tilkoblingen til Appsenderen.

«Avansert innstillinger»: Avanserte funksjoner. Sjelden i bruk.

«Fjern AppSendere»: Slett tilknyttede Appsendere fra telefonen.

## 7. AVANSERTE INNSTILLINGER

### To nivåer for pålogging:

BRUKER LOGIN: Tilgang bare til varslingshistorikk.

ADMIN LOGIN: Varslingshistorikk og administrator-funksjoner.

VARSLINGER: Varslingshistorikk for en begrenset tidsperiode.

ENHETER: For å få tilgang til denne fanen må du logge på som «Admin». Her kan du administrere telefonene som er koblet til Appsenderen. Klikk på den telefonen du ønsker å gjøre noe med. Nå kan du endre telefonens navn og visningsnavnet til Appsenderen.

Trykk «lagre» for å lagre endringene.

Trykk «slett» for permanent å stoppe varsling til denne telefonen.

TILPASSE: Endre varslingsstekst og varslingslyder fra det som er standard. Alle typer varslinger som Appsenderen har mottatt fra varslingsendere og som er mottatt av FlexiApp er listet opp. Hvis du ønsker å endre på en varsling, trykker du på pilen til høyre. F.eks. kan du velge hvilken dør det ringer på.

Velg hvordan varselet skal lyde fra menyen «Meldingstype». Trykk «Lagre» for å lagre endringene.

Trykk «Slett» for å fjerne varslingstypen fra listen.

Trykk «Standard» for å tilbakestille til fabrikkinnstilling.

TEST: Under denne fanen kan du få systemet til å sende deg en test-alarm.

## 8. BRUKSBEGRENSNINGER

Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

## 9. VIKTIG INFORMASJON

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

## 10. SIKKERHET

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder. Produktet må ikke skrues fra hverandre.

## 11. TEKNISKE DATA

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Dim. (bxhxd): 140x140x40mm        | Sendereffekt: 10 mW e.r.p.  |
| LAN: 10/100Mbps                   | Driftsspenning: 15VDC       |
| Radiofrekvens: 868.1 – 869.85 MHz | Temperatur: -10 °C - +40 °C |

## 12. SAMSVARERKLÆRING

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:

[www.vestfoldaudio.no/samsvar](http://www.vestfoldaudio.no/samsvar)

## 13. FEILSØKING

| Problem   | Mulig årsak  | Løsninger  |
|---|--|--|
| Appsenderen lyser ikke blått                                  | Strømforsyningen er ikke tilkoblet.                      | Kontroller tilkoblingen.   |
|   | Det er ikke kontakt med bredbåndsruteren                 | Kontroller tilkoblingen til ruteren og at ruteren er på.   |
|   | Bredbåndsruteren har ikke kontakt med Internett.         | Sjekk linjer.  |
| FlexiApp finner ikke Appsenderen                              | WiFi er ikke tilgjengelig                                | Skru på WiFi til det samme nettet der FlexiApp-sender er tilkoblet.                                      |
|   | Smarttelefonen er ikke tilkoblet WiFi-nettet.            | Logg på WiFi.  |
| Får ikke sammenkoblet   | Sammenkobling mislykkes pga. for lang avstand            | Flytt enhetene nærmere hverandre og prøv igjen   |
|   | Enheden er allerede sammenkoblet med andre enheter.      | Nullstill sammenkobling. Vennligst prøv igjen.   |
|   | Feil rekkefølge på sammenkoblingen                       | Trykk to ganger på LIFE-knappen på en enhet i det eksisterende system, og kun én gang på den nye enheten |
| Indikatorlampen fortsetter å blinke grønt etter sammenkobling | Er det trykket to ganger på den ene enhetens LIFE-knapp? | Trykk en gang til på LIFE-knappene for å avbryte. Prøv igjen.  |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   | Leter fortsatt etter nye enheter.                               | Trykk en gang til på LIFE-knappen for å avbryte. Prøv igjen. |
| FlexiApp mottar ikke varslinger                   | Varsling er avslått i FlexiApp.                                 | Slå på varsling i FlexiApp, fane "Sendere".                  |
|   | "Kun alarmer" er valgt.   | Slå av "Kun alarmer" i FlexiApp.                             |
|   | Mottak av varslinger er blokkert                                | Gå til Innstillinger: Tillat mottak av varslinger            |
|   | FlexiApp-senderen fungerer ikke.                                | Kontroller FlexiApp-senderens tilkoblinger.                  |
|   | Får ikke grønt blinkende lys.                                   | Sjekk rekkevidde mellom sendere og FlexiApp-senderen         |
|   | Smarttelefonen er ikke tilkoblet FlexiApp-senderen              | Koble til FlexiApp, fane "Søk".                              |
|   | FlexiApp-senderne er ikke sammenkoblet med senderne i huset.    | Sammenkoble FlexiApp-senderen med resten av utstyret i huset |
|   | Mobildata/WiFi/Internett er ikke tilgjengelig.                  | Slå på mobildata og/eller logg på et WiFi-nett.              |
|   | Telefonen er satt i "flymodus".                                 | Slå av "flymodus".   |
| Varslinger mottas, men ingen lyd eller vibrasjon. | Smarttelefonen er satt til "lydløs"-modus.                      | Slå på lyd og/eller vibrasjon.                               |
| FlexiApp varsler for sent                         | Smarttelefonens strømsparing er aktivert.                       | Slå av strømsparingsfunksjonen.                              |
|   | Smarttelefonen har vært utenfor dekningsområde.                 | Om mulig: Oppsøk områder med god dekning.                    |
|   | Smarttelefonen er opptatt med å bytte mellom mobildata og WiFi. | Om mulig: Velg enten mobildata eller WiFi.                   |
|   | Internett-linjen i boligen er ustabil.                          | Sjekk linje og tilgang.                                      |
|   | Smarttelefonen har andre app-er som stjeler prioritet.          | Forsøk å slå av andre "app'er".                              |

