

IRIS SOL KALENDER MED PÅMINNELSER

Bruksanvisning



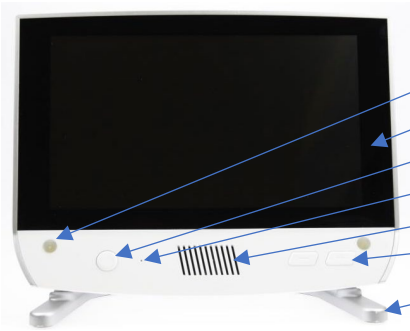
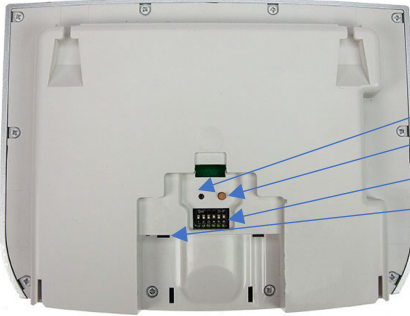
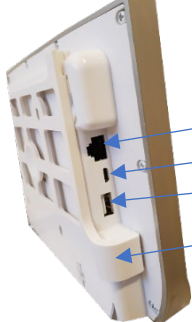
IRIS SOL är en elektronisk kalender med talande klocka och valbar visning av information som analog eller digital klocka, dag, datum, daglig orientering och dagligt schema.

Påminnelser läggs till direkt i kalendern. Påminnelserna meddelas med ljud, ljusblink, symboler och eventuellt ett röstmeddelande.

IRIS SOL har valbara visningsinställningar med bakgrundsbilder och färgkombinationer, så att den enkelt kan anpassas till användaren.

IRIS SOL levereras klar för användning, och du behöver bara ansluta den till strömmen med den medföljande strömförsörjningen. Ett inbyggt batteri behåller inställningarna vid eventuellt strömavbrott.

IRIS SOL fungerar också som en varningsmottagare för utvalda FlexiBlink LIFE-produkter, såsom brandlarm, dörrklocka och fjärravläsning av klockan.

	<p>Framsida:</p> <ul style="list-style-type: none"> Varningslampon (höger och vänster sida) Skärm med touch HEM-knappen Mikrofon för röstinspelning Högtalare Volym +/- Avtagbar fot
	<p>Anslutningar på baksidan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ljusindikator Life-knapp Funktionsbrytare Anslutning strömförsörjning
	<p>Anslutningar vänster sida:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ethernet (för anslutning till router) Används inte USB Väggfäste

1. KOM I GÅNG

IRIS SOL kan placeras på ett bord i den medföljande sockeln, eller skruvas upp på väggen med det medföljande väggfäste.

Anslut strömförsörjningen till vägguttaget och anslut sladden till IRIS SOL. Du kommer nu att se att skärmen startar. Första gången måste du välja önskat språk och skärmen vill då starta om. Välj sedan datum och tid. IRIS SOL är nu klar att användas. Om du har annan FlexiBlink LIFE-utrustning, gå till kapitel 6 för sammankoppling.

Exempel på anpassning:

	
<p>Informativ: Northern Lights bakgrund- digital</p>	<p>Schema för dagen: Sten bakgrund - markerad analog</p>
	
<p>Schema för dagen: Turkos bakgrund - analog</p>	<p>Endast text: Kontrast</p>

2. DAGLIG ANVÄNDNING

Klocka:

IRIS SOL har olika displayer av klockor, både analoga och digitala. Se kap. 4 för hur du ändrar urtavlan. Om talklockan är aktiverad kommer tidpunkt, tiden på dagen och/eller dagen att läsas upp när du trycker på skärmen.

Justera volymen:

Använd volymknapparna (plus/minus) på höger framsida av IRIS SOL för att justera volymen för dagliga aviseringar.

VIKTIG! Brandlarm larmas ALLTID på full volym.

Påminnelser:

Påminnelser visas som en separat skärm samtidigt som ett ljud spelas upp. Om ett röstmeddelande har spelats in, spelas det upp och om ljusblink är aktiverad, blinkar varningslamporna. Vad som visas bredvid påminnelsesymbolen bestäms av dina visningsinställningar. Påminnelsen finns kvar på skärmen i 30 minuter.

Om du trycker på skärmen visas klockan med en symbol för att en påminnelse är aktiv. Tryck på skärmen igen för att spela upp meddelandet på nytt. Nya påminnelser under denna period kommer att "ta över".

Varningar:

IRIS SOL fungerar också som varningsmottagare för FlexiBlink LIFE-produkter som är monterade i hemmet. Händelser och larm meddelas automatiskt med ljud, ljus och bild – samt röst om detta är aktiverat. Ett personligt röstmeddelande vid brandlarm kan vara särskilt fördelaktigt för personer som kan ha svårt att orientera sig vid akuta händelser.

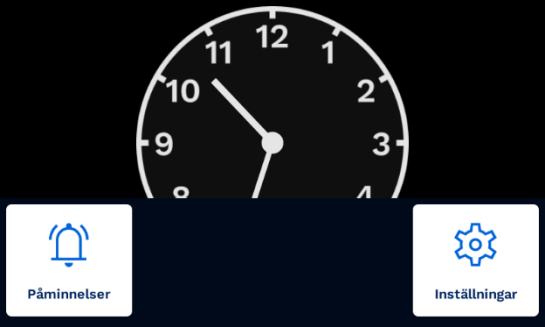
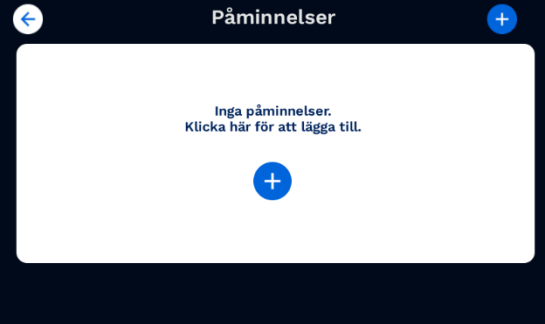

Genom att trycka på skärmen inom två minuter efter att meddelandet är klart ser du vilket meddelande som visades. Om du vill titta på klockan under denna period – tryck på HEM-knappen.



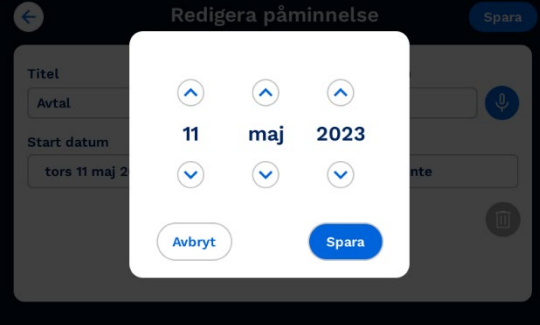

Avbryt avisering:

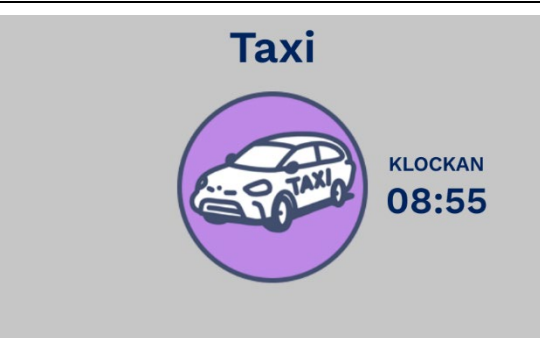
Om du vill stoppa en pågående avisering kan du trycka på skärmen eller trycka på HEM-knappen. Aviseringen stoppas omedelbart. Om ett brandlarm stoppas på detta sätt kommer kommande nya larm inom en minut att varnas med endast en symbol och lampa.

3. PÅMINNELSER

Tryck på HEM-knappen så visas en påminnelseikon i skärmens nedre vänstra hörn.

	<p>Tryck på ikonen Påminnelser för att visa listan med påminnelser.</p> <p>(Ikonen kan döljas för att låsa påminnelsefunktionen. Detta bestäms under inställningarna för påminnelser).</p>
	<p>Tryck på symbolen + för att lägga till en påminnelse.</p>
	<p>IRIS SOL har några färdiga förslag på påminnelser som du kan använda som utgångspunkt.</p> <p>Tryck på en av ikonerna för att ställa in en påminnelse.</p> <p>Om du inte vill ha en symbol kan du trycka på symbolknappen och välja en utan symbol.</p>

	<p>Det finns två rader för text. Titeln måste alltid fyllas i. Tryck på Symbol-knappen till höger om titeln för att ändra symbolen som ska visas tillsammans med texten.</p> <p>Tryck på mikrofon-knappen för att säga ditt eget röstmeddelande. Välj startdatum och starttid och om påminnelsen ska upprepas. Titeln är max. 16 tecken och beskrivning max. 22 tecken. Titeln visas i dagligt schema.</p>
	<p>Tryck på mikrofon-knappen för att börja spela in röstmeddelande till påminnelse. IRIS SOL räknar ner och inspelningen startar. Du kan spela in meddelande som är upp till 10 sekunder långt. Prata i mikrofonen med normal röst på ett avstånd på 5-10 cm. Inspelningen stoppas när 10 sekunder har gått eller du trycker på Stopp. Tryck på Play-knappen för att lyssna på inspelningen. För att spela in ett nytt röstmeddelande måste ett gammalt raderas först. Tryck på papirkorgen för att radera gammalt röstmeddelande.</p>
	<p>- Tryck på fältet Datum för att ange datum för påminnelsen. Tryck på Spara.</p> <p>- Tryck på tidsfältet för att ange tiden för påminnelsen. Tryck på Spara.</p>
	<p>Upprepa</p> <p>Om du önskar upprepa en påminnelse, tryck på Upprepa inte för att välja intervall för upprepningen.</p>

	<p>Här är 4 val av repetitionsmöjligheter som använder den angivna tiden som utgångspunkt. Tryck Lagra eller Pil tillbaka (avbryt).</p>
	<p>Alternativt kan du välja daglig, veckovis eller månadsvis upprepning. Välj vilka dagar påminnelsen ska upprepas och eventuellt intervall. Du kan också tidsbegränsa påminnelserna inom tid och datum. Tryck Lagra eller Pil tillbaka (avbryt).</p>
	<p>När du har gjort alla inställningar trycker du på Spara.</p>
	<p>Du kan aktivera/inaktivera varje enskild påminnelse med det blå skjutreglaget till höger i listan. Om en påminnelse upprepas finns det en upprepningssymbol mellan datum och skjutreglaget. Den visar upp till 5 påminnelser per sida.</p>
	<p>Exempel på hur påminnelsen kommer att se ut med rubrik, beskrivning, symbol och tid.</p>

ÄNDRA EN PÅMINNELSE

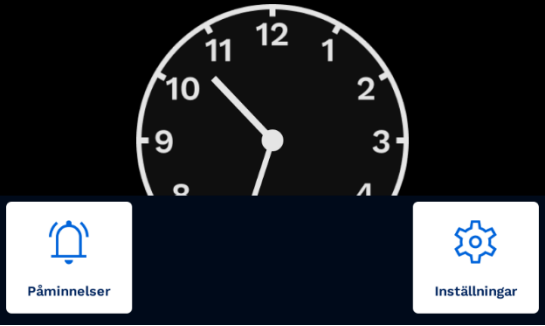
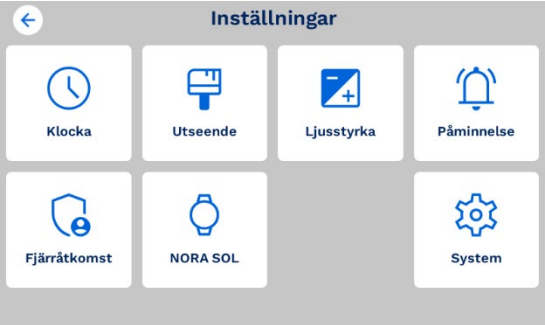
Tryck på HEM-knappen och tryck sedan på påminnelseikonen längst ner till vänster på skärmen. Det kan finnas flera sidor med påminnelser, varav 5 visas per sida. Tryck på påminnelsen du vill ändra. Gör de ändringar du vill ha och tryck på **Spara**.

RADERA EN PÅMINNELSE

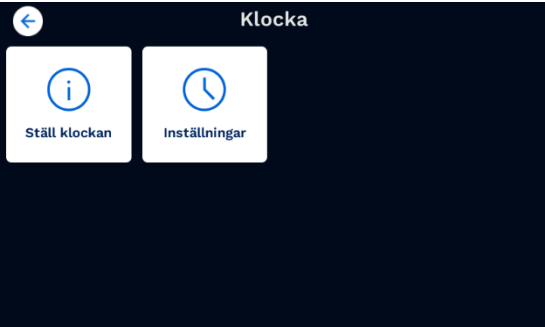
Tryck på HEM-knappen och tryck sedan på påminnelseikonen längst ner till vänster på skärmen. Tryck på påminnelsen du vill radera. Tryck sedan på papperskorgen för att **radera**.

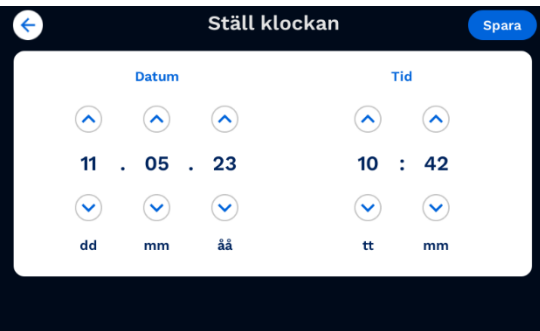
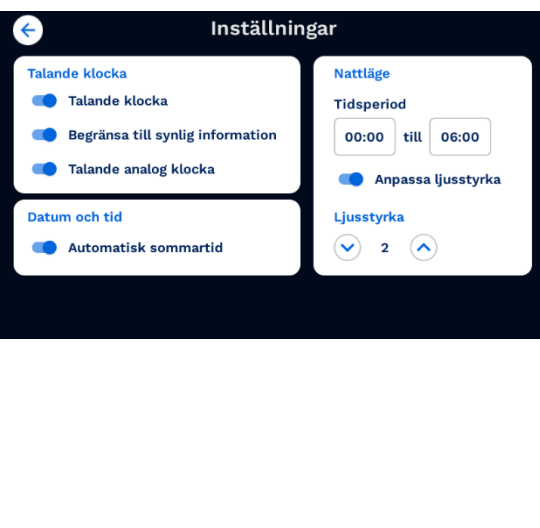
4. INSTÄLLNINGSMENYN

Under inställningsmenyn kan du ändra klocka/datum, utseende, påminnelser, ljusstyrka samt se systeminformation och vilka funktioner som valts. Här kan du också välja **Fjärråtkomst** för att fjärrstyra kalendern.

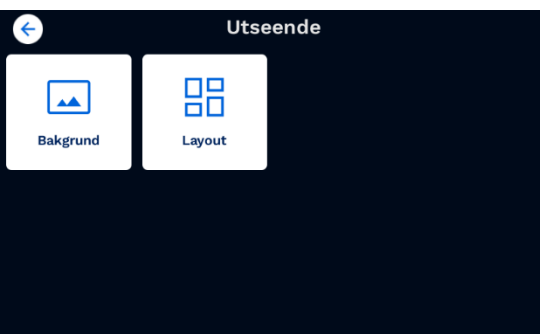
	<p>Tryck på HEM-knappen och en ikon med texten Inställningar visas i det nedre högra hörnet.</p> <p>Tryck på Inställningar-ikonen.</p> <p>Om du får meddelandet Skärmen är låst måste brytare 5 på baksidan av IRIS SOL tryckas ned (från PÅ till AV).</p>
	<p>Inställningsmenyerna kommer nu att visas som ikoner på skärmen.</p>

Inställningar: klocka

	<p>Under klockmenyn kan du ställa in klocka och datum, eller andra inställningar som talklocka, sommartid och nattläge.</p>
---	---

	<p>Ställ klockan</p> <p>Använd pilknapparna för att ändra datum och tid.</p> <p>Tryck på Spara för att spara inställningen eller på Pil tillbaka för att avbryta.</p>
	<p>Talande klocka</p> <ul style="list-style-type: none"> -Slå på eller av talande klocka. -Välj om informationen i röstmeddelandet ska begränsas till det som visas på skärmen. -Välj om den talande klockan ska ha analog eller digital avläsning. Analog klocka avrundar till närmaste 5 minuter. <p>Automatisk sommartid</p> <p>Nattläge</p> <p>Här kan du själv definiera tidsperioden för natten. Standardinställningarna är på 00:00 till 06:00. Ett giltigt val för början av natten är mellan 18.00 och 00.00, och start på dagtid är mellan kl 05:00 och 10:00.</p>

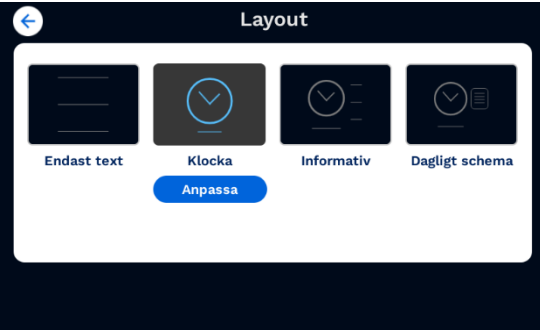
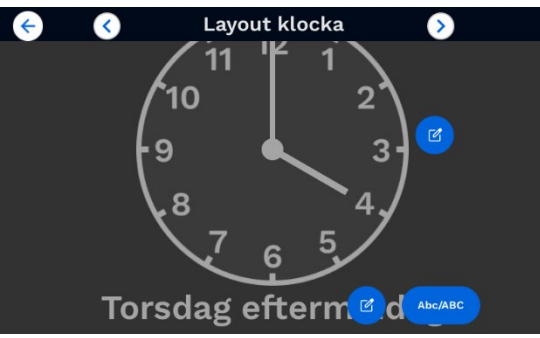


Inställningar: Utseende


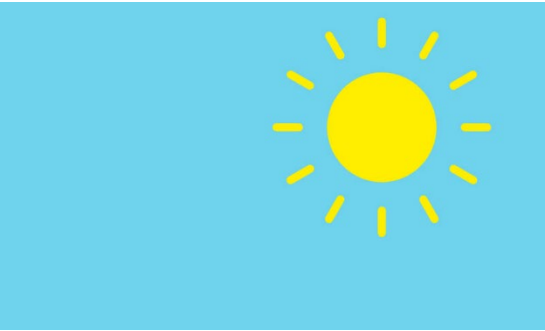


	<p>På den här sidan hittar du utseendeinställningar (bakgrund och layout).</p> <p>Menyfärgen är ljus eller mörk beroende på vilken bakgrund du har valt</p>
---	---

Inställningar: Utseende - Bakgrund


	<p>Här väljs klockans utseende. Varje utseende består av en bakgrund och text/klocka i utvalda färger.</p> <p>Urtavlan har två val, standard och markerad.</p> <p>Inställningen sparas automatiskt.</p>
---	---

Inställningar: Utseende - Layout

	<p>Du kan välja mellan 4 layouter för hur klockan ska se ut:</p> <p>Endast text - här visas dagen och den digitala klockan, period av dagen eller datum.</p> <p>Enkel klocka - här visas en stor klocka med valbar information längst ner.</p> <p>Informativ - här visas klockan med valbar information i 5 fält.</p> <p>Dagsschema - här visas klockan tillsammans med en översikt över dagens kommande påminnelser.</p> <p>Alla alternativ kan anpassas.</p>
	<p>Ställ in klockan</p> <p>Nu visas omslagsbilden med blå pennikoner i de positioner som kan ändras.</p> <p>När du trycker på en pennikon visas en lista över vad som kan visas i den positionen på skärmen. Valen sker direkt, så att du kan försöka hitta den bild som passar användaren bäst.</p>
	<p>Uppsätt dag</p> <p>Alla uppsätt har en display som skiljer mellan dag och natt.</p> <p>Tryck på de vite Pilarna längst upp på skärmen för att se vad som kommer visas för dag och natt.</p>
	<p>Uppsätt natt</p> <p>Tryck på Pennikon för att ändra layouten mellan klocka och bild.</p> <p>Om du väljer Bild, finns det en sol för dagtid och en måne och stjärnor för natten. Ingen annan information som t.ex. klockan visas.</p>

	<p>Bild för natt (i stället för klocka).</p> <p>Nattläge används i första hand för de som vill ha symboler för 24-timmars orientering i stället för en klockdisplay.</p> <p>Detta görs i Inställningar, Utseende, Inställningar och Anpassa.</p>
	<p>Bild för dag (i stället för klocka).</p>
	<p>Dagsschemat visar en översikt över dagens kommande påminnelser, om detta har valts vid registreringen av själva påminnelsen/påminnelserna. Och Dagligt Schema vyn har valts.</p>
	<p>Om du inte använder Dagligt schema som en fast visning på skärmen kan du enkelt få en överblick över kommande aktiviteter genom att trycka på Hem-knappen och sedan välja Kalender.</p> <p>För att komma åt kalendern måste knappen för detta vara påslagen (se avsnittet Inställningar: Påminnelser).</p>

Inställningar: Ljusstyrka

	<p>Här väljer du:</p> <ul style="list-style-type: none"> -skärmens ljusstyrka -om varningslamporna ska vara av eller på -styrkan på varningslamporna <p>Inställningarna sparas automatiskt.</p>
---	--

Inställningar: Påminnelser

	<p>Här kan du välja om tiden ska visas i påminnelsebilden, om menyknappen (ikonen) och menyknappen för kalendern ska visas på skärmen samt om klockan ska läsas upp vid påminnelser.</p> <p>Inställningarna sparas automatiskt.</p>
--	---

Inställningar: System

	<p>IRIS SOL är i princip underhållsfri, och det finns inga licenser etc. som behöver förnyas.</p>
--	---

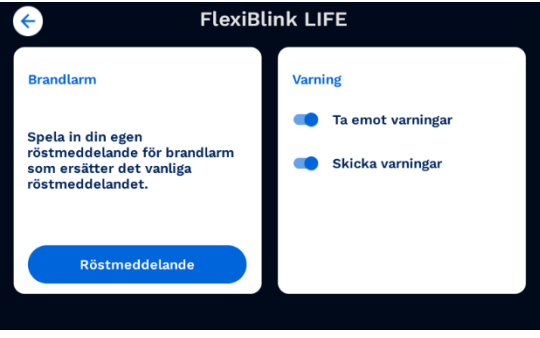

Inställningar: System - Uppgradera

	<p>Programvaran (SW) kan uppdateras, via e-post USB eller internet (internet antingen via kabel till ditt lokala nätverk eller genom att använda IRIS SOL Remote Management).</p> <p>Kontakta Vestfold Audio AS om du behöver hjälp.</p>
--	--

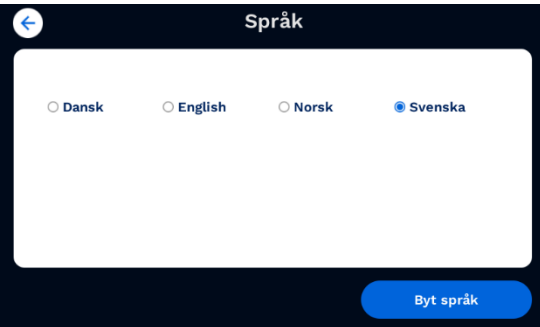
Inställningar: System - Återställ

	<p>IRIS SOL kan återställas till fabriksstandard här.</p> <p>Alla inställningar och anslutningar tas bort och enheten kan överlämnas till en ny användare.</p>
--	--

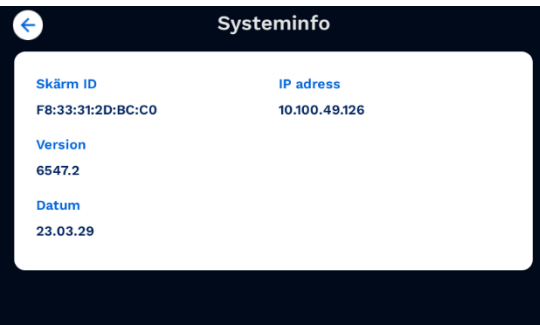
Inställningar: System - FlexiBlink LIFE

	<p>När Ta emot varningar är aktiverat får IRIS SOL meddelanden från FlexiBlink LIFE-systemet.</p> <p>När Skicka varningar är aktiverat skickas ett meddelande till FlexiBlink LIFE-mottagare när en påminnelse inträffar.</p> <p>Du kan spela in din egen röstmeddelande för brandlarm.</p>
	<p>Tryck på inspelningsknappen för att börja spela in röstmeddelanden i händelse av brandlarm. IRIS SOL räknar ner och inspelningen startar. Du kan spela in ett meddelande som är upp till 10 sekunder långt. Prata i mikrofonen med normal röst på ett avstånd av 5-10 cm. Inspelningen stoppas när 10 sekunder har gått eller du trycker på Stopp. Tryck på Play-knappen för att lyssna på inspelningen. För att spela in ett nytt röstmeddelande måste alla gamla raderas först. Tryck på Sopkorg för att radera gamla röstmeddelanden.</p>

Inställningar: System - Språk

	<p>Här kan du ändra språket på din enhet. Efter att ha ändrat språk startar enheten om.</p> <p>Kontakta Vestfold Audio om du behöver ytterligare språk.</p>
---	---

Inställningar: System - Systeminfo

	<p>Här hittar du information om versioner och eventuell internetanslutning. Detta är information som används för förfrågningar till Vestfold Audio AS.</p>
---	--

5. SKÄRMLÅS

Med funktionsomkopplare 5 på baksidan av IRIS SOL kan du aktivera/inaktivera skärmlås och volymjustering. Då kommer användaren inte att kunna komma åt att ändra inställningar. Volym och inställningar är låsta till aktuell nivå. Låsning aktiveras med skjutreglage 5 till ON. Knappar för påminnelser och kalender kan tas bort / läggas till under Inställningar: Påminnelse.



6. SAMMANKOPPLING

Om du vill använda IRIS SOL tillsammans med FlexiBlink LIFE-seriens larm-produkter måste du sammankoppla enheterna.

Alla FlexiBlink LIFE-enheter som ska fungera tillsammans måste sammankopplas genom att trycka på **LIFE-knappen**. **LIFE-knappen** sitter under baklocket på IRIS SOL.

Anslut för första gången

<p>1. Tryck på LIFE-knappen på en av enheterna 2 gånger.</p>	<p>2. Tryck på LIFE-knappen på den andra enheten 1 gång. Indikatorlamporna på båda enheterna blinkar grönt.</p>	<p>3. Sammankopplingen bekräftas av det faktum att indikatorlamporna lyser fast i 2-3 sekunder. Enheterna är klara att användas. Tryck på testknappen på en sändare för att kontrollera sammankopplingen.</p>

Ansluta ny enhet till befintligt system

1. Tryck på **LIFE-knappen** på enheten från det befintliga systemet 2 gånger.
2. Tryck på **LIFE-knappen** på den nya enheten 1 gång.
3. Sammankopplingen bekräftas av indikatorlamporna som lyser fast grönt i 2-3 sekunder.
4. Enheterna är klara att användas. **Tryck på testknappen** för att kontrollera sammankopplingen.

Sammankopplingen misslyckades

Om du får ett rött ljus i den nya enheten vid sammankopplingen misslyckades det. Återställ enheten för reparation (se nedan).

Avbryt sammankopplingen

För att avbryta en aktiv sammankoppling, tryck på **LIFE-knappen** 1 gång.

Återställ sammankopplingen

Tryck på **LIFE-knappen** på enheten 5 gånger där sammankopplingen ska raderas. Detta bekräftas av växlande röda och gröna blinkar.

7. TILLBEHÖR

IRIS SOL kan samspela med utvalda produkter i FlexiBlink LIFE-serien för att ge användaren ytterligare påminnelser och drifthjälp.

			
Optisk rökdetektor Art.nr: 1655	Termisk branddetektor Art.nr: 1667	FLEXIKNAPP Art.nr: 1645	
Optisk rökdetektor som aktiveras vid rök. ID-väljare för rum-väljare. Livstids brandvarnarbatteri (10 år)	Termisk brandvarnare som aktiveras av varmen från en brann. ID-väljare för rum-väljare. Batteri som håller hela brandvarnarens livslängd (10 år)	Knapp för dörrklocka eller fjärravläsning av klockor.	
			
BRANDSÄNDARE Art.nr: 1638	AURORA Art.nr: 1648	BACKUP Art.nr: 1948	ELLA Art.nr: 1671
Ljuddetektor för Brandlarmsystem (utan galvanisk anslutning)	Varnar när det finns en aktiv påminnelse på IRIS SOL	Nödbatteri för IRIS SOL och IRIS MÅNE	Armbandssändare för fjärravläsning av klockor

8. VIKTIG INFORMATION

Produkten kan rengöras med en mjuk, lätt fuktig trasa. Produkten är avsedd för inomhusbruk i icke-kondenserande miljö.

Produkten ska inte lämnas i direkt solljus.

ANVÄNDNINGSBEGRENSNINGAR

Endast tillåtet att användas inom EU/EES.

ÅTERVINNING

Kassera inte produkten med restavfall. Bekanta dig med lokala bestämmelser för kassering av elektriska produkter. Med rätt hantering kan stora delar av produkten återvinnas, samtidigt som miljön skyddas.

SÄKERHET

Undvik att utsätta enheten för lågor och andra direkta värmekällor. Ta inte isär produkten.

TEKNISKA DATA

BxHxD (utan väggfäste och fot):	218x165x40 mm
Vikt utan strömförsörjning:	800 g
Radiofrekvens:	868.1 – 869.85 MHz
Sändareffekt:	10 mW e.r.p.
Driftspänning:	15 VDC
Temperatur:	-10 °C - +40 °C

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Vestfold Audio AS förklarar att produkten överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.vestfoldaudio.no/samsvar

9. FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösningar
Enheten fungerar inte	Strömförsörjningen är inte ansluten	Se till att strömförsörjningen är ansluten till vägguttaget och att den är helt ansluten till enheten
Klockan visar fel tid eller datum		Ställ klockan. Se Inställningar: Klocka: Ställ klockan
Klockan visar fel tid efter ett strömavbrott	Klockbatteriet är slut	Klockans batteri laddas under en lång tid. Batteriet ska laddas i minst 4 dagar innan strömmen tas bort
Kommer inte in i inställningsmenyn.	Omkopplare nr 5 på baksidan står upp (ON)	Skjut omkopplare 5 nedåt (till AV)
Det går inte att ställa in volymen	Omkopplare nr 5 på baksidan står upp (ON)	Skjut omkopplare 5 nedåt (till AV)

Talklockan fungerar inte	Funktionen är avstängd i inställningarna	Gå till Inställningar: Klocka: Inställningar och aktivera talande klocka .
Påminnelse/medelande visas inte	Påminnelsen är inte aktiv	Aktivera påminnelsen med skjutreglaget i påminnelseöversikten.
	Tidpunkten är fel	Se till att påminnelsen är inställd på rätt datum och tid
Påminnelsen upprepas inte	Repetitionen är inte inställd på rätt dag/datum/tid	Se till att påminnelsen är inställd med rätt repetition
Det går inte att sammankoppla	Indikatorlampan lyser rött efter anslutningsförsök	Enheten är redan sammankopplad med andra enheter. Återställ sammankopplingen.
	Indikatorlampan lyser rött efter anslutningsförsök	Sammankopplingen misslyckas. Försök igen
	Indikatorlampan fortsätter att blinka grönt efter sammankoppling	Letar fortfarande efter nya enheter. Tryck på LIFE-knappen igen för att avbryta. Försök igen
Meddelande har inte mottagits	Ej sammankopplad	Återställ sammankopplingen på den senaste enheten och anslut igen
	Brist på täckning	Prova att flytta enheterna närmare varandra
	Tomt batteri i sändaren	Byt batteri i sändaren
	Sändaren fungerar inte	Läs bruksanvisningen för sändaren
Meddelande mottaget, men inget ljud	Sänkt volym	Prova att justera volymen
Hur återställer du alla inställningar?	Enheten måste levereras till en ny användare.	Anslut enheten till internet och ström. Gå till Inställningar: System: Återställ

