

FlexiBlink Life Reisevekkerur Modell 1



Brukerhåndbok

1. Innledning

FlexiBlink LIFE Reisevekkerur modell 1 er en kompakt og bærbar vekkerklokke med valgfri vibrasjon og/eller lyd.

Klokke-displayet kan legges ned, slik at klokken og de lagrede innstillingene ligger trygt bevart.

Nøkkeldata:

- Enkel i bruk
- Batteridrevet
- Kraftig vibrasjon

2. Oversikt



- 1) Stille tid på klokke
- 2) Stille tid for varsling
- 3) Testknapp
- 4) Stille timer
- 5) Stille minutter
- 6) Varsling på/av
- 7) Slumre og lys
- 8) Stille type varsel
- 9) Stille 12/24 timers klokke



3. Batterier

Fjern lokket til batterirommet, sett inn 1 stk. AAA batteri for klokken og 2 stk. AA batterier for vibrator og lydvarsling. Sørg for at du setter inn batteriene korrekt i henhold til polmarkeringer i batterirommet (+ og -).

Når LCD skjermen blir utydelig er det tid for å skifte klokkebatteriet (AAA batteriet). Når vekkeurets lyd blir dårlig, lyden for lav eller vibratoren for svak, er det en indikasjon på at AA-batteriene bør skiftes.

4. Vedlikehold

Hvis produktet ikke skal brukes på en stund kan det være lurt å ta ut batteriene for å unngå mulige lekkasjer.

Under transport anbefales det å fjerne batteriene for vibrator og lydvarsling (2 stk AA batterier). Du unngår da at batteriene blir brukt hvis det ved en feiltagelse blir trykket på lysknappen (7) under reisen.

5. Stille tid på klokke

- Velg først 12 eller 24 timers klokke med bryter (9). Velges 12 timers klokke vil en P vises i display for PM.
- Trykk og hold knappen «Stille tid på klokke» (1) og

trykk samtidig på knappen «Stille timer» (4) inntil den korrekte time er stilt inn på klokken.

- Trykk og hold knappen «Stille tid på klokke» (1) og trykk samtidig på knappen «Stille minutter» (5) inntil det korrekte minutt er stilt inn på klokken.

6. Stille tid for varsling

- Trykk og hold «Stille tid for varsling» (2) og trykk samtidig på knappen «Stille timer» (4) inntil den korrekte time er stilt inn. Har du valgt 12 timers klokke er det viktig å sette den korrekte time (AM/PM). Når varsling er stilt til PM tid vil en «P» sees på displayet.
- Trykk og hold knappen «Stille tid for varsling» (2) og trykk samtidig på knappen «Stille minutter» (5) inntil det korrekte minutt er stilt inn.

7. Slå på varsling

- Slå på varsling ved å sette bryter «ALARM on/off» (6) til «on». Varslingssymbol vil da sees på toppen av displayet som indikasjon på at varsling er slått på. Du vil nå bli varslet automatisk på den valgte varslingstid.

- Du kan velge om du vil varsles enten med enten vibrasjon, lyd eller lyd og vibrasjon samtidig ved å sette bryter «Stille type varsel» (8) til vib, buzz eller vib buzz.
- Du kan avbryte et varsel ved å trykke på knappen «Stille tid for varsling» (2). Varsel vil da bli sendt ut neste dag på samme tid.
- Du kan avbryte et varsel midlertidig ved å trykk på knappen «Slumre og lys» (7). Varselet vil da starte igjen etter cirka 4 minutter. Du kan gjenta dette så mange ganger som du ønsker.
- For å stanse varsling permanent settes bryteren «Alarm on/off» (6) til «off».

8. Natlyd

Du kan lettere se tiden i mørke ved å trykk og holde knappen «Slumre og lys» (7) inne.

9. Testknappen

Testknappen (3) kan brukes til å demonstrere lyd og vibrasjon uten å måtte aktivere varsling. For å bruke testknappen sett først type varsel med bryteren «Stille type varsel» (8) og trykk testknappen (3) inn for å demonstrere lyd, vibrasjon, eller både lyd og vibrasjon.

10. Resirkulering

Produktet og batteriet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.



11. Tekniske data

Strøm: 2 x AA batterier og 1 x AAA batteri medfølger.
Mål: 90mmØ x 30mm.
Vekt: 200g (uten batterier)



Vestfold Audio AS

www.vestfoldaudio.no

tel. 33 47 33 47

