





IRIS SOL REMOTE ACCESS

Bruksanvisning



IRIS SOL REMOTE ACCESS, heretter kalt SOL REMOTE, gjør at støttepersoner/ pårørende kan legge inn påminnelser som varsles på IRIS SOL, eventuelt NORA SOL (armbåndskalender), dersom det ikke er kablet internett tilgjengelig ved ønsket plassering.

Man kan også oppdatere programvaren på IRIS SOL med SOL REMOTE.

	<p>OVERSIKTSBILDE – SOL REMOTE</p> <p> PÅ-bryter er merket ON / OFF</p> <p>LAN kobles til IRIS SOL sin nettverkskontakt (internett)</p> <p>POWER kobles til IRIS SOL sin USB (strøm)</p>
	<p>TILKOBLINGER – SOL REMOTE</p> <p>Koble nettverkskabelen til «LAN»</p> <p>Koble USB-kabel til «POWER»</p>
	<p>SYMBOLER – SOL REMOTE</p> <p>4 prikker – status batteri/ lading</p> <p>PWR – AV/ PÅ-status</p> <p>WAN – ikke i bruk</p> <p>LAN – status nettverk</p> <p>WIFI – ikke i bruk</p> <p>3G/4G – status mobildekning</p>
	<p>TILKOBLINGER – IRIS SOL</p> <p>Nettverk (for tilkobling til SOL REMOTE)</p> <p>USB (strømuttak til SOL REMOTE)</p>

1. KOMME I GANG

Pakk ut enheten. Det medfølger en nettverkskabel (internett), et strømadapter, en USB-kabel (til strøm) og borrelås. Borrelås kan benyttes til å feste IRIS SOL REMOTE til ønsket sted.

Man kan velge å benytte strømadapter koblet til stikkontakt til SOL REMOTE eller kun USB-kabel mellom IRIS SOL og SOL REMOTE.

Koble til ønsket kabel til kontakt merket POWER. Den andre enden kobles til stikkontakt eller IRIS SOL USB.

Koble til nettverkskabel til kontakt merket LAN. Den andre enden kobles til IRIS SOL sin nettverkskontakt.

Når SOL REMOTE blir tilkoblet strøm, skal den slå seg på. Hvis ikke PWR lyser grønt, kan du holde ON/OFF-knappen inne til PWR lyser grønt. SOL REMOTE bruker inntil 6 minutter på å starte opp.

Ved normal bruk vil PWR, LAN og 3G/4G lyse grønt, samt at LAN og 3G/4G vil blinke litt (datatrafikk).

Gå inn på IRIS SOL – Innstillinger og Fjerntilgang, se at status har skiftet fra Offline til Online.

Du kan nå aktivere Fjerntilgang.

SOL REMOTE benytter mobilnettet og vil virke der mobiltelefon har dekning.

2. VIKTIG INFORMASJON

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut. Produktet er for innendørs bruk i ikke-kondenserende miljø.

Produktet bør ikke stå i direkte sollys.

BRUKSBEGRENSNINGER

Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

RESIRKULERING

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

SIKKERHET

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder. Produktet må ikke skrus fra hverandre.

TEKNISKE DATA

BxHxD	120x74x28 mm
Vekt	225 g
Radiofrekvens	700 – 2600 MHz
Driftsspennning	5 VDC via USB-C
Temperatur	0 °C - +40 °C

SAMSVARERKLÆRING

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:

www.vestfoldaudio.no/samsvar

FEILSØKING

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Enheden virker ikke	Strømforsyningen er ikke tilkoblet	Kontroller at strømforsyning står i en stikkontakt som har strøm, eller USB-kabel koblet til IRIS SOL og at den er plagget inn i SOL REMOTE. Slå på enhet hvis nødvendig (ingen lys).
	Enhet er ikke påslått (PWR lyser ikke)	Slå på enhet (hold inne ON/OFF-knappen til det lyser i display).
	LAN symbol lyser ikke	Sjekk nettverkskabelen i begge ender. Slå av og på SOL REMOTE.
	3G/4G symbol lyser ikke	SOL REMOTE er utenfor mobildekning
	Fjerntilgang på IRIS SOL er ikke aktivert	Gå til innstillinger, Fjerntilgang og se at Fjerntilgang er aktivert og Online.
	SOL REMOTE er akkurat startet.	Vent inntil 6 minutter slik at enheten er klar til bruk.



HMS: 301388