

FlexiBlink

Brukerhåndbok

Tråkkemattebryter uten sender

Art. nr. TRÅKKEM



MAN 2452 A

Vestfold Audio AS

Sandefjord

FlexiBlink

Bruksområde

Tråkkematte TRÅKKEM er en del av FlexiBlink systemet. Den anvendes som en bryter som aktiverer FlexiBlink sender når man tråkker på den. Tråkkematten brukes gjerne sammen med universalsender eller barnevakt.

Virkemåte

Tråkkematta brukes for å registrere om en person passerer et område hvor tråkkematta ligger. På tråkkematta er det montert en ledning med konektor. Dersom ledningen er tilkoblet FlexiBlink sender, vil varslingen kunne sendes trådløst til andre mottakere.

Tilkobling

Tråkkematta kobles normalt til en universalsender, barnevakt eller assistansealarm. Sett pluggen fra tråkkematta inn i signalinngang for potensialfri kontakt på senderen.

NB! Påse at matten monteres slik at risikoen for å snuble i matten eller ledningen minimeres.

Produsent

Vestfold Audio AS
3241 Sandefjord

Tekniske spesifikasjoner nødvendig for sikker bruk

Bruksområde: Innendørs.
Størrelse: 39 x 70 cm.

Nødvendige advarsler i forbindelse med bruk

Tråkkematta må ikke brettes.

Plassering og montering

1. Tråkkematta legges normalt under matte/teppe på gulvet.
2. Sensorledningen plugges i egnet enhet for videre-sending av varsel.
3. Monter senderen som beskrevet i senderens brukerhåndbok.
4. Test sensor og sender ved å tråkke på matta. Sjekk at mottakeren mottar.
5. Nå er Tråkkematta klar til bruk.

Rengjøring utført av bruker

Tråkkematta kan rengjøres med myk klut oppvridd i lunkent, mildt såpevann. Hjelpemiddelet må ikke utsettes for søl eller sprut med vann.

Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Lagring når ikke i bruk

Oppbevar alltid tråkkematta flatt eller som levert fra oss. Oppbevares på et tørt og helst støvfritt sted.



Vestfold Audio AS
[Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord](http://www.vestfoldaudio.no)
www.vestfoldaudio.no

tel. +47 33 47 33 47

