


# FlexiBlink LIFE Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling

## SENGEV-L

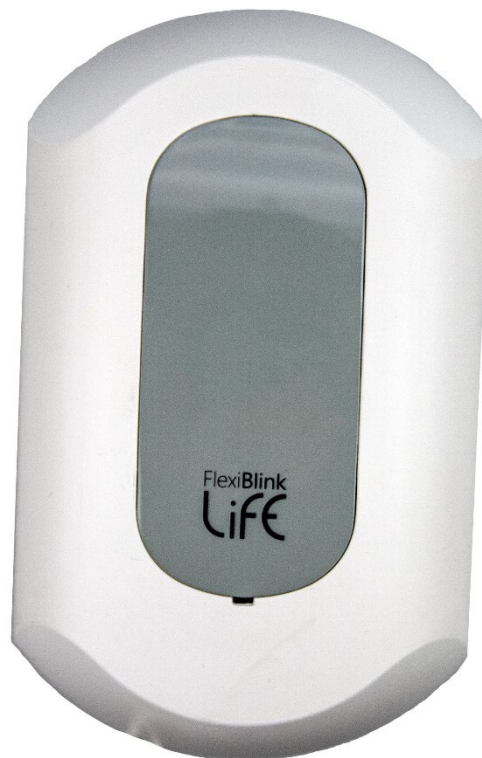

# Brukerhåndbok

---

# Innholdsfortegnelse

---

|   |          |
|---|----------|
| <b>1. Innledning</b>                              | <b>3</b> |
| <b>2. Oversikt</b>                                | <b>3</b> |
| I pakken  | 3        |
| Under frontlokk                                   | 3        |
| <b>3. Komme i gang</b>                            | <b>4</b> |
| Plassering  | 4        |
| Tilkobling  | 4        |
| Sammenkoble enheter                               | 4        |
| Sammenkoble første gang                           | 4        |
| Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system | 4        |
| Sammenkobling mislykkes                           | 5        |
| Avbryte sammenkobling                             | 5        |
| Nullstille sammenkoblingen                        | 5        |
| <b>4. Daglig bruk</b>                             | <b>5</b> |
| Varsling  | 5        |
| <b>5. Utvidede funksjoner</b>                     | <b>5</b> |
| Velge funksjoner                                  | 5        |
| Velge modus                                       | 6        |
| <b>6. Viktig informasjon</b>                      | <b>7</b> |
| Bruksbegrensninger                                | 7        |
| Resirkulering                                     | 7        |
| <b>7. Sikkerhet</b>                               | <b>7</b> |
| <b>8. Tekniske data</b>                           | <b>7</b> |
| <b>9. Samsvarserklæring</b>                       | <b>7</b> |
| <b>10. Feilsøking</b>                             | <b>8</b> |

## 1. Innledning

**SENDEVIBRATOR** er en mottaker/varsler som tar imot trådløse signaler fra FlexiBlink LIFE detektorer/sendere montert i boligen. Sengevibratoren varsler deg om daglige hendelser og forhold av mer sikkerhetsmessig art, alt avhengig av hvilke detektorer/sendere som er installert og hvordan sengevibratoren er konfigurert. Til daglige hendelser regner vi blant annet varsling av dørklokke og telefon. Sikkerhetsalarmer kan for eksempel være komfyrvakt og røykvarslere.

Sengevibratoren kan tilkobles vekkerklokke eller du kan benytte vekkefunksjonen i IRIS LIFE som fungerer trådløst.

Sengevibratoren vil vekke ved å vibrere med samme styrke som ved daglige signaler. Vibreringen avsluttes automatisk etter 2 minutter dersom vekkerklokken ikke slås av.

Sengevibratoren har innebygget nødstrømbatteri og vil dermed fortsette normal drift i minimum 24 timer ved bortfall av strøm. Den har også innebygget trådløs ladefeilvarsling, og vil varsle i FlexiBlink LIFE mottakere ved bortfall av ladestrøm.

## 2. Oversikt


### I pakken



Sengevibrator med tilkoblet ledning for vekkerklokke og strømforsyning

Figur 1 Framsiden

### Under frontlokk

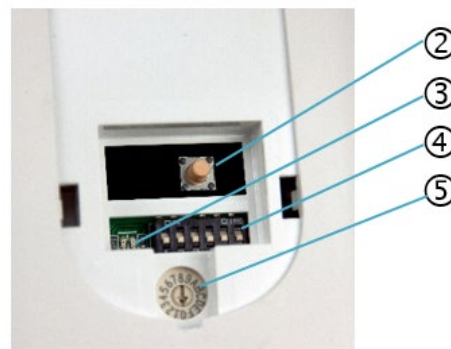

Figur 2 Under frontlokk

- ① Åpne lokket her
- ② LIFE-knapp (sammenkobling)
- ③ Lysindikator
- ④ Funksjonsbrytere
- ⑤ Modusbryter

### 3. Komme i gang

---

#### Plassering

Sengevibratoren plasseres mellom madrassene i sengen eller mellom madrassen og sengevangen.

#### Tilkobling


Sett strømforsyningen i kontakten på veggen. Dersom vekkerklokke skal benyttes, kobles vekkerklokkeledningen fra sengevibratoren til vekkerklokka.

#### Sammenkoble enheter


LIFE-knappen finnes under frontlokket på sengevibratoren. Se figur 2 på forrige side.

#### Sammenkoble første gang


1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på en av enhetene.

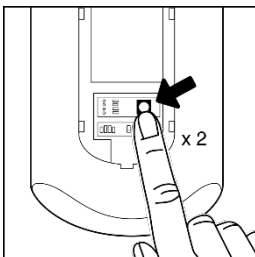

2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den andre enheten.

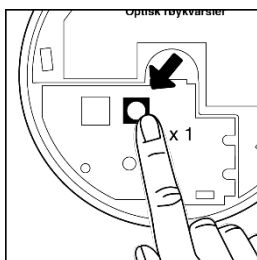

3. Indikatorlampene på begge enhetene blinker grønt.

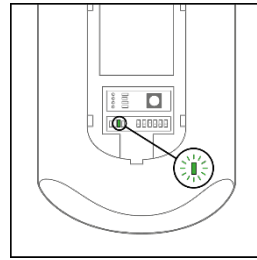

4. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
5. Enhetene er klare til bruk.

Trykk på «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.

#### Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system

1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på enhet fra eksisterende system.
2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den *nye* enheten.
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
4. Enhetene er klare til bruk.

Trykk på «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.


## Sammenkobling mislykkes

Dersom du får rødt lys i den nye enheten ved sammenkobling, mislykkes den.

Vennligst nullstill enheten før du sammenkobler på nytt.

## Avbryte sammenkobling

For å avbryte sammenkoblingen, trykk **én** gang på LIFE-knappen.

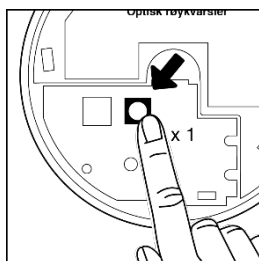

## Nullstille sammenkoblingen

Trykk **fem** ganger på LIFE-knappen på enheten hvor sammenkoblingen skal slettes. Dette bekreftes med røde og grønne blink.

## 4. Daglig bruk

---


### Varsling

Hendelser som oppdages i boligens FlexiBlink LIFE-anlegg varsles automatisk med vibrasjon.


## 5. Utvidede funksjoner

---

Sengevibratoren er utstyrt med en funksjonsbryter og en modusbryter bak frontlokket. Du trenger ikke endre på fabrikkinnstillingen med mindre du har behov for de funksjonene som blir forklart i dette kapittelet.

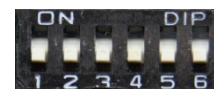

**Funksjonsbryter**  
(fabrikkinnstilling)

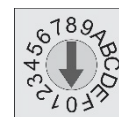

**Modusbryter**  
(fabrikkinnstilling)

### Velge funksjoner



### Nabovarsling – bryter 1

For å få nabovarsling i FlexiBlink LIFE-systemet, må det benyttes en IRIS LIFE for oppsett. Da settes alle varslingsmottakerne opp til å varsle ved brann eller innbrudd hos aktuelle naboer. Dersom du ikke ønsker at Sengevibratoren skal varsle fra naboer, kan du skyve *bryter 1* opp. Sengevibratoren blir da koblet fra nabovarsling.

**NB!** *Nabovarsling går kun på alarmsignaler, og ikke for daglige signaler som for eksempel telefon og dørklokke.*



### Trådløs vekking – bryter 2 og 3

IRIS LIFE kan sende vekkesignal trådløst til sengevibrator. Det finnes mulighet for to kanaler (A og B). Det vil si at om man har to IRIS LIFE, kan disse sende vekkesignal til hver sin sengevibrator. Bryter 2 styrer kanal A og bryter 3 styrer kanal B. Begge kanaler er som standard aktivert.

Dersom du ønsker å deaktivere trådløs vekking, kan du vippe bryter 2 og/eller bryter 3 opp.




### Tvungen driftsstans – bryter 6

Dersom sengevibratoren skal slås helt av, for eksempel ved transport, vippes bryter 6 opp eller ned (kun endring av bryterens stilling nødvendig) før strømkontakten tas ut. Det kan også gjøres etter at strømkontakten er tatt ut. Sengevibratoren går da i fullstendig dvale, og kan kun vekkes opp igjen ved tilkobling med strømkontakt.

NB! Hvis bryteren vendes mens sengevibratoren står med ladespenning på, vil den gå tilbake til normaldrift dersom batterieliminatoren ikke trekkes ut av kontakten på veggen innen 2 minutter.

Kombinasjoner av funksjonene kan gjøres fritt etter behov med bryter 1 til 3. Bryter 4 og 5 er reservert for fremtidige behov.

## Velge modus

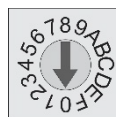

### Vibrasjon ved alle signaler (0)

Dette er fabrikkinnstilling. Sengevibratoren varsler nå for alle signaler – både daglig og alarm.



### Vibrasjon kun ved alarmer (1)

Dersom du ønsker at sengevibrator ikke skal varsle deg om dørklokke og telefon, kan du sette venderen i posisjon 1. Sengevibratoren vil nå kun varsle alarmer – forhold av sikkerhetsmessig karakter (komfyrvakt, røykvarsler o.l.). NB! Den vil også varsle vekkerklokke.



### Vibrasjon kun ved brann (2)

Dersom du ønsker at sengevibrator kun skal varsle ved BRANN, kan du sette venderen i posisjon 2. Sengevibrator vil nå kun varsle brannalarmer (røykvarsler og brannklokkesender). NB! Den vil også varsle vekkerklokke.

## 6. Viktig informasjon

---

Sengevibratoren har to lys, et grønt og et rødt. Det grønne lyset lyser konstant ved strømdrift og blinker ved batteridrift. Når Sengevibratoren lader, vil det røde lyset være på. Dette lyset vil skifte mellom av og på ettersom produktet lades automatisk ved behov.

Sengevibratoren har innebygget temperatursikring og strømsikring og benytter trygg NiMH batteriteknologi med forsiktig ladesyklus. Den har kontinuerlig overvåkning innebygget, slik at den ikke vil utgjøre noen risiko eller fare ved riktig bruk.

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut.

Produktet er for innendørs bruk i ikke-kondenserende miljø.

### Bruksbegrensninger

Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

### Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.



## 7. Sikkerhet

---

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder.

Produktet må ikke skrus fra hverandre.

Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes, brennes eller lades opp.

## 8. Tekniske data

---

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Dim. (bxhxd):   | 92x150x37mm        |
| Vekt:           | 600 gram           |
| Radiofrekvens:  | 868.1 – 869.85 MHz |
| Sendereffekt:   | 10 mW e.r.p.       |
| Driftsspenning: | 15VDC/230VAC       |
| Temperatur:     | -10 °C - +40 °C    |

## 9. Samsvarserklæring

---

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:

[www.vestfoldaudio.no/samsvar](http://www.vestfoldaudio.no/samsvar)



## 10. Feilsøking

| Problem  | Mulig årsak  | Løsninger  |
|--|--|--|
| <b>Får ikke sammenkoblet – ind.lampe lyser rødt</b>                              | Sammenkobling mislykkes pga. for lang avstand            | Flytt enhetene nærmere hverandre og prøv igjen   |
|  | Enheter er allerede sammenkoblet med andre enheter.      | Nullstill sammenkobling. Vennligst prøv igjen.   |
|  | Feil rekkefølge på sammenkoblingen                       | Trykk <b>to</b> ganger på LIFE-knappen på en enhet i det eksisterende system, og kun <b>én</b> gang på den nye enheten |
| <b>Indikatorlampen fortsetter å blinke grønt etter sammenkobling</b>             | Er det trykket to ganger på den ene enhetens LIFE-knapp? | Trykk en gang til på LIFE-knappene for å avbryte. Prøv igjen.  |
|  | Leter fortsatt etter nye enheter.                        | Trykk en gang til på LIFE-knappen for å avbryte. Prøv igjen.   |
| <b>Varsling mottas ikke</b>  | Ikke sammenkoblet  | Koble ut siste enhet og koble sammen igjen   |
|  | Modusbryter er satt i modus 1 eller 2                    | Sett modusbryter i riktig posisjon   |
|  | Manglende dekning  | Forsøk å flytte enhetene nærmere hverandre eller sett opp repeater   |
|  | Sender virker ikke                                       | Les bruksanvisning til sender  |
|  | Tomt batteri i sender                                    | Bytt batteri i sender  |
|  | Enheter er sammenkoblet feil.                            | Nullstill sammenkoblingen på enheten og legg til igjen.  |
|  | Nabovarsel   | Kontroller at funksjonsbryteren for nabovarsel står korrekt.   |
|  | Nødstrømsbatteriet er svakt.                             | Ring service.  |
| <b>Sengevibrator varsler hendelser, men ingen sendere er aktivert i boligen.</b> | Enheter er ikke sammenkoblet                             | Koble enheten til en mottaker  |
|  | Ingen mottaker er sammenkoblet med senderen              | Sjekk at det er en mottaker i systemet. Nullstill enheten. Koble til på nytt. Prøv igjen                               |



Vestfold Audio AS  
Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord

[www.vestfoldaudio.no](http://www.vestfoldaudio.no)

Tlf.: +47 33 47 33 47

