

# IRIS SOL KALENDER MED PÅMINDELSER

## Brugsanvisning



IRIS SOL er en elektronisk kalender med et talende ur og valgbar visning af information såsom analogt eller digitalt ur, dag, dato, daglig orientering og daglig tidsplan.

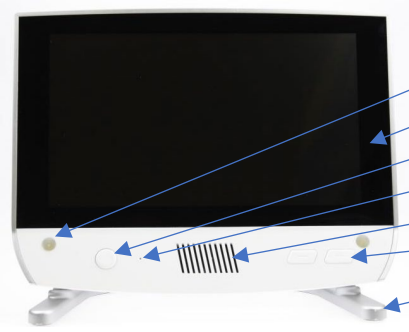

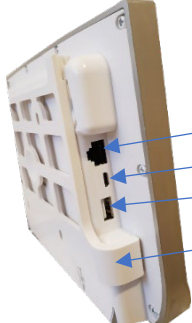
Påmindelser føjes direkte til kalenderen eller online via den sikre webportal. Påmindelserne meddeles med lyd, lysglimt, symboler og mulighed for en talebesked.

IRIS SOL har valgbare skærmindstillinger med baggrundsbilleder og farvekombinationer, så det nemt kan tilpasses brugeren.

IRIS SOL leveres klar til brug, og du behøver kun at tilslutte den til strømmen med den medfølgende strømforsyning. Et indbygget batteri holder indstillingerne i tilfælde af strømsvigt.

IRIS SOL kan videresende advarsler og påmindelser til armbåndsuret NORA SOL.

IRIS SOL fungerer også som advarselsmodtager for udvalgte FlexiBlink LIFE-produkter, såsom brandalarm, dørklokke og fjernaflæsning af uret.

	<p>Front:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Advarselslamper (højre og venstre side)</li> <li>Skærm med berøring</li> <li>HJEM-knap</li> <li>Mikrofon til stemmeoptagelse</li> <li>Højttaler</li> <li>Lydstyrke +/-</li> <li>Aftagbar fod</li> </ul>
	<p>Tilkoblinger bagpå:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lysindikator</li> <li>Life-knap</li> <li>Funktionsbrydere</li> <li>Tilslut strømforsyning</li> </ul>
	<p>Tilslutninger venstre side:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ethernet (til tilslutning til router)</li> <li>Ikke i brug</li> <li>USB</li> <li>Vægbeslag</li> </ul>

## 1. INTRODUKTION

IRIS SOL kan placeres på et bord med den medfølgende bordfod, eller skrues op på væggen med det medfølgende beslag.

Sæt strømfor­syningen i stikkontakten og ledningen i IRIS SOL. Hvis du vil indstille påmindelser via fjernadgang/internet, skal internetkablet være tilsluttet *før* strømfor­syningen. Du vil nu se, at skærmen starter. Første gang skal du vælge det ønskede sprog, og skærmen genstarter. Vælg derefter dato og klokkeslæt. IRIS SOL er nu klar til brug. Hvis du har andet FlexiBlink LIFE-udstyr, skal du gå til kap. 6 for parring.

<p>Eksempler på tilpasning:</p> 	
<p>Informative: Nordlys baggrund - digital</p>	<p>Dagsplan: Sten baggrund - fremhævet analog</p>
	
<p>Dagsplan: Turkis baggrund - analog</p>	<p>Dagsplan: Kontrast - analog fremhævet</p>

## 2. DAGLIG BRUG

### Ur:

IRIS SOL har forskellige tilgængelige urskærme, både analoge og digitale. Se kap. 4 for hvordan du ændrer urskiven. Hvis taleuret er aktiveret, oplæses klokkeslet, klokkeslet og/eller dagen højt, når du trykker på skærmen.

### Lydstyrkejustering:

Brug lydstyrkeknapperne (plus/minus) på højre forside af IRIS SOL til at justere lydstyrken for daglige meddelelser.

**VIGTIG! Brandalarmer alarmeres altid ved fuld lydstyrke.**

### Påmindelser:

Påmindelser vises som en separat skærm, samtidig med at der afspilles en lyd. Hvis der er optaget en talebesked, afspilles den, og hvis lyset blinker, blinker det i meddelelseslysene. Hvad der vises ved siden af påmindelsessymbolet, bestemmes af dine skærmindstillinger. Påmindelsen forbliver på skærmen i 30 minutter.

Hvis du rører ved skærmen, vises uret med et symbol om, at en påmindelse er aktiv. Tryk igen for at afspille beskeden igen. Nye påmindelser i denne periode vil "tage over".

**Advarsel:**

IRIS SOL fungerer også som alarmmodtager for FlexiBlink LIFE-produkter, der er installeret i hjemmet. Hændelser og alarmer varsles automatisk med lyd, lys og symbol – samt stemme, hvis dette aktiveres. En personlig talebesked i tilfælde af en brandalarm kan være særlig gavnlig for personer, der kan have svært ved at orientere sig i tilfælde af akutte hændelser.




Ved at trykke på skærmen inden for to minutter efter, at meddelelsen er afsluttet, vil du se, hvilken meddelelse der blev vist. Hvis du vil se på uret i denne periode – tryk på **HJEM**-knappen.





**Annuller anmeldelse:**



Hvis du vil stoppe en igangværende meddelelse, kan du trykke på skærmen eller trykke på knappen HOME. Meddelelsen stopper med det samme. Hvis en brandalarm stoppes på denne måde, vil kommende nye alarmer inden for et minut blive advaret med kun et symbol og lys.

**3. PÅMINDELSER**

Tryk på **HJEM**-knappen så vises et påmindelsesikon i nederste venstre hjørne af skærmen.

	<p>Tryk på ikonet <b>Påmindelser</b> for at få vist listen over påmindelser.</p> <p>Ikonet kan skjules for at låse påmindelsesfunktionen. Dette bestemmes under indstillingerne for påmindelser.</p>
	<p>Tryk på <b>symbolet +</b> for at tilføje en påmindelse.</p>
	<p>IRIS SOL har nogle færdige forslag til påmindelser, der kan bruges som udgangspunkt.</p> <p>Tryk på et af ikonerne. Du får nu billedet til at indstille en påmindelse.</p> <p>Hvis du ikke vil have et symbol, kan du trykke på <b>knappen Symbol</b> og vælge uden symbol.</p>

	<p>Der er to linjer til tekst – titel skal altid udfyldes.</p> <p>Tryk på <b>knappen</b> Symbol til højre for titlen for at ændre symbolet, så det vises sammen med teksten.</p> <p>Tryk på <b>knappen</b> Stemme/mikrofon for at indtale din egen talebesked.</p> <p>Vælg startdato og -klokkeslæt, og om påmindelsen skal gentages.</p> <p>Titlen er maks. 16 tegn og beskrivelse maks. 22 tegn. Titlen vises i den daglige tidsplan.</p>
	<p>Tryk på <b>knappen Optag</b> for at starte optagelse af talebesked til påmindelse. IRIS SOL tæller ned, og optagelsen starter. Du kan sende en besked på op til 10 sekunder. Tal ind i mikrofonen med en normal stemme i en afstand på 5-10 cm.</p> <p>Optagelsen stopper, når der er gået 10 sekunder, eller du trykker på <b>Stop</b>. Tryk på <b>knappen Afspil</b> for at lytte til optagelsen.</p> <p>For at optage en ny talebesked skal enhver gammel slettes først. Tryk på <b>Papirkurv</b> for at slette gammel talebesked.</p>
	<p>-Tryk på <b>feltet Dato</b> for at indtaste datoen for påmindelsen. Tryk på <b>Gem</b>.</p> <p>-Tryk på <b>tidslinjen</b> for at indtaste tidspunktet for påmindelsen. Tryk på <b>Gem</b>.</p>
	<p><b>Gentagelse</b></p> <p>Hvis du ikke vil gentage beskeden, skal du trykke på <b>Ingen gentagelse</b> for at ændre.</p>

	<p>Her er 4 hurtigopkald til gentagelse, der bruger den indtastede tid som udgangspunkt.</p> <p>Tryk på <b>Gem</b> eller <b>Pil tilbage</b> (annuller).</p>
	<p>Alternativt kan du vælge <b>Daglig</b>, <b>Ugentlig</b> eller <b>Månedlig</b> gentagelse.</p> <p>Vælg, hvilke dage påmindelsen skal gentages, og om nødvendigt intervallet. Du kan også tidsbegrænse meddelelser inden for tid og dato.</p> <p>Tryk på <b>Gem</b> eller <b>Tilbage-pilen</b> (annuller).</p>
	<p>Når du har fuldført alle indstillingerne, skal du trykke på <b>Gem</b>.</p>
	<p>Du kan aktivere/deaktivere hver påmindelse med den blå skyder i højre side af listen.</p> <p>Hvis en påmindelse gentager sig, er der et symbol for gentagelse mellem dato og skyder. Der vises op til 5 påmindelser pr. side.</p>
	<p>Eksempel på, hvordan påmindelse ville se ud med titel og symbol.</p>

## REDIGER EN PÅMINDELSE

Tryk på **HJEM**-knappen, og tryk derefter på ikonet Påmindelser i nederste venstre hjørne af skærmen.

Der kan være flere påmindelsessider, der viser 5 pr. Side.

Tryk på den påmindelse, du vil ændre.



Foretag de ønskede ændringer, og tryk på **Gem**.

## SLET EN PÅMINDELSE

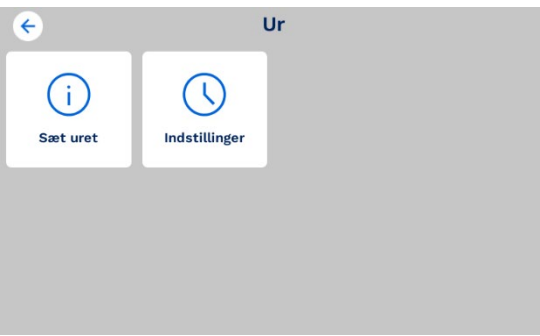
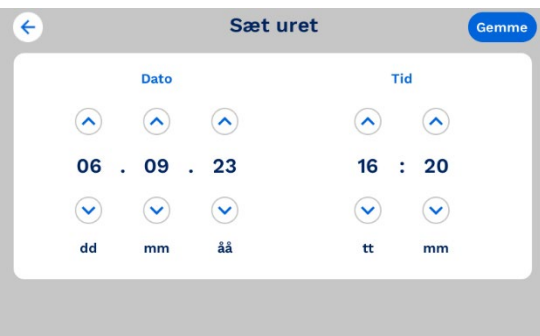
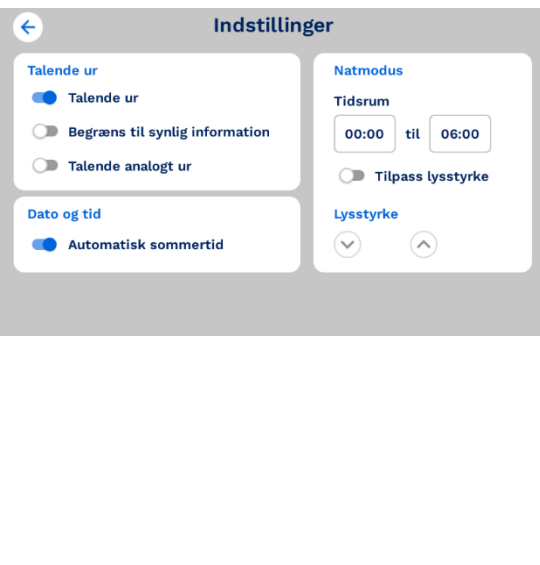
Tryk på **HJEM**-knappen, og tryk derefter på ikonet Påmindelser i nederste venstre hjørne af skærmen. Tryk på den påmindelse, du vil slette. Tryk derefter på **skraldespandsikonet** for at slette.

## 4. MENUEN INDSTILLINGER

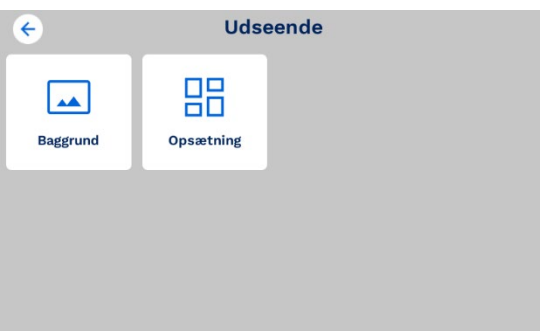
Under indstillingsmenuen kan du ændre ur/dato, udseende, påmindelser, lysstyrke samt se systemoplysninger og hvilke funktioner der er valgt. Her kan du også vælge Remote Access for at administrere kalenderen eksternt.

	<p>Tryk på <b>HJEM</b>-knappen så vises et ikon med teksten Indstillinger i nederste højre hjørne.</p> <p>Tryk på <b>ikonet</b> Indstillinger.</p> <p>Hvis du modtager meddelelsen <b>Skærmen er låst</b>, skal kontakt 5 på bagsiden af IRIS SOL trykkes ned (fra ON til OFF).</p>
	<p>Indstillingsmenuerne vises nu som ikoner på skærmen.</p>

**Indstillinger: Ur**

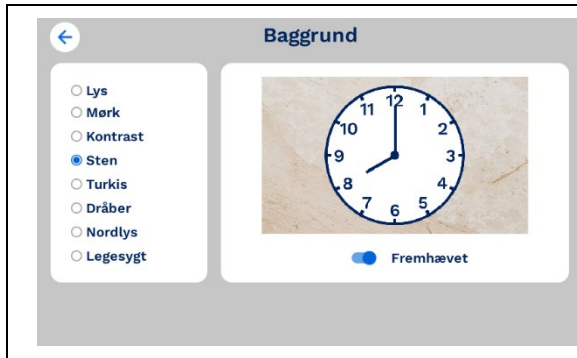
	<p>Under urmenuen kan du indstille uret og datoen eller andre indstillinger såsom taleur, sommertid og nattilstand.</p>
	<p><b>Indstil ur</b></p> <p>Brug <b>pileknapperne</b> til at ændre dato og klokkeslæt.</p> <p>Tryk på <b>Gem</b> for at gemme indstillingen eller på pilen <b>Tilbage</b> for at annullere</p>
	<p><b>Talende ur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Slå taleuret til eller fra.</li> <li>-Vælg om oplysningerne i talebeskeden skal begrænses til det der vises på skærmen.</li> <li>-Vælg, om taleuret skal have analog eller digital recitation. Analogt ur afrunder til nærmeste 5 minutter.</li> </ul> <p><b>Automatisk sommertid</b></p> <p><b>Natmodus</b></p> <p>Her kan du selv definere tidsrummet for natten. Standardindstillingerne er 00:00 til 06:00.</p> <p>Det gyldige valg til starten af natten er mellem 18:00 og 00:00, og starten på dagtimerne er mellem 05:00 og 10:00.</p>

**Indstillinger: Udseende**

	<p>På denne side finder du indstillinger for udseende (baggrund og layout).</p> <p>Menufarven er lys eller mørk afhængigt af den valgte baggrund</p>
---	--



**Indstillinger: Udseende - Baggrund**

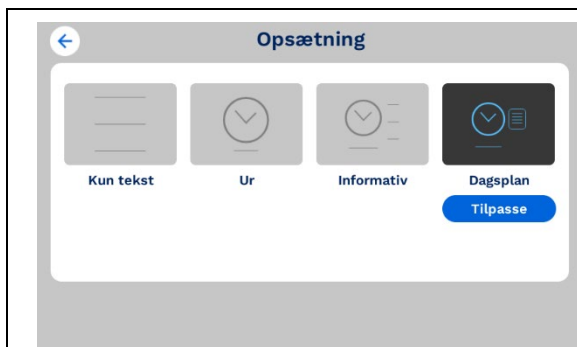


Her vælges urets udseende. Hvert look består af baggrund og tekst/ur i udvalgte farver.

Urskiven har to valgmuligheder, standard og fremhævet.

Indstillingen gemmes automatisk.

**Indstillinger: Udseende - Layout**



Du kan vælge mellem 4 layouts for, hvordan uret skal se ud:

**Kun tekst** - her vises dag og digital tid, periode på dagen eller dato.

**Enkelt ur** - her vises et stort ur med valgbare oplysninger i nederste kant.

**Informativ** - her vises uret med valgbare oplysninger i 5 felter.

**Dagsplan** - her vises uret sammen med en oversigt over dagens kommende påmindelser.

Alle visninger kan tilpasses.



**Layout ur**

Nu vises forsidebilledet med blå **penikoner** på det sted, der kan ændres.


Når du trykker på et **penikon**, vises en liste over, hvad der kan vises på den pågældende position, på skærmen. Valgene opstår med det samme, så du kan prøve at finde det billede, der passer bedst til brugeren.



**Layout dag**

Alle layouts har en visning, der skelner mellem dag og nat.

Tryk på de hvide **pile** øverst på skærmen for at se, hvad der vises dag og nat.

	<p><b>Layout Nat</b> Tryk på <b>ikonet Pen</b> for at ændre visningen mellem ur og foto.</p> <p>Hvis du vælger <b>Billede</b>, er der en sol om dagen og en måne og stjerner om natten. Ingen andre oplysninger såsom ur vil blive vist.</p>
---	--

	<p><b>Billede til nat</b> (i stedet for ur).</p> <p>Nattilstand bruges primært til dem, der ønsker symboler til dagsorientering i stedet for urskive.</p> <p>Dette gøres i Indstillinger, Udseende, Layout og Tilpas.</p>
	<p><b>Billede til dag</b> (i stedet for ur).</p>
	<p>Dagsplan viser en oversigt over dagens kommende påmindelser, hvis denne er valgt under registreringen af selve påmindelsen/påmindelserne, og dagsplanvisningen er valgt.</p>
	<p>Hvis du ikke bruger dagsplan som et fast display på skærmen, kan du nemt få et overblik over kommende aktiviteter ved at trykke på <b>knappen Hjem</b> og derefter vælge <b>Kalender</b>.</p>

	<p>For at få adgang til <b>Kalender</b> skal knappen til dette være slået til (se afsnittet Indstillinger: Påmindelser).</p>
--	--

### Indstillinger: Layout

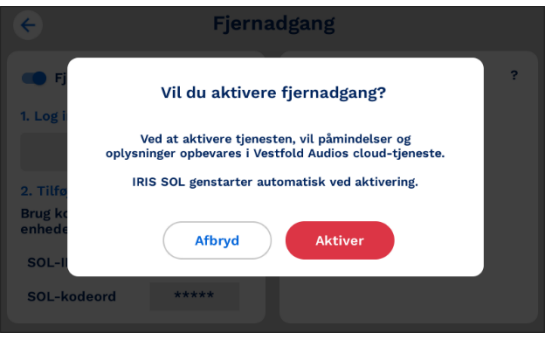
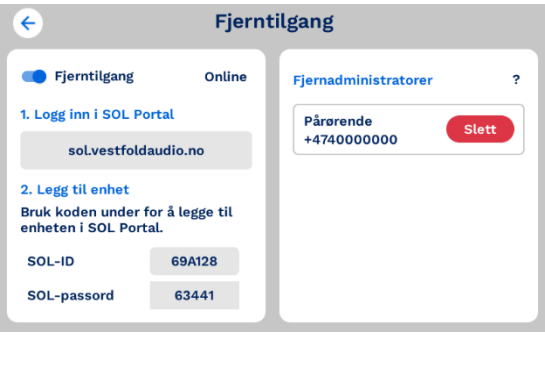
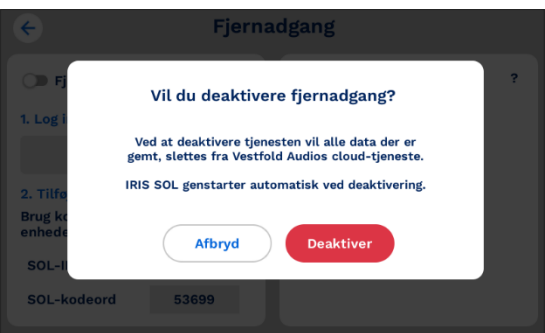

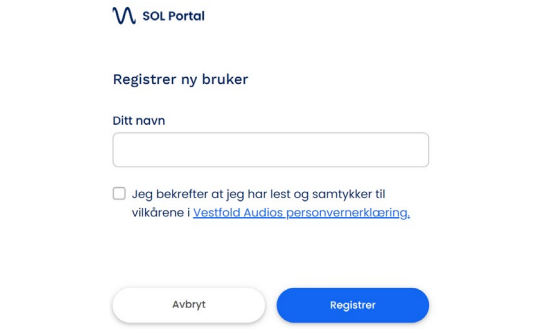
	<p>Her er valgt::</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-skærmens lysstyrke</li> <li>-om meddelelseslamper skal være tændt eller slukket</li> <li>-Styrken af advarselslamper</li> </ul> <p>Indstillinger gemmes automatisk.</p>
--	---

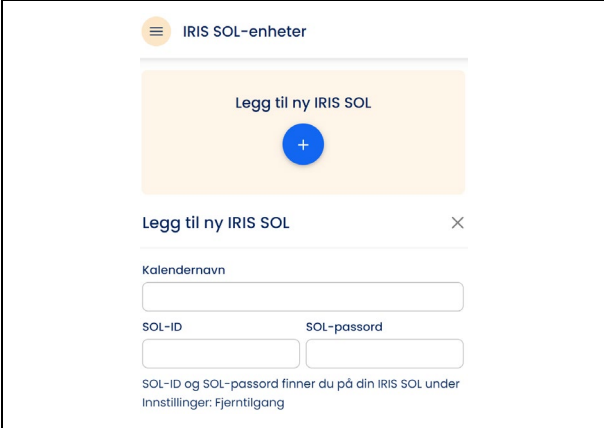

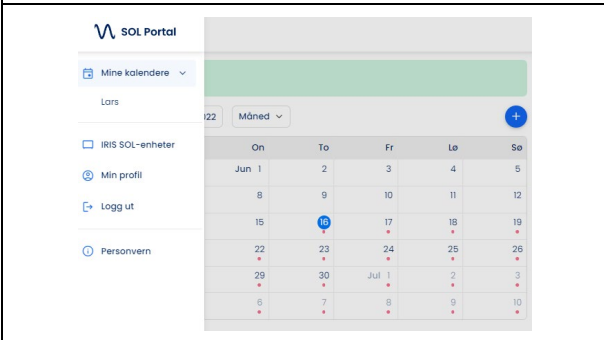
### Indstillinger: Påmindelser

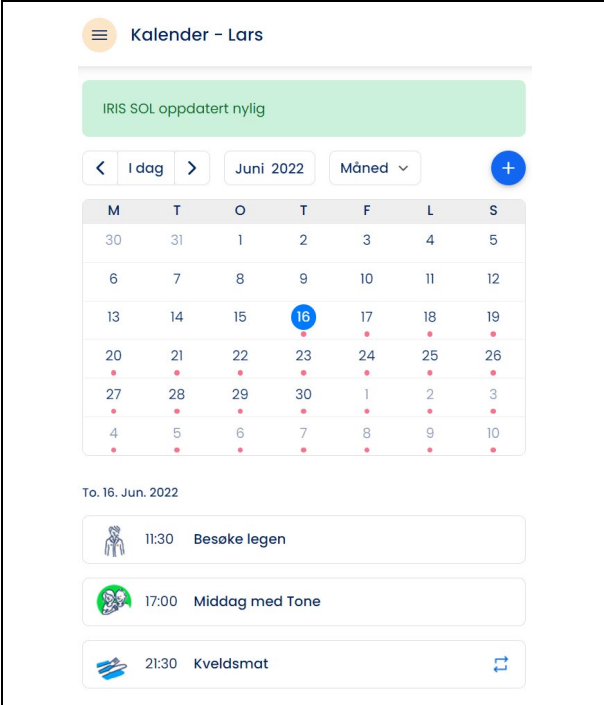

	<p>Her kan du vælge, om tiden skal vises i påmindelsesbilledet, om menuknappen (ikonet) og menuknappen til kalenderen skal vises på skærmen, og om uret skal læses højt ved påmindelser.</p> <p>Indstillinger gemmes automatisk.</p>
--	--

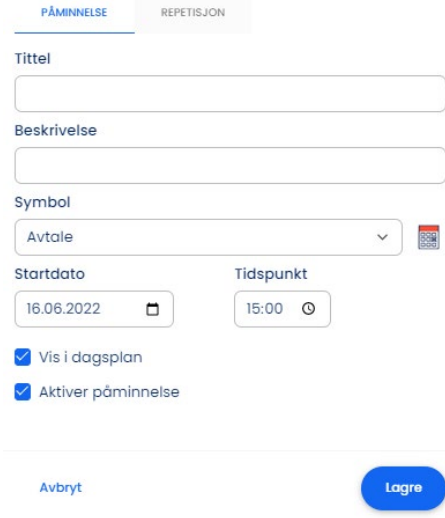
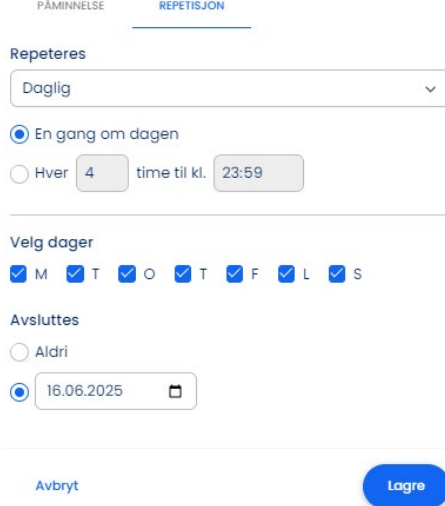
### Indstillinger: Fjerntilgang & Portal

	<p><b>IRIS SOL - fjerntilgang</b></p> <p>Her giver du adgang til supportpersoner til at administrere påmindelser eksternt via sikker webportal. Op til 3 brugere pr. IRIS SOL. <b>Iris Sol skal være forbundet til internettet</b>, enten via netværkskabel eller via produkt 1928 for trådløs adgang. Se kapitel 7 om tilbehør. Internetkabel <b>skal</b> tilsluttes, før du tilslutter strøm for at få en IP-adresse.</p> <p>Tryk på <b>knappen Remote Access</b> for at aktivere tjenesten.</p>
--	--


	<p><b>IRIS SOL – aktiver fjerntilgang</b></p> <p>Ved aktivering af fjernadgangstjenesten gemmes påmindelser og information fra IRIS SOL i Vestfold Audios cloud-tjeneste. Når fjernadgang er aktiveret, bliver SOL-adgangskoder synlige.</p>
	<p><b>IRIS SOL – Slet fjernadministrator</b></p> <p>Når en supportperson har oprettet forbindelse til IRIS SOL, vises deres navn og mobilnummer her. Her kan du også slette eventuelle forbindelser. Klik på <b>Slet</b> på den relevante fjernadministrator (IRIS SOL skal have forbindelse til internettet). Der genereres en ny SOL-adgangskode, så tidligere fjernadministratorer ikke kan logge på igen uden at få en ny SOL-adgangskode.</p>
	<p><b>IRIS SOL – deaktivere Fjerntilgang</b></p> <p>Hvis du vil deaktivere fjernadgang, skal du trykke på knappen <b>Remote Access</b>. Ved deaktivering slettes alle data, der er gemt på Vestfold Audios cloud-tjeneste.</p> <p>IRIS SOL genstarter efter at have trykket på <b>Deaktiver</b>.</p>
	<p><b>Portal - indlogging</b></p> <p>Gå til portalen, <a href="http://sol.vestfoldaudio.no/">sol.vestfoldaudio.no/</a> på din computer eller mobiltelefon, og følg instruktionerne.</p> <p>Brug mobilnummeret på den person, der skal betjene portalen (den, der indstiller påmindelser). Engangskode sendes via SMS.</p>
	<p><b>Portal - indlogging</b></p> <p>Registrer dit navn.</p> <p><b>Dit navn vil være synligt under fjernadgang på IRIS SOL.</b></p>


	<p><b>Portal – Tilføj ny IRIS SOL</b></p> <p>Når du er logget ind, skal du tilføje ny IRIS SOL første gang. Tryk på  Under kalendernavn skal du navngive IRIS SOL-kalenderen med det ønskede navn. Tilføj derefter SOL-ID'et (6 tegn) og <b>SOL-adgangskoden</b> (5 tegn), der findes på den relevante IRIS SOL, som vist under Remote Access-menuen. Tryk på <b>Tilføj</b>.</p>
	<p><b>Portal – kalender</b></p> <p>Hvis du har flere kalendere (IRIS SOL) tilknyttet, kan du skifte mellom dem ved at klikke øverst til venstre, <b>Mine kalendere</b>.</p>

	<p><b>Portal – kalender</b></p> <p>Vælg mellom måneds- eller ugevisning.</p> <p>Tryk  Sådan indstiller du påmindelser med en gentagelse.</p> <p>Symbol for gentagelse</p>
	<p><b>Portal – ny påmindelse</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Titlen er på op til 16 tegn</li> <li>-Beskrivelse er op til 22 tegn</li> <li>-Vælg hvilket symbol der skal medtages i Påmindelse</li> <li>-Indstil startdato og -klokkeslæt</li> <li>-Vis i daglig tidsplan er aktiv</li> </ul>


	<p>-Aktivér påmindelse er aktiv: en gentagende påmindelse kan deaktiveres i perioder.</p> <p>Vælg <b>Gem, Gentagelse</b> eller <b>Annuller</b></p>
	<p><b>Portal – Ny påmindelse med gentagelse</b></p> <p>-Under Gentag kan du vælge Ingen gentagelse, Dagligt, Ugentligt, Månedligt eller Årligt. Afhængigt af hvilken du vælger, får du forskellige muligheder.</p> <p>-Tidsintervallet for gentagelse er mellem 00:00 og 23:59, men kan gentages flere dage eller uger.</p> <p>-Hvornår skal påmindelsen slutte, Aldrig eller en Slutdato?</p> <p>Vælg <b>Gem, Påmindelse</b> eller <b>Annuller</b></p>

### Indstillinger: NORA SOL


	<p>For at få påminnelser direkte til din NORA SOL armbåndskalender, skal den først tilsluttes i det samme LIFE-netværk, se parring. NORA SOL skal forblive aktivert, og klik derefter på Søk etter NORA SOL på IRIS SOL.</p> <p>IRIS SOL søger efter tilgængelige NORA SOL i det samme LIFE-gitter. Vælg den relevante NORA SOL ved hjælp af dens serienummer (SN). SN kan findes på bagsiden af eller i Info-menuen på NORA SOL.</p>
	<p>Når NORA SOL er tilknyttet, kan du aktivere <b>låsemenuen på NORA SOL</b>. Låsen kan kun deaktiveres med IRIS SOL, når NORA SOL er inden for dækning. Menulås deaktiveres midlertidigt, hvis du opretter forbindelse til</p>

	<p>lader. Der kan kun tilsluttes 1 NORA SOL til IRIS SOL. I tilfælde af ændring til en anden NORA SOL skal den gamle slettes, før den kan tilføjes.</p>
---	---


### Indstillinger: System

	<p>IRIS SOL er stort set vedligeholdelsesfri, og der er ingen licenser osv., der skal fornyes.</p>
---	--

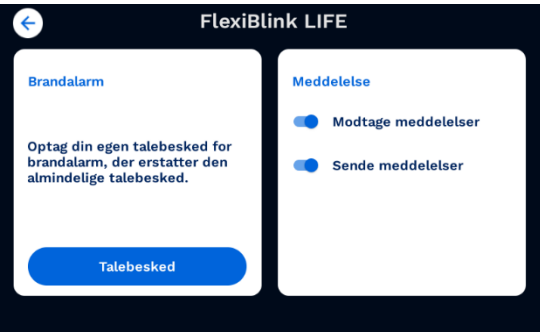

### Indstillinger: System - Opgradere

	<p>Software (SW) kan opdateres, enten via USB eller internettet (internet enten via kabel til dit lokale netværk eller ved hjælp af IRIS SOL Remote Management).</p> <p>Kontakt Vestfold Audio AS, hvis du har brug for hjælp.</p>
---	--


### Indstillinger: System - Nulstil

	<p>IRIS SOL kan nulstilles til fabriksstandard her.</p> <p>Alle indstillinger og forbindelser fjernes, og enheden kan overdrages til en ny bruger.</p>
---	--

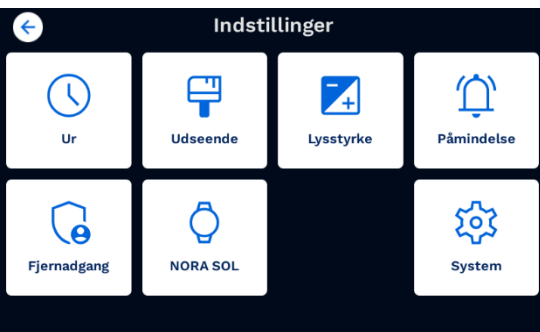
**Indstillinger: System - FlexiBlink LIFE**

	<p>Når <b>Modtag meddelelser</b> er slået til, modtager IRIS SOL meddelelser fra FlexiBlink LIFE-systemet.</p> <p>Når <b>Send meddelelser</b> er slået til, sendes der besked til FlexiBlink LIFE-modtagere, når der opstår en påmindelse.</p> <p>Du kan optage din egen talebesked til brandalarm.</p>
	<p>Tryk på <b>knappen Optag</b> for at starte optagelse af stemmemeddelelser i tilfælde af brandalarm. IRIS SOL tæller ned, og optagelsen starter. Du kan sende en besked på op til 10 sekunder. Tal ind i mikrofonen med en normal stemme i en afstand på 5-10 cm. Optagelsen stopper, når der er gået 10 sekunder, eller du trykker på <b>Stop</b>. Tryk på <b>knappen Afspil</b> for at lytte til optagelsen. For at optage en ny talebesked skal enhver gammel slettes først. Tryk på <b>Papirkurv</b> for at slette gamle talebeskeder.</p>

**Indstillinger: System - Sprog**

	<p>Her kan du ændre sproget på din enhed. Når du har ændret sproget, genstarter enheden.</p> <p>Kontakt Vestfold Audio, hvis du har brug for yderligere sprog.</p>
---	--

**Indstillinger: System - Systeminfo**

	<p>Her finder du oplysninger om versioner og enhver internetforbindelse. Dette er oplysninger, der bruges i henvendelser til Vestfold Audio AS.</p>
---	---



## 5. SKÆRMLÅS

Med funktionskontakt 5 på bagsiden af IRIS SOL kan du aktivere/deaktivere skærmlås og lydstyrkejustering. Derefter kan brugeren ikke få adgang til at ændre indstillinger. Lydstyrke og indstillinger er låst til det aktuelle niveau.



Låsning aktiveres ved at skubbe kontakten 5 til ON. Knapper til påmindelser og kalender kan fjernes/tilføjes under Indstillinger: Påmindelse.

## 6. PARRING

Hvis du ønsker at bruge IRIS SOL sammen med FlexiBlink LIFE-seriens meddelelsesprodukter, skal du parre enhederne.

Alle FlexiBlink LIFE-enheder, der arbejder sammen, skal parres ved at trykke på LIFE-knappen. **LIFE-knappen** er placeret under bagsiden af IRIS SOL.

### Sammenkoble første gang

<p>1. Tryk på <b>LIFE-knappen</b> på en af enhederne 2 gange.</p>	<p>2. Tryk på LIFE-knappen på den anden enhed 1 gang. Indikatorlamperne på begge enheder blinker grønt.</p>	<p>3. Parringen bekræftes ved at indikatorlamperne lyser grønt konstant i 2-3 sekunder. Enhederne er klar til brug. Tryk på <b>knappen Test</b> på en sender for at kontrollere parringen.</p>

### Tilslutning af ny enhed til eksisterende system

1. Tryk på **LIFE-knappen** på enheden fra det eksisterende system 2 gange.
2. Tryk på **LIFE-knappen** på den nye enhed 1 gang.
3. Parringen bekræftes af indikatorlamperne, der lyser konstant grønt i 2-3 sekunder.
4. Enhederne er klar til brug. Tryk på **knappen Test** for at kontrollere parringen.

### Parring mislykkedes

Hvis du får et rødt lys i den nye enhed, når du parrer, mislykkedes det. Nulstil enheden til repetition (se nedenfor).

### Annuller parring

For at annullere en aktiv parring skal du trykke på **LIFE-knappen** 1 gang.

### Nulstil parringen

Tryk på LIFE-knappen på enheden 5 gange, hvor parringen skal slettes. Dette bekræftes af skiftevis røde og grønne blink.

### 7. TILBEHØR

IRIS SOL kan interagere med udvalgte produkter i FlexiBlink LIFE-serien for at give brugeren yderligere påmindelser og betjeningshjælp.

			
IRIS SOL Fjernadministrasjon Art.nr: 1928	NORA SOL Armbåndskalender Art.nr: 1927	Optisk Røgalarm Art.nr: 1655	FLEXIKNAPP Art.nr: 1645
Modul, der gør det muligt at fjernstyre IRIS SOL uanset brugerens internetadgang. Tilsluttes direkte til hovedproduktet.	Armbåndsur med påmindelser. Synkroniserer med IRIS SOL	Optisk røgalarm aktiveret af røg. Rumvælger ID-kontakt. Batteri, der holder hele røgalarmens levetid (10 år)	Dørklokkeknop eller fjernaflæsning af ur
			
BRANDESENDER Art.nr: 1638	AURORA Art.nr: 1648	BACKUP Art.nr: 1948	ELLA Art.nr: 1671
Eksisterende lyd-detektor Brandalarmanlæg (uden galvanisk tilslutning)	Alarmerer, når der er en aktiv påmindelse på IRIS SOL	Nødstrømsbatteri til IRIS SOL og IRIS MÅNE	Armbåndssender til fjernaflæsning af ure

## 8. VIGTIG INFORMATION

Produktet kan rengøres med en blød, let fugtig klud. Produktet er beregnet til indendørs brug i ikke-kondenserende miljø.

Produktet bør ikke efterlades i direkte sollys.

### BRUGSBEGRÆNSNINGER

Kun tilladt at blive brugt inden for EU/EØS.

### GENBRUG

Bortskaf ikke produktet sammen med restaffald. Gør dig bekendt med lokale regler for bortskaffelse af elektriske produkter. Med korrekt håndtering kan store dele af produktet genanvendes, samtidig med at miljøet skånes.

### SIKKERHED

Undgå at udsætte enheden for flammer og andre direkte varmekilder. Produktet må ikke skilles ad.

### TEKNISKE DATA

BxHxD (uden vægbeslag og stativ):	218x165x40 mm
Vægt uden strømforsyning:	800 g
Radiofrekvens:	868,1 – 869,85 MHz
Sendereffekt:	10 mW e.r.p.
Driftsspænding:	15 VDC
Temperatur:	-10 °C - +40 °C

### SAMSVARERKLÆRING

Vestfold Audio AS erklærer, at produktet overholder direktiv 2014/53/EU.

Den fulde tekst til overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse::  
[www.vestfoldaudio.no/samsvar](http://www.vestfoldaudio.no/samsvar)

### FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Løsninger
Enheden virker ikke	Strømforsyningen er ikke tilsluttet	Sørg for, at strømforsyningen er tilsluttet stikkontakten, og at den er sat helt i enheden
Uret viser forkert klokkeslæt eller dato		Indstil uret. Se <b>Indstillinger: Ur: Indstil ur</b>
Uret viser det forkerte tidspunkt efter en strømafbrydelse	Urbatteriet er løbet tør for strøm	Urbatteriet genoplades over en lang periode. Batteriet skal oplades i mindst 4 dage, før strømmen fjernes

Åbner ikke indstillingsmenuen.	Tjek nr. 5 på bagsiden står op (ON)	Slide bryder 5 ned (til OFF)
Kan ikke indstille lydstyrken	Tjek nr. 5 på bagsiden står op (ON)	Slide bryder 5 ned (til OFF)
Talende ur virker ikke	Funktionen er slået fra i indstillingerne	Gå til <b>Indstillinger: Ur: Indstillinger</b> , og aktiver <b>Taleur</b> .
Påmindelse ikke underrettet/ vises ikke	Påmindelsen er ikke aktiv	Aktivér påmindelsen med skyderen i oversigten over påmindelser.
	Timing er forkert	Sørg for, at påmindelsen er indstillet til korrekt dato og klokkeslæt
Påmindelsen gentages ikke	Gentagelse er ikke indstillet til den korrekte dag/dato/klokkeslæt	Sørg for, at påmindelsen er indstillet med den korrekte gentagelse
Kan ikke parres	Indikatorlampen lyser rødt efter parringsforsøg	Enheden er allerede parret med andre enheder. Nulstil parring
	Indikatorlampen blinker rødt efter parringsforsøg	Parring mislykkes. Prøv igen
	Indikatorlampen fortsætter med at blinke grønt efter parring	Leder stadig efter nye enheder. Tryk på LIFE-knappen igen for at annullere. Prøv igen
Meddelelsen er ikke modtaget	Ikke parret	Nulstil parring på den sidste enhed, og opret forbindelse igen
	Manglende dækning	Prøv at flytte enhederne tættere på hinanden
	Tomt batteri i senderen	Udskift batteriet i senderen
	Sender fungerer ikke	Læs brugervejledningen til transmitteren
Meddelelse modtaget, men ingen lyd	Lydstyrken justeres ned	Prøv at justere lydstyrken
Portal: kan ikke oprette forbindelse til ny enhed	Ny enhed (IRIS SOL) er ikke forbundet til internettet / ingen IP-adresse. Kontroller <b>indstillinger: System: Systeminfo</b> og IP-adresse.	Kontroller, at internetkablet er tilsluttet, tag stikket ud, vent 10 sekunder, og sæt strøm i. Kontroller, om enheden har IP-adresse nu, og tilslut enheden i portalen
Sådan nulstilles alle indstillinger?	Enhed, der skal leveres til ny bruger.	Tilslut enheden til internet og strøm. Gå til <b>Indstillinger: System: Nulstil</b>

